

Naudojimo instrukcija

Dušo ir tualetu kėdė, skirta atsvario turintiems žmonėms

Versija: 1.5

LT



Gaminio identifikavimo duomenų išsaugojimas: toliau pateiktose eilutėse rekomenduojame įrašyti savo gaminio identifikavimo duomenis, nurodytus identifikacinėje plokštelėje, kad turėtumėte šią informaciją, jei kiltų klausimų dėl gaminio. (5.6 skyrius „Gaminio ženklimas“, 31 pav.)*

TYP Tipas:	
REF Prekės Nr.:	
SN Serijos numeris (21):	
 Pagaminimo data:	
Kita informacija / pastabos:	

* Pagal užsakymą pagamintų gaminių identifikavimo duomenys ir identifikacinė plokštelė gali skirtis.

Dėkojame, kad pasirinkote DIETZ dušo ir tualetu kėdę „tauron|dts“.

Šis gaminys yra pagalbinė medicinos priemonė. Kad galėtumėte tinkamai ją naudoti ir išvengti galimų pavojų dėl netinkamo naudojimo, būtina labai gerai susipažinti su jos naudojimu.

Prieš naudodami savo gaminį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Joje pateikiamos svarbios nuorodos, padėsiančios pasinaudoti visais techniniais privalumais. Be to, sužinosite, kaip saugiai eksploatuoti gaminį ir išlaikyti jo vertę.

Jei Jums reikia daugiau informacijos apie


priežiūrą, kreipkitės į specializuotą medicinos prekių parduotuvę.

Informaciją apie dabartinę savo gaminio būseną visada rasite mūsų svetainėje. Prireikus informacijos ir kilus klausimų dėl gaminio saugos bei atšaukimų kreipkitės į DIETZ raštu arba telefonu. Mūsų kontaktinę informaciją rasite kitoje naudojimo instrukcijos pusėje.



PASTABA

Žmonės, turintys regėjimo sutrikimą, PDF formatu pateikiamą naudojimo instrukciją didesniu šriftu gali peržiūrėti adresu **shop.dietz-group.de**.

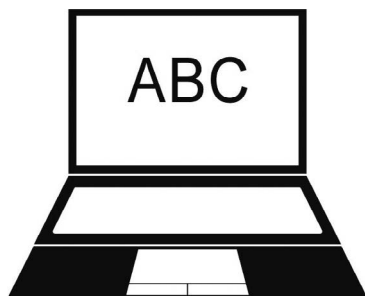

1 Svarbi informacija

1.1 Bendroji informacija	6
1.2 Paskirtis	6
1.3 Indikacijos.	6
1.4 Kontraindikacijos.	7
1.5 Ženkla ir simboliai	7

2 Gaminio aprašymas

2.1 Tiekiamas komplektas	8
2.2 Priedai	8
2.3 „tauron dts“ su standartine šonine dalimi struktūra.	9
2.4 „tauron dts“ su šonine dalimi su abdukcija ir pagalbine priemone atsistoti struktūra . . .	9
2.5 „tauron dts“ su pasukamąja šonine dalimi struktūra.	9

3 Gaminio naudojimo pradžia

3.1 Montavimo nuorodos	10
3.2 Įrankiai	10
3.3 Sėdynės plotis	10
3.4 Atlošo aukštis	12
3.5 Sėdynės gylis.	12
3.6 Sėdynės aukštis.	14

4 Gaminio naudojimas

4.1 „tauron dts“ su standartine šonine dalimi	15
4.2 „tauron dts“ su šonine dalimi su abdukcija ir pagalbine priemone atsistoti	15
4.3 „tauron dts“ su pasukamąja šonine dalimi	15
4.4 Atsisėdimas ir atsistojimas	16
4.5 Persėdimas į šoną	16
4.6 Tualetų kėdės funkcijos naudojimas	17
4.7 Dušo kėdės funkcijos naudojimas	18
4.8 Sėdimąjo paviršiaus pasukimas	18
4.9 Atlošo pagalvėlės nustatymas	19
4.10 Gaminio lankstymas	19
4.11 Transportavimas	20
4.12 Priedai ir kitų gamintojų primontuojamosios / pertvarkymo dalys	20

5 Techniniai duomenys

5.1 Taip matuoja DIETZ	21
5.2 Matmenys ir techninė informacija	22
5.3 Gaminio patikros	22
5.4 Papildoma informacija	23
5.5 Medžiagos	23
5.6 Gaminio ženklavimas	24

6 Saugos nuorodos

6.1 Saugos nuorodos	25
---------------------	----

7 Kasdienė ir techninė priežiūra

7.1 Techninė ir einamoji priežiūra	26
7.2 Einamosios priežiūros planas	27
7.3 Valymo ir dezinfekavimo sistemos	28
7.4 Klaidų paieška ir jų šalinimas	28
7.5 Valymas	29
7.6 Dezinfekavimas	29
7.7 Atliekų tvarkymas	30
7.8 Perdavimas ir pakartotinis naudojimas	30
7.9 Laikymas	30

8 Gamintojo deklaracijos

8.1 Garantija	31
8.2 Naudojimo trukmė	31
8.3 Atsakomybė	31

1.1 BENDROJI INFORMACIJA

Ši naudojimo instrukcija yra sudedamoji tiekiamo komplekto dalis. Naudotojas ją turi išsaugoti, o perduodant gaminį ar atiduodant jį naudoti pakartotinai instrukcija turi būti perduodama

kartu. Informacijos apie naujausią naudojimo instrukcijos versiją teiraukitės „DIETZ GmbH“. Prieš montuodami ir naudodami gaminį perskaitykite naudojimo instrukciją.

1.2 PASKIRTIS

„tauron|dts“ dušo ir tualetu kėdė (maks. naudotojo svoris 250 kg) yra pagalbinė priemonė duše ir tualete, specialiai sukurta žmonėms, turintiems antsvorio ir judėjimo negalią. Gaminys yra skirtas naudoti tik patalpose ir turi būti statomas ant lygaus, tvirto pagrindo.

Gaminys naudojamas tokiose srityse kaip senjorų ir slaugos namai, ligoninės, reabilitacijos cen-

trai, dienos centrai ir privatūs namų ūkiai.

Jis nėra pritaikytas sėdėti nuolat ir negali būti naudojamas kaip kėdė.

Pagal užsakymą pagamintų ir atitinkamai paženklintų gaminių paskirtis gali būti kitokia. Tokiu atveju turi būti laikomasi su gaminiu pateiktų dokumentų.

1.3 INDIKACIJOS

Šis gaminys turėtų būti naudojamas žmonėms, kurie dėl fizinės negalios negali naudotis esamu dušu ar tualetu arba juos sunkiai pasiekia dėl šių negalių:

- ▼ Antsvoris
- ▼ Paralyžius
- ▼ Galūnių netekimas, defektas, deformacija
- ▼ Sąnarių kontraktūros ir jų pažeidimai
- ▼ Kitos ligos

1.4 KONTRAINDIKACIJOS

Gaminiu negalima naudotis šiais atvejais:

- ▼ Suvokimo sutrikimai
- ▼ Sunkūs pusiausvyros sutrikimai
- ▼ Negebėjimas sėdėti
- ▼ Naudotojo svoris yra >250 kg
- ▼ Vaikai ir asmenys, kurių ūgis yra <146 cm ir (arba) kūno svoris <40 kg (KMI <17)

1.5 ŽENKLAI IR SIMBOLIAI

Šie simboliai žymi teksto ištraukas, kurias yra naudingos naudojant ir eksploatuojant gaminį kasdieniame gyvenime.



ĮSPĖJIMAS

Visada būtina laikytis įspėjamųjų nuorodų ir jas taikyti! Jos atkreipia dėmesį į tai, kad nesilaikant reikalavimų kyla pavojus susižaloti ir (arba) sugadinti gaminį bei padaryti žalos aplinkai._____



PASTABA

Patarimai ir rekomendacijos, kaip lengviau naudotis funkcijomis._____

Gaminys iš dalies yra surenkamas gamykloje ir supakuojamas į kartoninę dėžę. Jei įmanoma, išsaugokite pakuotę, nes vėliau joje bus galima laikyti gaminį.

Jei turinys akivaizdžiai pažeistas, nedelsdami praneškite siuntėjui.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti: deginant pakavimo plėvelę gali susidaryti nuodingų dujų.

Pavojus užspringti: plastikinius maišelius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje._____

2.1 TIEKIAMAS KOMPLEKTAS

Gavę prekę nedelsdami patikrinkite, ar yra visos dalys ir ar jos nepažeistos. Turinį sudaro:

- ▼ 2 šoninės dalys, įskaitant 4 teleskopines kojas ir 4 guminius kojų antdėklus
- ▼ 1 atlošas, įskaitant atlošo pagalvėlę
- ▼ 1 sėdynės pagalvėlė, įskaitant 2 įstatomuosius vamzdžius,
2 tualetų kibiro laikantieji bėgeliai,
4 tvirtinimo spaustukai
- ▼ 1 įrankių rinkinys: 1 dvigubas atvirasis veržliaraktis, 1 raktas su vidiniu šešiabriauniu
- ▼ 1 varžtų rinkinys: 2 M6 x 50 mm varžtai su galvutėmis su vidiniu šešiabriauniu, 2 rievėtosios veržlės
- ▼ 1 Naudojimo instrukcija



PASTABA

Aprašytos įrangos savybės ir tiekiamas komplektas gali skirtis, nes priklauso nuo šalies ir rinkos, individualių indikacijų ir medicininės būklės._____

2.2 PRIEDAI

- ▼ Apvalus tualetų kibiras su dangčiu
- ▼ Kvadratinis tualetų kibiras su dangčiu

2.3 „tauron|dts“ SU STANDARTINE ŠONINE DALIMI STRUKTŪRA

Atlošo pagalvėlė

Atlošas

Standartinė šoninė dalis


Sėdynės pagalvėlė

Išpjovos higienai dangtelis

Teleskopinė koja

Tualetto kibiras (parinktis)

Guminiai kojų antdėklai

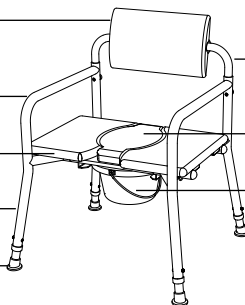

Pav. 1

2.4 „tauron|dts“ su ŠONINE DALIMI SU ABDUKCIJA IR PAGALBINE PRIEMONE

Atlošo pagalvėlė

Atlošas

Šoninė dalis su abdukcija
ir pagalbine priemone atsistoti


Sėdynės pagalvėlė

Išpjovos higienai dangtelis

Teleskopinė koja

Tualetto kibiras (parinktis)

Guminiai kojų antdėklai

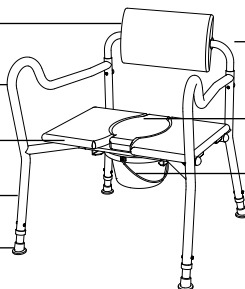

Pav. 2

2.5 „tauron|dts“ SU PASUKAMAJA ŠONINE DALIMI STRUKTŪRA

Atlošo pagalvėlė

Atlošas

Pasukamoji šoninė dalis

Užfiksavimo svirtis


Išpjovos higienai dangtelis

Teleskopinė koja

Sėdynės pagalvėlė

Guminiai kojų antdėklai

Tualetto kibiras (parinktis)

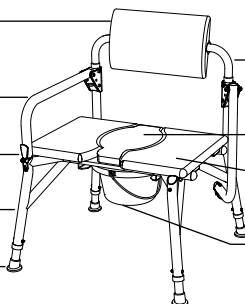

Pav. 3

3.1 MONTAVIMO NUORODOS

Montavimo ir veikimo patikras atlieka specializuotos prekybos atstovai. Specializuotos prekybos technikas pritaiko gaminį konkrečiam naudotojui.



PASTABA

Pirmajam naudojimui turėtų paruošti išmokyti specializuotų medicinos priemonių prekybos atstovai.

3.2 ĮRANKIAI

▼ Raktas su vidiniu šešiabriauniu (5 mm)

▼ Dvigubas atvirasis veržliaraktis (8 x 10 mm)


3.3 SĖDYNĖS PLOTIS

1. Išimkite atskiras dalis ir varžtų rinkinį iš kartoninės dėžės ir padėkite visas dalis ant švaraus, lygaus ir stabilaus paviršiaus (grindų arba stalo).
2. Galima nustatyti vieną iš trijų gaminio sėdynės pločių (560 / 630 / 700 mm). Atlošas iš anksto sumontuotas 560 mm sėdynės pločiui.
3. Pirmiausia atlošas įstatomas į šonines dalis (1, 4 pav.). Montuodami atkreipkite dėmesį į atskirų dalių išlygiavimą. Šoninių dalių įstatomojo vamzdžio laikiklis yra nukreiptas į vidų. Atlošas įkišamas į šonines dalis, pagalvėle į priekį.




ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus: montuodami prie judančių dalių saugokite savo rankas ir pirštus.

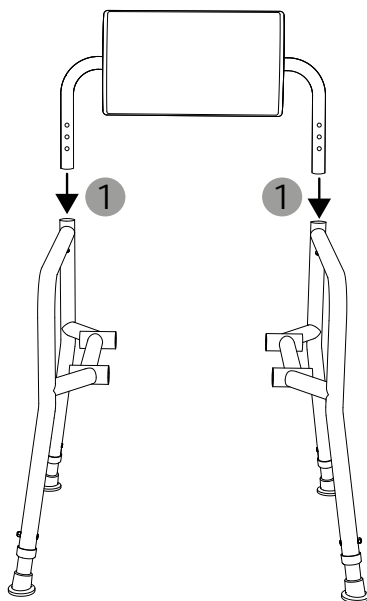


Pav. 4

4. Šonines dalis išlygiuokite lygiagrečiai vieną su kita (5 pav.). Po vieną varžtą (M6 x 50 mm) iš kairės ir dešinės pusės iš priekio įsukite į šonines dalis (1, 5 pav.) ir tvirtai priveržkite juos rievėtosiomis veržlėmis gaminio galinėje pusėje (2, 5 pav.).

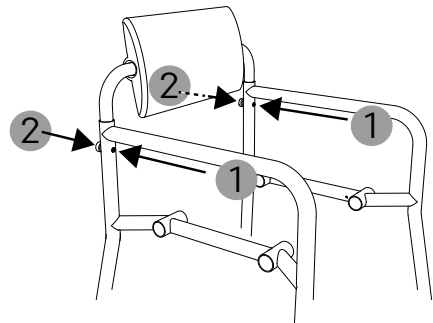


Pav. 5

5. Jei norite pritaikyti sėdynės plotį pagal savo poreikius, atlikite toliau nurodytus veiksmus: atlaisvinkite rievėtąsias veržles atlošo pagalvėlės galinėje pusėje (1, 6 pav.). Pasukite atlošo pagalvėlę link grindų (2, 6 pav.).

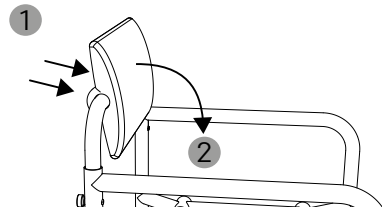


Pav. 6

6. Dabar lengva pasiekti varžtus galinėje pagalvėlės pusėje ir paprasta juos ištraukti iš pagalvėlės (1, 7 pav.).

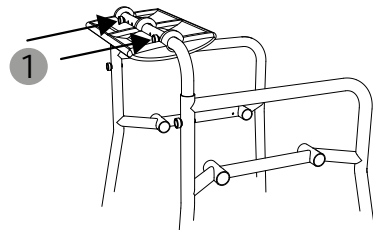

Pav. 7

7. Atlošo tarpinė dalis atlaisvinta ir gali būti nustatyta pagal norimą sėdynės plotį (560 / 630 / 700 mm) traukiant (1, 8 pav.) šonines dalis per tris kiekvienoje pusėje esančias skyles. Nustatydami sėdynės plotį atkreipkite dėmesį, kad atlošas būtų išlygiuotas per vidurį.

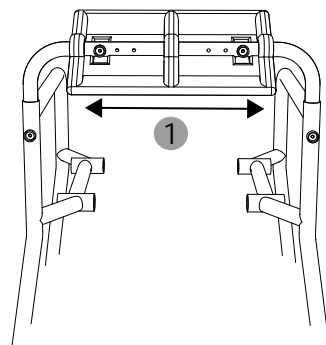

Pav. 8

8. Pasirinkus norimą sėdynės plotį galima vėl įstatyti varžtus ir juos priveržti rievėtosiomis veržlėmis.

3.4 ATLOŠO AUKŠTIS


1. Norėdami nustatyti atlošo aukštį, atlaisvinkite rievėtasias veržles šoninėse dalyse ir ištraukite varžtus (1, 9 pav.).
2. Atlošo aukštis (410 / 435 / 460 mm) nustatomas pritvirtinant vienoje iš trijų skylių. Tam abiejose pusėse tolygiai traukite atlošą į viršų (2, 9 pav.).
3. Nustatę norimą aukštį vėl pritvirtinkite atlošą varžtais ir rievėtosiomis veržlėmis. Atkreipkite dėmesį, kad varžtai turi būti įsukti iš priekio (1, 10 pav.), o rievėtosios veržlės gaminio galinėje pusėje – tvirtai priveržtos (2, 10 pav.).




ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus: montuodami saugokite savo rankas ir pirštus.

Nelaimingo atsitikimo pavojus: gaminį galima naudoti tik pritvirtinus atlošą.

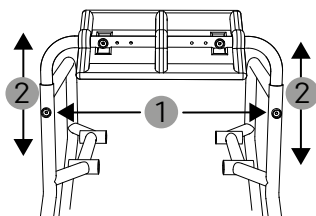

Pav. 9

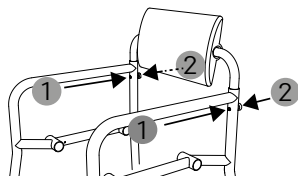

Pav. 10

3.5 SĖDYNĖS GYLIS

Sėdimąjį paviršių galima montuoti dviejose padėtyse (450 / 510 mm). Sėdynės gylis matuojamas nuo atlošo vamzdžio iki priekinio sėdimojo paviršiaus krašto (žr. 5.1 skyrių).

1. Pasirinkite Jums tinkamą sėdynės gylį (11, 12 pav.). Atkreipkite dėmesį, kad nuo pasirinkto sėdynės gylio taip pat priklauso, kurioje vietoje yra išpjova higienai, kai dangtelis yra uždėtas ant sėdimojo paviršiaus.




ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus: montuodami prie judančių dalių saugokite savo rankas ir pirštus.

Nelaimingo atsitikimo pavojus: jei sumontavus sėdimąjį paviršių galima pakelti jo priekį arba galą, vadinasi, įstatomieji vamzdžiai sumontuoti neteisingai.


Nelaimingo atsitikimo pavojus: prieš naudojant reikia iki galo įkišti įstatamuosius vamzdžius ir juos užfiksuoti tvirtinimo spaustukais. Jei tvirtinimo spaustukai įstatomi iš priekio arba iš galo, jie gali atsilaisvinti.

2. Įkiškite sėdimąjį paviršių tarp šoninių dalių per vidurį į įstatomojo vamzdžio laikiklį taip, kad jis būtų tiesiai (1, 13 pav.). Švelniai stumtelėdami sėdimąjį paviršių į šonus patikrinkite, ar sėdynė tinkamai įstatyta. Jei sėdimasis paviršius nejuda, vadinasi, padėties nustatymo laikiklis po sėdimuoju paviršiumi yra tinkamoje padėtyje.
3. Iš šono (iš kairės arba dešinės pusės) įstumkite abu įstatomuosius vamzdžius į įstatomųjų vamzdžių laikiklius po sėdimuoju paviršiumi (įstatomieji vamzdžiai lengviau įstumiama švelniais sukamaisiais judesiais). Įsitikinkite, kad įstatomieji vamzdžiai yra visiškai įstumti (2, 13 pav.).
4. Bandydami pakelti sėdimąjį paviršių patikrinkite, ar jis tvirtai primontuotas. Jo neturi būti įmanoma pakelti nei nuo priekinių, nei nuo galinių įstatomojo vamzdžio laikiklių.
5. Įstatomieji vamzdžiai pasukami taip, kad skylių angos būtų nukreiptos į viršų ir į apačią. Keturi tvirtinimo spaustukai įstatomi iš apačios (1, 14 pav.).
6. Tvirtinimo spaustukai neleidžia įstatomiešiams vamzdžiams pasislinkti į šonus.

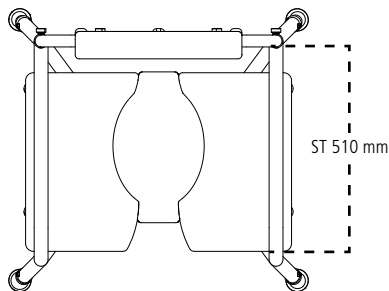


ST 510 mm, išpjova higienai priekyje

Pav. 11

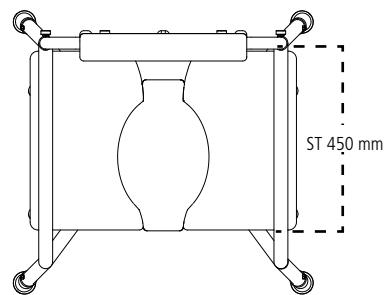

ST 450 mm, išpjova higienai gale

Pav. 12

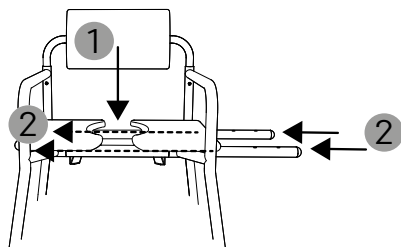


Pav. 13



PASTABA

Jei įstatomųjų vamzdžių nepavyksta įstumti iki galo, galite atlikti toliau aprašytą veiksmą: atlaisvinkite visas keturias rievėtasias veržles ir šiek tiek pakratykite šonines dalis. Dabar turėtų būti lengva įstumti įstatomuosius vamzdžius. Paskui dar kartą priveržkite visas rievėtasias veržles.

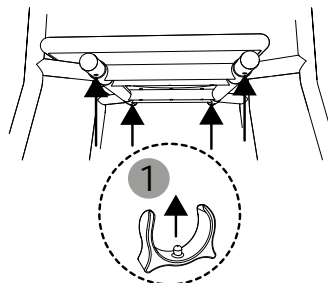

Pav. 14

3.6 SĖDYNĖS AUKŠTIS

1. Sėdynės aukštį pritaikykite tiekiamame komplekte esančiu įrankių rinkiniu.
2. Norėdami nustatyti teleskopines kojas, atlaisvinkite ir išsukite varžtus (1, 15 pav.).
3. Dabar galima nustatyti norimą teleskopinių kojų ilgį (2, 15 pav.) ir vidiniu bei išoriniu vamzdžiu uždengti skylės.
4. Galiausiai vėl įsukite varžtus, iš išorės uždėkite ir priveržkite veržles.




ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus: reguliuodami teleskopines kojas saugokite savo pirštus.

Virtimo pavojus: nustatykite vienodą visų 4 teleskopinių kojų ilgį.


Nelaimingo atsitikimo pavojus: įsitikinkite, kad varžtai tvirtai priveržti.

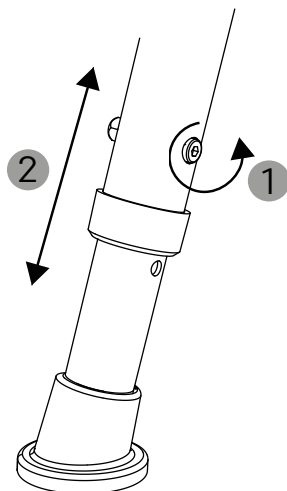

Pav. 15

4.1 „tauron|dts“ SU STANDARTINE ŠONINE DALIMI

Šių šoninių dalių konstrukcija (16 pav.) atitinka bendruosius kasdienės priežiūros reikalavimus.

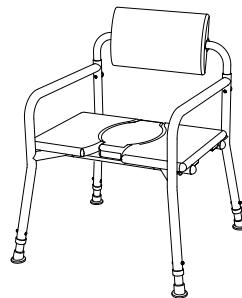


Pav. 16

4.2 „tauron|dts“ SU ŠONINE DALIMI SU ABDUKCIJA IR PAGALBINE PRIEMONE ATSISTOTI

Abdukcinės šoninės dalys (17 pav.) papildomai padidina sėdynės plotį 150 mm, todėl patogų sėdėti žmonėms, kuriems reikia gerokai daugiau vietos priekinėje dalyje.


Į viršų išlenkta forma arti rankos užtikrina didesnę saugumą ir padeda atsistėti bei atsistoti.

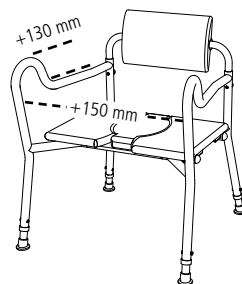

Pav. 17

4.3 „tauron|dts“ SU PASUKAMAJA ŠONINE DALIMI

Šoninės dalis abiejose pusėse (18 pav.) galima pasukti, todėl lengva persėsti, pvz., iš neįgaliojo vežimėlio ant dušo ir tualetų kėdės ir atvirkščiai.

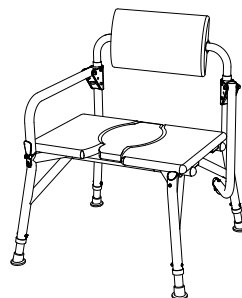

Pav. 18

4.4 ATSIŠĖDIMAS IR ATSISTOJIMAS

Norėdami ant gaminio atsisėsti ir nuo jo atsistoti kuo saugiau ir lengviau, elkitės taip, kaip nurodyta toliau:

Atsisėdimas:

1. Pastatykite gaminį taip, kad visos keturios kojos stovėtų stabiliai ir būtų galima sklandžiai naudotis gaminiu.
2. Atsistokite kuo arčiau gaminio, apsisukite (19 pav.) ir atsargiai ženkite nedidelį žingsnelį atgal, kol pajusite sėdimojo paviršiaus kraštą prie kojų.
3. Dabar abiem rankomis suimkite šonines dalis ir atsiremkitė į jas.
4. Tada galite lėtai ir saugiai atsisėsti ant dušo ir tualetų kėdės.

Atsistojimas:

Norėdami atsistoti nuo dušo ir tualetų kėdės, anksčiau aprašytus veiksmus atlikite atvirkštine eilės tvarka.



ĮSPĖJIMAS


Prispaudimo pavojus! Uždėdami išpjovos higienai dangtelį įsitikinkite, kad jis priglundą lygiai.

Virtimo pavojus: atkreipkite dėmesį, kad kūno judesiai gali pakeisti svorio centrą ir padidinti pavojų, kad gaminys nuvirs.

Virtimo pavojus: į abu porankius remkitės tik vertikaliai.

Nelaimingo atsitikimo pavojus: nelipkite ant sėdimojo paviršiaus.

Pavojus paslysti: ant guminių kojų antdėklų negali patekti jokių aliejinių ar labai muiluotų medžiagų.

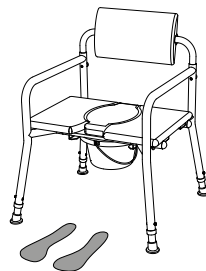

Pav. 19

4.5 PERSĖDIMAS Į ŠONĄ

Norint persėsti į šoną, pasukamoji šoninė dalis turi būti pasukta žemyn.

1. Pastatykite dušo ir tualetų kėdę toje vietoje, iš kurios norėsite persėsti ant gaminio.
2. Norėdami pasukti šoninę dalį žemyn, atlaisvinkite užfiksavimo svirtį traukdami ją į save (1, 20 pav.).




ĮSPĖJIMAS

Nelaimingo atsitikimo pavojus: norint persėsti porankis visada pasukamas žemyn. Persėdę užfiksavokite porankį. Nesiremkitė į neužfiksuotą šoninę dalį.

Prispaudimo pavojus: lenkdami žemyn saugokite savo kojas, pirštus, rankas ir drabužius.

3. Atlaisvinkite šoninę dalį iš tvirtinimo elemento pakeldami ją į viršų ir pasukdami į šoną (2, 20 pav.).
4. Dabar šoninę dalį galima nulenkti žemyn (3, 20 pav.).
5. Galite persėsti ant gaminio arba nuo jo atsistoti į šoną.
6. Persėdus į šoną šoninė dalis vėl užfiksuojama atvirkštine eilės tvarka. Šoninė dalis girdimai užsifiksuoja.

Jei norite persėsti iš gaminio, rekomenduojame paprašyti padėjėjo pagalbos.

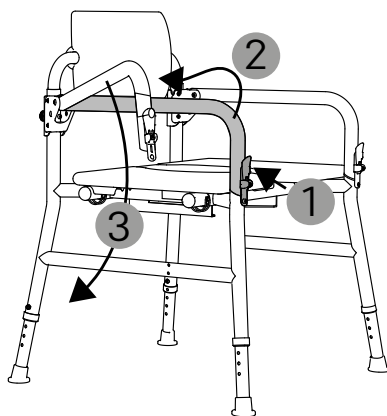

Pav. 20

4.6 TUALETO KĖDĖS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Prieš naudodami:

1. Tualetu kibirą be dangčio iš galo arba iš priekio stumkite kreipiamuoju bėgeliu po sėdyne taip, kad jis atsidurtų tarp įstatomųjų vamzdžių (1, 21 pav.).
2. Nuimkite dangtelį nuo išpjovos higienai (2, 21 pav.).




ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus: nestumkite ir neišimkite kibiros, kai ant gaminio vis dar sėdi žmogus.

Infekcijos pavojus: baigus naudotis kibirą reikia ištuštinti ir išvalyti.

Baigę naudoti:

1. Norėdami ištuštinti kibirą, atsargiai ištraukite jį iš galo arba iš priekio (1, 21 pav.).
2. Ištuštinę išvalykite ir (arba) dezinfekuokite kibirą ir sėdimąjį paviršių, kaip nurodyta.
3. Tada tiesiai uždėkite išpjovos higienai dangtelį.

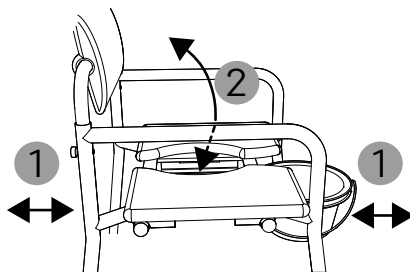

Pav. 21

4.7 DUŠO KĖDĖS FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Prieš naudodami:

1. Norint naudotis duše, šis gaminys naudojamas išėmus tualetu kibirą. Jei reikia, atsargiai ištraukite jį iš galo arba iš priekio (1, 21 pav.).
2. Išpjovos higienai dangtelį galite uždėti ant sėdimojo paviršiaus arba dangtelį galite išimti. (2, 21 pav.).

Baigę naudoti:

1. Visada valykite ir (arba) dezinfekuokite gaminį taip, kaip nurodyta.

4.8 SĖDIMOJO PAVIRŠIAUS PASUKIMAS

1. Numaukite keturis tvirtinimo spaustukus nuo įstatomųjų vamzdžių (1, 22 pav.).
2. Kitame žingsnyje spausdami galinius gaubtelius (kairėje arba dešinėje) (1, 23 pav.) išstumkite įstatomuosius vamzdžius per šoną priešingoje pusėje. Dabar galite ištraukti įstatomuosius vamzdžius (1, 23 pav.).



ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus! Nestumkite ir neišimkite kibiro, kai ant gaminio vis dar sėdi žmogus.


Prispaudimo pavojus! Uždėdami išpjovos higienai dangtelį įsitikinkite, kad jis priglunda lygiai.



ĮSPĖJIMAS


Prispaudimo pavojus: montuodami sėdimąjį paviršių ir įstumdami bei išstumdami įstatomuosius vamzdžius saugokite savo rankas ir pirštus.

Nelaimingo atsitikimo pavojus: prieš naudojant reikia įstatyti tvirtinimo spaustukus. Įsitikinkite, kad tvirtinimo spaustukai tvirtai užsispaudžia ant įstatomųjų vamzdžių, kitaip spaustukai gali atsilaisvinti.

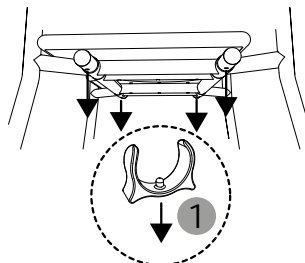

Pav. 22

3. Sėdimasis paviršius atlaisvintas, dabar jį galima pakelti (2 pav., 23 pav.) ir pasukti 180° kampu (3 pav., 23 pav.).
4. Norėdami pritvirtinti sėdimąjį paviršių, vadovaukitės 3.5 skyriuje pateikta instrukcija, pradėdami nuo 2 punkto.

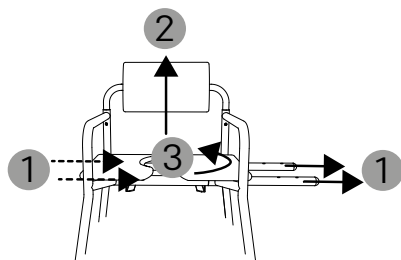

Pav. 23


4.9 ATLOŠO PAGALVĖLĖS NUSTATYMAS

Atlošo pagalvę galima pasukti 360° kampu. Ji automatiškai prisitaiko prie individualios Jūsų sėdėjimo padėties (24 pav.).



PASTABA

Padėties nustatymas: atlošo pagalvėlę visada uždekite pagal sėdėjimo kryptį.

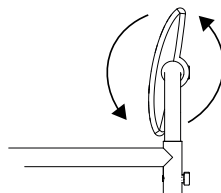

Pav. 24


4.10 GAMINIO LANKSTYMAS

1. Atlaisvinkite sėdimąjį paviršių (4.8 skyrius, 1–2 punktai) ir nuimkite jį nuo gaminio.
2. Atlaisvinkite rievėtąsias varžles atlošo galinėje pusėje ir išsukite varžtus (1, 2, 25 pav.). Varžtus laikykite saugioje vietoje, kol reikės iš naujo surinkti gaminį.




ĮSPĖJIMAS

Prispaudimo pavojus: lankstydami saugokite rankas ir pirštus.

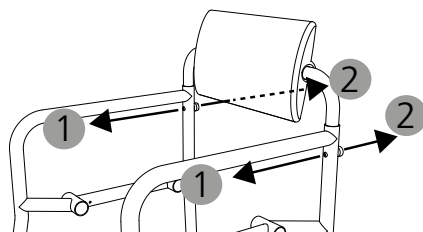

Pav. 25

3. Dabar gaminį galima lengvai sulankstyti (1, 2, 26 pav.) pasukant vieną šoninę dalį į vidų, o kitą – į išorę.
4. Jei norite vėl naudoti gaminį, išlankstykite jį atvirkštine eilės tvarka ir vykdykite 3.3 skyriuje pateiktą instrukciją nuo 4 punkto.

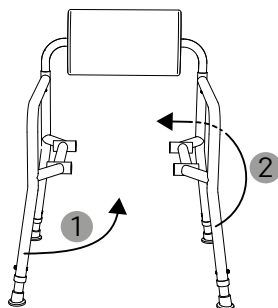

Pav. 26

4.11 TRANSPORTAVIMAS

Dušo ir tualetų kėdė nėra dažnai transportuojamas gaminys. Jei kėdę reikia transportuoti, rekomenduojame ją sulankstyti (4.10 skyrius). Kėdė turi būti supakuota taip, kad būtų stabili ir nekelėtų pavojaus staiga ir pavojingai pajudėjus transporto priemonei. Jei gaminį reikia nešti, rekomenduojame pakelti kėdę už abiejų šoninių dalių.

4.12 PRIEDAI IR KITŲ GAMINTOJŲ PRIMONTUOJAMOSIOS / PERTVARKYMO DALYS

Paprastai leidžiama naudoti tik originalius „DIETZ GmbH“ priedus. Jei prie gaminio montuojami kitų gamintojų gaminiai, atsakomybė už gaminio saugą tenka priedus montuojančiam arba primontuojančiam ir (arba) pertvarkančiam asmeniui. Tada priedų derinio arba primontuojamųjų dalių gaminio derinio atitiktį turi iš naujo deklaruoti tai atlikęs asmuo. „DIETZ GmbH“ deklaruojama atitiktis pagal MDR 2017/745 II priedą netenka galios.




ĮSPĖJIMAS

Pavojus saugai: gaminio sauga negali būti užtikrinta, jei naudojami ne DIETZ parduodami priedai ir (arba) primontuojamosios ir (ar) pertvarkymo dalys.

Jei prie gaminio tvirtinami priedai arba primontuojamosios ir (arba) pertvarkymo dalys, visada reikia laikytis saugos nuorodų, pateiktų priedo ar primontuojamosios dalies naudojimo instrukcijoje.

5.1 TAIP MATUOJA DIETZ

Pateikti gaminio standartinės konfigūracijos matmenys.

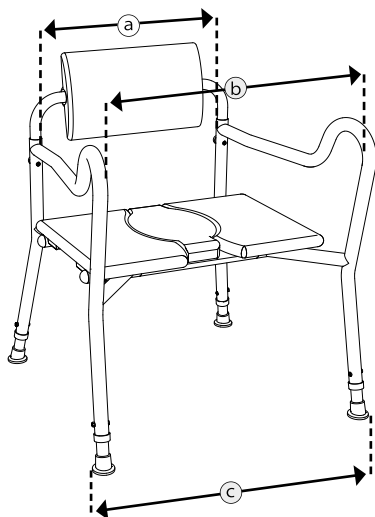


Pav. 27




PASTABA

Tekstilės komponentų matmenys (pvz., atlošo aukštis) yra orientacinės vertės su ± 10 mm paklaida.

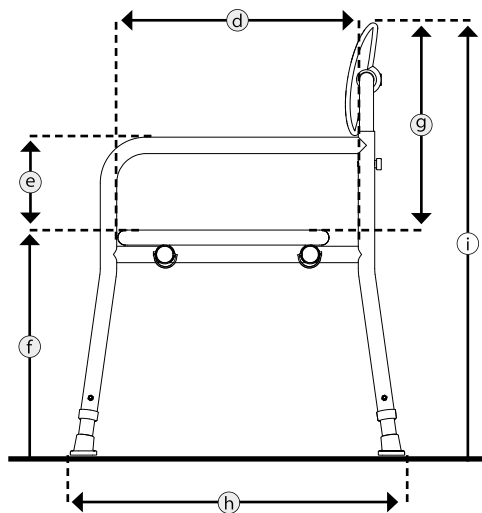

Pav. 28

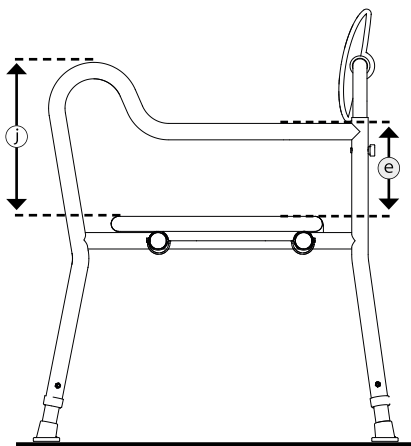

Pav. 29

5.2 MATMENYS IR TECHININĖ INFORMACIJA

Specifikacijos			Standartinė konstrukcija	Abdukcija su pagalbine priemone atsistoti	Pasukamoji konstrukcija
a	Sėdynės plotis ¹	mm	560 / 630 / 700		
b	Sėdynės plotis ¹ priekyje	mm	–	710 / 780 / 850	–
d	Sėdynės gylis ²	mm	450 / 510		
f	Sėdynės aukštis	mm	450–600		
h	Bendras ilgis ³	mm	705–747	770–806	705–747
c	Bendras plotis ³	mm	SB 560: 750–792 SB 630: 820–862 SB 700: 890–932	SB 560: 810 SB 630: 885 SB 700: 960	SB 560: 750–792 SB 630: 820–862 SB 700: 890–932
i	Bendras aukštis	mm	860–1060 (25 mm žingsniais)		
	Sėdynė (plotis × gylis × aukštis)	mm	670 × 450 × 32		
	Atlošo pagalvėlė (plotis × gylis × aukštis)	mm	420 × 70 × 245		
	Reguliuojamasis atlošo kampas	°	360		
g	Atlošo aukštis	mm	410 / 435 / 460		
e	Šoninės dalies aukštis	mm	200		
j	Šoninės dalies aukštis priekyje	mm	–	330	–
	Porankio ilgis	mm	580	680	580
	Pervažiavimo aukštis	mm	343–493		
	Apvalus tualetų kibiras (plotis × aukštis / Ø)	mm	300 × 160 / 300		
	Kvadratinis tualetų kibiras (ilgis × plotis × aukštis)	mm	410 × 300 × 160		
	Sunkiausios dalies masė ⁴	kg	6,25	6,75	7,25
	Bendras svoris	kg	14	14,5	15
	Maksimalus naudotojo svoris ⁵	kg	250		

¹ Matuojama tarp šoninių dalių.² Matuojama nuo atlošo vamzdžio iki priekinio sėdimojo paviršiaus krašto.³ Priklauso nuo sėdynės aukščio.⁴ Dušo ir tualetų kėdės svoris, atėmus nuimamąsias dalis (čia be sėdimojo paviršiaus, įstatomųjų vamzdžių ir tualetų kibių).⁵ Maksimalus naudotojo svoris, įskaitant papildomą apkrovą. Papildomos apkrovos svoris sumažina maksimalų naudotojo svorį.

5.3 GAMINIO PATIKROS

ISO 17966	patikrinta pagal reikalavimus ir bandymo metodus, taikomus asmens higienos priemonėms
EN 1021-2	patikrintas apmušalų medžiagų ir plastikinių komponentų atsparumas užsidegimui nuo liepsnos

ISO 10993-5	patikrintas medžiagos toksiškumas
Bandomojo manekeno svoris	250 kg

5.4 PAPILDOMA INFORMACIJA

Specifikacijos		„tauron dts“
Spalvos		Mangano pilka 01, mangano pilka 02, žaliosios citrinos
Standartinė šoninė dalis	kg	1,4
Šoninė dalis su abdukcija ir pagalbine priemone atsistoti	kg	1,6
Pasukamoji šoninė dalis	kg	1,9
Atlošas, įskaitant atlošo pagalvėlę	kg	1,45
Sėdynės pagalvėlė	kg	5,2
Įstatomasis vamzdis	kg	1,2
Apvalus tualetų kibiras	kg	0,54
Kvadratinis tualetų kibiras	kg	0,2
Teleskopinė koja	kg	0,17
Guminiai kojų antgaliai	kg	0,05
Aplinkos temperatūra naudojant		nuo +10 °C iki +40 °C
Aplinkos sąlygos laikant		nuo 0 °C iki +45 °C // nuo 20 % iki 75 % santykinė oro drėgmė

5.5 MEDŽIAGOS

Šoninė dalis	Aliuminis, dengtas miltelinio būdu
Atlošas	Aliuminis, dengtas miltelinio būdu
Atlošo pagalvėlė	PU (poliuretanai)
Rievimasis veržlė	PA (poliamidas), žalvaris
Sėdynės pagalvėlė	PU (poliuretanai), mediena
Padėties nustatymo laikiklis, sėdynė	PP + 15 % GF (polipropilenas + stiklo pluoštas)
Įstatomieji vamzdžiai	Nerūdijantis plienas
Įstatomųjų vamzdžių galiniai gaubteliai	PP (polipropilenas)
Tvirtinimo spaustukas	PP (polipropilenas)
Apvalus tualetų kibiras	PP (polipropilenas)
Kvadratinis tualetų kibiras	PP (polipropilenas)
Tualetų kibiros laikantysis bėgelis	Aliuminis, dengtas miltelinio būdu
Teleskopinė koja	Aliuminis, dengtas miltelinio būdu, PP (polipropilenas)
Guminiai kojų antgaliai	TPE (termoplastinis elastomeras), nerūdijantis plienas

Pastaba: visi naudojami metalai yra atsparūs korozijai.

5.6 GAMINIO ŽENKLINIMAS

Ant gaminio esančios tipo ir įspėjamosios etiketės turi būti įskaitomos. Neįskaitomas arba trūksta-
mas etiketes nedelsdami paveskite pakeisti savo
specializuotos prekybos atstovui. Serijos numeris,
pagal kurį galima aiškiai identifikuoti gaminį, yra
identifikacinėje plokštelėje. Jos negalima pašalinti.

- Pagal užsakymą pagamintų gaminių
ženklinimas

SONDERANFERTIGUNG
CUSTOM MADE DEVICE

Pav. 30




Pakartotiniam naudojimui
atskiiriems pacientams.



Unikalus paciento numeris
(atitinka
gaminio serijos numerį)

Pagal užsakymą gaminami gaminiai – tai indivi-
dualiai naudotojui pagaminti gaminiai. Šiuo
atveju skiriasi identifikacinė plokštelė, įspėjamo-
sios nuorodos ir gali skirtis paskirtis. Būtina va-
dovautis papildomais dokumentais.

- Identifikacinė plokštelė

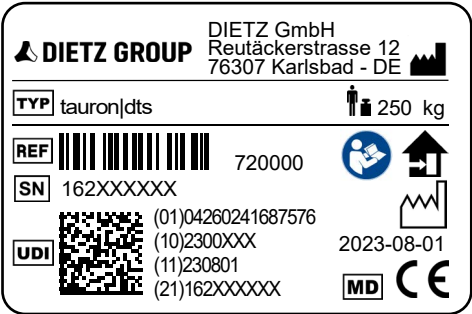

Pav. 31

	TYP = pavadinimas ir (arba) modelis
	REF = prekės numeris
	SN = serijos numeris
	UDI = unikalus priemonės identifikatorius (01) UDI-DI / GTIN (10) partijos numeris (11) pagaminimo data (MMMMmmDD) (21) serijos numeris
	Gamintojas / gamintojo ženklas / kontaktinis adresas
	Maksimalus naudotojo svoris, įskaitant papildomą apkrovą
	Pagaminimo data (MMMM-mm-DD)
	Gaminį leidžiama naudoti tik patalpose
	Laikykitės naudojimo instrukcijos
	Medicinos priemonė (angl. „Medical Device“)
	CE ženklas MDR 2017/745 VIII priedas

6.1 SAUGOS NUORODOS

Siekdami išvengti kritimo, pavojingų situacijų ir gaminio pažeidimų, naudodami savo gaminį visada laikykitės toliau pateiktų saugos nuorodų:

- ▼ Gaminį leidžiama naudoti tik patalpose, pastačius ant lygaus, tvirto pagrindo.
- ▼ Nenaudokite gaminio kaip pagalbinės priemonės lipti ir nesistokite ant jo.
- ▼ Nepakraukite vienos gaminio pusės.
- ▼ Patalpose, kuriose grindys yra drėgnos, ypač jei buvo naudojami dušo priedai (pvz., muilas, skystasis muilas ar šampūnas), sėdantis ir stojantis kyla pavojus paslysti.
- ▼ Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Pažeisto gaminio naudoti negalima.
- ▼ Išardę ir vėl surinkę gaminį kiekvieną kartą patikrinkite stabilumą ir įsitikinkite, kad nustatytas vienodas visų teleskopinių kojų ilgis.
- ▼ Jei judėjimo galimybės yra labai ribotos, gaminį naudokite padedant lydinčiam asmeniui.
- ▼ Gaminio negalima naudoti baseine ar vandens parke.
- ▼ Dėl karšto vandens arba saulės spindulių gali įkaisti gaminio paviršius. Pavojus nusideginti!
- ▼ Apie rimtus su gaminiu susijusius incidentus būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai.
- ▼ Jei Jūsų gaminys yra pagamintas pagal užsakymą (žr. gaminio ženklimą), be naujausios naudojimo instrukcijos būtina laikytis papildomų dokumentų, įskaitant visas saugos nuorodas.

7.1 TECHNINĖ IR EINAMOJI PRIEŽIŪRA

Kad gaminys visada veiktų saugiai, rekomenduojame reguliariai atlikti einamosios priežiūros plane nurodytas patikras.

Dėl netinkamos ar aplaidžios gaminio kasdienės ir einamosios priežiūros apribojama atsakomybė. Einamosios priežiūros plane nepateikiama jokios informacijos apie tai, kokius darbus iš tikrųjų reikia atlikti su gaminiu.



PASTABA

Jūs, kaip naudotojas, pirmasis pastebėsite bet kokią žalą. Jei aptiksite einamosios priežiūros plane nurodytą klaidą ar kitus defektus ir veikimo apribojimus, nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį specializuotos prekybos atstovą.



ĮSPĖJIMAS

Siekiant išlaikyti gaminio eksploatavimo saugą, gaminį gali remontuoti tik specializuotos prekybos atstovai, naudodami originalias DIETZ atsargines dalis. Atitinkamą atsarginių dalių katalogą rasite mūsų interneto svetainėje prie atitinkamo gaminio informacijos.



PASTABA

Einamosios priežiūros plane nurodytas patikras atlikti ir priemonių imtis turi naudotojas arba padėjėjas, jei nenurodyta kitaip.



PASTABA SPECIALIZUOTOS PREKYBOS ATSTOVUI

Jei naudotojas pastebi nejprastus gaminio sutrikimus, patikrinkite pagal visus einamosios priežiūros plane išvardytus patikros punktus. Patikros taip pat turi būti atliekamos prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą ir po ilgesnio (>4 mėn.) gaminio laikymo.

7.2 EINAMOSIOS PRIEŽIŪROS PLANAS

Kas	Aprašymas	kas mėnesį prieš naudojant	
Sėdimasis paviršius ir atlošo pagalvėlė Patikrinkite, ar nėra pažeidimų	- Sėdimasis paviršius ir atlošo pagalvėlė negali būti pažeisti. - Neveikiant funkcijoms ir esant paviršiaus pažeidimams, komponentus turi pakeisti specializuotos prekybos atstovas.	x	
Nustatomosios dalys Patikrinkite, ar stipriai pritvirtintos	Patikrinkite, ar tvirtai priveržti varžtai, kuriais buvo nustatomas gaminy.	x	
Įstatomieji vamzdžiai Patikrinkite, ar veikia ir ar nenusidėvėjo	Patikrinkite, ar teisingai uždėti tvirtinimo spaustukai. Jie turi būti užmaiti iš apačios ir tvirtai apgaubti įstatomuosius vamzdžius.	x	
	Patikrinkite, ar įstatomieji vamzdžiai nesulenkti.  Sulenktus įstatomuosius vamzdžius turi pakeisti specializuotos prekybos atstovas.		x
Pasukamoji šoninė dalis Patikrinkite, ar stipriai pritvirtinta, veikia ir nenusidėvėjo	Patikrinkite, ar šoninės dalys tvirtai užfiksuotos.	x	
	Patikrinkite, ar nepažeistas fiksatorius.  Jei aptinkama tokių pažeidimų, gaminio naudoti nebegalima, nes nebeužtikrinamas saugus naudojimas.		x
Tualetto kibiras Patikrinkite, ar veikia ir ar nenusidėvėjo	- Kibirą turi būti lengva įstumti ir išstumti. - Neveikiant funkcijoms ir esant paviršiaus pažeidimams (tualetto kibiras, kreipiamieji bėgeliai), komponentus turi pakeisti specializuotos prekybos atstovas.	x	
Srieginės jungtys Patikrinkite, ar tvirtai priveržtos	Visi tvirtinimo varžtai turi būti tvirtai priveržti.  Savaime užsifiksuojančios veržlės ir varžtai praranda savo veiksmingumą pakartotinai atlaisvinant ir priveržiant. Tada juos turi pakeisti įgaliotasis specializuotos prekybos atstovas.		x
Sukomplektuotas rėmas Veikimas ir pažeidimai	Rėmo dalys (šoninės dalys, atlošas, įstatomojo vamzdžio laikiklis) negali būti pažeistos, įtrūkusios ar sulenktos.  Jei aptinkama tokių pažeidimų, gaminio naudoti nebegalima, nes nebeužtikrinamas saugus naudojimas.		x
Apžiūrimoji kontrolė Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių dalių, lūžių, korozijos ar kitokios žalos	 Jei aptinkama tokių pažeidimų, gaminio naudoti nebegalima, nes nebeužtikrinamas saugus naudojimas.		x
Visas gaminy Patikrinkite, ar nėra nešvarumų	Sėdimąjį paviršių ir (ar) atlošo pagalvėlę bei tualetto kibirą reikia valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno naudojimo.	x	
	Atsižvelgiant į užterštumą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, reikia valyti visą gaminį (žr. skyrių „Valymas ir dezinfekavimas“).		x

7.3 KLAIDŲ PAIEŠKA IR JŲ ŠALINIMAS

Kas	Galimos priežastys	Priemonės
Sėdimasis paviršius nėra tiesus.	- Nustatytas skirtingas teleskopinių kojų ilgis. - Įstatomieji vamzdžiai įstatyti neteisingoje padėtyje (3.5 skyrius „Sėdynės gylis“).	Nustatykite teisingai.
Dušo ir tualetu kėdė pasvyra.	- Nustatytas skirtingas teleskopinių kojų ilgis. - Patikrinkite, ar visos rievėtosios veržlės tvirtai priveržtos.	Nustatykite teisingai.
Nepavyksta uždėti išpjovos higienai dangčio.	Išpjovos higienai dangtis uždėtas neteisingai.	Apsukite dangtį 180° ir tada jį uždėkite.
Nepavyksta įstumti ir ištraukti tualetu kibiro.	Vienoje pusėje atsilaisvino kreipiamasis bėgelis.	Priveržkite varžtus.
	- Apgadintas tualetu kibiras. - Sulenktas kreipiamasis bėgelis.	Kreipkitės į įgaliotąjį specializuotos prekybos atstovą.
Nepavyksta atfiksuoti ir užfiksuoti atlenkiamosios šoninės dalies.	Neatlaisvintas fiksavimo laikiklis arba užteršta užfiksavimo svirtis.	Nuvalykite komponentus.
	Sugedo užfiksavimo svirtis.	Kreipkitės į įgaliotąjį specializuotos prekybos atstovą.
Girdisi gurgždėjimas ir (arba) trinties garsai.	Galimos įvairios priežastys.	Kreipkitės į įgaliotąjį specializuotos prekybos atstovą.

7.4 VALYMO IR DEZINFEKAVIMO SISTEMOS

Šis gaminys yra sertifikuotas „RehaWash“ ir gali būti valomas bei dezinfekuojamas „RehaWash“ valymo ir dezinfekavimo sistemose (plovimo kameroje). Laikykitės „RehaWash“ plovimo kamelių naudojimo instrukcijos.

Įsitikinkite, kad gaminys yra visiškai sausas.



PASTABA

Materialinė žala:

Nuimkite visas nuimamąsias tekstilines dalis ir laikykite šios naudojimo instrukcijos skyriaus „Valymas ir dezinfekavimas“. Valykite tik aukštesnio nei IP 55 apsaugos lygio elektrinius komponentus. Jei įmanoma, pašalinkite esamus kamščius iš uždarytų vamzdžių be išleidimo angų. Jei įmanoma, gaminį į sistemą statykite vamzdžių angomis žemyn._____



PASTABA

Valymo ir dezinfekavimo sistemas gali naudoti tik patvirtinti kvalifikuoti darbuotojai.

Valant ar dezinfekuojant sistemą, kai kurie komponentai gali pakeisti spalvą, tačiau gaminys vis tiek atlieka visas funkcijas.

7.5 VALYMAS

Gaminį valykite drungnu vandeniu, sumaišytu su švelniu valikliu (be tirpiklių, kurio pH vertė yra nuo 5 iki 9).

Nuvalę nušluostykite švariu vandeniu ir nusausinkite kėdę šluoste.



ĮSPĖJIMAS

Medžiagos pažeidimai: nevalykite didžiaslėgiais valymo įrenginiais, nenaudokite jokių aštrių, ėsdinančių cheminių medžiagų, vielinių šepėčių ar abrazyvinių medžiagų.

Korozijos pavojus: siekdami išvengti korozijos įsitikinkite, kad nuvalius visos medžiagos yra visiškai sausos.

7.6 DEZINFEKAVIMAS

Kruopščiai nuvalykite arba apipurškite visas dalis paprastai rinkoje įsigijama paviršiaus dezinfekavimo priemone. Ypač kruopščiai rekomenduojama dezinfekuoti paviršius, prie kurių dažnai liečiasi rankos ir oda, pvz., sėdimasis paviršius, tualetų kibiras, atlošas, įskaitant pagalvėles ir šonines dalis.

Medžiagoms gali būti naudojamos šios dezinfekavimo priemonės:

- ▼ Dezinfekavimas aldehidų sudėtyje neturinčia priemone, pagaminta alkoholio pagrindu (ne daugiau kaip 70 % propilo alkoholio)



ĮSPĖJIMAS

Medžiagos pažeidimai: dezinfekuodami laikykitės valymo ir dezinfekavimo priemonių gamintojo pateiktų naudojimo ir darbo su priemone nuorodų.

Infekcijos pavojus: gaminį reikia dezinfekuoti kiekvieną kartą prieš juo naudojantis kitam naudotojui. Tai padeda išvengti kryžminės taršos.

7.7 ATLIEKŲ TVARKYMAS

Jei Jums nebereikia gaminio, kreipkitės į savo specializuotos prekybos atstovą, kuris jį paims ir tinkamai sutvarkys atliekas arba naudos

pakartotinai. Priešingu atveju gaminį nuneškite į vietinį atliekų tvarkymo centrą.

7.8 PERDAVIMAS IR PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

Jūsų gaminį galima perduoti naudoti kitiems ir naudoti pakartotinai, nebent jis yra pagamintas pagal užsakymą ir atitinkamai paženklintas. Pakartotinių naudojimų skaičius priklauso nuo medžiagos nusidėvėjimo būklės ir konkretaus gaminio funkcinio tinkamumo.

Perduodami naujam naudotojui arba specializuotos prekybos atstovui arba perduodami naudoti pakartotinai nepamirškite perduoti visų saugiam naudojimui būtinų techninių dokumentų.

Specializuotos prekybos atstovas, prieš perduodamas gaminį naudoti pakartotinai, turi jį išvalyti, dezinfekuoti, patikrinti, ar nėra pažeidimų, ir suteikti leidimą naudoti.

Tam turi būti patikrinta pagal visus einamosios priežiūros plane išvardytus gaminio patikros punktus.



ĮSPĖJIMAS

Infekcijos pavojus: gaminį reikia dezinfekuoti kiekvieną kartą prieš jį naudojantis kitam naudotojui. Tai padeda išvengti kryžminės taršos.



PASTABA

Jei gaminys paženklintas kaip pagal užsakymą pagamintas gaminys, jis negali būti perduodamas ar pakartotinai naudojamas.

7.9 LAIKYMAS

Jei norite laikyti gaminį, atkreipkite dėmesį, kad jis turi būti laikomas sausoje, nuo intensyvių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, nuo 0 °C iki +45 °C temperatūroje. Gaminį galite sulankstyti, kad užimtų mažiau vietos (4.10 skyrius).

Po ilgesnio laikymo (>4 mėn.), prieš pakartotinai naudodami gaminį patikrinkite pagal visus einamosios priežiūros plane išvardytus patikros punktus.



ĮSPĖJIMAS

Nelaikykite gaminio šalia šilumos šaltinio ir ant jo nekraukite jokių daiktų.

8.1 GARANTIJA

Garantijos taikomos visiems gaminio defektams, akivaizdžiai susijusiems su medžiagos ar gamybos defektais. Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pranešimo apie pasirengimą išsiųsti gavimo, ne vėliau kaip po pristatymo. Garantija netaikoma pažeidimams,

atsiradusiems dėl nusidėvėjimo, tyčinių veiksmų, neatsargaus ar netinkamo valdymo ar naudojimo. Tai taip pat galioja, jei naudojamos netinkamos priežiūros priemonės, tepimo alyvos ar tepalai.

8.2 NAUDOJIMO TRUKMĖ

Naudojant kasdien ir pagal paskirtį, numatoma gaminio naudojimo trukmė yra penkeri metai. Būtina sąlyga – laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą einamosios priežiūros ir saugos

reikalavimų.

Nurodyta naudojimo trukmė nėra papildoma garantija.

8.3 ATSAKOMYBĖ

„DIETZ GmbH“ atsako tik tuo atveju, jei gaminiai naudojami laikantis nurodytų sąlygų ir nurodytiems tikslams. Rekomenduojame tinkamai elgtis su gaminiais ir prižiūrėti juos pagal instrukciją. „DIETZ GmbH“ neatsako už žalą, padarytą naudojant „DIETZ GmbH“ nepatvirtintus komponentus ir atsargines dalis. Remontuoti

gali tik įgalioti specializuotos prekybos atstovai arba pats gamintojas.



Gaminių grupė: XXL gaminiai
Gaminy: tauron|dts
Naudojimo instrukcija, 1.5 versija
Versijos data 2026-01 (NHA)

REF LT BDA: 911399

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
Vokietija

Telefonas +49 7248 9186–0

Faksas +49 7248 9186–86

info@dietz-group.de

www.dietz-group.de

Gali būti spaudos klaidų ir kitų klaidų. Pasiliekami teisę keisti kainą arba gaminius.
„DIETZ GmbH“, Karlsbadas
Kopijuoti visą ar dalis leidžiama tik gavus raštišką
„DIETZ GmbH“, Karlsbadas, leidimą.