

Om de tashouder gemakkelijker te kunnen instellen heeft DIETZ een speciaal gereedschap ontwikkeld. Dit gereedschap in de vorm van het DIETZ-logo wordt meegeleverd met de rollator. Hoe u hiermee de tashouder kunt instellen leest u in het volgende hoofdstuk.

TASHOUDER INSTELLEN



WAARSCHUWING

Magnetische tashouder: neem de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies van uw pacemaker in acht.



AANWIJZING

Draai de tashouder niet volledig los.

Met het meegeleverde gereedschap kunt u de tashouder instellen als deze de tas niet loodrecht van boven oppakt.

1. Druk de remhendels omlaag om de parkeerremmen te blokkeren.
2. Vouw de rollator uit.
3. Als de tas is ingehangen, verwijdert u deze.
4. Houd de DIETZ-logo-zijde van het gereedschap vast.
5. Leg het gereedschap zodanig op de tashouder dat het vastklikt **(1)**.
6. Draai de tashouder **(2)** met het gereedschap zodat de opening naar boven wijst **(3)**.
7. Indien nodig herhaalt u de stappen 4 – 6 met de andere tashouder.

