


TOMTAR GS

Looprek star

Gebruiksaanwijzing versie 1.1

NL

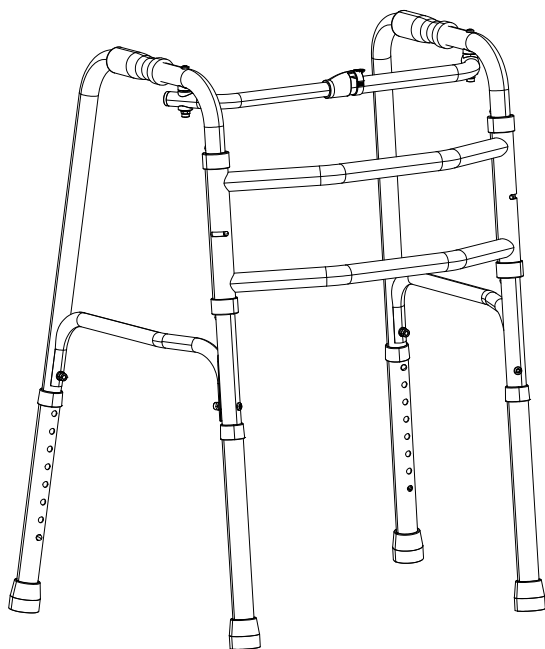

Registratie van de product-identificatiegegevens:

Neem de identificatiegegevens voor uw product over van het typeplaatje in de onderstaande regels, zodat u deze bij de hand hebt bij vragen over het product (zie hoofdstuk 5.5).*

TYP Model:	
REF Artikelnummer:	
SN Serienummer:	
 Productiedatum:	
Overige informatie/ aantekeningen:	

* De identificatiegegevens of het typeplaatje kunnen bij speciale ontwerpen afwijken.

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van DIETZ.

Dit product is een medisch hulpmiddel.

Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, deze geldt ook voor het doorgeven/de herinzet van het product. Zo vermijdt u verwondingen of productbeschadigingen. Bovendien behoudt u informatie die de gebruiksveiligheid en een waardebehoud van uw product dient.


Neem voor verdere informatie contact op met uw medische speciaalzaak.

Neem voor aanmerkingen en vragen over de productveiligheid en voor retouren schriftelijk of telefonisch contact op met DIETZ GmbH. Onze contactinformatie vindt u aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



AANWIJZING

Voor mensen met een visuele beperking is de gebruiksaanwijzing in een grotere weergave beschikbaar op **www.shop.dietz-group.de** in pdf-formaat.

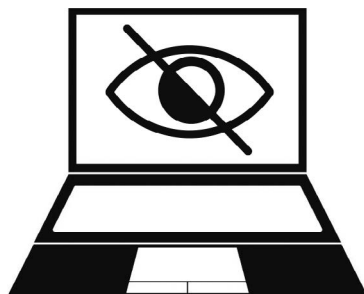

Op onze internetsite vindt u de actuele stand van de gebruiksaanwijzing evenals verdere informatie over uw product.

1 Belangrijke informatie

1.1 Bestemming	6
1.2 Gebruiksomgeving.....	6
1.3 Opslagomgeving	6
1.4 Levensduur	7
1.5 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .	7
1.6 Indicaties/beoogd gebruik.....	7
1.7 Contra-indicaties	7

2 Productbeschrijving

2.1 Leveringsomvang.....	8
2.2 Opbouw van het product.....	9

3 Product in gebruik nemen

3.1 Montage-instructies	10
3.2 Looprek uitvouwen	10
3.3 Hoogte instellen	11

4 Product gebruiken

4.1 Looprek gebruiken.....	12
4.2 Lopen met het looprek.....	12
4.3 Looprek samenvouwen	13
4.4 Looprek transporteren.....	14
4.5 Toebehoren en uitbreidingen/aanpassingen van externe leveranciers.....	14

5 Technische gegevens

5.1 Afmetingen en technische gegevens	15
5.2 Verdere gegevens.....	15
5.3 Materialen/kleuren.....	16
5.4 Producttests	16
5.5 Productaanduiding.....	17

6 Veiligheidsaanwijzingen

6.1 Veiligheidsaanwijzingen.....	18
----------------------------------	----

7 Verzorging en onderhoud

7.1 Onderhoud.....	20
7.2 Onderhoudsschema	21
7.3 Foutopsporing en -oplossing.....	23
7.4 Reiniging	24
7.5 Desinfectie	24
7.6 Doorgeven en herinzet	25
7.7 Afvoer	25

8 Verklaringen van de fabrikant

8.1 Garantie.....	26
8.2 Aansprakelijkheid	26

1.1 BESTEMMING

Het looprek TOMTAR GS dient als ondersteuning en beveiliging bij het stapsgewijs lopen en staan, en bij de looptraining voor mensen met een bewegingsbeperking met een lichaamsgewicht van max. 130 kg in de binnenruimte. Het wordt ingezet wanneer het gebruik van andere loophulpmiddelen niet voldoende is. Het is in hoogte verstelbaar en licht. Het looprek kan aan de ergonomische grepen in kleine stappen worden opgetild en in de looprichting wor-

den verplaatst.

Het looprek is niet geschikt voor kinderen of personen met een lichaamslengte van minder dan 146 cm.

Het beoogd gebruik kan afwijken bij producten die als speciaal ontwerp zijn gebouwd en overeenkomstig zijn aangeduid. In dat geval geldt de met het product meegeleverde documentatie.

1.2 GEBRUIKSOMGEVING

Het looprek is uitsluitend inzetbaar in de binnenruimte zonder trappen en op een egale, vaste ondergrond. Plekken waar het looprek kan worden gebruikt zijn bejaarden- en

verzorgingshuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, dagopvang en particuliere huishoudens. De omgevingstemperatuur voor het gebruik ligt bij -10 °C tot +50 °C.

1.3 OPSLAGOMGEVING



WAARSCHUWING

Sla het product niet op in de buurt van een warmtebron en plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product.

Wanneer u het product wilt opslaan, let er dan op dat het droog, beschermd tegen sterke zonnestraling en bij een temperatuur van 0 °C tot +45 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 20% tot 75% wordt opgeslagen. Let erop dat het looprek niet kan omvallen en geen oppervlakbeschadigingen krijgt.

Na een langdurigere opslag (> 4 maanden)

controleert u voor het opnieuw gebruiken/de herinzet alle in het onderhoudsplan opgevoerde controlepunten aan het product.

1.4 LEVENSDUUR

De te verwachten productlevensduur bedraagt 5 jaar bij dagelijks en beoogd gebruik. Voorwaar- de hiervoor is het naleven van de onderhouds-, reinigings- en veiligheidsvoorschriften die in de

gebruiksaanwijzing zijn aangegeven. De aange- geven levensduur geldt niet als een extra garan- tie.

1.5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Wanneer het product onjuist of niet conform het beoogd gebruik wordt ingezet, kan hiervan een gevaar uitgaan. Neem de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht. Deze worden als volgt aangeduid:



WAARSCHUWING

Er bestaat een matig risico op zware letsels.



VOORZICHTIG

Er bestaat een klein risico op lichte letsels.



AANWIJZING

Attendeert op het gevaar van mogelijke materiële schade. Geeft tips en adviezen.

1.6 INDICATIES/BEOOGD GEBRUIK

Het product mag worden gebruikt bij:

- loopproblemen door een beperking van het actieve of passieve bewegingsapparaat

- coördinatieproblemen bij het lopen
- verminderde belastbaarheid
- verstoring van het evenwicht

1.7 CONTRA-INDICATIES

Het product mag niet worden gebruikt:

- door kinderen
- door personen met een lichaamslengte < 146 cm en/of een lichaamsgewicht < 40 kg (BMI < 17)
- bij storingen in de waarneming
- bij ernstige gewichtstoornissen
- bij het niet los kunnen staan
- bij een lichaamsgewicht boven 130 kg

2.1 LEVERINGSOMVANG



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar: bij het verbranden van verpakkingsfolies kunnen giftige gassen ontstaan.

Verstikkingsgevaar: plastic zakken buiten het bereik van kinderen bewaren.



AANWIJZING

- De beschreven uitvoeringskenmerken en de leveringsomvang kunnen afhankelijk van het land en de markt afwijken en zijn afhankelijk van de individuele indicatie en het ziektebeeld.
- Bewaar de originele doos om het product te verzenden of op te slaan.

Het product is af fabriek compleet gemonteerd en in een doos verpakt. Controleer na ontvangst van het artikel de inhoud op volledigheid en integriteit. Stel de leverancier op de hoogte als de inhoud zichtbaar beschadigd is.

De inhoud bestaat uit:

- 1 looprek
- 1 gebruiksaanwijzing


2.2 OPBOUW VAN HET PRODUCT



AANWIJZING

De gebruiksaanwijzing kan afbeeldingen en beschrijvingen van componenten bevatten die afwijken van de daadwerkelijke leveringsomvang.

1. Vouwstang
2. Dwarsstang
3. Telescoopspoot
4. Dop
5. Zijframe
6. Vouwvergrendeling (oranje)
7. Handgreep

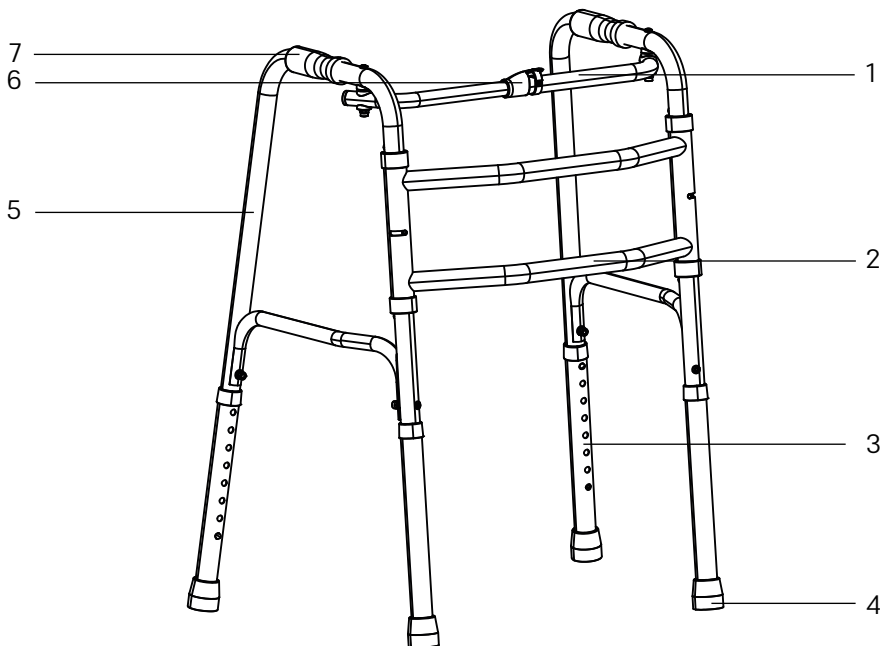

3.1 MONTAGE-INSTRUCTIES

Het product is af fabriek gemonteerd en wordt samengevouwen geleverd. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe het product wordt opgebouwd en aan uw behoeften wordt aangepast, zodat u het product comfortabel kunt gebruiken. De functiecontrole en de aanpassing van het product aan de gebruiker wordt uitgevoerd door de vakhandel.

Vakpersoneel:

- is op basis van vakkundige opleiding, kennis en ervaring in staat de overeenkomstige werkzaamheden uit te voeren,
- kan mogelijke gevaren voor het gehele proces zelfstandig herkennen en gevaren vermijden.

3.2 LOOPREK UITVOUWEN




WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding: gebruik het product alleen wanneer de vouwvergrendeling is vastgeklikt.


Klemgevaar: let bij het vouwen van het product op uw handen.

1. Neem met beide handen de handgrepen (1) vast.

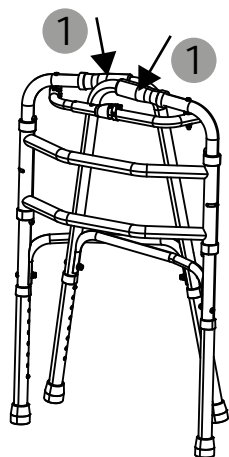

Afb. 1

2. Vouw beide zijden uit door deze naar buiten te trekken (2, 3).
→ De vouwvergrendeling klikt hoorbaar vast (4).

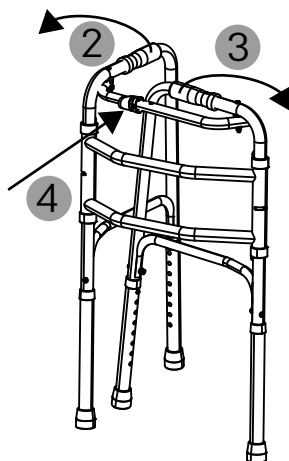

Afb. 2

3.3 HOOGTE INSTELLEN



WAARSCHUWING

Valgevaar: stel de 4 telescoop poten op dezelfde hoogte in.

Valgevaar: controleer of de veerpenen van de 4 telescoop poten na het instellen van de hoogte stevig vastklikken.



VOORZICHTIG


Klemgevaar: let bij het instellen van de telescoop poten op uw handen.



AANWIJZING

- DIETZ adviseert om de in dit hoofdstuk beschreven instelmogelijkheden door geïnstrueerd vakpersoneel te laten uitvoeren.
- In het algemeen wordt het product met licht gebogen armen gebruikt. Hiertoe wordt de hoogte van de telescoop poten ingesteld: de gebruiker gaat rechtop staan met los hangende armen tussen de zijframes. De handgrepen worden ongeveer op de hoogte van de polsen ingesteld.

1. Druk de veerpen van de telescoop poot naar binnen **(1)** en draai deze minimaal naar de zijkant, zodat u deze kunt verschuiven **(2)**.
2. Positioneer de telescoop poot in de gewenste hoogte **(3)**.
3. Draai de telescoop poot zodanig dat de veerpen vastklikt **(2)**.
→ De veerpen klikt hoorbaar vast.
4. Herhaal de stappen 1 – 3 met de drie andere telescoop poten.

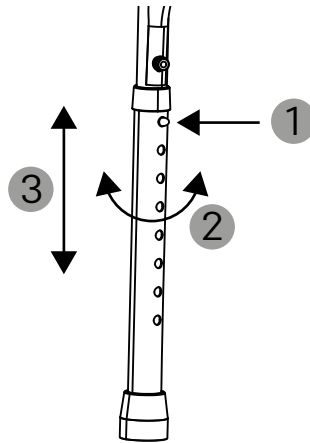

Afb. 3

4.1 LOOPREK GEBRUIKEN

Maak u voor het eerste gebruik vertrouwd met het product, zodat u zich veilig voelt bij het hanteren ervan. Laat u daarbij ondersteunen door een begeleider.

Controleer voordat u het product gebruikt altijd of:

- het looprek volledig is uitgevouwen
- het looprek op alle 4 poten staat
- de 4 veerpennen van de telescooppoten en de veerpen van de vouwvergrendeling stevig zijn vastgeklit
- alle onderdelen stevig gemonteerd zijn

4.2 LOPEN MET HET LOOPREK



WAARSCHUWING

Valgevaar: gebruik het product alleen om naar voren te lopen.

Valgevaar: gebruik het looprek niet op aflopende of oplopende vloeren.

Valgevaar: gebruik het product alleen op een vaste, egale ondergrond in gesloten ruimtes.

Valgevaar: zet het looprek bij het lopen niet te ver naar voren bij u weg.


Valgevaar: steun alleen op het looprek wanneer alle 4 poten stevig op de vloer staan.

Gevaar voor verwonding: zet het looprek niet op uw voeten.

1. Vouw het looprek uit.
2. Ga in het looprek staan, zodat uw voeten zich midden tussen de achterste looprekpoten bevinden **(1)**.
3. Neem met beide handen de handgrepen vast.
4. Let erop dat u veilig staat.
5. Til het looprek met alle 4 poten tegelijk op en zet het een klein stukje met alle 4 poten

gelijktijdig voor u neer **(2)**.

6. Zet kleine stappen naar voren tot u zich ter hoogte van de achterste looprekpoten bevindt **(1)**.

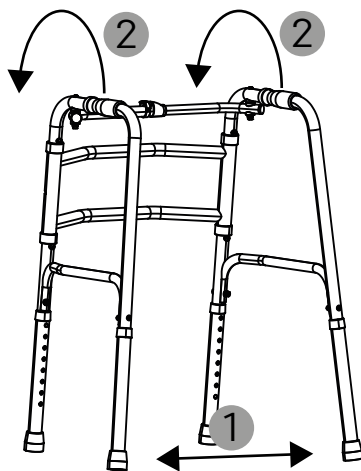

Afb. 4

4.3 LOOPREK SAMENVOUWEN




WAARSCHUWING

Klemgevaar: let bij het vouwen van het product erop dat uw handen zich niet tussen de onderdelen bevinden die worden samengevouwen.




AANWIJZING

- Het looprek staat in gevouwen toestand niet zelfstandig. Beveilig het tegen omvallen, zodat het niet beschadigd raakt.
 - Zie hoofdstuk 3.2 om het looprek te ontvouwen.
1. Om de veerpen los te maken drukt u de vouwvergrendeling naar beneden **(1)**.

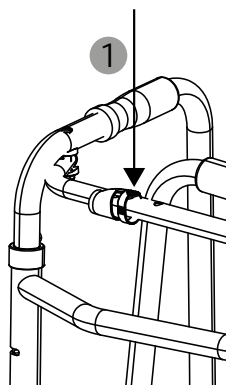

Afb. 5

2. Vouw één zijde deels naar binnen tot de veerpen van de vouwvergrendeling niet meer in het gat zit.
3. Laat de vouwvergrendeling los.
4. Vouw de zijdelen naar binnen **(2, 3)**.

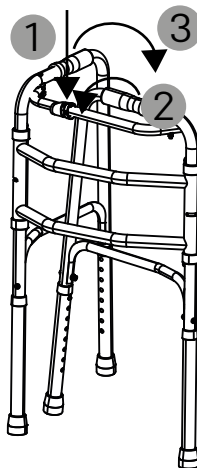

Afb. 6

4.4 LOOPREK TRANSPORTEREN



AANWIJZING

Informeer uzelf vooraf over de bepalingen van het vervoersbedrijf voor het transport in het vliegtuig of de trein.

1. Vouw het looprek samen.
2. Voor de verzending verpakt u het looprek in de originele doos.
3. Positioneer de doos zoals hierop is beschreven als het looprek voor de verzending in de originele doos is verpakt.
4. Transporteer het looprek zodanig dat dit stabiel staat en er geen gevaar ontstaat door plotselinge bewegingen van het vervoermiddel.

4.5 TOEBEHOREN EN UITBREIDINGEN/AANPASSINGEN VAN EXTERNE LEVERANCIERS



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwondingen: de veiligheid van het product kan niet worden gegarandeerd als er uitbreidingen of toebehoren worden gebruikt die niet door DIETZ zijn vrijgegeven.

Gevaar voor verwonding: als er toebehoren of uitbreidingen aan het product moeten worden aangebracht, moeten de veiligheidsinstructies uit de gebruiksaanwijzing van de toebehoren of de uitbreiding in acht worden genomen.

Wij adviseren om alleen originele toebehoren van DIETZ GmbH te gebruiken evenals combinaties waarvan de effectiviteit en veiligheid op basis van een combinatieovereenkomst volgens Aanhang I Nr. 14.1 van EU-verordening 2017 / 745 (MDR) zijn getest.

Verdere informatie over de toegelaten toebehoren en combinatieovereenkomsten ontvangt u van onze service.

Voor het TOMTAR looprek GS zijn geen toebehoren voorzien.

Als u een DIETZ-product combineert met niet door ons geleverde toebehoren, wijzigt u het product.

Als er externe producten op een DIETZ-product worden gemonteerd, gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product over naar de persoon die de toebehoren monteert of de uitbreiding uitvoert.

5.1 AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties	Eenheid	TOMTAR GS
Lengte/breedte/hoogte	mm	490 / 695 / 760
Lengte/breedte/hoogte samengevouwen	mm	150 / 490 / 760
Hoogte min. / max.	mm	760 - 925
Hoogte, instelbaar	mm	7 niveaus × 25
Draaicirkel max.	mm	700
Handgreepbreedte/handgreep lengte	mm	37 / 110
Greep afstand	mm	410
Gewicht	kg	2,8
Kantelstabiliteit voorwaarts (ISO 11199-1)	°	10
Kantelstabiliteit achterwaarts (ISO 11199-1)	°	7
Kantelstabiliteit zijwaarts (ISO 11199-1)	°	3,5
Max. lichaamsgewicht	kg	130
Aanbevolen lichaamslengte	m	1,55 – 1,80

5.2 VERDERE GEGEVENS

Specificaties	TOMTAR GS
REF	200330
Omgevingstemperatuur in bedrijf	-10 °C tot +50 °C
Omgevingsvoorwaarden opslag	0 °C tot +45 °C // 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

5.3 MATERIALEN/KLEUREN



AANWIJZING

Alle gebruikte metalen zijn corrosiebestendig.

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Zijdelen van het frame	Aluminiumbuis, geschroefd, geanodiseerd	Zwart
Frame dwarsstang	Aluminiumbuis, gelast, poedergecoat	Mangan Grey
Telescooppoten	Aluminium, geanodiseerd	Zwart
Handgrepen	Kunststof TPR	Zwart
Vouwvergrendeling	Kunststof PP	Oranje
Dop	PVC	Zwart

5.4 PRODUCTTESTS

Norm	getest
EN ISO 11199-1	getest zijn de normen voor technische hulpmiddelen bij het lopen voor gebruik met beide armen, looprekken (loopframes)
ISO 10993-5	getest op toxiciteit in het materiaal
ISO 24415-1	getest is de wrijving van de dop voor technische loophulpmiddelen

5.5 PRODUCTAANDUIDING

Typeplaatjes en waarschuwingsplaatjes op het product moeten leesbaar blijven. Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes door de vakhandel vervangen. Het serienummer waarmee een product eenduidig wordt geïdentificeerd, bevindt zich op de dwarsstang op het typeplaatje. Het typeplaatje mag niet worden verwijderd.

Bij een product met de hieronder vermelde aanduiding gaat het om een speciaal ontwerp.

SONDERANFERTIGUNG
CUSTOM-MADE DEVICE




Bij speciale ontwerpen, die individueel zijn vervaardigd voor gebruikers, wijken het typeplaatje of de bestemming en de waarschuwingen af. De aanvullende documentatie moet in acht worden genomen.

Voor het hergebruik bij een individuele patiënt.



Uniek patiëntnummer (komt overeen met het productserienummer)

Hierna worden de symbolen en informatie van het typeplaatje in detail verklaard. Het hier afgebeelde typeplaatje is een voorbeeld.

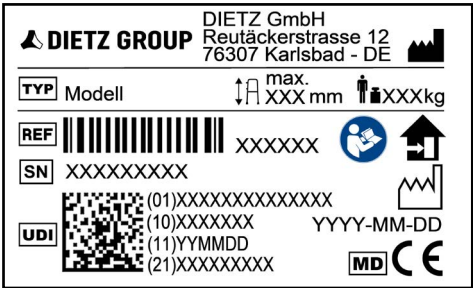

Afb. 7

TYP	TYP = model
REF	REF = artikelnummer
SN	SN = serienummer
UDI	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI/GTIN (10) charge-/lotnummer (11) productiedatum (JJMMDD) (21) serienummer
	Fabrikant
	Maximaal lichaamsgewicht
	Productiedatum (JJ-MM-DD)
	Maximaal instelbare hoogte
	Het looprek is uitsluitend voorzien voor gebruik in de binnenruimte.
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht
MD	Medical Device/medisch hulpmiddel
CE	Het product is conform met de verordening (EU) 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

6.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Neem bij het gebruik van uw product altijd de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht om een val, gevaarlijke situaties en schade aan het product te vermijden:



WAARSCHUWING

Veiligheidsinstructies: neem alle veiligheidsinstructies in acht, omdat er anders gevaar voor verwondingen kan bestaan!

- Lees voor het gebruik van het product de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Het product mag alleen in gesloten ruimtes worden gebruikt.
- Het product mag alleen op een vaste, egale ondergrond worden gebruikt.
- Natte, aflopende en oplopende vloeren vermijden.
- Extra voorzichtigheid is geboden bij losse vloerbedekkingen, zoals tapijten. Deze kunnen wegglijden.
- Het looprek moet veilig op alle 4 poten staan.
- Controleer voor ieder gebruik van het looprek of alle onderdelen stevig zijn gemonteerd.
- Controleer voor ieder gebruik of de veerpen van de vouwvergrendeling is vastgeklikt.
- Vergewis u voor ieder gebruik of de veerpennen van de telescoop poten op dezelfde hoogte zijn ingesteld en vergrendeld. Het looprek kan anders ongewild bij belasting inklappen.
- Bij gewichtsverplaatsingen door lichaamsbewegingen kan het kantelrisico van het product worden vergroot. Let er altijd op dat de belasting op het product gelijkmatig plaatsvindt.
- Het looprek altijd met beide handen gebruiken.
- Hang geen tassen of andere lasten aan uw looprek, omdat hierdoor het kantelrisico wordt vergroot.
- Let bij de montage, de hoogte-instelling van de telescoop poten en bij het vouwen op uw handen. Er bestaat klemgevaar.
- Het max. lichaamsgewicht van 130 kg niet overschrijden.
- Plaats het product niet langere tijd in directe zonnestraling, warmtebronnen of lage temperaturen, omdat onderdelen van het product (bijv. frame of handgrepen) zeer heet ($> 41^{\circ}\text{C}$) of zeer koud ($< 0^{\circ}\text{C}$) kunnen worden en deze in bepaalde omstandigheden huidletsels kunnen veroorzaken.
- Gebruik het product niet onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht en reactievermogen negatief kunnen beïnvloeden.
- Het product alleen gebruiken conform het beoogd gebruik.
- Het product mag niet als sta-op- of vervoershulpmiddel worden gebruikt.
- Niet op het product klimmen.
- Niet met het looprek tegen obstakels lopen.

- Niet op de dwarsstangen of de vouwstang gaan zitten.
- De dwarsstangen niet gebruiken om op te steunen.
- Het product mag niet aan kinderen worden gegeven om te spelen.
- Geen trappen beklimmen en geen roltrappen gebruiken met het looprek. Gebruik een lift.
- Het looprek mag niet in het water worden gebruikt, omdat hierdoor schade aan het materiaal kan worden veroorzaakt.
- Let erop dat u het looprek droogt wanneer het nat is geworden.
- Als u functiebeperkingen aan uw product vaststelt, breng dit dan onmiddellijk voor onderhoud naar de vakhandel.
- Na opslag van meer dan 4 maanden moet u voor de heringebruikname alle in het onderhoudsschema vereiste inspecties uitvoeren.
- Het product verwijderd houden van potentiële warmte- en vuurbronnen.
- Win onmiddellijk advies in bij een arts bij rood worden, prikkelingen of irritaties van de huid die ontstaan in combinatie met het gebruik van het product.
- Ernstige incidenten die in combinatie met het product optreden, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteit.

7.1 ONDERHOUD



WAARSCHUWING

Veiligheidsgevaar: om de gebruiksveiligheid van het product te behouden, mogen reparaties aan het product uitsluitend worden uitgevoerd door de vakhandel met originele DIETZ-reserveonderdelen. De overeenkomstige catalogus met reserveonderdelen is beschikbaar op onze internetsite onder de desbetreffende productinformatie.

Klemgevaar: let bij het onderhoud van het looprek op uw handen.



AANWIJZING

Gebruikers merken mogelijke beschadigingen als eerste op. Als u een fout, zoals deze in het onderhoudsschema is opgevoerd, of verdere defecten en functiebeperkingen vaststelt, neem dan contact op met aangewezen vakpersoneel.



AANWIJZING

De volgens het onderhoudsschema vereiste inspecties en maatregelen moeten, indien niet anders aangegeven, door de gebruikers of de helpers worden uitgevoerd.



AANWIJZING VOOR DE VAKHANDEL

Wanneer gebruikers opvallende zaken aan het product melden, controleert u alle in het onderhoudsschema opgevoerde controlepunten. De controles moeten voor iedere herinzet en na een langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd.

Om een veilig bedrijf van het product te kunnen garanderen, adviseert DIETZ om de in het onderhoudsschema opgevoerde controles regelmatig uit te voeren.

Gebrekkig of nalatig onderhoud en verzorging van het product leidt tot een beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsschema geeft geen uitsluitsel over de daadwerkelijk noodzakelijke, aan het product vastgestelde, arbeidsomvang.

7.2 ONDERHOUDSSCHEMA

Wat moet u controleren	Beschrijving	maandelijks voor het gebruik	
Frame: functie en stabiliteit	• Het frame mag niet verbogen zijn of andere beschadigingen vertonen. • Het frame mag slechts minimaal in elkaar kunnen worden geschoven.	x	
Vouwvergrendeling: functie en stabiliteit	• Het oranje kunststofelement van de vouwvergrendeling moet stevig met de vouwstang zijn verbonden. • Het oranje kunststofelement moet probleemloos omlaag kunnen worden gedrukt, zodat de veerpen van de vouwvergrendeling kan worden ingedrukt. • Het oranje kunststofelement mag niet beschadigd zijn. • Na het losmaken van de veerpen van de vouwvergrendeling moet het looprek zich probleemloos laten vouwen. • Wanneer het looprek is uitgevouwen, moet de vouwvergrendeling duidelijk hoorbaar vastklikken. Het looprek mag zich in deze toestand niet laten vouwen.	x	
Handgrepen: stabiliteit	• De handgrepen moeten aanwezig zijn. • De handgrepen moeten vastzitten. • De handgrepen mogen geen beschadigingen of scheuren vertonen.	x	
Veerpennen: functie en stabiliteit	• De veerpennen van de telescoop poten moeten op dezelfde hoogte zijn ingesteld en vergrendeld.	x	
Doppen: functie, stabiliteit en vervuiling	• Alle 4 doppen moeten veilig op de ondergrond staan. • Alle 4 doppen moeten stevig met het frame zijn verbonden en mogen geen sterke slijtage of andere schade vertonen. • Bij vervuiling de doppen reinigen.	x	
Schroef- en geklonken verbindingen: stevig vastzittend	Gevaar voor verwondingen: zelfvergrendelende moeren en schroeven verliezen door herhaald losdraaien en aandraaien hun effectiviteit. Daarom moeten zelfvergrendelende moeren en schroeven, wanneer deze los zijn, door de vakhandel worden vervangen. • Alle schroef- en geklonken verbindingen moeten strak vastzitten.	x	

Wat moet u controleren	Beschrijving	maandelijks voor het gebruik	
Telescooppoten: functie en veiligheid	- De telescooppoten van het looprek moeten bij ingedrukte veerpennen probleemloos in hoogte kunnen worden versteld. - De buizen mogen niet verbogen zijn of andere beschadigingen vertonen.		X
Veerpennen: functie	- De veerpennen moeten naar binnen kunnen worden gedrukt, zodat de telescooppoten probleemloos in hoogte kunnen worden versteld. - De veerpennen moeten duidelijk hoorbaar vastklikken. - De gaten voor de veerpennen mogen niet sterk uitgesleten zijn. Uitgesleten gaten garanderen geen veilige vergrendeling van de veerpennen.		X
Het gehele product: functie en beschadiging	- Het frame mag geen beschadigingen of scheuren vertonen. - Het frame mag niet verbogen zijn. De framebuizen mogen niet worden nagericht. - Functie- en oppervlakschade moet worden verholpen.		X
Typeplaatje: beschadiging	Alle informatie van het typeplaatje moet duidelijk leesbaar zijn.		X
Visuele controle: loszittende onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	 Gevaar voor verwonding: als een dergelijke schade wordt vastgesteld, mag het product niet worden gebruikt omdat een veilige hantering niet is gegarandeerd.		X
Het gehele product: vervuiling	Afhankelijk van de mate van vervuiling, maar minstens maandelijks, moet het gehele product worden gereinigd (zie hoofdstuk 7.4).		X

7.3 FOUTOPSPORING EN -OPLOSSING

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
Het looprek staat niet met alle 4 poten op de vloer.	De ondergrond is niet egaal.	Loop met het looprek alleen op een egale, vaste ondergrond.
	Er zit een steentje of een andere verontreiniging in de doppen.	Verontreinigingen verwijderen
	De telescooppoten zijn niet op dezelfde hoogte ingesteld.	De telescooppoten op dezelfde hoogte instellen.
	Het frame is verbogen.	Contact opnemen met de vakhandel
	De doppen zijn niet stevig met het frame verbonden of zijn beschadigd.	
Het frame van het looprek is niet vanzelf stabiel.	Het looprek is niet volledig uitgevouwen.	Looprek volledig uitvouwen
	De veerpennen van de telescooppoten of de vouwvergrendeling zijn defect, zodat deze niet juist vastklikken.	Contact opnemen met de vakhandel
Het looprek laat zich niet vouwen.	De vouwstang of de vouwvergrendeling zijn defect.	Contact opnemen met de vakhandel
Het looprek vouwt ongewild samen.	De veerpen van de vouwvergrendeling is niet vastgeklikt.	Looprek volledig uitvouwen
	De vouwvergrendeling is defect.	Contact opnemen met de vakhandel
De telescooppoten verschuiven ongewild in hoogte.	De veerpennen zijn niet juist vastgeklikt.	Laat de veerpennen op de juiste hoogte in de gaten klikken, zodat ze duidelijk hoorbaar vergrendelen.
	De veerpennen zijn defect en kunnen niet langer juist vastklikken.	Contact opnemen met de vakhandel
	De gaten van de telescooppoten zijn uitgesleten zodat de veerpennen niet langer juist kunnen vastklikken.	
De handgrepen van het frame bieden geen goede grip.	De handgrepen zijn beschadigd, versleten of zitten los.	Contact opnemen met de vakhandel

7.4 REINIGING



AANWIJZING

- Gebruik voor de reiniging geen hogedrukapparatuur, geen scherpe, bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen.
- Let na de reiniging op een volledige droging van alle materialen om corrosie te vermijden.

Het product en de componenten ervan kunt u met een vochtige doek afvegen. Bij sterkere verontreinigingen gebruikt u lauwwarm water gemengd met mild reinigingsmiddel. Na het reinigen veegt u met helder water na en wrijft u het product droog met een doek.

Verwijder verontreinigingen, bijv. steentjes uit de doppen.

7.5 DESINFECTIE



WAARSCHUWING

Infectiegevaar: het product moet voor iedere wisseling van personen worden gedesinfecteerd.



AANWIJZING

Neem bij de desinfectie de gebruiks- en verwerkingsaanwijzingen van de fabrikant van het reinigings- en desinfectiemiddel in acht.

Spray alle delen grondig met een in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel voor oppervlakken of drink een doek met desinfectiemiddel en veeg daarmee alle onderdelen af. Wees uiterst zorgvuldig bij de desinfectie van oppervlakken die vaak contact maken met de handen of de huid, bijv. handgrepen.

Gebruik de actuele lijst van het Robert-Koch-Instituut om een met het materiaal compatibel desinfectiemiddel te selecteren (www.rki.de).

De volgende desinfectiemiddelen zijn compatibel met het materiaal:

- aldehydevrije desinfectiemiddelen op basis van alcoholen (max. 70 % propylalcohol)
- desinfectiemiddelen op waterbasis (alcoholvrij, aldehydevrij, oplosmiddelenvrij en parfumvrij)

7.6 DOORGEVEN EN HERINZET



WAARSCHUWING

Infectiegevaar: het product moet voor iedere wisseling van personen worden gedesinfecteerd. Dit is belangrijk om kruisbesmettingen te vermijden.



AANWIJZING

Als het product als een speciaal ontwerp is aangeduid zijn het doorgeven en de herinzet uitgesloten.

Uw product is geschikt om te worden doorgegeven en opnieuw te worden ingezet. Het aantal keren dat het product opnieuw kan worden

ingezet is afhankelijk van de materiaalslijtage en de deugdelijkheid van het functioneren van het desbetreffende product. Bij het doorgeven van het product aan nieuwe gebruikers of de vakhandel moet u eraan denken dat u alle voor een veilige handhaving noodzakelijke technische documenten overdraagt.

Het product moet voordat het opnieuw wordt ingezet door de vakhandel worden gereinigd, gedesinfecteerd en op schade worden onderzocht en vrijgegeven.

Daarvoor moeten alle in het onderhoudsschema opgevoerde controlepunten aan het product worden gecontroleerd.

7.7 AFVOER

Het product bestaat uit aluminium- en kunststofmaterialen, die evenals het verpakkingsmateriaal (karton) kunnen worden gerecycled. Als u het product niet langer nodig hebt, neem dan contact op met de vakhandel. Deze zal het product ophalen en vakkundig afvoeren of hergebruiken. Anders brengt u het product naar uw lokale afvalstation.

8.1 GARANTIE

Garanties hebben betrekking op alle gebreken van het product die aantoonbaar zijn te herleiden naar materiaal- of fabricagefouten. De garantieperiode is 24 maanden vanaf de toegang van de mededeling dat het product gereed is voor verzending, ten laatste na de uitlevering.

Van de garantieverplichting uitgesloten zijn beschadigingen die door slijtage, opzet of door nalatige of onjuiste bediening, gebruik of reiniging zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij gebruik van ongeschikte onderhoudsmiddelen, smeeroliën of vetten.

8.2 AANSPRAKELIJKHEID

DIETZ GmbH is alleen aansprakelijk wanneer de producten onder de aangegeven voorwaarden en voor de aangegeven doelen worden ingezet. DIETZ adviseert om de producten adequaat te onderhouden en te verzorgen overeenkomstig de handleiding. DIETZ GmbH is niet verantwoordelijk voor schade die door onderdelen en reserveonderdelen worden veroorzaakt die niet door

DIETZ GmbH werden vrijgegeven. Reparaties mogen uitsluitend door de vakhandel of de fabrikant zelf worden uitgevoerd.



Productgroep: hulpmiddelen

Product: TOMTAR GS

Gebruiksaanwijzing versie 1.1 NL

Stand 2025-08 (NHA)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Germany

Tel.: +49 7248.9186-0

Fax: +49 7248.9186-86

info@dietz-group.de

www.dietz-group.de

Drukfouten, vergissingen en prijs- of productwijzigingen voorbehouden.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Nadrukken, ook gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH, Karlsbad.



DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Germany