

DIETZ a conçu un outil spécial pour vous aider à régler la suspension pour sacoche. Cet outil de la forme du logo DIETZ est joint au déambulateur. Le chapitre ci-dessous vous explique comment régler la suspension pour sacoche à l'aide de l'outil.

RÉGLAGE DE LA SUSPENSION POUR SACOCHE



AVERTISSEMENT

Suspension magnétique pour sacoche : veuillez prendre en compte le mode d'emploi et les consignes de sécurité de votre stimulateur cardiaque.



REMARQUE

Ne dévissez pas complètement la suspension pour sacoche.

Grâce à l'outil fourni, vous pouvez régler la suspension pour sacoche si elle ne permet pas d'y loger la sacoche insérée par le haut à la verticale.

1. Pour bloquer les freins de stationnement, pressez le levier de freinage vers le bas.
2. Dépliez le déambulateur.
3. Si la sacoche y est suspendue, décrochez-la.
4. Saisissez l'outil du côté du logo DIETZ.
5. Positionnez l'outil sur la suspension pour sacoche de sorte qu'il s'enclenche **(1)**.
6. Tournez la suspension pour sacoche **(2)** au moyen de l'outil, de sorte que l'ouverture soit dirigée vers le haut **(3)**.
7. Si nécessaire, répétez les étapes 4 à 6 sur l'autre suspension pour sacoche.

