


tauron|rfa[®]

XXL-rollator

Gebruiksaanwijzing versie 1.1

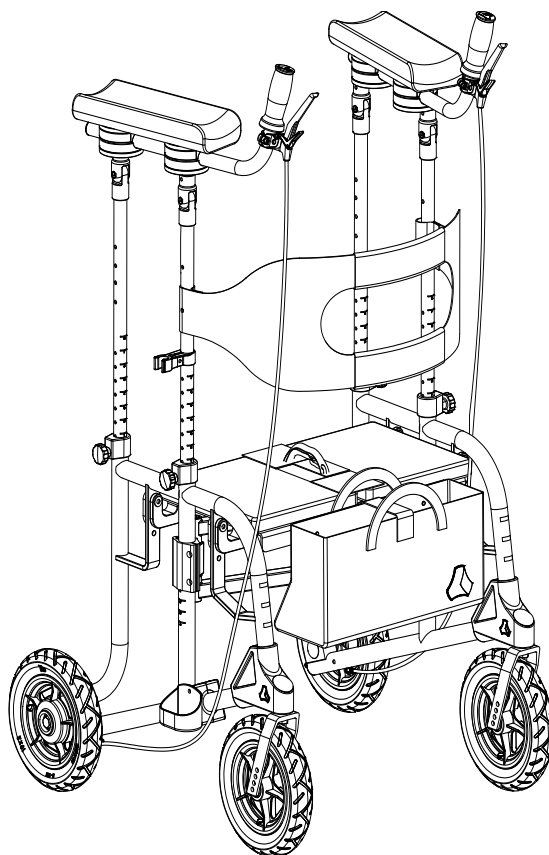

Registratie van de product-identificatiegegevens:

Neem de identificatiegegevens voor uw product over van het typeplaatje in de onderstaande regels, zodat u deze bij de hand hebt bij vragen over het product (zie hoofdstuk 5.5).*

 Model:	
 Artikelnummer:	
 Serienummer (21):	
 Productiedatum:	
Overige informatie/ aantekeningen:	

* De identificatiegegevens of het typeplaatje kunnen bij speciale ontwerpen afwijken.

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van DIETZ.

Dit product is een medisch hulpmiddel. Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, deze geldt ook voor het doorgeven/de herinzet van het product. Zo vermijdt u verwondingen of productbeschadigingen. Bovendien behoudt u informatie die de gebruiksveiligheid en een waardebehoud van uw product dient. Neem voor verdere informatie contact op met uw medische speciaalzaak.

Neem voor aanmerkingen en vragen over de productveiligheid en voor retouren schriftelijk of telefonisch contact op met DIETZ GmbH. Onze contactinformatie vindt u aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



AANWIJZING

Voor mensen met een visuele beperking is de gebruiksaanwijzing in een grotere weergave beschikbaar op **www.shop.dietz-group.de** in pdf-formaat.



Op onze internetsite vindt u de actuele stand van de gebruiksaanwijzing evenals verdere informatie over uw product.

1 Belangrijke informatie	
1.1 Bestemming	6
1.2 Gebruiksomgeving.....	6
1.3 Opslagomgeving	6
1.4 Levensduur	7
1.5 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .	7
1.6 Indicaties/beoogd gebruik.....	7
1.7 Contra-indicaties	7
2 Productbeschrijving	
2.1 Leveringsomvang.....	8
2.2 Opties	8
2.3 Opbouw van het product.....	9
3 Product in gebruik nemen	
3.1 Montage-instructies	10
3.2 Gereedschap	10
3.3 Onderarmschalen en greepstangen monteren en instellen	10
3.3.1 Onderarmschalen en greepstangen monteren.....	11
3.3.2 Greepstangen instellen	12
3.3.3 Diepte van de onderarmschalen instellen.....	12
3.3.4 Onderarmschalen horizontaal draaien ..	13
3.4 Rollator uitvouwen	14
3.5 Hoogte onderarmsteun instellen.....	15
3.6 Rugband instellen.....	16
3.6.1 Hoogte van de rugband instellen	16
3.6.2 Diepte van de rugband instellen	17
3.7 Zitkussen gebruiken	18
3.7.1 Zitkussen bevestigen.....	18
3.7.2 Zitkussen verwijderen	19
3.8 Zitting instellen.....	19
3.8.1 Zitpositie instellen	19
3.8.2 Zithoogte instellen	20
4 Product gebruiken	
4.1 Rollator gebruiken.....	22
4.2 Lopen met de rollator.....	22
4.3 Remmen activeren en instellen.....	23
4.3.1 Bedrijfsremmen activeren	23
4.3.2 Blokkeerremmen activeren.....	24
4.3.3 Remmen instellen	25
4.4 Zitten op de rollator	26
4.5 Rollator uitvouwen en samenvouwen.....	26
4.5.1 Uitvouwen	27
4.5.2 Samenvouwen	27
4.6 Rollatortas in- en uithangen.....	28
4.7 Rollator dragen	29

4.8 Rollator transporteren 30

4.9 Gedeeltelijk inklappen (optioneel) 30

4.9.1 Uitvouwen 31

4.9.2 Samenvouwen 32

4.9.3 Gedeeltelijk inklappen 32

4.10 Wandelstokhouder (optioneel) 33

4.11 Eenhandsrem (optioneel) 34

4.12 Accessoires en uitbreidingen/aanpassingen van externe leveranciers 34

5 Technische gegevens

5.1 Afmetingen en technische gegevens 35

5.2 Producttests 35

5.3 Verdere gegevens 36

5.4 Materialen/kleuren 36

5.5 Productaanduiding 37

6 Veiligheidsaanwijzingen

6.1 Veiligheidsaanwijzingen 38

7 Verzorging en onderhoud

7.1 Onderhoud 40

7.2 Onderhoudsschema 41

7.3 Foutopsporing en -oplossing 43

7.4 Reiniging 45

7.5 Desinfectie 45

7.6 Doorgeven en herinzet 46

7.7 Afvoer 46

8 Verklaringen van de fabrikant

8.1 Garantie 47

8.2 Aansprakelijkheid 47

1.1 BESTEMMING

De vouwbare tauron|rfa is speciaal geconstrueerd voor de verzorging van personen met adipositas en kan binnen en buiten worden gebruikt. Het rijdbare hulpmiddel is geschikt voor de dagelijkse verzorging van adipose mensen met bewegingsbeperkingen en moet beperkte loopprestaties compenseren of ten minste verbeteren, zodat gebruikers een uitbreiding van hun actieradius of verbeterde mobiliteit bereiken. De rollator ondersteunt de gebruiker bij het lopen en kan bovendien als beperkte zitgelegenheid voor tijdelijke rustmomenten worden gebruikt. Het hulpmiddel is bedoeld voor jonge en volwassen personen met een maximumgewicht

van tot 250 kg. Een voor de zitting ingehangen rollatortas maakt het transport van voorwerpen mogelijk, zoals bijvoorbeeld boodschappen, tot een last van 5 kg. Het gebruik voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld als traploophulp of voor het transporteren van zware lasten is niet toegestaan of niet conform beoogd gebruik en gevaarlijk.

Het beoogd gebruik kan afwijken bij producten die als speciaal ontwerp zijn gebouwd en overeenkomstig zijn aangeduid. In dat geval geldt de met het product meegeleverde documentatie.

1.2 GEBRUIKSOMGEVING

De rollator is universeel inzetbaar op een egale, vaste ondergrond en door het vouwmechanisme geschikt voor transport. Plekken waar de tauron|rfa kan worden gebruikt zijn

bejaarden- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, dagopvang en particuliere huishoudens. De omgevingstemperatuur voor het gebruik ligt bij -10 °C tot +50 °C.

1.3 OPSLAGOMGEVING



WAARSCHUWING

Sla het product niet op in de buurt van een warmtebron en plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product.

Bij het opslaan van de rollator dient u erop te letten dat deze droog, beschermd tegen sterke zonnestraling, bij een temperatuur van 0 °C tot +45 °C en een relatieve luchtvochtigheid

van 20% tot 75% wordt opgeslagen. Beveilig de rollator tegen ongewenst weggrollen. Activeer echter niet de blokkeerremmen omdat deze in geactiveerde toestand de banden over een langere periode kunnen beschadigen. Om het zitkussen en de tas in gevouwen toestand te sparen, adviseert DIETZ deze van tevoren te verwijderen. Na een langdurigere opslag (> 4 maanden) moet u voor het opnieuw gebruiken/de herinzet alle in het onderhoudsplan

opgevoerde controlepunten aan de rollator controleren.

1.4 LEVENSDUUR

De te verwachten productlevensduur bedraagt 5 jaar bij dagelijks en beoogd gebruik. Voorwaar- de hiervoor is het naleven van de onderhouds-, reinigings- en veiligheidsvoorschriften die in de

gebruiksaanwijzing zijn aangegeven. De aange- geven levensduur geldt niet als een extra garan- tie.

1.5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Wanneer het product onjuist of niet conform het beoogd gebruik wordt ingezet, kan hiervan een gevaar uitgaan. Neem de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht. Deze worden als volgt aangeduid:



WAARSCHUWING

Er bestaat een matig risico op zware letsels.



VOORZICHTIG

Er bestaat een klein risico op lichte letsels.



AANWIJZING

Attendeert op het gevaar van mogelijke materiële schade. Geeft tips en adviezen.

1.6 INDICATIES/BEOOGD GEBRUIK

Het product mag worden gebruikt bij:

- loopproblemen door beperkingen van het actieve of passieve bewegingsapparaat
- adipositas en de daaruit voortvloeiende aandoeningen
- coördinatieproblemen bij het lopen
- verminderde belastbaarheid
- Reuma of artritis

1.7 CONTRA-INDICATIES

Het product mag niet worden gebruikt:

- door kinderen en personen met een lichaamslengte < 146 cm en/of een lichaamsgewicht < 40 kg (BMI < 17)
- als klimhulp, transporthulp voor zware lasten/personen of voor vergelijkbare doeleinden worden gebruikt.
- bij storingen in de waarneming
- bij ernstige evenwichtsstoornissen
- bij overschrijding van de aangegeven belastbaarheid van 250 kg
- bij het niet los kunnen staan
- bij verminderd of onvoldoende gezichtsvermogen

2.1 LEVERINGSOMVANG



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar: bij het verbranden van verpakkingsfolies kunnen giftige gassen ontstaan.

Verstikkingsgevaar: plastic zakken buiten het bereik van kinderen bewaren.



AANWIJZING

- De beschreven uitvoeringskenmerken en de leveringsomvang kunnen afhankelijk van het land en de markt afwijken en zijn afhankelijk van de individuele indicatie en het ziektebeeld.
- Bewaar de originele doos om het product te verzenden of op te slaan.

Het product is af fabriek deels gemonteerd en in een doos verpakt. Controleer na ontvangst van het artikel de inhoud op volledigheid en integriteit. Stel de leverancier op de hoogte als de inhoud zichtbaar beschadigd is.

De inhoud bestaat uit:

- 1 rollator tauron|rfa
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 rugband, gemonteerd
- 2 onderarmschalen met 2 greepstangen, niet aan het product gemonteerd
- 4 schroeven voor de montage van de onderarmschalen en greepstangen
- accessoires, die niet op het product zijn gemonteerd: tas, transportbeveiligingsband en zitkussen

2.2 OPTIES

- Gedeeltelijk inklapbaar
(Dient voor het kortstondig manoeuvreren van krappe ruimtes, zoals bijvoorbeeld in winkels of supermarkten en kamer- en rolstoeldeuren (zie hoofdstuk 4.9).)
- Wandelstokhouder links/rechts
- Eenhandsrem links/rechts


2.3 OPBOUW VAN HET PRODUCT



AANWIJZING

De gebruiksaanwijzing kan afbeeldingen en beschrijvingen van componenten bevatten die afwijken van de daadwerkelijke leveringsomvang.

1. Onderarmschaal
2. Greepstang
3. Draaischijf
4. In hoogte verstelbare onderarmsteunen
5. Vouwband (zwart)
6. Ontgrendelingsband (grijs)
7. Opvouwbare zitting inclusief zitkussen
8. Vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen
9. Kruisstang
10. Reflecterende sticker achter
11. Achterwiel
12. Trommelrem
13. Voorwiel (stuurwiel)
14. Reflecterende sticker aan de zijkant
15. Rollatortas
16. Hoogteverstelling kruisstang
17. Reflecterende sticker voor
18. Hoogteverstelling zitting
19. Stergriep voor de hoogteverstelling van de onderarmsteunen
20. Remkabel
21. Rugband
22. Remhendel
23. Handvat

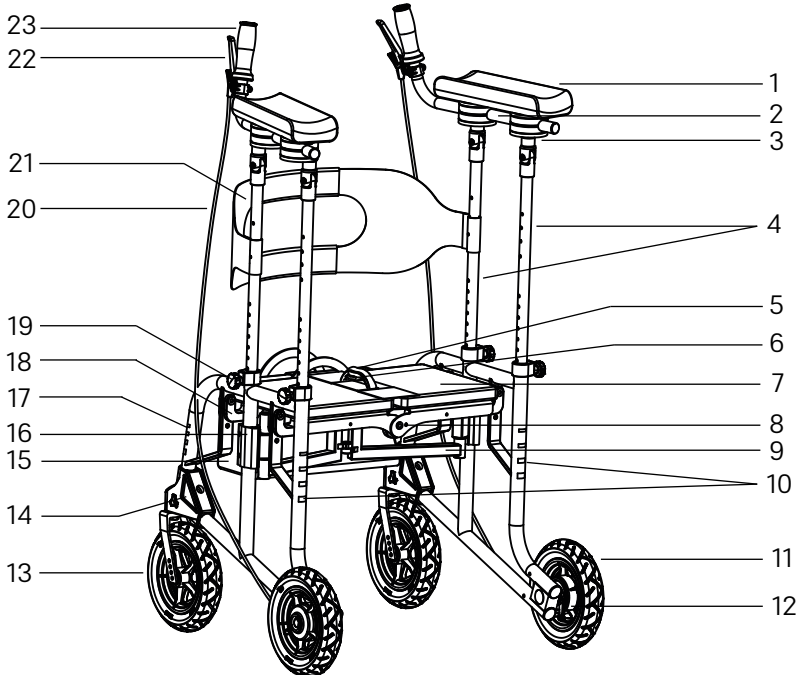

3.1 MONTAGE-INSTRUCTIES

De rollator is af fabriek deels gemonteerd, de 2 onderarmschalen met greepstangen zijn niet vast aan de rollator gemonteerd, de accessoires zijn niet aan het product gemonteerd. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe de rollator wordt opgebouwd en aan uw behoeften wordt aangepast, zodat u de rollator comfortabel kunt gebruiken. De functiecontrole en

de aanpassing van het product aan de gebruiker wordt uitgevoerd door de vakhandel.

Vakpersoneel:

- is op basis van vakkundige opleiding, kennis en ervaring in staat de overeenkomstige werkzaamheden uit te voeren,
- kan mogelijke gevaren voor het gehele proces zelfstandig herkennen en gevaren vermijden.

3.2 GEREEDSCHAP

- Momentsleutel
- Inbussleutel (3 mm, 4 mm, 5 mm)
- Schroefleutel (8 mm, 10 mm, 13 mm)
- Steeksleutel (13 mm)

3.3 ONDERARMSCHALEN EN GREEPSTANGEN MONTEREN EN INSTELLEN



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar: Houd de kussentjes verwijderd van brandhaarden om ontbranding te vermijden.

Valgevaar: Trek de fixatieschroeven handvast aan voordat u de rollator gebruikt.



VOORZICHTIG

Klemgevaar: Let bij het monteren en instellen van de onderarmschalen en greepstangen op uw handen.



AANWIJZING

- DIETZ adviseert om de in dit hoofdstuk beschreven montage en instelling alleen door geïnstrueerd vakpersoneel te laten uitvoeren.
- De onderarmschalen en greepstangen zijn niet af fabriek gemonteerd, maar door de remkabels reeds met de rollator verbonden. Zie voor de montage hoofdstuk 3.3.1.
- De greepstangen zijn af fabriek zo ingesteld dat de handvaten niet naar boven wijzen. Om de greepstangen voor het gebruik in te stellen, zie hoofdstuk 3.3.2.

3.3.1 Onderarmschalen en greepstangen monteren



WAARSCHUWING

Sturzgefahr: De 2 achterste onderarmsteunen zijn niet vastgezet.



AANWIJZING

- Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het uitvouwen hoofdstuk 3.4 of hoofdstuk 4.9.
 - Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de hoogte-instelling van de onderarmsteunen hoofdstuk 3.5.
1. Plaats de rollator in de rijrichting voor u.
 2. Om de rollator enigszins te ontvouwen, trekt u deze aan de 2 onderarmsteunen in de rijrichting (naar voren) uit elkaar (1).


Rollator zonder optie voor gedeeltelijk inklappen

- 3.1 Druk de zitting omlaag tot deze horizontaal is.

Rollator met optie voor gedeeltelijk inklappen


- 3.1 Om de vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen los te maken, trekt u de grijze ontgrendelingsband naar boven.
- 3.2 Houd de grijze ontgrendelingsband aangehouden en druk met de andere hand op één zijde van de zitting omlaag tot deze horizontaal is.
- 3.3 Laat de grijze ontgrendelingsband los.
 - De vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen klikt niet vast.

4. Trek de achterste onderarmsteun naar boven (2) en positioneer deze in dezelfde trap als de onderarmsteun in rijrichting (voor), de trapaanduiding helpt u hierbij.
5. Draai de stergreep met de wijzers van de klok mee handvast aan (3).
6. Herhaal stap 4 – 5 met de andere achterste onderarmsteun.

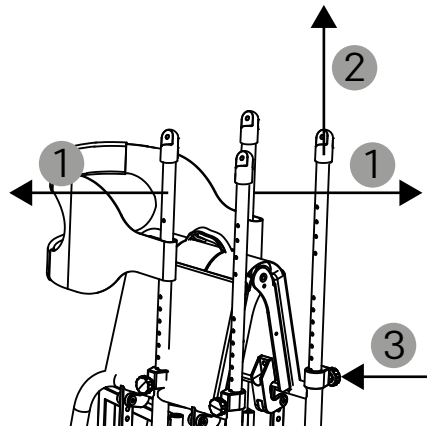

Afb. 2


7. Plaats de onderarmschaal met greepstang en draaischijven op de onderarmsteunen **(4)**. De handvaten moeten in de rijrichting (voren) wijzen.
8. Plaats de moeren in de daarvoor voorziene uitsparingen.
9. Plaats de schroeven altijd met een borgring.
10. Draai de schroeven vast met een inbus-sleutel (4 mm).
11. Herhaal de stappen 7 - 10 aan de andere zijde.

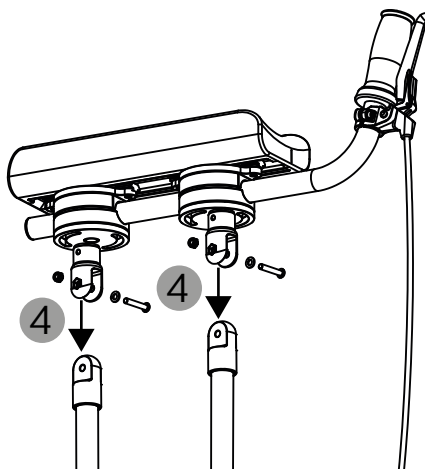

Afb. 3

3.3.2 Greepstangen instellen

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Maak de 4 schroeven aan de onderzijde van de draaischijf los met een inbus-sleutel (4 mm) **(1)**.
4. Schuif de greepstang traploos naar de gewenste diepte **(2)**. Let er daarbij op dat u de greepstang ten hoogste zo ver naar voren duwt tot hij achter vlak afsluit met de draaischijf **(3)**.
5. Let erop dat de handvaten naar boven wijzen **(4)**.
6. Draai de 4 schroeven handvast aan **(1)**.
7. Herhaal de stappen 3 - 6 met de andere onderarmschaal.

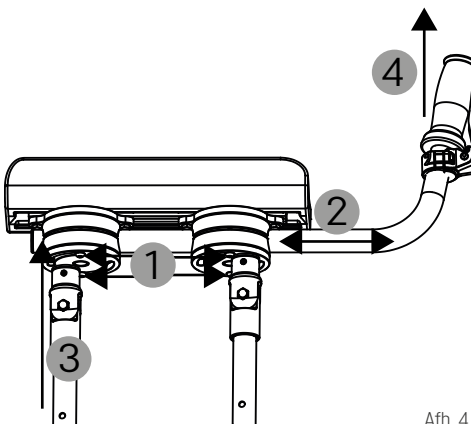


Afb. 4

3.3.3 Diepte van de onderarmschalen instellen

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.


3. Maak de 4 schroeven aan de onderzijde van de onderarmschaal los met een schroef sleutel (10 mm) **(1)**.
4. Schuif de onderarmschaal traploos naar de gewenste diepte **(2)**.
5. Draai de 4 schroeven handvast aan **(1)**.
6. Herhaal de stappen 3 – 5 met de andere onderarmschaal.

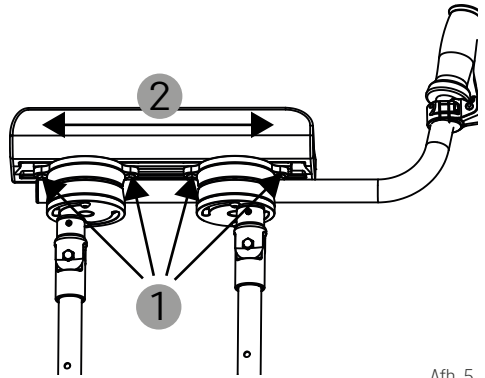


Afb. 5

3.3.4 Onderarmschalen horizontaal draaien

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Maak de 2 draadstangen aan de onderarmsteunen los met een inbussleutel (3 mm) **(1)**.
4. Maak de 4 schroeven aan de onderzijde van de draaischijf los met een inbussleutel (4 mm) **(2)**.
5. Draai de draaischijf traploos naar de gewenste positie **(3)**.
6. Let erop dat de handvaten naar boven wijzen **(4)**.
7. Draai de 4 schroeven handvast aan **(2)**.
8. Draai de 2 draadstangen handvast aan **(1)**.
9. Herhaal de stappen 3 – 8 met de andere onderarmschaal.

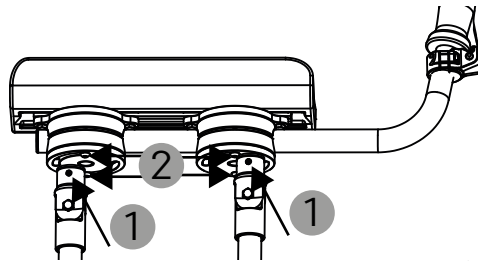

Afb. 6

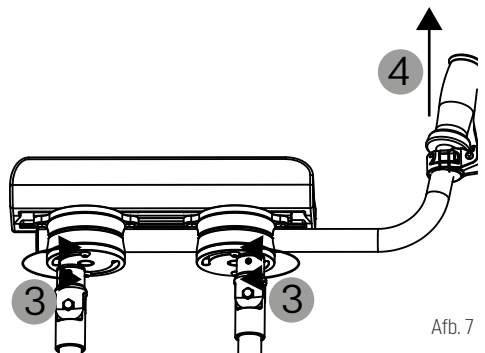

Afb. 7

3.4 ROLLATOR UITVOUWEN



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding: Gebruik de rollator alleen als zitgelegenheid wanneer deze volledig is uitgevouwen.


Klemgevaar: Let bij het vouwen van de rollator op uw handen.



AANWIJZING


Om een rollator met optie voor gedeeltelijk inklappen uit te vouwen, zie hoofdstuk 4.9.

1. Plaats de rollator in de rijrichting voor u.
2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
3. Houd u met één hand vast aan het handvat (1).
4. Om de rollator enigszins te ontvouwen, trekt u deze met de vrije hand aan de greepstang uit elkaar. Til daarbij de rollator een beetje op aan de greepstang om het trekken te vergemakkelijken (2).

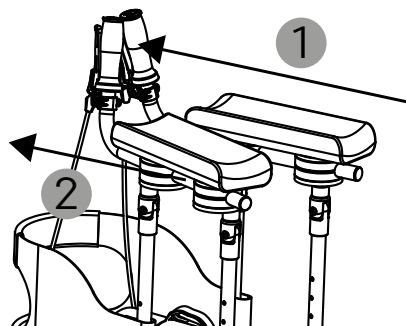

Afb. 8

5. Houd u verder met één hand vast aan het handvat (3).
6. Druk met de andere hand op één zijde van de zitting omlaag tot dit horizontaal is (4).
7. Als het zitkussen niet op de zitting ligt, bevestigt u dit (zie hoofdstuk 3.7).

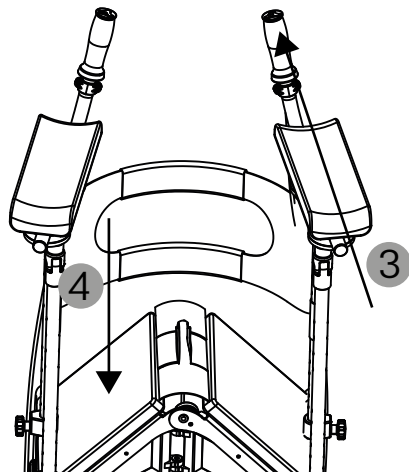

Afb. 9

3.5 HOOGTE ONDERARMSTEUN INSTELLEN



WAARSCHUWING

Valgevaar: Fixeer de onderarmsteunen niet tussen de vergrendelposities van de trapaanduiding, maar exact op één van de aangegeven posities.

Valgevaar: Trek de stergrepen handvast aan voordat u de rollator gebruikt.



VOORZICHTIG


Klemgevaar: Let bij het instellen van de onderarmsteunen op uw handen.



AANWIJZING

- DIETZ adviseert om de in dit hoofdstuk beschreven instelmogelijkheden door geïnstrueerd vakpersoneel te laten uitvoeren.
- In het algemeen wordt de rollator met gebogen armen (hoek van 90°) gebruikt. Hiertoe wordt de hoogte van de onderarmsteunen ingesteld: de gebruiker gaat recht op staan en met gehoekte armen (hoek van 90°) tussen de onderarmsteunen. Deze worden zo ingesteld dat de gebruiker de onderarmen op de onderarmschalen kan leggen wanneer deze rechtop staat. Voor alle onderarmsteunen wordt dezelfde trap gekozen.
- Door de instelling van de onderarmsteunhoogte verandert u de hoogte van de rugband.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Houd de greepstang vast.
4. Maak de 2 stergrepen aan één zijde van de rollator tegen de wijzers van de klok in zo los dat u de onderarmsteunen kunt bewegen (1).
5. Positioneer de 2 onderarmsteunen in de gewenste hoogte (2). Kies voor beide onderarmsteunen dezelfde trap, de trapaanduiding helpt u hierbij (3).
6. Trek de stergrepen met de wijzers van de klok mee handvast aan (1).
7. Herhaal de stappen 3 – 6 met de 2 onderarmsteunen van de andere zijde.

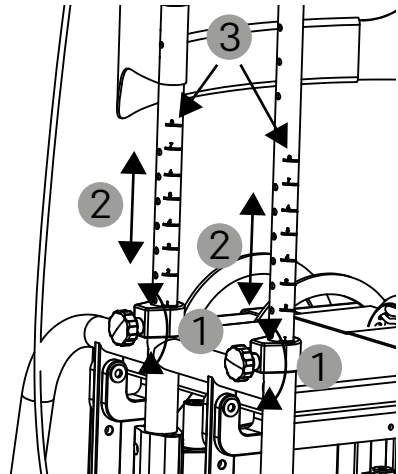

Afb. 10

3.6 RUGBAND INSTELLEN



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar: Houd de rugband verwijderd van brandhaarden om ontbranding te vermijden.

3.6.1 Hoogte van de rugband instellen




AANWIJZING

- DIETZ adviseert om de in dit hoofdstuk beschreven instelmogelijkheden uitsluitend door geïnstrueerd vakpersoneel te laten uitvoeren.
 - De bovenste 4 gaten van de beide onderarmsteunen in rijrichting (voor) zijn voorzien voor de hulsschroeven van de rugband.
 - De rugband moet aan beide zijden in dezelfde trap worden ingesteld.
1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
 2. Vouw de rollator uit.

mijden.

Valgevaar: De rugband helpt u om de juiste positie op de zitting te vinden. De rugband is geen rugleuning.

3. Maak met een inbussleutel (3 mm) de hulsschroef van de rugband los uit de onderarmsteun (1).
4. Neem de hulsschroef uit.
5. Schuif de rugband naar de gewenste trap (2).
6. Plaats de hulsschroef met borgringen aan beide uiteinden (1).
7. Draai de hulsschroef met een momentsleutel (5 Nm) vast (1).
8. Herhaal de stappen 3 - 7 aan de andere zijde van de rugband.

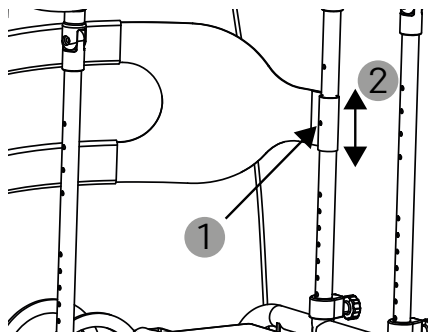

Afb. 11

3.6.2 Diepte van de rugband instellen



WAARSCHUWING

Valgevaar: Neem de hamerkopbout niet uit de geleidelijn. Als de rugband niet goed wordt bevestigd, bestaat het gevaar dat deze zich bij gebruik opent.




AANWIJZING

Wanneer u vragen heeft over het instellen van de rugbanddiepte, neemt u contact op met de vakhandel.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Haal beide afdekkingen los van de rugband door de klittenbandsluiting van de afdekkingen los te maken **(1)**.
4. Maak de klittenbandsluiting los van het bovenste en onderste deel van de rugband **(2)**.
5. Positioneer de klittenbandsluitingen in de gewenste diepte. Blijf binnen de door de hamerkopbout en geleidelijn aangegeven begrenzing **(3)**.

6. Bevestig de klittenbandsluitingen van het bovenste en onderste deel **(2)**.
7. Bevestig de bovenste afdekking van de rugband met de belettering in de rijrichting (voor) en het logo op de linker zijde **(1)**.
8. Oriënteer u bij het bevestigen van de onderste afdekking op de bovenste afdekking **(1)**.

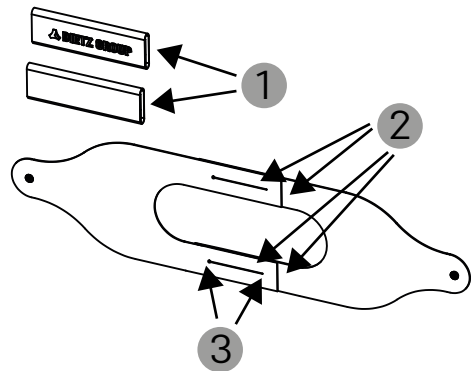

Afb. 12

3.7 ZITKUSSEN GEBRUIKEN



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar: Houd het zitkussen verwijderd van brandhaarden om ontbranding te vermijden.



AANWIJZING


Leg de klittenbandsluitingen in één vlak op elkaar zodat het elastische middendeel van het zitkussen niet te sterk doorhangt of te strak gespannen is.

3.7.1 Zitkussen bevestigen

Om comfortabel op de rollator te zitten, bevestigt u het zitkussen.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Trek het zitkussen uit elkaar en leg het met de ritssluiting in de rijrichting (voor) op de zitting, zonder het met de klittenbandsluiting op de zitting te bevestigen (1).
4. Open de klittenbandsluiting van het middendeel (2).
5. Trek de vouwband (en de ontgrendelingsband) door de opening van het middendeel (3).
6. Bevestig de klittenbandsluiting onder de band (de banden), zodat die (deze) eroverheen lopen (2).

7. Om de afstand in het midden te verkleinen, duwt u de zijden van het zitkussen dicht naar elkaar toe (4).
8. Om de klittenbandsluiting van het zitkussen op de zitting te bevestigen, drukt u op het zitkussen.

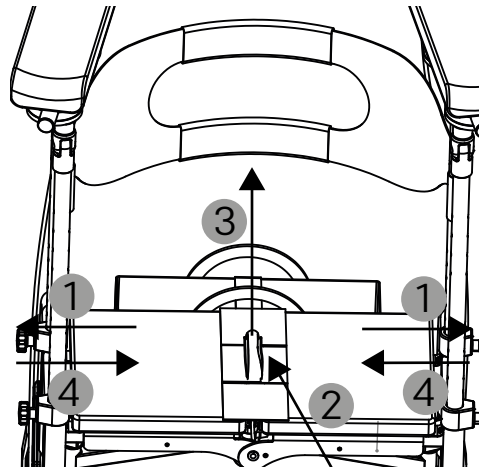


Afb. 13

3.7.2 Zitkussen verwijderen

Om de rollator smaller samen te vouwen en om het zitkussen bij transport of opslag te sparen, verwijdert u het zitkussen.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Om de klittenbandsluiting van het zitkussen op de zitting los te maken, trekt u deze van de zitting af (1).
4. Trek het zitkussen uit elkaar en leg het op de zitting (2).
5. Maak de klittenbandsluiting van het middendeel los (3).

6. Verwijder het zitkussen van de zitting.

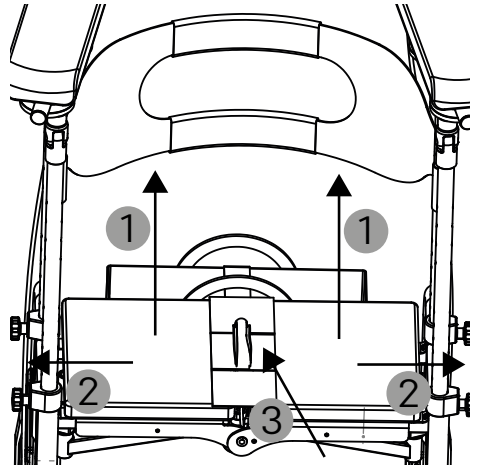

Afb. 14

3.8 ZITTING INSTELLEN

3.8.1 Zitpositie instellen



WAARSCHUWING

Valgevaar: Draai de fixatieschroeven handvast aan voordat u de rollator gebruikt.

Klemgevaar: Let bij het instellen van de zitdiepte op uw handen.




AANWIJZING

DIETZ adviseert om de in dit hoofdstuk beschreven instelling alleen door geïnstrueerd vakpersoneel te laten uitvoeren.

1. Druk de remhendels omlaag om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Als de tas is ingehangen, verwijdert u deze (zie hoofdstuk 4.6).
4. Als het zitkussen op de zitting ligt, neemt u dit af.

5. Maak met een inbusleutel (5 mm) en een steeksleutel (13 mm) de 8 schroeven van de zitting los **(1)**.
6. Neem de 8 schroeven uit.
7. Positioneer de zitting in de gewenste diepte **(2)**.
8. Plaats de 8 schroeven met een borgring op de schroefdraadzijde **(1)**.
9. Draai de 8 schroeven vast.

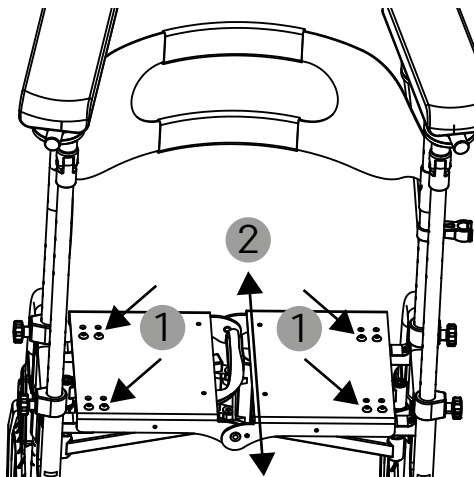

Afb. 15

3.8.2 Zithoogte instellen



WAARSCHUWING

Valgevaar: Stel de zitting en de kruisstang uniform en op beide zijden op dezelfde trap in. Om de stabiliteit van de rollator te waarborgen, moet de zitting bij een volledig uitgevouwen rollator op de kruisstang liggen.

Valgevaar: Draai de fixatieschroeven met een momentsleutel aan.


Klemgevaar: Let bij het instellen van de zithoogte op uw handen.



AANWIJZING


- De in dit hoofdstuk beschreven instelmogelijkheden mogen uitsluitend door geïnstrueerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
 - De voeten van de gebruiker moeten bij het zitten contact hebben met de vloer.
1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
 2. Vouw de rollator uit.
 3. Als de tas is ingehangen, verwijdert u deze (zie hoofdstuk 4.6).
 4. Als het zitkussen op de zitting ligt, neemt u dit af.
 5. Om de kruisstang te kunnen bewegen, maakt u met een inbusleutel (4 mm) de 4 schroeven van de 2 klemmen **(1)** los.
 6. Om de zitting aan één zijde van de rollator in te stellen, maakt u met een inbusleutel (5 mm) en een schroefleutel (13 mm) de 2 schroeven van de hoogteverstelling van de zitting los **(2)**.
 7. Neem de 2 schroeven uit.
 8. Positioneer de zitting in de gewenste trap.

9. Plaats de 2 schroeven met de borgringen in de onderstaande volgorde: op de kopzijde de borgring uit plastic, op de schroefdraadzijde de borgring uit plastic, dan die uit metaal en daarna de moer.
10. Draai de 2 schroeven met een momentsleutel (15 Nm) vast **(2)**.
11. Herhaal de stappen 6 – 10 aan de andere zijde.

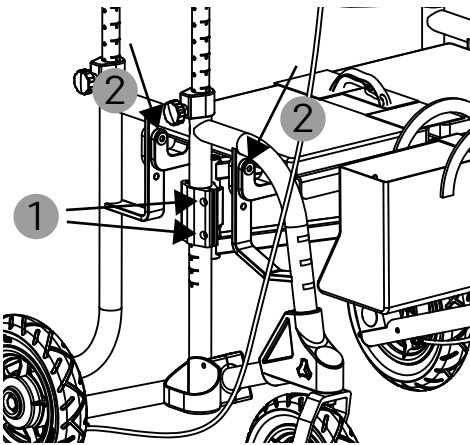


Afb. 16

12. Om verontreinigingen of beschadigingen aan de rollator te vermijden, legt u een onderlegger op de vloer.
13. Leg de rollator naar achteren, zodat deze op de onderarmschalen en de achterwielen ligt.
14. Duw de kruisstang tot aan de zitting, zodat de zitting en de kruisstang contact maken. Let erop dat de zitting recht is.
15. Trek de kruisstang naar boven in een „V” tot u weerstand voelt **(3)**.

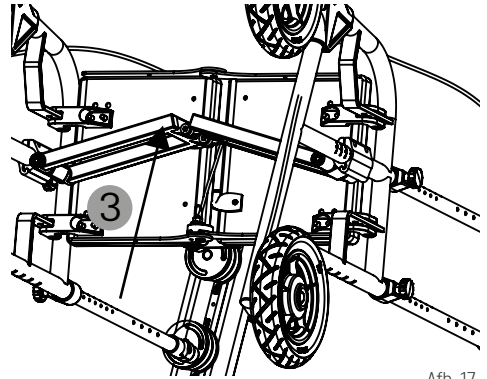

Afb. 17

16. Controleer aan de hand van de trapaanduiding van de kruisstang of deze in dezelfde trap is ingesteld als de zitting **(4)**.
17. Om de juiste instelling van de kruisstang te waarborgen controleert u of de klemmen zoals op de afbeelding centraal en parallel met de buis lopen **(5)**.
18. Draai de 4 schroeven met de momentsleutel (8 Nm) vast **(6)**.
19. Plaats de rollator weer op de wielen.
20. Controleer of de zitting op de kruisstang ligt.

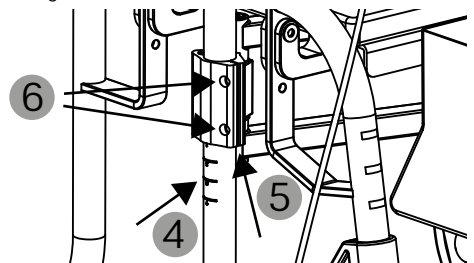

Afb. 18

4.1 ROLLATOR GEBRUIKEN

Maak u voor het eerste gebruik vertrouwd met de rollator, zodat u zich veilig voelt bij het hanteleren ervan. Laat u daarbij ondersteunen door een begeleider.

Controleer voordat u de rollator gebruikt altijd of:

- de rollator volledig is uitgevouwen
- de rollator op alle 4 wielen staat
- alle aangebouwde delen goed zijn bevestigd
- alle schroeven vast zijn aangedraaid
- de wielen bij het duwen probleemloos draaien
- de remmen functioneren (zie hoofdstuk 4.3.)

- de tas correct in de magnetische tashouders hangt (zie hoofdstuk 4.6)

Om veilig deel te nemen aan het openbare verkeer adviseert DIETZ:

- de verkeerswet in acht te nemen
- de rollator niet te gebruiken onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht en reactievermogen negatief kunnen beïnvloeden
- er op te letten dat de reflecterende stickers intact en zichtbaar zijn
- om beter zichtbaar te zijn lichte, opvallende kleding te dragen

4.2 LOPEN MET DE ROLLATOR



WAARSCHUWING

Valgevaar: Om een goede steunfunctie te garanderen moet de rollator dicht bij het lichaam worden bestuurd. Duw de rollator niet te ver van u af.

Valgevaar: Loop niet naar achteren met de rollator.

Valgevaar: Om te zorgen dat de rollator tijdens het lopen niet bij u wegrolt, bijvoorbeeld wanneer u met de rollator op een hellende weg loopt, gebruikt u de bedrijfsremmen. Trek daarvoor de remhendels naar u toe (zie hoofdstuk 4.3.1).

Valgevaar: Rij niet op te hellende wegen.

Valgevaar: Gebruik de bedrijfsremmen voorzichtig tijdens het lopen. Het met een ruk aantrekken van de remhendel kan ervoor zorgen dat u struikelt of uit evenwicht wordt gebracht (zie hoofdstuk 4.3.1.).



AANWIJZING

Om hindernissen vroegtijdig te herkennen en te kunnen omzeilen, loopt u rechtop en kijkt u naar voren.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Vouw de rollator uit.
3. Plaats uzelf achter de rollator.
4. Leg de onderarmen op de onderarmschalen en neem met beide handen de handvaten vast.
5. Als u zeker staat, maakt u de blokkeerremmen los, door de remhendels naar u toe te trekken (zie hoofdstuk 4.3.2).
6. Ga op pad.

4.3 REMMEN ACTIVEREN EN INSTELLEN

4.3.1 Bedrijfsremmen activeren




WAARSCHUWING

Valgevaar: Gebruik de bedrijfsremmen voorzichtig tijdens het lopen. Het met een ruk aantrekken van de remhendels kan ervoor zorgen dat u struikelt of uit evenwicht wordt gebracht.

Valgevaar: Rij niet op te hellende wegen.

Om te zorgen dat de rollator tijdens het lopen niet bij u wegrolt, bijvoorbeeld wanneer u met de rollator op een hellende weg loopt, gebruikt u de bedrijfsremmen.

1. Om de rollator tijdens het lopen gedoseerd te remmen, trekt u de beide remhendels zachtjes en gelijkmatig naar u toe **(1)**.
2. Om de remmen los te maken, laat u de remhendels naar hun neutrale positie terugkeren **(1)**.

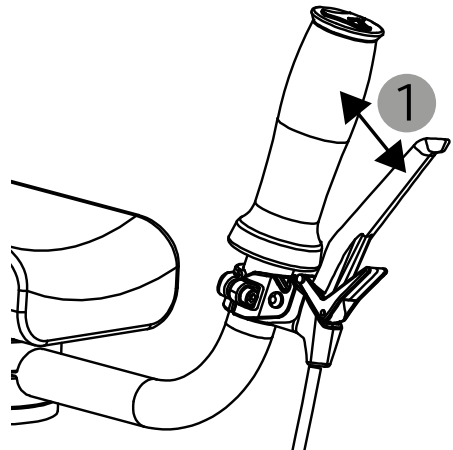

4.3.2 Blokkeerremmen activeren



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar: Houd de rollator verwijderd van brandhaarden om ontbranding te vermijden.

Valgevaar: Activeer bij het parkeren van de rollator en voordat u op de rollator gaat zitten de blokkeerremmen, om het weggrollen van de rollator te vermijden.




VOORZICHTIG

Klemgevaar: Let bij het bedienen van de Blokkeerrem op uw vinger.


Om de rollator te parkeren gebruikt u de blokkeerremmen.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren (1).
→ De vergrendelingshendels klikken hoorbaar vast.

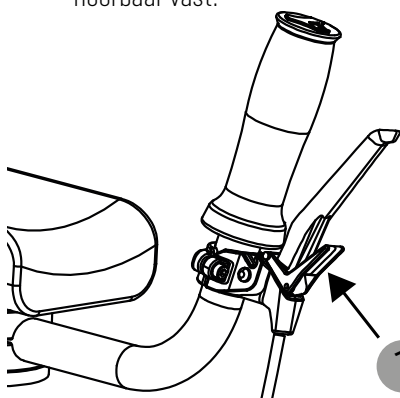

Afb. 20

2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te ontgrendelen (2).
→ De vergrendelingshendels ontgrendelen hoorbaar.
3. Laat de remhendels naar hun neutrale positie terugkeren (3).

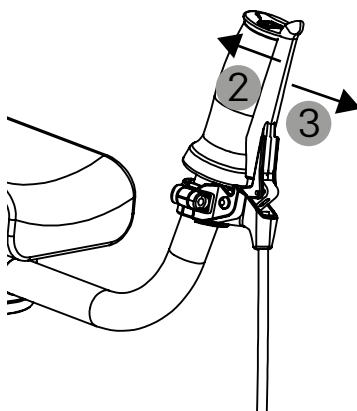

Afb. 21

4.3.3 Remmen instellen



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding: Draai de stelschroeven niet volledig uit, omdat de remmen anders niet functioneren.

Gevaar voor verwonding: Als de hier beschreven afstelling geen verbetering van de remprestaties oplevert of als er problemen optreden bij de afstelling, neemt u contact op met de vakhandel. Alleen zo kan een veilig gebruik van de rollator worden gewaarborgd.


Gevaar voor verwonding: De remmen moeten na het vervangen van de remkabel of de achterwielen opnieuw worden ingesteld. Dit mag alleen plaatsvinden door de vakhandel.

Zo herkent u of de remmen correct zijn ingesteld:

- De remhendels en de remkabels mogen niet los hangen omdat anders de remwerking is verminderd.
- Als u de remhendel loslaat, moeten de remmen zonder sleepgeluiden kunnen worden gedraaid.

Bij een verminderde remwerking stelt u de remmen van de achterwielen in met de stelschroeven voor de remkabels:

1. Vouw de rollator uit.
2. Als het onderste deel van de stelschroef te vast is, maakt u deze los met een schroef-sleutel (8 mm) tegen de wijzers van de klok in **(1)**.
3. Om de remkabels te verkorten en daardoor de spanning te verhogen, draait u het bovenste deel van de stelschroeven tegen de wijzers van de klok in **(2)**.
4. Om het zelfstandig losraken van de remkabels te vermijden, draait u het onderste deel van de stelschroef met de wijzers van de klok mee handvast aan **(1)**.

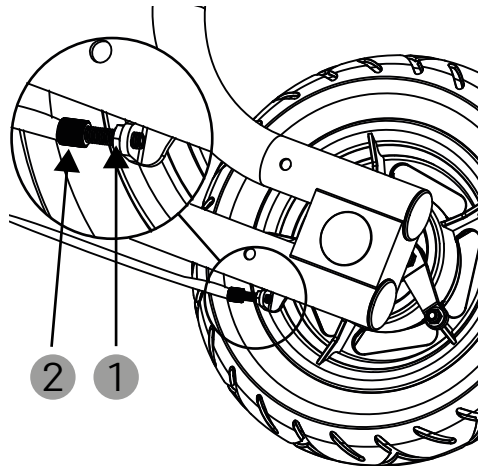

Afb. 22

4.4 ZITTEN OP DE ROLLATOR



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar: Houd de rollator verwijderd van brandhaarden om ontbranding te vermijden.

Gevaar voor verwonding: Gebruik de rollator alleen als zitgelegenheid wanneer deze volledig is uitgevouwen.

Valgevaar: Voordat u op de rollator gaat zitten activeert u de blokkeerremmen om het weggrollen van de rollator te vermijden.

Valgevaar: De rugband helpt u om de juiste positie op de zitting te vinden. De rugband is geen rugleuning.

Valgevaar: De zitting is alleen bedoeld voor tijdelijke rustmomenten. Gebruik voor langere pauzes een gebruikelijke zitgelegenheid.

Gevaar voor verwonding: Als u op de rollator zit, mag u niet trippelen of door andere personen worden geduwd.

Valgevaar: Gebruik de rollator niet als zitgelegenheid in een voertuig of een voertuig van het openbaar vervoer.

1. Parkeer de rollator op een vaste, egale ondergrond.
2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
3. Vouw de rollator uit.
4. Controleer of de rollator op alle 4 wielen staat.
5. Als het zitkussen niet op de zitting ligt, bevestig u het zitkussen.
6. Voor een korte pauze gaat u op de zitting zitten.

4.5 ROLLATOR UITVOUWEN EN SAMENVOUWEN



WAARSCHUWING

Klemgevaar: Let bij het vouwen van de rollator op uw handen.

Gevaar voor verwonding: Gebruik de rollator alleen als zitgelegenheid wanneer deze volledig is uitgevouwen.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding: Let er bij het samenvouwen op dat u buiten de rollator stapt.




AANWIJZING

- Om een rollator met optie voor gedeeltelijk inklappen samen te klappen, zie hoofdstuk 4.9.
- U kunt de rollator samen met de lege tas vouwen. Een gevulde tas moet u voor het (gedeeltelijk) samenvouwen uithangen of leegmaken (zie hoofdstuk 4.6).


4.5.1 Uitvouwen

1. Plaats de rollator in de rijrichting voor u.
2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
3. Houd u met één hand vast aan het handvat (1).
4. Om de rollator enigszins te ontvouwen, trekt u deze met de vrije hand aan de greepstang uit elkaar. Til daarbij de rollator een beetje op aan de greepstang om het trekken te vergemakkelijken (2).

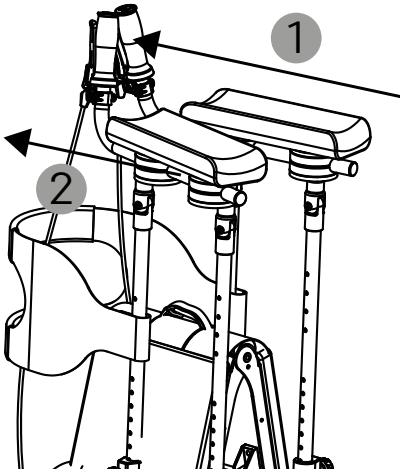

Afb. 23

5. Houd u verder met één hand vast aan het handvat (3).
6. Druk met de andere hand op één zijde van de zitting omlaag tot dit horizontaal is (4).
7. Als het zitkussen niet op de zitting ligt, bevestigt u dit.

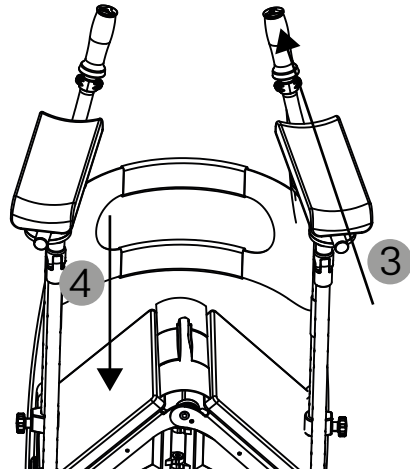


Afb. 24

4.5.2 Samenvouwen

1. Plaats de rollator in de rijrichting voor u.
2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
3. Als u de rollator smaller wilt samenvouwen, verwijdert u het zitkussen.

4. Houd u met één hand vast aan het handvat **(1)**.
5. Trek de zwarte vouwband naar omhoog tot de rollator is samengevouwen **(2)**.
6. Als de rollator niet volledig is samengevouwen, duwt u deze samen. Houd u daarvoor met één hand vast aan het handvat **(1)** en duw met de vrije hand aan de onderarm-schaal **(3)** de rollator samen.

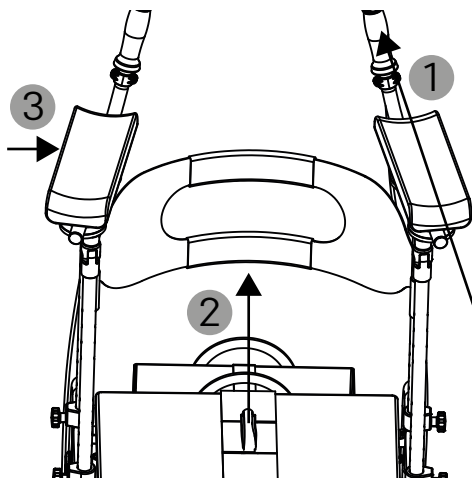

Afb. 25

4.6 ROLLATOR TAS IN- EN UITHANGEN



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar: Houd de tas verwijderd van brandhaarden om ontbranding te vermijden.

Gevaar voor verwonding: Belaad de tas niet boven het toegelaten maximale gewicht van 5 kg. Het gevaar bestaat dat de tas u op de voeten valt, dat u over de tas struikelt of dat de rollator omvalt.

Magnetische tashouder: Voor gebruikers met een pacemaker gelden dezelfde bepalingen in de omgang met de rollortas als voor conventionele tassen met magneetsluitingen. Neem de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies van uw pacemaker in acht.



VOORZICHTIG

Klemgevaar: Let er bij het in- en uithangen van de tas op dat u niet tussen de magneten grijpt.




AANWIJZING

Bij schokkende bewegingen kan de tas een beetje heen-en-weer slingeren, wat onschadelijk is.

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
2. Vouw de rollator uit.

3. Om de tas in te hangen houdt u deze vast aan de greepriemen (1).
4. Houd de tas met het logo in de rijrichting (voor).
5. Om te zorgen dat de magneten vastklikken, leidt u de tas parallel aan de tashouder tegen tashouder (2).
→ De magneten klikken hoorbaar vast.
6. Voordat u de tas belaaft, controleert u door een visuele controle of de magneten juist zijn vastgeklikt.
7. Om de tas uit te hangen houdt u deze vast aan beide greepriemen (1).
8. Trek de tas naar boven uit de tashouder (3).

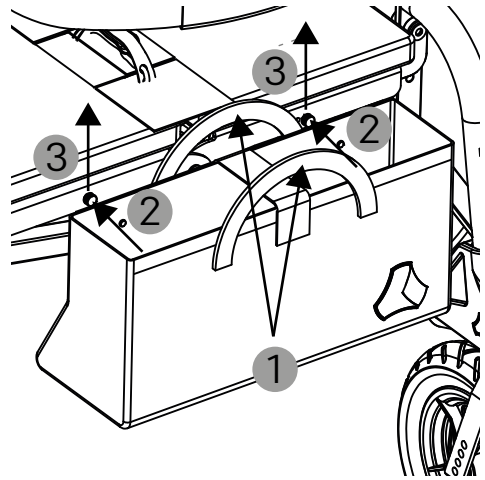

Afb. 26

4.7 ROLLATOR DRAGEN



WAARSCHUWING


Valgevaar: Haal nog een tweede persoon erbij ter ondersteuning. Til de rollator met zijn tweeën alleen op wanneer u beide veilig staat en het eigen gewicht van de rollator kunt dragen.

Valgevaar: Draag de rollator alleen wanneer deze volledig is samengevouwen en niet zwaar beladen is.

Klemgevaar: Let bij het dragen van de rollator op uw handen. Draag de rollator alleen aan de aangegeven plaatsen (1).

1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
2. Vouw de rollator samen.
3. Houd de rollator met zijn tweeën voor en achter aan het frame vast (1).

4. Til de rollator op en draag deze naar de gewenste doellocatie.

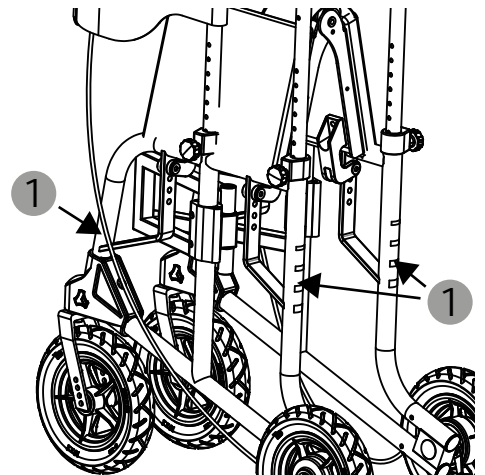


Afb. 27

4.8 ROLLATOR TRANSPORTEREN



AANWIJZING

- Om de rollator smaller samen te vouwen en om het zitkussen te sparen, neemt u het zitkussen af.
 - Om de tas te sparen, neemt u de tas af.
 - Informeer uzelf vooraf over de bepalingen van het vervoersbedrijf voor het transport in het vliegtuig of de trein.
 - Bij een rollator met een optie voor gedeeltelijk inklappen mag de vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen niet zijn vastgeklikt, omdat er anders schade aan het product kan ontstaan.
1. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
 2. Vouw de rollator samen.
 3. Beveilig de rollator tegen uitvouwen tijdens het transport door de transportbeveiligingsband aan het achterste frame te bevestigen (1).

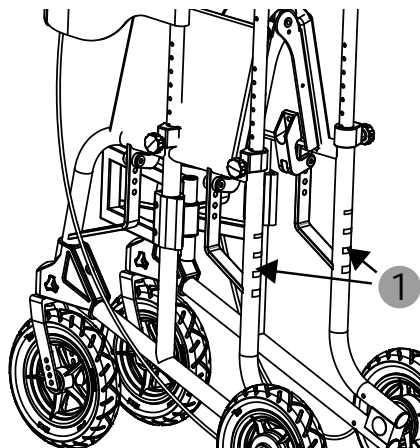

Afb. 28

4. Voor de verzending verpakt u de rollator in de originele doos.
5. Positioneer de doos zoals hierop is beschreven als de rollator voor de verzending in de originele doos is verpakt.
6. Transporteer de rollator zodanig dat deze stabiel staat en er geen gevaar ontstaat door plotselinge bewegingen van het vervoermiddel.

4.9 GEDEELTELIJK INKLAPPEN (OPTIONEEL)



WAARSCHUWING

Klemgevaar: Let bij het vouwen van de rollator op uw handen.

Gevaar voor verwonding: Gebruik de rollator alleen als zitgelegenheid wanneer deze volledig is uitgevouwen.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding: Let er bij het (gedeeltelijk) samenvouwen op dat u buiten de rollator stapt.




AANWIJZING

- Als uw rollator geen optie voor gedeeltelijk inklappen heeft, kan de rollator hiervoor worden aangepast. DIETZ adviseert om aanpassingen door de vakhandel te laten


4.9.1 Uitvouwen

1. Plaats de rollator in de rijrichting voor u.
2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
3. Houd u met één hand vast aan het handvat (1).
4. Om de rollator enigszins te ontvouwen, trekt u deze met de vrije hand aan de greepstang uit elkaar. Til daarbij de rollator een beetje op aan de greepstang om het trekken te vergemakkelijken (2).

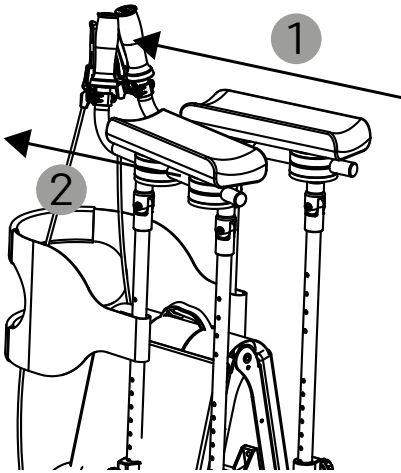

Afb. 29

- uitvoeren.
- U kunt de rollator samen met de lege tas vouwen. Een gevulde tas moet u voor het (gedeeltelijk) samenvouwen uithangen of leegmaken.
5. Om de vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen los te maken, trekt u de grijze ontgrendelingsband naar boven (3).
 6. Houd de grijze ontgrendelingsband aangetrokken en druk met de andere hand op één zijde van de zitting omlaag tot deze horizontaal is (4).
 7. Laat de grijze ontgrendelingsband los.
 - De vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen klikt niet vast.
 8. Als het zitkussen niet op de zitting ligt, bevestigt u dit.

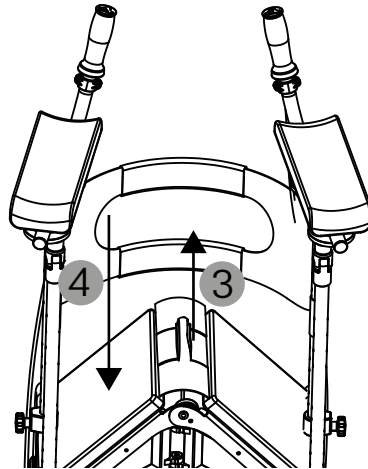


Afb. 30

4.9.2 Samenvouwen

1. Plaats de rollator in de rijrichting voor u.
2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
3. Als u de rollator smaller wilt samenvouwen, verwijdert u het zitkussen.
4. Houd u met één hand vast aan het handvat **(1)**.
5. Om de vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen los te maken, trekt u de grijze ontgrendelingsband naar boven. Om de rollator te vouwen trekt u gelijktijdig de zwarte vouwband naar omhoog tot de rollator is samengevouwen **(2)**.
6. Laat de ontgrendelingsband en de vouwband los.
 - De vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen klikt niet vast.

7. Als de rollator niet volledig is samengevouwen, duwt u deze samen. Houd u daarvoor met één hand vast aan het handvat **(1)** en duw met de vrije hand aan de onderarmschaal **(3)** de rollator samen.

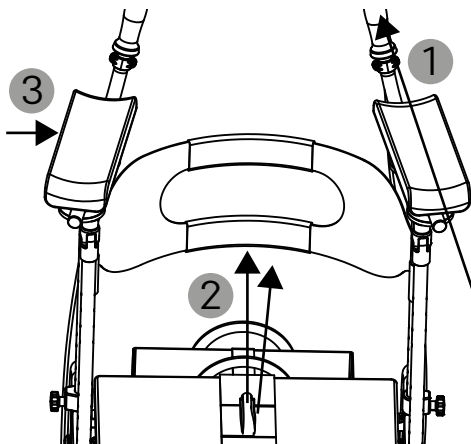

Afb. 31

4.9.3 Gedeeltelijk inklappen




WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding: Als de rollator gedeeltelijk is ingevouwen bestaat er een verhoogd kantelrisico. Gebruik de optie voor gedeeltelijk inklappen alleen op een egale, vaste ondergrond.



AANWIJZING


- Gebruik de gedeeltelijk ingeklapte rollator alleen voor het kortdurend manoeuvreren in nauwe passages.
 - Oefen geen druk uit op de zitting wanneer de rollator gedeeltelijk is ingeklapt.
1. Plaats de uitgevouwen rollator in de rijrichting voor u.
 2. Trek de vergrendelingshendels naar u toe om de blokkeerremmen te blokkeren.
 3. Houd u met één hand vast aan het handvat **(1)**.
 4. Om de rollator te vouwen trekt u gelijktijdig de zwarte vouwband naar omhoog tot de vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen in het gat voor gedeeltelijk inklappen vastklikt **(2)**.
 - De vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen klikt hoorbaar vast.

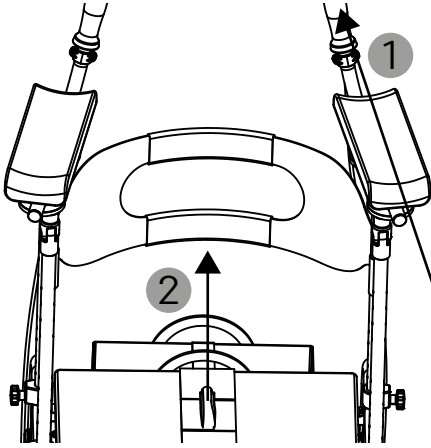

Afb. 32

5. Om het onverwacht openen van de rollator te vermijden controleert u door een visuele

controle of de vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen in de trap voor gedeeltelijk inklappen is vastgeklikt (3).

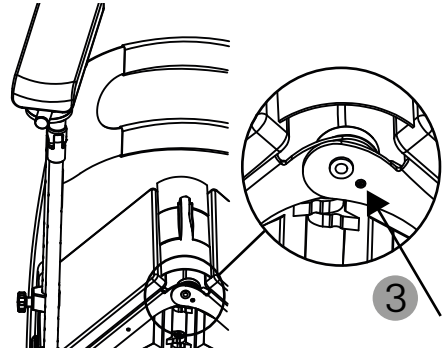

Afb. 33

4.10 WANDELSTOKHOUDER (OPTIONEEL)



WAARSCHUWING

Valgevaar: Let erop dat de wandelstok juist in de wandelstokhouder is gepositioneerd en bij het lopen niet kan losraken.




AANWIJZING

Als uw rollator niet over een wandelstokhouder beschikt, kan deze op ieder moment worden toegevoegd. DIETZ adviseert om dit door de vakhandel te laten uitvoeren.

1. Druk de remhendels omlaag om de blokkeerremmen te blokkeren (zie hoofdstuk 4.3.2.).
2. Voor het opbergen van uw wandelstok positioneert u de rubbervoet van de

wandelstok in het onderste deel van de wandelstokhouder (1).

3. Klik de stok met lichte druk in de bovenste klem van de wandelstokhouder (2).
4. Voor het uitnemen van de wandelstok trekt u deze uit de bovenste klem van de wandelstokhouder (2).

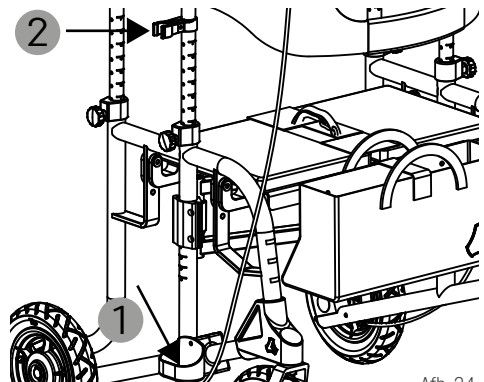

Afb. 34

4.11 EENHANDSREM (OPTIONEEL)



WAARSCHUWING

Valgevaar: De uitrusting van uw rollator met een eenhandsrem heeft als voorwaarde dat u voldoende kracht hebt in de hand die de remhendel bedient. Alleen zo is de veilige hantering van de rollator gewaarborgd.

Als een van uw handen niet voldoende kracht heeft voor het veilig bedienen van de rem, kan de rollator worden aangepast naar een eenhandsremsysteem. Deze aanpassing moet door de vakhandel worden uitgevoerd.

Er gelden dezelfde gebruiks-, onderhouds- en veiligheidsinstructies als bij de uitvoering met twee remhendels.

4.12 ACCESSOIRES EN UITBREIDINGEN/AANPASSINGEN VAN EXTERNE LEVERANCIERS



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding: De veiligheid van het product kan niet worden gegarandeerd als er uitbreidingen of accessoires worden gebruikt die niet door DIETZ zijn vrijgegeven.

Gevaar voor verwonding: Als er accessoires of uitbreidingen aan het product moeten worden aangebracht, moeten de veiligheidsinstructies uit de gebruiksaanwijzing van de accessoires of de uitbreiding in acht worden genomen.

Als u een DIETZ-product combineert met niet door ons geleverde accessoires, wijzigt u het product.

Als er externe producten op een DIETZ-product worden gemonteerd, gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product over naar de persoon die de accessoires monteert of de uitbreiding uitvoert.

Wij adviseren om alleen originele accessoires van DIETZ GmbH te gebruiken evenals combinaties waarvan de effectiviteit en veiligheid op basis van een combinatieovereenkomst volgens Aanhang I Nr. 14.1 van EU-verordening 2017 / 745 (MDR) zijn getest.

Verdere informatie over de toegelaten accessoires en combinatieovereenkomsten ontvangt u van onze service.

5.1 AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties		Eenheid	tauron rfa		
Effectieve zitbreedte ¹		mm	580	630	680
Totale breedte		mm	785	835	880
Breedte gedeeltelijk ingeklapt		mm	650	680	710
Binnenmaat gedeeltelijk ingeklapt		mm	460	480	508
Lengte/breedte/hoogte samengevouwen		mm	809/367/1255	809/382/1255	809/390/1255
Gewicht zonder/met accessoires		kg	21/22,5	21,5/23	22/24
Totale lengte		mm	809		
Totale hoogte min./max.		mm	1255 / 1430		
Hoogte onderarmsteun, verstelbaar		mm	8 trappen × 25		
Hoogte onderarmsteun min./max.		mm	1100 / 1275		
Zithoogte		mm	515 / 535 / 555 / 575		
Zitdiepte		mm	300		
Grootte van de wielen		mm	250 x 50		
Draaicirkel min./max.		mm	1080 / 1200		
Kantelstabiliteit volgens EN ISO 11199-3	voorwaarts	°	> 15		
	achterwaarts	°	> 7		
	zijwaarts	°	> 4,5		
Max. lichaamsgewicht incl. extra lading		kg	250		
Max. belastbaarheid rollatoras		kg	5		
Aanbevolen lichaamslengte		m	1,50 - 1,90		

¹Gemeten tussen de zijdelen.

5.2 PRODUCTTESTS

Norm	getest
EN ISO 11199-3	getest zijn de normen voor hulpmiddelen bij het lopen voor gebruik met beide armen, rollators
ISO 10993-5	getest op toxiciteit in het materiaal
ISO 8191-2	getest is de bestendigheid ten opzichte van ontbranding voor polstermaterialen en kunststof onderdelen

5.3 VERDERE GEGEVENS

Specificaties	tauron rfa
REF	730001
Omgevingstemperatuur in bedrijf (gehele rollator en DIETZ-opties)	-10 °C tot +50 °C
Omgevingsvoorwaarden opslag (gehele rollator en DIETZ-opties)	0 °C tot +45 °C // 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

5.4 MATERIALEN/KLEUREN




AANWIJZING

Alle gebruikte metalen zijn corrosiebestendig.

Onderdeel	Kleur	Materiaal
Frame	Mangan Grey, Citrin	Aluminium (Al), gepoedercoat
Zitting	Grijs	Aluminium (Al), gepoedercoat
Kruisstang	Zwart	Staal
Onderarmsteunen	Zwart	Staal
Wielen	Zwart	Polyurethaan (PU)
Remhendel	Zwart	Polyamide (PA) + 30% Glasvezel (GF)
handvaten	Zwart	Thermoplastische elastomeer (TPR)
Zitkussen	Zwart	Polyester, PUR-schuim
Rollatortas	Zwart	Polyester
Rugband	Zwart	Polyester, PE-HD
Onderarmschaal	Zwart	PU-schuim

5.5 PRODUCTAANDUIDING

Typeplaatjes en waarschuwingsplaatjes op het product moeten leesbaar blijven. Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes en ontbrekende reflecterende stickers door de vakhandel vervangen. Het serienummer waarmee een product eenduidig wordt geïdentificeerd, bevindt zich op de kruisstang op het typeplaatje. Het typeplaatje mag niet worden verwijderd.

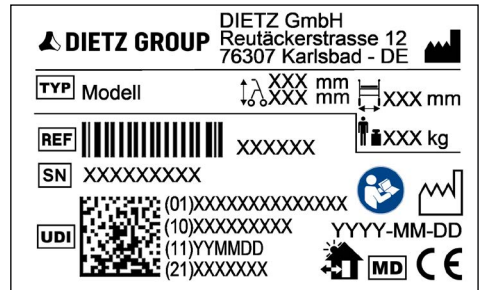

Afb. 35

Bij een product met de hieronder vermelde aanduiding gaat het om een speciaal ontwerp.

SONDERANFERTIGUNG
CUSTOM-MADE DEVICE

Bij speciale ontwerpen, die individueel zijn vervaardigd voor gebruikers, wijken het typeplaatje of de bestemming en de waarschuwingen af. De aanvullende documentatie moet in acht worden genomen.



Voor het hergebruik bij een individuele patiënt.



Uniek patiëntnummer (komt overeen met het productserienummer)

Hierna worden de symbolen en informatie van het typeplaatje in detail verklaard. Het hier afgebeelde typeplaatje is een voorbeeld.

	TYP = model
	REF = artikelnummer
	SN = serienummer
	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI/GTIN (10) charge-/lotnummer (11) productiedatum (JJMMDD) (21) serienummer
	Fabrikant/merkteken van de fabrikant/contactadres
	Maximaal lichaamsgewicht incl. extra lading
	Productiedatum (JJ-MM-DD)
	Totale breedte rollator
	Totale hoogte (min. - max.) Rollator
	De rollator kan binnen en buiten worden gebruikt.
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht
	Medical Device/medisch hulpmiddel
	Het product is conform met de verordening (EU) 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

6.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Neem bij het gebruik van uw product altijd de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht om een val, gevaarlijke situaties en schade aan het product te vermijden:



WAARSCHUWING

Veiligheidsinstructies: neem alle veiligheidsinstructies in acht, omdat er anders gevaar voor verwondingen kan bestaan!

- Lees voor het gebruik van de rollator de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- De rollator mag alleen op een vaste, egale ondergrond worden gebruikt!
- Gebruik bij hellende wegen de bedrijfsremmen (trek de remhendels gedoseerd naar u toe).
- De rollator moet veilig en gelijkmatig op alle 4 wielen staan.
- Controleer voor ieder gebruik van de rollator of alle aangebouwde delen stevig vastzitten, de remmen functioneren en de rollator volledig is uitgevouwen.
- Activeer beide blokkeerremmen voordat u op de zitting van de rollator gaat zitten.
- De zitting is alleen bedoeld voor tijdelijke rustmomenten. Gebruik voor langere pauzes een gebruikelijke zitgelegenheid.
- De rugband helpt u om de juiste positie op de zitting te vinden. De rugband is geen rugleuning.
- Bij gewichtsverplaatsingen door lichaamsbewegingen kan het kantelrisico van de rollator worden vergroot. Let er altijd op dat de belasting op de rollator gelijkmatig plaatsvindt.
- Hang geen tassen aan de handvaten of aan andere delen van de rollator, omdat hierdoor het kantelrisico wordt vergroot. Hang de meegeleverde rollator tas alleen aan de daarvoor bestemde tashouder.
- Let bij het vouwen van de rollator op uw handen. Er bestaat klemgevaar.
- Overschrijf de max. belastingsgrens van 250 kg door gebruiker en extra lading niet.
- Plaats de rollator niet langere tijd in directe zonnestraling, warmtebronnen of lage temperaturen, omdat onderdelen van het product (bijv. frame of handvaten) zeer heet (> 41 °C) of zeer koud (< 0 °C) kunnen worden en deze in bepaalde omstandigheden huidletsels kunnen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de rollator niet in de directe nabijheid van nooduitgangen en vluchtwegen wordt geparkeerd en deze blokkeert.
- Gebruik de rollator niet onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht en reactievermogen negatief kunnen beïnvloeden.
- De rollator alleen gebruiken conform het beoogd gebruik.
- Rijd met de rollator niet ongeremd tegen hindernissen, zoals bijv. stoepen of randen.
- De rollator mag niet aan kinderen worden gegeven om te spelen.

- Als u op de rollator zit, mag u niet trippelen of door andere personen worden geduwd. Er bestaat gevaar voor verwonding en er kan daarbij schade aan het product worden veroorzaakt.
- Neem in het openbare verkeer de verkeerswet in acht.
- Om zichtbaar te zijn draagt u indien mogelijk lichte, opvallende kleding en let u erop dat de reflecterende stickers intact en zichtbaar zijn.
- Gebruik de rollator niet als zitgelegenheid in een voertuig of een voertuig van het openbaar vervoer.
- Niet met de rollator op een roltrap rijden.
- Trappen mogen alleen met hulp van begeleidende personen worden genomen, als er geen lift of geen hellingen aanwezig zijn.
- Rails of vergelijkbare obstakels moeten, als u er niet omheen kunt rijden, in een rechte hoek (90°) worden overgestoken.
- De rollator mag niet als transporthulp voor zware lasten of voor vergelijkbare doeleinden worden gebruikt.
- De rollatortas mag voor het transport van voorwerpen tot max. 5 kg worden gebruikt.
- Ga nooit op de rollator staan en gebruik deze nooit als opstaphulp.
- Als u functiebeperkingen aan uw rollator vaststelt, breng deze dan onmiddellijk voor onderhoud naar de vakhandel.
- Na opslag van meer dan 4 maanden moet u voor de heringebruikname alle in het onderhoudsschema vereiste inspecties uitvoeren.
- Uit hygiënisch oogpunt niet ongekleed op de rollator gaan zitten.
- De rollator verwijderd houden van potentiële warmte- en vuurbronnen.
- Win onmiddellijk advies in bij een arts bij rood worden, prikkelingen of irritaties van de huid die ontstaan in combinatie met het gebruik van het product.
- Ernstige incidenten die in combinatie met het product optreden, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteit.

7.1 ONDERHOUD



WAARSCHUWING

Veiligheidsgevaar: om de gebruiksveiligheid van het product te behouden, mogen reparaties aan het product uitsluitend worden uitgevoerd door de vakhandel met originele DIETZ-reserveonderdelen. De overeenkomstige catalogus met reserveonderdelen is beschikbaar op onze internetsite onder de desbetreffende productinformatie.

Klemgevaar: Let bij het onderhoud van de rollator op uw handen.



AANWIJZING

Gebruikers merken mogelijke beschadigingen als eerste op. Als u een fout, zoals deze in het onderhoudsschema is opgevoerd, of verdere defecten en functiebeperkingen vaststelt, neem dan contact op met aangewezen vakpersoneel.



AANWIJZING

De volgens het onderhoudsschema vereiste inspecties en maatregelen moeten, indien niet anders aangegeven, door de gebruikers of de helpers worden uitgevoerd.



AANWIJZING VOOR DE VAKHANDEL

Wanneer gebruikers opvallende zaken aan het product melden, controleert u alle in het onderhoudsschema opgevoerde controlepunten. De controles moeten voor iedere herinzet en na een langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd.

Om een veilig bedrijf van het product te kunnen garanderen, adviseert DIETZ om de in het onderhoudsschema opgevoerde controles regelmatig uit te voeren.

Gebrekkig of nalatig onderhoud en verzorging van het product leidt tot een beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsschema geeft geen uitsluitel over de daadwerkelijk noodzakelijke, aan het product vastgestelde, arbeidsomvang.

7.2 ONDERHOUDSSCHEMA

Wat moet u controleren	Beschrijving	maandelijks voor het gebruik	
Remmen/ blokkeerremmen/ bedrijfsremmen: functie	 Gevaar voor verwonding: De remmen moeten na het vervangen van de remkabel of de achterwielen opnieuw worden ingesteld. Dit mag alleen plaatsvinden door de vakhandel. <ul style="list-style-type: none"> • Bij vergrendelde remhendels (blokkeerrem) of compleet aangetrokken remhendels (bedrijfsrem) mogen de achterwielen niet draaien. • Als de remhendels in neutrale positie zijn, moeten de remmen zonder probleemloos en geluidsloos kunnen worden gedraaid. • De remhendels moeten intact zijn. • Het onderste deel van de stelschroeven aan het uiteinde van de remkabels van de achterwielen moet altijd aangedraaid zijn. • De remkabels moeten altijd met een geleideband zijn gefixeerd. 	X	
Onderarmsteunen: stabiliteit	<ul style="list-style-type: none"> • De stergrepen voor de hoogteverstelling en voor de beveiliging van de onderarmsteunen tegen ongewenste speling moeten aan beide zijden aanwezig zijn en handvast kunnen worden aangedraaid. • De onderarmsteunen mogen niet wiebelen. • De handvaten en remhendels moeten vastzitten. 	X	
Onderarmschalen, draaischijven en greepstangen: stabiliteit, vervuiling en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Bij vervuiling reinigt u de onderarmschalen conform de reinigingsinstructies. • De onderarmschalen mogen niet beschadigd zijn. • De onderarmschalen mogen niet wiebelen. • De draaischijven en greepstangen mogen geen zichtbare beschadigingen/vervormingen vertonen. • Onderarmschalen, draaischijven en greepstangen moet stevig zijn vastgeschroefd. 	X	
Vouwmechanisme: functie, veiligheid en beschadiging	Met en zonder optie voor gedeeltelijk inklappen: <ul style="list-style-type: none"> • De rollator moet zich laten vouwen. • De vouwband mag geen zichtbare beschadigingen vertonen. Met optie voor gedeeltelijk inklappen: <ul style="list-style-type: none"> • De vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen moet intact zijn. • De ontgrendelingsband mag geen zichtbare beschadigingen vertonen. • De vergrendelingspen voor gedeeltelijk inklappen moet met behulp van de ontgrendelingsband vastklikken en kunnen worden losgemaakt. 	X	
Stuur- en loopwielen: soepelheid, veiligheid en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • De wielen moeten recht lopen en mogen niet trillen. • De wielen moeten zich tijdens het rijden licht en geluidsarm bewegen. • De wielen mogen niet beschadigd zijn. • Bij vervuiling reinigt u de wiellagers conform de reinigingsinstructies. • De afdekoppen van de achterwielen moeten aanwezig zijn. • Laat beschadigde en sterk versleten wielen vervangen. 	X	

Wat moet u controleren	Beschrijving	maandelijks voor het gebruik	
Schroefverbindingen: stevig vast	 Gevaar voor verwonding: Zelfvergrendelende moeren en schroeven verliezen door herhaald losdraaien en aandraaien hun effectiviteit. Daarom moeten zelfvergrendelende moeren en schroeven, wanneer deze los zijn, door de vakhandel worden vervangen. <ul style="list-style-type: none"> • Alle schroefverbindingen moeten vastzitten. 	x	
Zitting en zitkussen: stabiliteit, vervuiling en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Bij vervuiling reinigt u de zitting/het zitkussen conform de reinigingsinstructies. • Bij beschadiging laat u de zitting/het zitkussen vervangen. • De zitting moet bij een volledig uitgevouwen rollator op de kruisstang liggen. 	x	
Rugband: vervuiling en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • De rugband moet vast aan de onderarmsteunen zijn geschroefd. • De rugband moet onbeschadigd zijn. • Bij vervuiling reinigt u de rugband conform de reinigingsinstructies. 	x	
Rollator tas en tashouder: functie, vervuiling en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Als de tas of de tashouder beschadigd is, laat u deze vervangen. • Bij vervuiling reinigt u de tas en de tashouder conform de reinigingsinstructies. • De magnetische tashouder aan de tas en de rollator moet vastzitten en probleemloos functioneren. 	x	
Wandelstokhouder: vervuiling en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Het bovenste en onderste deel van de wandelstokhouder moet onbeschadigd zijn. • De wandelstokhouder moet vast en op de juiste positie aan de rollator zijn vastgezet. • De wandelstok moet zich probleemloos in de wandelstokhouder laten positioneren. • Bij vervuiling reinigt u de wandelstokhouder conform de reinigingsinstructies. 	x	
Reflecterende stickers: beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Alle reflecterende stickers moeten intact en aanwezig zijn. 	x	
Onderarmsteunen: stabiliteit, functie en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • De stergrepen voor de hoogteverstelling en voor de beveiliging van de onderarmsteunen tegen ongewenste speling moeten aan beide zijden aanwezig zijn en handvast kunnen worden aangedraaid. • De onderarmsteunen mogen niet wiebelen. • De onderarmsteunen mogen geen zichtbare beschadigingen/vervormingen vertonen. • De onderarmsteunen moeten probleemloos in hoogte kunnen worden veresteld en daarbij in één van de posities van de trapaanduiding vastklikken. • De handvaten en remhendels moeten vastzitten. • De handvaten en remhendels mogen geen beschadigingen of scheuren vertonen. 	x	

Wat moet u controleren	Beschrijving	maandelijks voor het gebruik	
Frame compleet, incl. kruisstang: functie en beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Het frame en de kruisstang mogen geen beschadigingen of scheuren vertonen. • Functie- en oppervlakschade moet worden verholpen. 		X
Typeplaatje: beschadiging	<ul style="list-style-type: none"> • Alle informatie van het typeplaatje moet duidelijk leesbaar zijn. 		X
Visuele controle: loszittende onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	 Gevaar voor verwonding: Als een dergelijke schade wordt vastgesteld, mag de rollator niet worden gebruikt omdat het veilig rijden niet is gegarandeerd.		X
Het gehele product: vervuiling	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van de mate van vervuiling, maar minstens maandelijks, moet de gehele rollator worden gereinigd (zie hoofdstuk 7.4). 		X

7.3 FOUTOPSPORING EN -OPLOSSING

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
Het product loopt niet recht.	<ul style="list-style-type: none"> • De wielagers zijn defect of de wielmontage is niet meer correct vastgezet. 	Contact opnemen met de vakhandel
Het product is zwaar te duwen.	<ul style="list-style-type: none"> • De wielagers zijn vuil. 	Vuil verwijderen
	<ul style="list-style-type: none"> • De remmen zijn verkeerd ingesteld. • De wielagers zijn defect of de wielmontage is niet meer correct vastgezet. 	Contact opnemen met de vakhandel
De remfunctie is onvoldoende of ongelijkmatig.	<ul style="list-style-type: none"> • De remmen zijn verkeerd ingesteld of de remvoeringen zijn versleten. 	Contact opnemen met de vakhandel
De zitting is niet horizontaal of is niet vast verbonden met de rollator.	<ul style="list-style-type: none"> • De rollator is niet volledig uitgevouwen (bijv. gedeeltelijk ingeklapt). 	Rollator volledig uitvouwen
	<ul style="list-style-type: none"> • De zitting is niet correct vastgezet in de zijdelingse houders of is defect. 	Contact opnemen met de vakhandel
	<ul style="list-style-type: none"> • De kruisstang of het vouwmechanisme zijn defect. 	

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
Het product laat zich niet vouwen.	<ul style="list-style-type: none"> • De kruisstang, de zitting of het vouwmechanisme zijn defect. 	Contact opnemen met de vakhandel
Het product biedt geen goed houvast of staat niet veilig.	<ul style="list-style-type: none"> • De onderarmsteunen zijn niet juist vastgezet of verkeerd op de gebruiker ingesteld. 	Controleer of de stergrepen van de onderarmsteunen handvast zijn aangedraaid. Controleer de hoogte van de onderarmsteunen, neem indien nodig contact op met de vakhandel.
	<ul style="list-style-type: none"> • De rollator is niet volledig uitgevouwen. 	Rollator volledig uitvouwen
	<ul style="list-style-type: none"> • Het frame van de rollator of de onderarmsteunen zijn beschadigd. 	Contact opnemen met de vakhandel
	<ul style="list-style-type: none"> • De onderarmschalen zijn niet juist vastgezet of verkeerd op de gebruiker ingesteld. 	Controleer of de schroeven handvast zijn aangedraaid.
		Controleer de positie, neem indien nodig contact op met de vakhandel.
De tas kan niet worden ingehangen.	<ul style="list-style-type: none"> • De magnetische tashouder is defect of is losgeraakt. • Een onderdeel van de magnetische tashouder is zoekgeraakt. 	Contact opnemen met de vakhandel
Het zitkussen laat zich niet bevestigen.	<ul style="list-style-type: none"> • De klittenbandsluiting is vuil. 	Vuil verwijderen
	<ul style="list-style-type: none"> • Een deel van de klittenbandsluiting is losgeraakt. 	Contact opnemen met de vakhandel
De rugband gaat open.	<ul style="list-style-type: none"> • De klittenbandsluiting is vuil. 	Vuil verwijderen
	<ul style="list-style-type: none"> • Een deel van de klittenbandsluiting is losgeraakt. 	Contact opnemen met de vakhandel
	<ul style="list-style-type: none"> • De hamerkopbout is niet in de geleidelijn gepositioneerd. 	Positioneer de hamerkopbout in de geleidelijn, neem indien nodig contact op met de vakhandel.
	<ul style="list-style-type: none"> • De klittenbandsluiting van de rugband en/of de afdekking is niet juist bevestigd. 	Klittenbandsluiting bevestigen
Piepende en slepende geluiden	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse oorzaken 	Contact opnemen met de vakhandel

7.4 REINIGING



AANWIJZING

- Gebruik voor de reiniging geen hogedrukapparatuur, geen scherpe, bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen.
- Let na de reiniging op een volledige droging van alle materialen om corrosie te vermijden.
- Door zand en zeewater (of strooizout) kunnen bewegende delen en de wiellagers beschadigd raken. Reinig het product grondig wanneer het aan dergelijke omstandigheden is blootgesteld.

Het product en de niet-textiele componenten ervan kunt u met een vochtige doek afvegen. Bij sterkere verontreinigingen gebruikt u lauwarm water gemengd met mild reinigingsmiddel. Na het reinigen veegt u met helder water na en wrijft u het product droog met een doek.

De wielen kunt u met een vochtige borstel met zachte kunststofharen reinigen. Geen draadborstel gebruiken!

Het textiel is met de hand wasbaar met een mild reinigingsmiddel tot 40 °C met de hand wasbaar. Machinewasbaar textiel is overeenkomstig aangeduid.

7.5 DESINFECTIE



WAARSCHUWING

Infectiegevaar: Het product moet voor iedere wisseling van personen worden gedesinfecteerd.

Bij textiel met naden kan een veilige desinfectie niet worden gewaarborgd. DIETZ adviseert om deze te vervangen.



AANWIJZING

- Neem bij de desinfectie de gebruiks- en verwerkingsaanwijzingen van de fabrikant van het reinigings- en desinfectiemiddel in acht.
- Neem bij alle afneembare textiel de wasinstructie in acht, indien aanwezig.

Spray alle delen grondig met een in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel voor oppervlakken of drenk een doek met desinfectiemiddel en veeg daarmee alle onderdelen af. Wees uiterst zorgvuldig bij de desinfectie van oppervlakken die vaak contact maken met de handen of de huid, bijv. zitting, handvaten.

Gebruik de actuele lijst van het Robert-Koch-Instituut om een met het materiaal compatibel desinfectiemiddel te selecteren (www.rki.de).

De volgende desinfectiemiddelen zijn compatibel met het materiaal:

- aldehydevrije desinfectiemiddelen op basis van alcoholen (max. 70 % propylalcohol)
- desinfectiemiddelen op waterbasis (alcoholvrij, aldehydevrij, oplosmiddelenvrij en parfumvrij)

7.6 DOORGEVEN EN HERINZET



WAARSCHUWING

Infectiegevaar: Het product moet voor iedere wisseling van personen worden gedesinfecteerd. Dit is belangrijk om kruisbesmettingen te vermijden.



AANWIJZING

Als het product als een speciaal ontwerp is aangeduid zijn het doorgeven en de herinzet uitgesloten.

Uw product is geschikt om te worden doorgegeven en opnieuw te worden ingezet. Het aantal keren dat het product opnieuw kan worden

ingezet is afhankelijk van de materiaalslijtage en de deugdelijkheid van het functioneren van het desbetreffende product. Bij het doorgeven van het product aan nieuwe gebruikers of de vakhandel moet u eraan denken dat u alle voor een veilige handhaving noodzakelijke technische documenten overdraagt.

Het product moet voordat het opnieuw wordt ingezet door de vakhandel worden gereinigd, gedesinfecteerd en op schade worden onderzocht en vrijgegeven.

Daarvoor moeten alle in het onderhoudsschema opgevoerde controlepunten aan het product worden gecontroleerd.

7.7 AFVOER

Het product bestaat uit aluminium- en kunststofmaterialen, die evenals het verpakkingsmateriaal (karton) kunnen worden gerecycled. Als u het product niet langer nodig hebt, neem dan contact op met de vakhandel. Deze zal het product ophalen en vakkundig afvoeren of hergebruiken. Anders brengt u het product naar uw lokale afvalstation.

8.1 GARANTIE

Garanties hebben betrekking op alle gebreken van het product die aantoonbaar zijn te herleiden naar materiaal- of fabricagefouten. De garantieperiode is 24 maanden vanaf de toegang van de mededeling dat het product gereed is voor verzending, ten laatste na de uitlevering.

Van de garantieverplichting uitgesloten zijn beschadigingen die door slijtage, opzet of door nalatige of onjuiste bediening, gebruik of reiniging zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij gebruik van ongeschikte onderhoudsmiddelen, smeeroliën of vetten.

8.2 AANSPRAKELIJKHEID

DIETZ GmbH is alleen aansprakelijk wanneer de producten onder de aangegeven voorwaarden en voor de aangegeven doelen worden ingezet. DIETZ adviseert om de producten adequaat te onderhouden en te verzorgen overeenkomstig de handleiding. DIETZ GmbH is niet verantwoordelijk voor schade die door onderdelen en

reserveonderdelen worden veroorzaakt die niet door DIETZ GmbH werden vrijgegeven. Reparaties mogen uitsluitend door de vakhandel of de fabrikant zelf worden uitgevoerd.



Productgroep: rollators

Product: tauron|rfa

Gebruiksaanwijzing versie 1.1 NL

Versie 2025-05 (NHA)

REF NL BDA: 911367

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Germany

Tel.: +49 7248.9186-0

Fax: +49 7248.9186-86

info@dietz-group.de

www.dietz-group.de

Drukfouten, vergissingen en prijs- of productwijzigingen voorbehouden.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Nadrukken, ook gedeeltelijk, uitsluitend met schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH, Karlsbad.