

Um Ihnen die Einstellung der Taschenaufhängung zu erleichtern, hat DIETZ ein spezielles Werkzeug entwickelt. Dieses Werkzeug in Form des DIETZ-Logos liegt dem Rollator bei. Wie Sie damit die Taschenaufhängung einstellen können, erfahren Sie im untenstehenden Kapitel.

TASCHEAUFHÄNGUNG EINSTELLEN



WARNUNG

Magnetische Taschenaufhängung: Beachten Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise Ihres Herzschrittmachers.



HINWEIS

Drehen Sie die Taschenaufhängung nicht vollständig heraus.

Mit dem mitgelieferten Werkzeug können Sie die Taschenaufhängung einstellen, wenn diese die Tasche nicht senkrecht von oben aufnimmt.

1. Um die Feststellbremsen zu blockieren, drücken Sie die Bremshebel nach unten.
2. Entfalten Sie den Rollator.
3. Falls die Tasche eingehängt ist, hängen Sie diese aus.
4. Nehmen Sie die DIETZ-Logo-Seite des Werkzeugs in die Hand.
5. Legen Sie das Werkzeug so auf die Taschenaufhängung, dass es einrastet **(1)**.
6. Drehen Sie mit dem Werkzeug die Taschenaufhängung **(2)**, sodass die Öffnung nach oben zeigt **(3)**.
7. Falls nötig wiederholen Sie die Schritte 4 – 6 mit der anderen Taschenaufhängung.

