

Per facilitare la regolazione del gancio porta borsa, DIETZ ha sviluppato un attrezzo speciale. Questo attrezzo dalla forma del logo DIETZ è compreso nella fornitura del rollator. Il capitolo in basso spiega come regolare il gancio porta borsa con l'ausilio di questo attrezzo.

REGOLAZIONE DEL GANCIO PORTA BORSA



AVVERTENZA

Gancio porta borsa magnetico: osservare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza del pacemaker.



NOTA BENE

Non svitare il gancio porta borsa completamente.

L'attrezzo in dotazione permette di regolare il gancio porta borsa se questo non accoglie la borsa in verticale dall'alto.

1. Per bloccare i freni di stazionamento spingere le leve del freno verso il basso.
2. Aprire il rollator.
3. Se la borsa è agganciata, sganciarla.
4. Afferrare il lato dell'attrezzo con il logo DIETZ.
5. Inserire l'attrezzo nel gancio porta borsa e farlo scattare in posizione **(1)**.
6. Girare il gancio porta borsa **(2)** con l'attrezzo in modo che l'apertura sia rivolta verso l'alto **(3)**.
7. Se necessario, ripetere i passi 4 – 6 con l'altro gancio porta borsa.

