



AS(O1)


**DIETZ**<sup>®</sup>  
 REHA-PRODUKTE

## Positionierung der Antriebsräder

### Aktiv < - > Passiv

Um die Position Hinterrades zu variieren, wird die Adapterplatte nach vorne oder hinten verschoben. Um Zwischenschritte zu erreichen, werden die Platten von links nach rechts getauscht und um 180° gedreht.

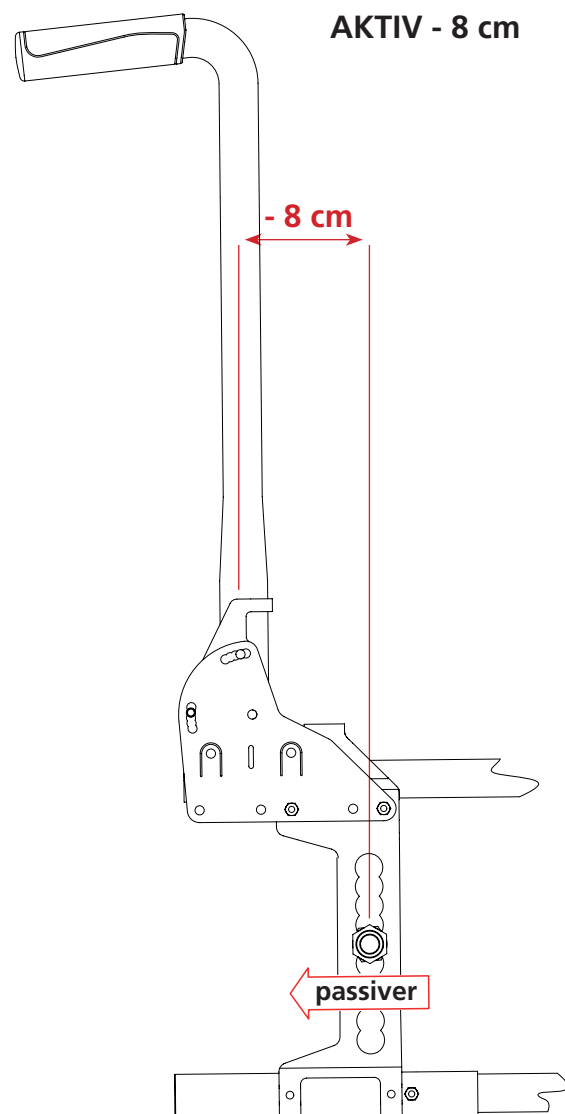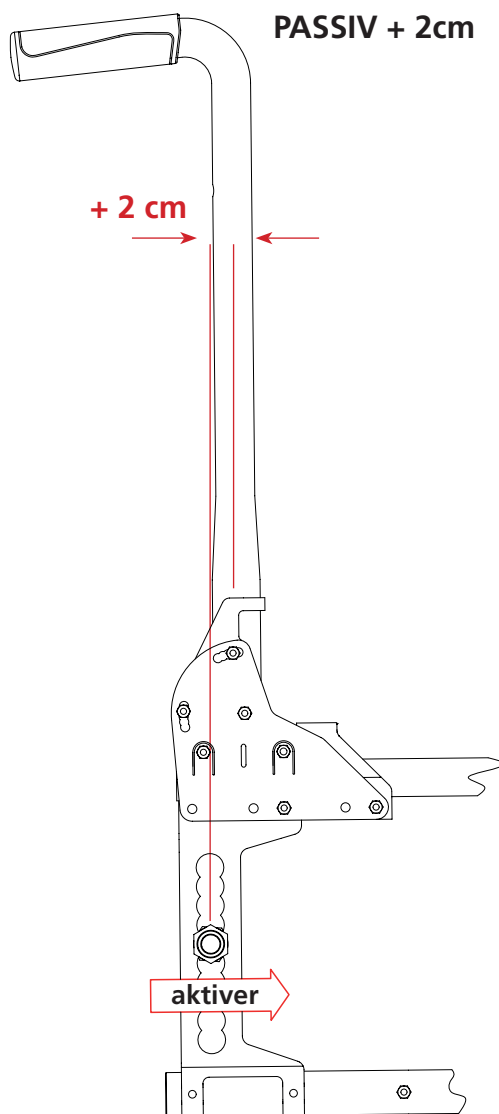

Bei stark aktiven Sitzpositionen empfehlen wir unbedingt Anti Kipp Rollen Art. 184371 / 184372 zu verwenden.

