

TOMTAR®

TOMTAR DH / DS

Douchekruk / douchestoel
Gebruikshandleiding versie 1.4 NL



TOMTAR DH





TOMTAR DS

NL

Bewaren van productidentificatiegegevens

Wij raden u aan de identificatiegegevens van uw product van het typeplaatje over te nemen op de volgende regels, zodat u ze bij de hand hebt in geval van vragen over het product.

(zie het hoofdstuk "Productkenmerking").

 Type / model:	
 Artikelnr. /REF:	
 Serienummer (21):	
 Productiedatum:	
Overige gegevens/ aantekeningen:	

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een douchekruk van DIETZ.

Dit product is een medisch hulpmiddel. U moet uzelf bekend maken met de omgang met dit product om het correct te kunnen gebruiken en om mogelijke gevaren door verkeerd gebruik te vermijden.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. U vindt hierin belangrijke informatie waarmee u de technische voordelen volledig kunt benutten. Ook vindt u hier instructies om het product veilig te kunnen gebruiken en de waarde ervan zo goed mogelijk te behouden.


Als u meer informatie wilt over zorg en medische hulpmiddelen, kunt u contact opnemen met uw vakhandel.

Op onze website vindt u altijd alle actuele informatie over uw product. Voor feedback en vragen over de productveiligheid en over terugroepacties kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met DIETZ. U vindt onze contactgegevens op de achterzijde van deze gebruikshandleiding.



OPMERKING

Voor personen met een verminderd gezichtsvermogen is een grotere weergave van deze gebruikshandleiding in PDF-formaat beschikbaar op **shop.dietz-group.de**.

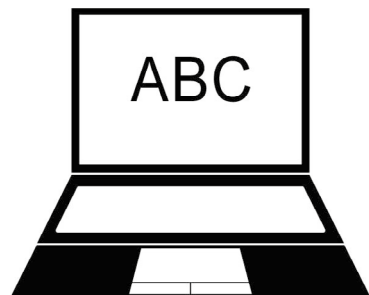

1 Belangrijke informatie		5 Technische gegevens	
1.1 Algemeen	5	5.1 Zo worden de maten bij DIETZ gemeten.	13
1.2 Gebruiksdoel.	5	5.2 Afmetingen en technische gegevens	14
1.3 Indicaties	5	5.3 Productcontroles.	14
1.4 Contra-indicaties.	5	5.4 Meer informatie	14
1.5 Tekens en symbolen.	6	5.5 Materialen	15
2 Productbeschrijving		5.6 Productmarkering	15
2.1 Leveringsomvang	7	6 Veiligheidsinstructies	
2.2 Exemplarische weergave	7	6.1 Veiligheidsinstructies	16
2.3 Accessoires	7	7 Verzorging en onderhoud	
3 Product in gebruik nemen		7.1 Onderhoud	17
3.1 Montage-instructies	8	7.2 Onderhoudsrooster	18
3.2 Gereedschap	8	7.3 Reiniging	19
3.3 Montage TOMTAR DH	8	7.4 Desinfectie	19
3.4 Montage TOMTAR DS	9	7.5 Recycling	19
4 Product gebruiken		7.6 Doorgifte en hergebruik	20
4.1 Zithoogte instellen	10	7.7 Opslag	20
4.2 Het product optillen	10	8 Verklaringen van de fabrikant	
4.3 Gaan zitten en opstaan.	11	8.1 Garantie	21
4.4 Vervoer.	11	8.2 Levensduur	21
4.5 Accessoires en hulpstukken van andere fabrikanten	12	8.3 Aansprakelijkheid	21

1.1 ALGEMEEN

Deze gebruikshandleiding maakt deel uit van de leveringsomvang. De gebruiker moet deze bewaren en ook doorgeven bij het doorgeven van het product. Wijzigingen door technische ontwikkelingen ten opzichte van de in deze gebruikshandleiding getoonde uitvoeringen voorhouden. Voor kopieën, vertalingen en

verveelvoudiging in welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH noodzakelijk. Het auteursrecht behoort de fabrikant toe. De actuele geldige versie van de gebruikshandleiding kunt u bij DIETZ GmbH opvragen. Lees de gebruikshandleiding voordat u het product monteert en gebruikt.

1.2 GEBRUIKSDOEL

De douchestoel stelt personen met verminderde mobiliteit in staat om te douchen op ondergronden die stevig en vlak zijn en die zijn voorzien van anti-slipvoorzieningen. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse lichamelijke verzorging in douche- en wasruimtes. Het product is geschikt voor een maximaal gebruikersgewicht tot 100 kg. De TOMTAR DH/DS is uitsluitend geschikt voor privégebruik.

Het product mag niet worden gebruikt door kinderen en ook niet door personen die kleiner dan 146 cm zijn of die minder dan 40 kg (BMI < 17) wegen. Voor het gebruik als permanente zitgelegenheid is dit product niet geschikt. Het mag niet voor het vervoer van personen of goederen worden gebruikt.

1.3 INDICATIES

Het gebruik van dit medisch hulpmiddel is aangewezen wanneer personen met een lichamelijke beperking niet staand kunnen douchen vanwege:

- ▼ Onvermogen om te staan
- ▼ Onvoldoende stevige houding
- ▼ Amputatie van ledematen/defect aan de ledematen/misvorming van ledematen

1.4 CONTRA-INDICATIES

Het product mag niet worden gebruikt bij:

- ▼ Waarnemingsstoornissen
- ▼ Sterke evenwichtsstoornissen
- ▼ Onvermogen tot zitten
- ▼ een gebruikersgewicht van meer dan 100 kg

1.5 TEKENS EN SYMBOLEN

Deze symbolen wijzen op tekstpassages die nuttig zijn voor het alledaagse gebruik van dit product.



WAARSCHUWING

Waarschuwingen moeten altijd worden nageleefd! We wijzen u erop dat bij niet-naleving letselgevaar kan ontstaan en/of schade aan het product of de omgeving kan worden toegebracht.



OPMERKING

Tips en suggesties die het gebruik makkelijker maken.

2.1 LEVERINGSOMVANG

Het product wordt in folie verpakt en geleverd in een kartonnen verpakking.

Controleer de inhoud van de verpakking direct na ontvangst op volledigheid en beschadigingen. Als herkenbaar is dat de inhoud beschadigd is, moet u dit onmiddellijk aan uw leverancier melden.

Leveringsomvang TOMTAR DH:

- ▼ 1 Zitting
- ▼ 2 Uitschuifbare poten genummerd (1, 2)
- ▼ Schroevenset: 5 x onderlegschilden, 5 x schroeven 35 mm
- ▼ 1 Gebruikshandleiding



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar: Bij verbranding van verpakkingsmateriaal kunnen giftige gassen ontstaan.

Verstikkingsgevaar: Bewaar plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Leveringsomvang TOMTAR DS

- ▼ 1 Zitting
- ▼ 2 Uitschuifbare poten genummerd (1, 2)
- ▼ 1 Rugleuning en 2 achterframebuizen
- ▼ Schroevenset: 9 x onderlegschilden, 4 x schroeven 55 mm, 1 x schroef 35 mm, 4 x schroeven 30 mm
- ▼ 1 Gebruikshandleiding

2.2 EXEMPLARISCHE WEERGAVE

1. Handgreep (bij model TOMTAR DS)
2. Rugleuning (bij model TOMTAR DS)
3. Achterframebuis (bij model TOMTAR DS)
4. Zitting (met handgreep buiten)
5. Uitschuifbare poot
6. Springknop
7. Rubberen voetje



Afb. 1

2.3 ACCESSOIRES

Voor dit product zijn geen accessoires beschikbaar.

3.1 MONTAGE-INSTRUCTIES

De montage en functionele controle worden door de vakhandel uitgevoerd. De monteur van de specialist past het product op de gebruiker aan.



OPMERKING

Lees de gebruikshandleiding voordat u het product monteert en gebruikt.

3.2 GEREEDSCHAP

Voor het monteren is het volgende gereedschap nodig:

- ▼ Kruiskopschroevendraaier


3.3 Montage TOMTAR DH

1. Leg de zitting met de onderkant naar boven op een schone, vlakke en stabiele ondergrond (vloer of tafel) (afb. 2).
2. Om de uitschuifbare poten te monteren worden deze gekruist op de onderkant van de zitting geplaatst. Daarbij ligt de poot met nummer 1 onderaan (afb. 2, 1) en die met nummer 2 (afb. 2, 2) wordt daar overheen geplaatst en in het midden bevestigd (afb. 2, 3). Gebruik daarvoor de volgende onderdelen: 1 × onderlegschiif, 1 × schroef 35 mm.
3. De uitschuifbare poten vastschroeven aan de andere vier voorgeboorde gaten (afb. 2, 4). Gebruik daarvoor de volgende onderdelen: 4 × onderlegschiifven, 4 × schroeven 35 mm.



WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar: Let op uw handen en vingers bij de gehele montage.

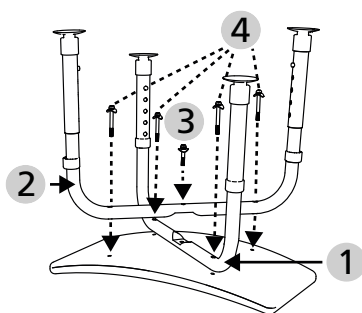

Afb. 2


3.4 Montage TOMTAR DS

1. Leg de zitting met de onderkant naar boven op een schone, vlakke en stabiele ondergrond (vloer of tafel) (afb. 2).
2. Om de uitschuifbare poten te monteren worden deze gekruist op de onderkant van de zitting geplaatst. Daarbij ligt de poot met nummer 1 onderaan (afb. 2, 1) en die met nummer 2 (afb. 2, 2) wordt daar overheen geplaatst en in het midden bevestigd (afb. 2, 3). Gebruik daarvoor de volgende onderdelen:
1 × onderlegschiif, 1 × schroef 35 mm.
3. In de volgende stap zorgt u ervoor dat de gaten in de uitschuifbare poten en de buizen van de rugleuning op elkaar passen en schroeft u alle onderdelen aan de zitting (afb. 3, 1). Gebruik daarvoor de volgende onderdelen:
4 × onderlegschiiven, 4 × schroeven 55 mm.
4. Om de rugleuning te monteren plaatst u de gaten van de rugleuning en de bijbehorende buizen op elkaar en schroeft u de onderdelen aan elkaar (afb. 4, 1).
Gebruik daarvoor de volgende onderdelen:
4 × onderlegschiiven, 4 × schroeven 30 mm.




WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar: Let op uw handen en vingers bij de montage.

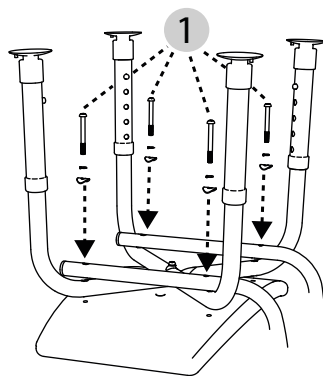

Afb. 3

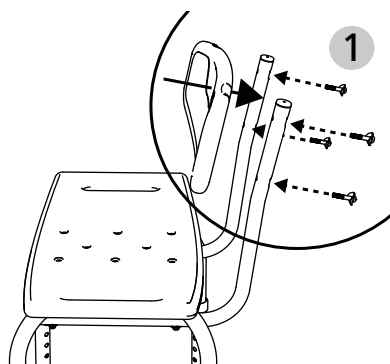

Afb. 4

4.1 Zithoogte instellen

1. De hoogte van het product kan in 6 stappen worden ingesteld. Druk daarvoor de springknoppen op uitschuifbare poten naar binnen (afb. 5, 1).
2. De uitschuifbare poten instellen op de gewenste hoogte (afb. 5, 2) totdat de kop van de springknop weer uit het gat komt en vastklikt (afb. 5, 1).




WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar: Pas op dat uw vingers niet klem raken bij het verstellen van de uitschuifbare poten.

Risico op ongevallen: Zorg dat de springknoppen op de uitschuifbare poten na het verstellen allemaal weer uit een gat naar buiten komen en goed vergrendeld zijn.

Kantelgevaar: Stel alle 4 de uitschuifbare poten op dezelfde lengte in. _____

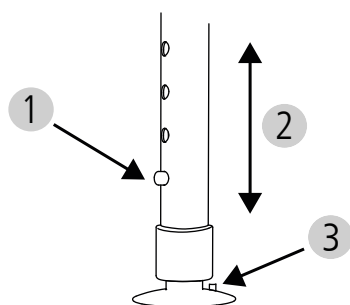

Afb. 5

4.2 Het product optillen

1. Voordat u het product optilt moeten alle zuigvoetjes van de grond worden losgemaakt. Trek daarvoor aan het lipje op de zuigvoet (afb. 5, 3).
2. Houd het losgemaakte voetje boven de grond, zodat hij niet opnieuw vastzuigt.



WAARSCHUWING

Risico op ongevallen: Om te voorkomen dat de springknop en de schroeven tijdens het gebruik losraken, mag u de stoel niet optillen zonder eerst de zuigvoetjes los te maken.

Risico op ongevallen: Het product mag alleen onbezet, aan beide handgrepen van de zitting (links/ rechts) worden opgetild. _____

4.3 Gaan zitten en opstaan

1. Let er bij de plaatsing van de opklapbare douchestoel op dat er voldoende ruimte om te bewegen overblijft. Beide benen moeten stevig kunnen staan en het moet mogelijk zijn om ongehinderd op de stoel te gaan zitten.
2. Ga in het midden (afb. 6, 1) tussen de handgrepen (links/rechts, afb. 6, 2) op de zitting zitten. Laat u eventueel ondersteunen door een begeleider bij het gaan zitten of opstaan.




WAARSCHUWING

Kantelgevaar: Houd er rekening mee dat het zwaartepunt door lichaamsbewegingen wordt verlaagd, waardoor het kantelgevaar van het product groter wordt.

Kantelgevaar: Ga nooit met de voeten op de zitting staan.

Beknellingsgevaar: Ga nooit schrijlings op de zitting zitten.

Risico op ongevallen: Geen olieachtige of sterk zeephoudende substanties met de rubberen voetjes in aanraking laten komen. Het product kan anders wegglijden. _____

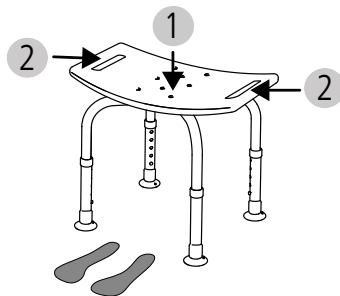

Afb. 6_

4.4 Vervoer

Dit product is niet bedoeld om vaak te worden vervoerd. Als het noodzakelijk is om de stoel te vervoeren, dan raden wij aan om de montagehandleiding in omgekeerde volgorde te volgen en de stoel te demonteren. Het product moet zo worden verpakt, dat hij stevig staat en er geen gevaar kan ontstaan door plotselinge en gevaarlijke bewegingen van het vervoermiddel.

4.5 ACCESSOIRES EN HULPSTUKKEN VAN ANDERE FABRIKANTEN

Voor dit product zijn geen accessoires van DIETZ verkrijgbaar. In het algemeen geldt dat alleen originele accessoires van DIETZ GmbH mogen worden gebruikt. Als er producten van andere fabrikanten op het product worden gemonteerd, gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product over op degene die het accessoire of het hulpstuk heeft gemonteerd. De conformiteit van de combinatie van accessoire/hulpstuk en product moet dan opnieuw worden bevestigd door degene die de montage uitvoert. De door DIETZ bevestigde conformiteit op grond van MDR 2017/745, bijlage I-III, komt hiermee te vervallen.




WAARSCHUWING

Veiligheidsgevaar: Als er hulpstukken of accessoires worden gebruikt die niet door DIETZ worden verkocht, kan de veiligheid van het product niet worden gegarandeerd.

Als er accessoires of hulpstukken op het product worden gemonteerd, moeten altijd de veiligheidsinstructies in de gebruikshandleiding bij het betreffende accessoire of hulpstuk worden opgevolgd.

5.1 ZO WORDEN DE MATEN BIJ DIETZ GEMETEN

De informatie over afmetingen heeft betrekking op de standaardconfiguratie van het product.

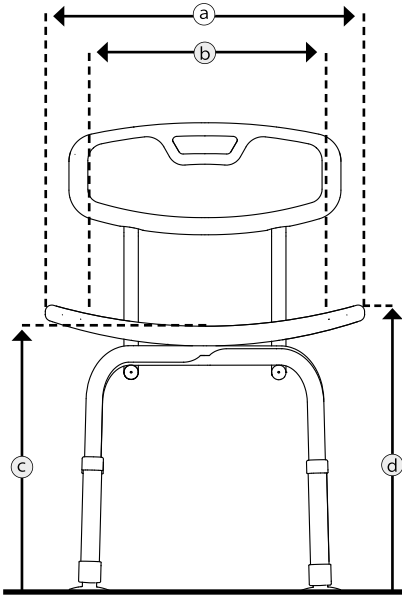


Afb. 7



OPMERKING

Maten gemeten op textielonderdelen (bijv. rughoogte) moeten worden opgevat als richtwaarden met een tolerantie van +/- 10 mm.

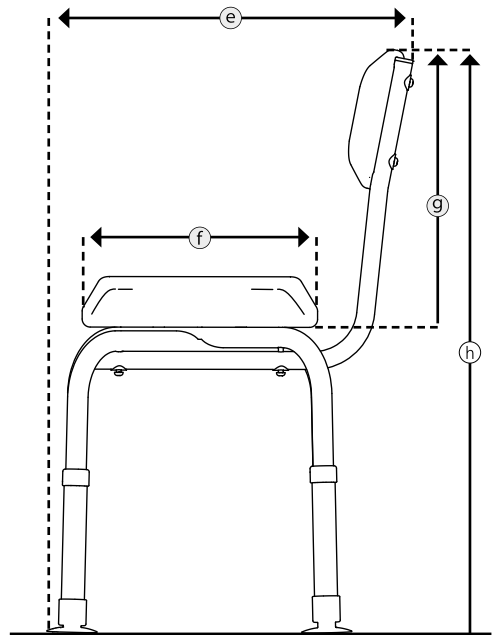

Afb. 8

5.2 AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties			TOMTAR DH	TOMTAR DS
b	Zitbreedte	mm	380	380
f	Zitdiepte	mm	295	295
c	Zithoogte binnen	mm	355 - 505	355 - 505
d	Zithoogte buiten	mm	385 - 535	385 - 535
e	Totale lengte	mm	400	475
a	Totale breedte	mm	490	490
h	Totale hoogte	mm	385 - 535	680 - 830
	Zitting (B × D)	mm	380 × 295	380 × 295
g	Rughoogte	mm	-	335
	Rugleuning (B × H)	mm	-	405 × 175
	Massa van het zwaarste afzonderlijke onderdeel ¹	kg	1,25	1,65
	Totaal gewicht	kg	2	2,8
	Maximaal gebruikersgewicht ²	kg	100	100

¹ Productgewicht zonder verwijderbare onderdelen (hier zonder zitting en rugleuning)

² Maximaal gebruikersgewicht inclusief bijlading / Het gewicht van de bijlading vermindert het maximale gebruikersgewicht.

5.3 PRODUCTCONTROLES

DIN EN 12182	Gecontroleerd conform de vereisten voor de norm hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen
ISO 17966	Getest volgens de voorschriften en testprocedures voor hulpmiddelen voor persoonlijke hygiëne
ISO 10993-5	Gecontroleerd op toxiciteit in het materiaal
Gewicht testdummy	100 kg

5.4 MEER INFORMATIE

Specificaties		
Kleuren		Wit
Zitting	kg	0,75
Rugleuning	kg	0,4
Omgevingstemperatuur bij gebruik		10 °C tot +40 °C
Omgevingsvoorwaarden bij opslag		0 °C tot 45 °C / 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid


5.5 MATERIALEN

Frame en uitschuifbare poten	Aluminium (gelakt)
Rugleuning / zitting	Hard-polyethyleen / HDPE
Springknop	Roestvrij staal
Eindkappen rugbuis	Polypropyleen / PP
Rubberen voetjes	Polyvinylchloride / PVC
Kunststof manchet uitschuifbare poot	Polyethyleen / PE
Schroeven, verbindingen	Roestvrij staal

Opmerking: Alle gebruikte metalen zijn corrosiebestendig

5.6 PRODUCTMARKERING

Type- en waarschuwingsplaatjes op het product moeten leesbaar blijven. Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes direct door uw specialist vervangen. Het serienummer, dat een product eenduidig identificeert, bevindt zich op het typeplaatje onder de zitting. Dit mag niet worden verwijderd.

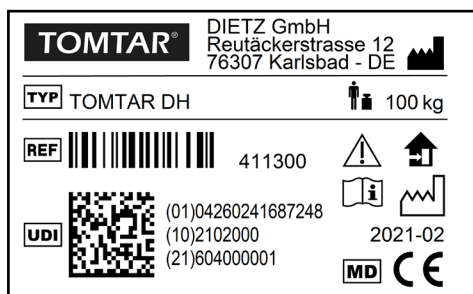

Afb. 9

	Handelsmerk
	Type/model
	REF = artikelnummer
	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI / GTIN (10) Bestelnummer (21) Serienummer
	Fabrikant/fabrikantsymbool/ contactadres
	Maximum gebruikersgewicht incl. bijlading
	Productiedatum
	Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt
	Instructies in de gebruikshandleiding opvolgen
	Let op: Veiligheidsinstructies zijn in de gebruikshandleiding vermeld!
	Medical Device / medisch hulpmiddel
	CE-markering MDR 2017/745 Bijlage I-III

6.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem bij het gebruik van uw product altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht om vallen, gevaarlijke situaties en schade aan het product te voorkomen:

- ▼ Het product mag alleen binnenshuis en op een vlakke, stabiele ondergrond worden gebruikt.
- ▼ Gebruik het product niet als opstaphulp en ga er niet op staan.
- ▼ Het product niet eenzijdig belasten.
- ▼ Er bestaat een gevaar op uitglijden in vochtige badkuipen of doucheruimtes, met name bij het gaan zitten en opstaan, vooral als er doucheproducten (bv. zeep, vloeibare zeep of shampoo) zijn gebruikt.
- ▼ Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen. Een beschadigd product mag niet worden gebruikt.
- ▼ Controleer na elke demontage en hermontage van de douchestoel de stabiliteit en zorg ervoor dat alle uitschuifbare poten op dezelfde lengte zijn afgesteld.
- ▼ In geval van ernstig verminderde mobiliteit, het product gebruiken met de hulp van een begeleider.
- ▼ Door heet water of straling van de zon kan het oppervlak van het product heet worden. Verbrandingsgevaar!
- ▼ Ernstige incidenten in samenhang met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.

7.1 ONDERHOUD

Ter garantie van een veilig gebruik van het product adviseren wij om de controles volgens het onderhoudsrooster regelmatig uit te voeren.

Onvoldoende of verwaarloosd onderhoud van het product zal leiden tot beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsrooster geeft geen informatie over de daadwerkelijk benodigde werkzaamheden aan het product.



OPMERKING

Als gebruiker bent u de eerste die mogelijke schade kunt opmerken. Als u een defect zoals is genoemd in het onderhoudsrooster, of eventuele andere defecten of functiebeperkingen vaststelt, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met een geautoriseerde specialist. _____



WAARSCHUWING

Om de bedrijfsveiligheid van het product te behouden, mogen reparaties aan het product uitsluitend door de vakhandel en met gebruik van DIETZ-reserveonderdelen worden uitgevoerd. De bijpassende catalogus met reserveonderdelen vindt u op onze website bij de informatie over uw product. _____



OPMERKING

De in het onderhoudsrooster vereiste inspecties en maatregelen moeten, indien niet anders is vermeld, door de gebruiker of door de helper worden uitgevoerd. _____



OPMERKING VOOR SPECIALISTEN:

Als de gebruiker afwijkingen aan het product vaststelt, controleer dan alle inspectiepunten die in het onderhoudsrooster zijn opgenomen. De controles moeten ook voor elke heringebruikname en na langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd _____.

7.2 ONDERHOUDSROOSTER

Wat	Omschrijving	maandelijks voor gebruik <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 5px;"> ↙ ↘ </div>	
Frame controleren op beschadigingen	Controleer of het frame verbogen of gebroken is.  Is er sprake van dergelijke schade, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem voor reparatie direct contact op met uw specialist.		x
Zitting en rugleuning op functie en beschadiging controleren	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de zitting, de vergrendelingspal en de rugleuning op de juiste manier geplaatst zijn. 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> Controleren op breuken en materiaalschade  Wordt dergelijke schade vastgesteld, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem voor reparatie direct contact op met uw specialist. 		x
Boutverbindingen controleren of ze vastzitten	<ul style="list-style-type: none"> Alle bouten moeten stevig aangedraaid zijn.  Bouten werken minder goed als ze herhaaldelijk worden losgemaakt en vastgedraaid. Daarom moeten deze door een geautoriseerde specialist worden vervangen. 	x	
Rubberen voetjes controleren op beschadigingen	 Defecte rubberen voetjes dienen direct te worden vervangen.		x
Visuele controle Controle op losse onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	 Wordt dergelijke schade vastgesteld, dan mag het product niet meer worden gebruikt, omdat een veilig gebruik niet meer is gegarandeerd. Neem contact op met uw specialist.		x
Gehele product controleren op vervuiling	<ul style="list-style-type: none"> Alle onderdelen van het product die met huid in aanraking komen moeten na ieder gebruik worden gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd. 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijk van de mate van vervuiling, maar ten minste maandelijks, moet het gehele product worden gereinigd/gedesinfecteerd (zie hoofdstuk "Reiniging en desinfectie"). 		x

7.3 REINIGING

Voor het reinigen van het product gebruikt u lauwwarm water met een mild schoonmaakmiddel (zonder oplosmiddelen en met een pH-waarde van 5-9). Na het reinigen met schoon water afwissen en het product met een doek droogwrijven.



WAARSCHUWING

Materiaalschade: Gebruik voor het schoonmaken geen hogedrukreiniger, geen agressieve, bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen.

Corrosiegevaar: Om corrosie te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle materialen na het reinigen volledig droog zijn. _____

7.4 DESINFECTIE

Alle onderdelen grondig desinfecteren met een geschikt oppervlaktedesinfectiemiddel. Daarbij is het aan te raden onderdelen die vaak met handen of huid in aanraking komen (bijv. zitting, rugleuning en armsteunen) bijzonder zorgvuldig te desinfecteren.

De volgende desinfectiemiddelen zijn geschikt voor het materiaal:

- ▼ aldehydevrije desinfectie op basis van alcohol (max. 70 % propylalcohol)



WAARSCHUWING

Materiaalschade: Volg bij het desinfecteren de gebruikshandleiding van de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen.

Infectiegevaar: Het product moet voor elke gebruikerswissel worden gedesinfecteerd. _____

7.5 RECYCLING

Als u het product niet meer nodig hebt, neem dan contact op met uw erkende specialist die het dan komt ophalen en het op de juiste wijze afvoert of opnieuw gebruikt. Als dit niet mogelijk is kunt u het product naar uw plaatselijke milieustraat brengen.

7.6 DOORGIFTE EN HERGEBRUIK

Uw product is geschikt om door te geven/opnieuw te gebruiken. Hoe vaak doorgifte mogelijk is, hangt af van de slijtagetoestand van het materiaal en de werking van het product.

Vergeet niet bij het doorgeven en hergebruiken van het product aan een nieuwe gebruiker of de specialist alle technische documentatie te overhandigen die nodig is voor een veilig gebruik.

Het product moet worden gereinigd, gedesinfecteerd en gecontroleerd op beschadigingen en goedgekeurd door een erkende specialist voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Daartoe moeten alle in het onderhoudsrooster vermelde inspectiepunten op het product worden gecontroleerd.

7.7 OPSLAG

Als u het product wilt opslaan, zorg er dan voor dat het droog is, beschermd tegen sterk zonlicht en bewaard bij een temperatuur van 0 °C tot +45 °C. Bescherm het product tegen omvallen of beweging op de opslagplaats.

Na een langere opslagduur (> 4 maanden) moeten bij een hernieuwde ingebruikname alle in het onderhoudsrooster genoemde controlepunten bij het product worden gecontroleerd.



WAARSCHUWING

Materiaalschade: Bewaar het product niet in de buurt van een warmtebron en plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product. _____

8.1 GARANTIE

De garanties hebben betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de melding van de verzending, uiterlijk vanaf de levering. Uitgesloten van de garantieverplichting

zijn beschadigingen die zijn ontstaan door slijtage, kwade opzet, nalatigheid of ondoelmatig gebruik. Hetzelfde geldt voor het gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, olies en vetten.

8.2 LEVENSDUUR

De te verwachten levensduur bedraagt vijf jaar, uitgaande van dagelijks gebruik conform het beoogde gebruiksdoel. Voorwaarde hiervoor is dat de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften

zoals vermeld in deze gebruikshandleiding worden nageleefd.

De indicatie over de levensduur is geen extra garantie.

8.3 AANSPRAKELIJKHEID

DIETZ GmbH aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de producten onder de voorgeschreven voorwaarden voor het voorgeschreven gebruiksdoel worden gebruikt. Wij adviseren de producten zorgvuldig te onderhouden en te verzorgen zoals in de gebruikshandleiding is beschreven. Voor schades veroorzaakt door (vervangende) onderdelen die niet door DIETZ GmbH zijn geautoriseerd, is DIETZ GmbH niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde specialisten of door de fabrikant zelf worden uitgevoerd.

TOMTAR®



Productgroep: Badkamer & WC
product: TOMTAR DH/DS
Gebruikshandleiding versie 1.4 NL
Status 2024-01 (PRO)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
Duitsland

Tel.: +49 7248.9186-0
Fax: +49 7248.9186-86
info@dietz-reha.de
www.dietz-rehab.de

TOMTAR is een geregistreerd merk van DIETZ GmbH.

De verkoop van TOMTAR-producten wordt afgehandeld door DIETZ GmbH.

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen en prijs- en productwijzigingen.
© DIETZ GmbH, Karlsbad, Duitsland
Verveelvoudiging, ook deels, uitsluitend met schriftelijke toestemming van
DIETZ GmbH, Karlsbad (Duitsland).



DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Duitsland