

TOMTAR®

FAKTO+Arthritis

Arthritis rollator

Gebruikshandleiding

Versie 1.2.1 NL



Hartelijk dank voor uw keuze voor de FAKTO+ Arthritis rollator van DIETZ.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door, voordat u uw nieuwe FAKTO+ Arthritis gebruikt. U vindt hierin belangrijke informatie die u in staat zal stellen de technische voordelen ten volle te benutten.

Ook vindt u hier instructies om uw Arthritis rollator veilig te kunnen gebruiken en de waarde ervan zo goed mogelijk te behouden.


Als u meer informatie wilt over zorg en medische hulpmiddelen, kunt u contact opnemen met uw vakhandel.

Deze gebruikshandleiding bevat alle nodige aanwijzingen voor het instellen en bedienen van de FAKTO+ Arthritis rollator.



OPMERKING

Als u de gebruikshandleiding in groter formaat wilt inzien, kunt u deze via **www.dietz-reha.de** downloaden in pdf-formaat.

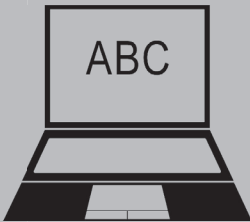

01 Belangrijke informatie

Algemeen 4

Gebruiksdoel 4

Indicatie 4

Contra-indicaties 4

Tekens en symbolen 5

02 Productbeschrijving

Leveringsomvang 5

Opbouw van de FAKTO+ Arthritis 6

03 Ingebruikname rollator

Montage 7

Rollator uitklappen 7

Armsteunen monteren 7

Armsteunen & handvatten instellen 8

Controle van de montage 8

04 Rollator gebruiken

Inklapvergrendeling 9

Remmen en blokkeerrem 9

Remmen afstellen 10

Remmen afstellen aan de kabel 10

05 Accessoires / hulpstukken

Mandje (standaard meegeleverd) 10

Plank (standaard meegeleverd) 10

Tafelblad (standaard meegeleverd) 11

Eénhandsrem (optioneel) 11

Uitbreidingen en accessoires van andere aanbieders 11

06 Veiligheidsinstructie

Veiligheidsinstructies 12

07 Opmerkingen over het gebruik

Reparatie/onderhoud 14

Onderhoudsrooster FAKTO+ Arthritis 15

Storingen zoeken en verhelpen 16

Reiniging 18

Desinfectie 18

Doorgifte en hergebruik 19

Opslag 19

Recycling 19

Productkenmerking 20

08 Fabrikantverklaringen

Garantie 21

Levensduur 21

Aansprakelijkheid 21

09 Technische gegevens

Afmetingen en technische gegevens 22

Productcontroles 23

Omgevingsvoorwaarden 23

Bepaling van de identificatiegegevens 23

ALGEMEEN

Deze gebruikshandleiding is bedoeld als basisinformatie voor alle gebruikers en eventueel verzorgend personeel om de FAKTO+ Arthritis veilig te kunnen gebruiken.

De handleiding beschrijft de voorbereiding, het gebruik, het onderhoud en de verzorging van uw rollator. Om volledig te kunnen profiteren van de werking en om de veiligheid te waarborgen, moet u de instructies altijd naleven. Zorg ervoor dat de gebruikshandleiding bereikbaar blijft voor de gebruiker.

Deze gebruikshandleiding maakt deel uit van de leveringsomvang. Wijzigingen door technische ontwikkelingen ten opzichte van de in deze gebruikshandleiding getoonde uitvoeringen voorbehouden. Voor kopieën, vertalingen en verveelvoudiging in welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van DIETZ GmbH noodzakelijk.

Het auteursrecht behoort de fabrikant toe. Voor deze gebruikshandleiding worden aanpassingen niet doorgegeven. De actuele geldige versie kunt u bij DIETZ GmbH opvragen.

GEBRUIKSDOEL

De FAKTO+ Arthritis dient als loophulp en gedeeltelijk ook als zitgelegenheid om even uit te rusten voor personen met beperkte mobiliteit - ook bij reuma en artritis - tot maximaal 120 kg lichaamsgewicht.

De rollator is bedoeld voor huiselijk en (poli) klinisch gebruik en dient uitsluitend te worden gebruikt op een vaste en vlakke ondergrond in binnenruimtes.

Het gebruiksdoel kan afwijken bij producten die op maat zijn gemaakt. Dit wordt in zo'n geval aangegeven. In dat geval moet ook de met dat product meegeleverde documentatie worden geraadpleegd.

INDICATIE

Het gebruik van de FAKTO+ Arthritis is geïndiceerd bij

- ▼ loopmoeilijkheden als gevolg van beperkingen van het actieve of passieve bewegingsapparaat
- ▼ coördinatieproblemen tijdens de loopfase
- ▼ verminderde belastbaarheid
- ▼ reuma of artritis

CONTRA-INDICATIES

Het gebruik van de FAKTO+ Arthritis is niet geïndiceerd bij

- ▼ waarnemingsstoornissen,
- ▼ ernstige evenwichtsstoornissen
- ▼ en een lichaamsgewicht van meer dan 120 kg

De FAKTO+ Arthritis mag niet worden gebruikt als opstaphulp, transporthulp voor zware lasten of vergelijkbare doeleinden.

De FAKTO+ Arthritis is niet geschikt voor kinderen.

TEKENS EN SYMBOLEN

Deze symbolen wijzen op tekstpassages die nuttig zijn voor het alledaagse gebruik van dit product.



WAARSCHUWING

Waarschuwingen moeten altijd worden nageleefd!

Ze wijzen u erop dat bij niet-naleving letselgevaar kan ontstaan en/of schade aan de rollator of de omgeving kan worden toegebracht. _____



OPMERKING

Tips en suggesties die het gebruik van functies makkelijker maken. _____

LEVERINGSOMVANG

De leveringsomvang van de FAKTO+ Arthritis bevat:

- ▼ FAKTO+ Arthritis rollator
- ▼ Winkelmand
- ▼ Tafelblad
- ▼ Gebruikshandleiding
- ▼ Kunststof plank
- ▼ Reflectoren

Optionele accessoires:

- ▼ Eénhandsrem
Art.-nr. 290107 (links)
Art.-nr. 290108 (rechts)

Controleer nadat u de rollator heeft uit-gepakt uit de verpakking of deze volledig en onbeschadigd is. Als de inhoud herkenbaar beschadigd is, moet dit onmiddellijk worden gemeld bij de transporteur.



WAARSCHUWING


Verstikkingsgevaar! Houd verpakkings- en beschermingsfolie uit de buurt van kinderen! _____



WAARSCHUWING

Gevaar door giftige dampen! Folies niet verbranden! Bij verbranding kunnen giftige gassen ontstaan. _____

OPBOUW VAN DE FAKTO+ ARTHRITIS

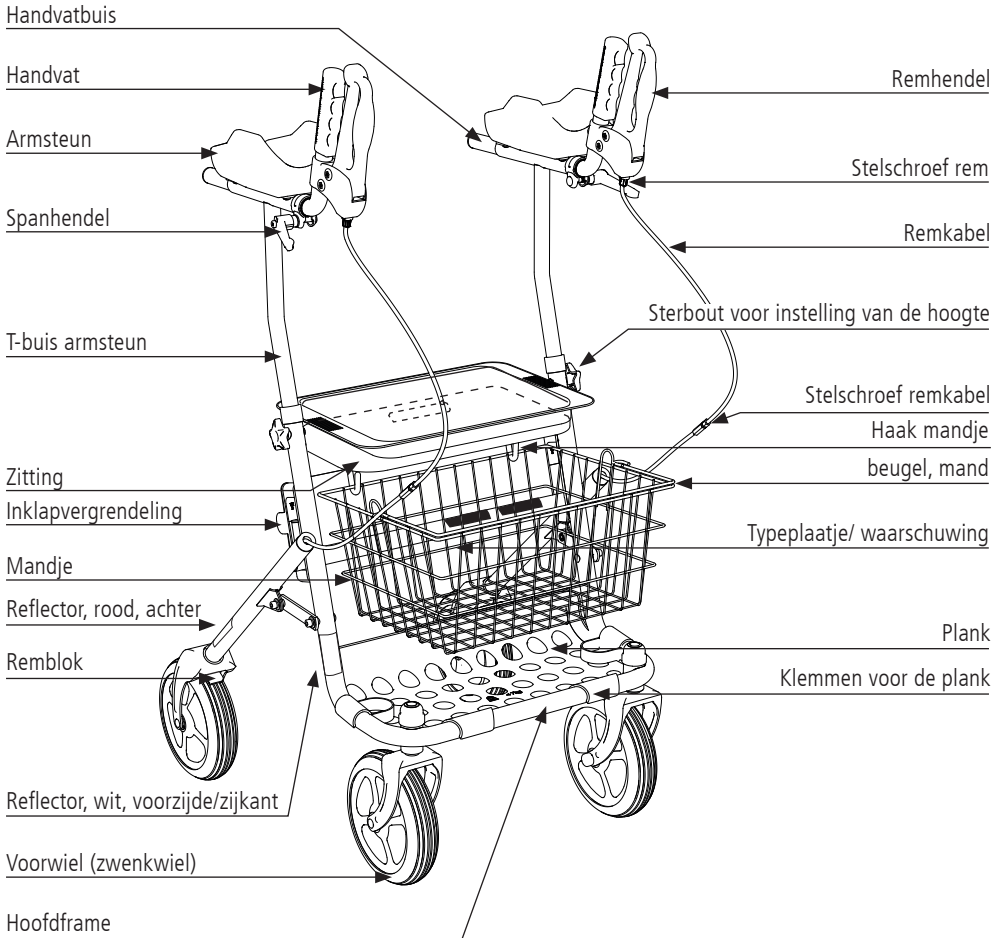

OPMERKING

De bovenstaande afbeelding helpt u om de afzonderlijke onderdelen van uw FAKTO+ Arthritis duidelijk te herkennen. Bij het lezen van deze gebruikshandleiding kunt u deze telkens opnieuw raadplegen.

MONTAGE


Leg de onderdelen van uw rollator op de grond. Door de remkabels zijn de handvatbuizen al verbonden aan het hoofdframe. Leg deze rechts en links naast het hoofdframe.

Rollator uitklappen


Houd het hoofdframe vast bij het handvatgat (1, afb. 1) van de stoel en zet deze met de voorwielen (zwenkwielen) op de grond. Het gat moet zich bevinden aan de zijde die van u is afgekeerd.

Buig u over het hoofdframe en grijp het van afgekeerde deel van het frame, om het frame uit te klappen (2, afb. 1).

Nu kunt u de rollator met alle vier wielen op de grond plaatsen en door de zitting naar beneden te drukken volledig uitklappen.

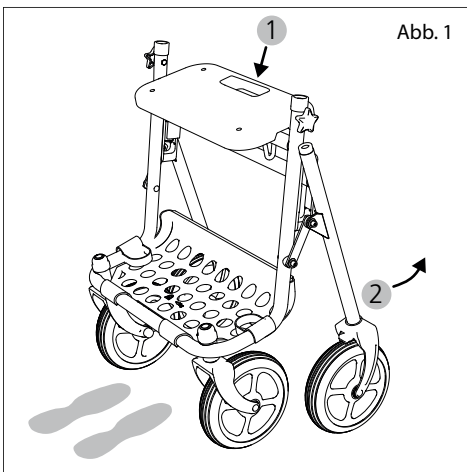

Om de inklapvergrendeling vast te zetten, klapt u de hendel naar beneden totdat deze vastzit in de geleider (1, afb. 2).

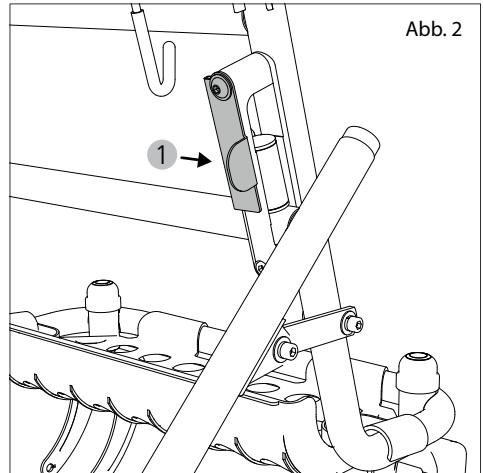

OPMERKING

De FAKTO+ Arthritis moet op uw individuele grootte worden ingesteld voordat u deze correct kunt gebruiken. Deze instelling moet door een geschoold persoon worden uitgevoerd. —


Armsteunen monteren

Draai de sterbouten van beide T-buizen los. U kunt nu de T-buizen (1, afb. 3) in de verticale buizen van het frame schuiven.

De spanhendel (3, afb. 3) aan de bovenkant van de T-buizen moeten in de richting van de voorwielen wijzen.

Schuif nu de handvatbuis van voren in het horizontale element van de T-buis (2, afb. 3), zodat de kant met het handvat en de remmen in rijrichting naar boven wijzen en zet de spanhendel vast (3, afb. 3).

Zet nu de blokkeerrem vast door de remhendel van u af te duwen. (Zie ook het hoofdstuk "Remmen en blokkeerrem")

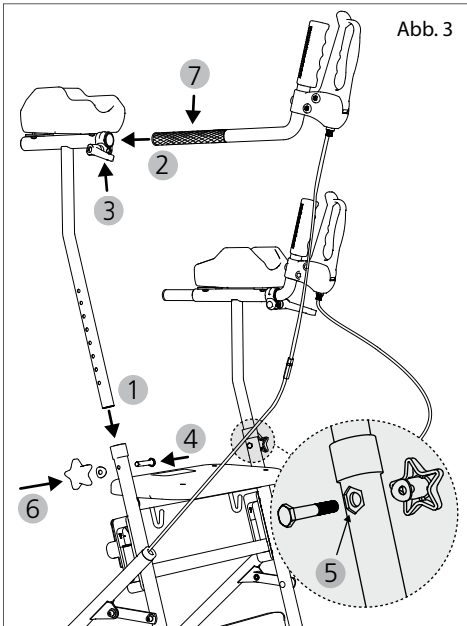

Armsteunen & handvatten instellen

Stel nu de juiste hoogte voor de armsteunen en de positie van de handvatten in. Plaats daarvoor de zeskantschroef (4, afb. 3) vanuit de binnenkant van het frame door het geboorde gat.

Leg nu de gebogen onderlegschiif over de schroefdraad. Let er hierbij op dat de kop van de zeskantschroef in de "zeshoekige uitsparing" (5, afb. 3) van de framebuis zit. U kunt de sterbout (6, afb. 3) zonder gereedschap aandraaien.


Controleer nu de positie van de handvatbuizen. Deze kunt u qua diepte aanpassen aan de lengte van uw onderarmen.

Let erop dat de handvatbuis uitsluitend op het geribbelde gedeelte (7, afb. 3) in de T-buizen

vast wordt gezet.

Om de stabiliteit van de rollator niet te verslechteren mag het uiteinde van de handvatbuis (8, afb. 4) niet in de T-buis verdwijnen!

Om de handvatbuis vast te zetten trekt u de spanhendel aan en stelt u deze zo in, dat de hendel in de tegenovergestelde richting van de rijrichting wijst (9, afb. 4).

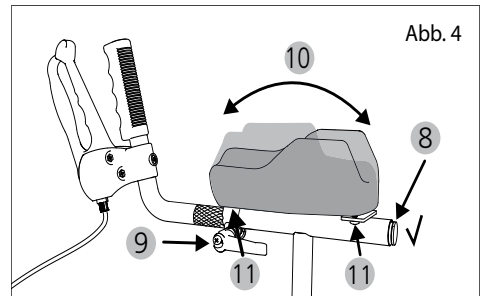

De zijkanten van de armsteunen van PU-schuim zijn aan een kant verhoogd. Als u een omgekeerde plaatsing van de armsteun comfortabeler vindt, is het mogelijk om deze om te draaien (10, afb. 4). Daarvoor moeten per armsteun aan de andere kant vier schroeven worden losgedraaid met een kruiskopschroevendraaier (11, afb. 4). Vraag dit aan uw specialist.

Controle van de montage

Controleer nu of de rollator correct gemonteerd is:


- ▼ De rollator moet veilig op alle vier wielen staan.
- ▼ De sterbouts en spanhendels moeten stevig zijn aangetrokken.
- ▼ De handvatbuizen en T-buizen met de armsteunen moeten stevig gemonteerd zijn en niet kunnen draaien.

Als u twijfelt of de rollator correct gemonteerd is, kunt u uw verkooppunt of een erkende specialist raadplegen.

ARTHRITIS ROLLATOR GEBRUIKEN

Maak uzelf voor het eerste gebruik vertrouwd met uw FAKTO+ Arthritis, zodat u zich veilig voelt tijdens het gebruik.

Inklapvergrendeling

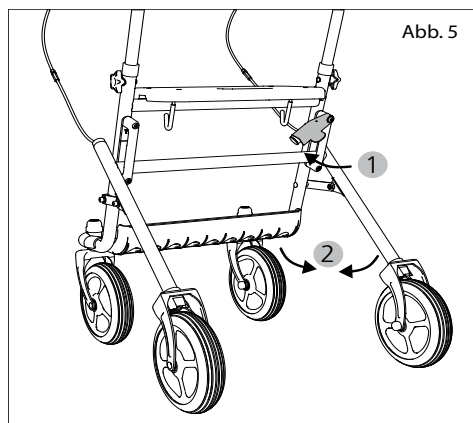

Na elk uitklappen moet de rollator vergrendeld worden. Zorg ervoor dat de inklapvergrendeling goed op zijn plek in de onderste positie zit. Om de vergrendeling los te kunnen maken en in te klappen, moet u eerst het tafelblad en het mandje verwijderen. Druk de inklapvergrendeling vervolgens naar boven (1, afb. 5) en schuif het voorste en achterste deel van het frame naar elkaar toe (2, afb. 5).

Lees voor meer informatie over de inklapvergrendeling ook het hoofdstuk „Rollator uitklappen”.




WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar! Pas op uw handen en vingers tijdens het bedienen van de inklapvergrendeling en het uit- en inklappen van de rollator! _____

Remmen en blokkeerrem

De remmen worden bediend met de aan de handvaten gemonteerde remhendels.

Om te remmen tijdens het gebruik (bedrijfsrem) trekt u beide remhendels gelijkmatig naar u toe (1, afb. 6).

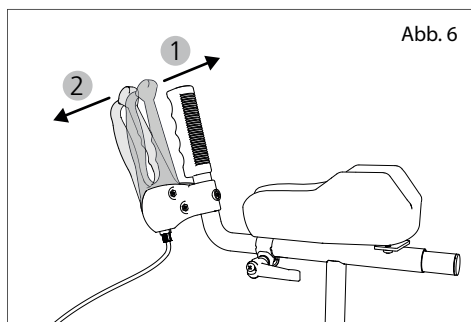

Om de rollator veilig en langdurig vast te zetten, bijv. om te zitten, drukt u de remhendel stevig van u af (2, afb. 6).

De remhendel blijft vast staan in deze positie. Om de rem te lossen trekt u de remhendel naar u toe. Het is duidelijk te voelen, dat de rem lost.




WAARSCHUWING

Foutief werkende remmen! Neem contact op met een erkende specialist of een geschoolde monteur voor het afstellen van de remmen! _____

Remmen afstellen

Aan de remhendels vindt u stelschroeven voor de remkabels. Door losdraaien (tegen de klok in) verhoogt u de spanning en vermindert u de afstand die de remhendel moet worden ingeknepen (1, afb. 7). De schroef is vastgezet met een moer (2, afb. 7). Draai na het bijstellen deze moer stevig aan, om te vermijden dat de remkabels vanzelf losser worden.

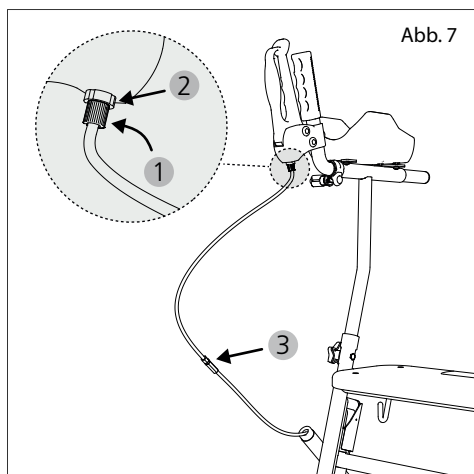

Remmen afstellen aan de kabel

De remmen kunnen ook aan de kabel (3, afb. 7) verder worden afgesteld. Dit kan nuttig zijn als de bijstelling aan de remhendels (beschreven in de vorige paragraaf) geen effect meer heeft. Ook hier moet u na het afstellen de borgmoer stevig aandraaien.



WAARSCHUWING

Foutief werkende remmen! Draai de schroef er nooit volledig uit, omdat anders de rem niet meer werkt.

ACCESSOIRES

Gebruik alleen originele accessoires van DIETZ. Alleen dan is de conformiteit en daarmee de veiligheid van het product gewaarborgd.

Mandje (standaard meegeleverd)

De onder de zitting geplaatste draadmand is bedoeld voor het bewaren en vervoeren van grotere voorwerpen of goederen tot max. 5 kg. Als u de mand wilt verwijderen, tilt u deze van de haak onder de zitting. U kunt de beugel nu naar boven klappen en de mand daar aan dragen.

Voor het vastmaken aan de rollator hangt u de mand weer in de haak.

Controleer voordat u iets in het mandje doet of het mandje stevig hangt.

Plank (standaard meegeleverd)

De plank onder het mandje is bedoeld voor het transporteren van grotere voorwerpen tot max. 7 kg, bijv. uw boodschappentas.

Als u de plank wilt schoonmaken, dan kunt u deze bij de klemmen, die om de framebuis zitten, naar boven optillen.

Om de plank terug te plaatsen drukt u de klemmen weer om de framebuis en controleert u of deze stevig zit.

Tafelblad (standaard meegeleverd)

Het tafelblad is bedoeld voor het binnenshuis transporteren van kleine voorwerpen tot max. 5 kg.

Het blad moet op de zitting worden geplaatst. Aan de onderzijde van het tafelblad zijn vier pennen aangebracht, die u in de vier gaten in de zitting kunt plaatsen.



WAARSCHUWING

Verbrandingsgevaar! Transporteer geen hete voorwerpen of dranken op het tafelblad! _

Eénhandsrem (optioneel)

Mocht u in een van beide handen over onvoldoende kracht beschikken voor een veilige bediening van de remmen, dan kan de FAKTO+ Arthritis optioneel worden uitgerust met een éénhandsrem. Deze moet door een erkende specialist op de rollator worden gemonteerd.

- ▼ Voorwaarde voor het uitrusten van uw rollator met een éénhandsrem is dat u in de hand waarmee u gaat remmen over voldoende kracht beschikt om een veilig gebruik te kunnen garanderen.
- ▼ Dezelfde gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn geldig als voor de uitvoering met remhendels aan beide handvatten.

UITBREIDINGEN EN ACCESSOIRES VAN ANDERE AANBIEDERS

In het algemeen geldt dat alleen originele accessoires van DIETZ GmbH mogen worden gebruikt. Als er producten van andere fabrikanten op de rollator worden gemonteerd, gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product over op degene die het accessoire of het hulpstuk heeft gemonteerd. De conformiteit van de combinatie van accessoire/hulpstuk en product moet dan opnieuw worden bevestigd door degene die de montage uitvoert. De door DIETZ bevestigde conformiteit op grond van MDR 2017/745, bijlage II, komt hiermee te vervallen.



WAARSCHUWING

Productveiligheid! Als er hulpstukken of accessoires worden gebruikt die niet door DIETZ worden verkocht, kan de veiligheid van het product niet worden gegarandeerd. _____



WAARSCHUWING

Productveiligheid! Als er accessoires of hulpstukken op de rollator worden gemonteerd, moeten altijd de veiligheidsinstructies in de gebruikshandleiding bij het betreffende accessoire of hulpstuk worden opgevolgd. _____

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Als de FAKTO+ Arthritis conform het beoogde bestemmingsdoel wordt gebruikt zoals is aangegeven in deze gebruikshandleiding, levert het gebruik geen gevaren op.



WAARSCHUWING

Letselgevaar! Volg alle veiligheidsinstructies op, anders kan er letselgevaar ontstaan! _____

- ▼ De rollator mag alleen in binnenruimtes en op een vaste en vlakke ondergrond worden gebruikt!
- ▼ De rollator moet stevig op alle vier de wielen staan!
- ▼ Controleer vóór gebruik van de rollator of alle gemonteerde onderdelen goed vastzitten, of de remmen werken en of de inklapvergrendeling vastgeklikt is.
- ▼ Blokkeer altijd beide remmen voordat u op de zitting van de rollator gaat zitten.
- ▼ De zitting van de rollator is alleen bedoeld voor korte zitperiodes, bijvoorbeeld voor een korte pauze tijdens een wandeling!
- ▼ Let op: bij een evenwichtsverschuiving als gevolg van lichaamsbewegingen kan het risico dat de rollator kantelt, groter worden.
- ▼ Hang geen tassen aan de handvatten, omdat ook hierdoor het kantelrisico toeneemt.
- ▼ Door de hoge armsteunen bestaat er in het algemeen een hoger kantelrisico bij het opstaan en rijden met de rollator. Let er daarom altijd op dat u de belasting op de rollator gelijkmatig verdeelt!
- ▼ Pas op uw handen en vingers tijdens het bedienen van de inklapvergrendeling en het uit- en inklappen van de rollator! Pas op! Beknellingsgevaar!
- ▼ Overschrijd nooit de maximale belasting van 120 kg voor gebruiker inclusief lading.
- ▼ Stel de rollator niet langdurig bloot aan direct zonlicht of lage temperaturen, omdat onderdelen (bijv. frame of handvatten) zeer heet ($> 41^{\circ}\text{C}$) of zeer koud ($< 0^{\circ}\text{C}$) kunnen worden en daardoor verwondingen aan de huid kunnen ontstaan.
- ▼ Zorg ervoor dat de rollator nooit in de directe omgeving van nooduitgangen en vluchtwegen geplaatst wordt en deze blokkeert.
- ▼ Gebruik de rollator nooit onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht of reactievermogen kunnen beïnvloeden.
- ▼ Gebruik de rollator uitsluitend voor het beschreven doel. Rijd er niet ongeremd mee tegen obstakels zoals traptreden of randen aan.

- ▼ De rollator is niet geschikt voor kinderen en mag niet voor andere dan het bedoelde doeleinde worden gebruikt!
- ▼ Als u op de rollator zit, mag u die niet met uw voeten voortbewegen of door andere personen worden geduwd. Hierdoor ontstaat letselgevaar en kan schade aan het product worden veroorzaakt.
- ▼ Houd u zich op de openbare weg aan de verkeersregels.
- ▼ Draag indien mogelijk lichte, opvallende kleding en let erop dat de reflectoren altijd goed zichtbaar zijn. Zo wordt u beter gezien door de andere weggebruikers.
- ▼ Gebruik de rollator nooit om te zitten in een voertuig, ook niet in het openbaar vervoer. Anders levert dat een verhoogd valrisico op!
- ▼ Gebruikt de rollator nooit op een roltrap, omdat daar een verhoogd valrisico bestaat!
- ▼ Trappen mogen alleen met ondersteuning van hulppersonen worden beklommen, voor zover er geen lift of hellingbanen aanwezig zijn.
- ▼ De lagers in de wielen kunnen beschadigd raken door inwerking van zand, zeewater of strooizout. Als u deze omstandigheden met de rollator bent tegengekomen, moet u deze daarna grondig reinigen.
- ▼ Rails en dergelijke obstakels moet u, als u deze niet kunt ontwijken, altijd in een rechte hoek (90°) oversteken.
- ▼ De rollator mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van zware goederen. Voorwerpen mogen alleen op de plank, in de mand of op het tafelblad worden vervoerd, zoals is beschreven in hoofdstuk 'Accessoires'.
- ▼ Ernstige incidenten met de rollator moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.
- ▼ Als u een functiebeperking bij uw rollator vaststelt, breng deze dan onmiddellijk voor reparatie naar uw erkende specialist.
- ▼ Voorafgaand aan de ingebruikneming na opslag langer dan een jaar moeten alle in het onderhoudsrooster vereiste inspecties worden uitgevoerd.
- ▼ Als u een product op maat hebt (zie het hoofdstuk "Productkenmerking") dienen behalve de gewone gebruikshandleiding ook de bijkomende documentatie incl. alle veiligheidsinstructies in acht te worden genomen.

REPARATIE/ONDERHOUD

Ter garantie van een veilig gebruik van de rollator adviseren wij om de controles volgens het onderhoudsrooster regelmatig uit te voeren.

Als de verzorging en het onderhoud van de rollator gebrekkig is of wordt verwaarloosd, leidt dat tot beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsrooster geeft geen informatie over de daadwerkelijk benodigde werkzaamheden aan de rollator.



OPMERKING

Als gebruiker merkt u mogelijke schade als eerste. Als u een defect zoals is genoemd in het onderhoudsrooster, of eventuele andere defecten of functiebeperkingen vaststelt, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met een erkende specialist. _____



OPMERKING

De in het onderhoudsrooster vereiste inspecties en maatregelen moeten, indien niet anders is vermeld, door de gebruiker of door een helper worden uitgevoerd. _____



WAARSCHUWING

Om de bedrijfsveiligheid van de rollator te behouden, mogen reparaties uitsluitend door de vakhandel en met gebruik van DIETZ-reserveonderdelen worden uitgevoerd. Het bijbehorende service-handboek en de lijsten met reserveonderdelen vindt u op onze website. _____




OPMERKING VOOR ERKENDE SPECIALISTEN

Als de gebruiker onregelmatigheden bij de rollator meldt, vragen we u om alle controlepunten in het onderhoudsrooster na te lopen. De controles moeten ook voor elke heringebruikname en na langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd. _____

ONDERHOUDSROOSTER FAKTO+ ARTHRITIS

Te controleren	Omschrijving	maandelijks voor gebruik	
Remmen/ blokkeerremmen: Functie	<p>Met naar voren gedrukte/geblokkeerde remhendels (blokkeerrem) of aangetrokken remhendels (bedrijfsrem) mogen de achterwielen niet kunnen draaien.</p> <p> De remmen moeten opnieuw worden ingesteld als de remkabels of de achterwielen zijn vervangen. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door een erkende specialist worden uitgevoerd.</p>	x	
Handvatbuizen en T-buizen: Stabiliteit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sterbout en spanhendel van de handvatbuizen en T-buizen moeten stevig vastgezet kunnen worden. 2. De armsteunen en handvatbuizen mogen niet wiebelen en niet kunnen draaien. 	x	
Inklapvergrendeling en vouwmechanisme: Werking & veiligheid	<ol style="list-style-type: none"> 1. De hendel van de inklapvergrendeling moet moeiteloos te bedienen zijn lasten zetten. 2. De beide framedelen moeten zonder problemen in- en uitgeklapt kunnen worden. Daarbij moet de horizontale stang van het achterste deel van het frame moeiteloos in de rails van het voorste deel van het frame naar boven laten schuiven. 3. Voor het vastzetten moet de hendel volledig naar beneden worden vastgezet. 	x	
Schroefverbindingen: stevig vastzitten	<p>Alle schroefverbindingen moeten stevig vastzitten.</p> <p> Zelfborgende moeren en schroeven verliezen hun effectiviteit na herhaaldelijk los- en vastschroeven. Daarom moeten deze door een erkende specialist worden vervangen als deze los blijken te zitten.</p>	x	
Zwenk- en loopwielen: Gangbaarheid, functie en beschadigingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. De wielen moeten in een rechte lijn lopen en mogen niet wiebelen. 2. De wielen moeten tijdens het rijden licht en geluidloos bewegen. 3. Reinig de wielen als er zich pluizen of vuil in de wielnaven bevinden. 4. De wielen mogen geen beschadigingen vertonen. 	x	
Armsteunen: Stabiliteit & beschadigingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. De armsteunen mogen niet wiebelen. Controleer of de armsteunen stevig zijn vastgeschroef op de T-stukken. 2. Het kussen van de armsteunen mag niet beschadigd zijn. 	x	

Te controleren	Omschrijving	maandelijks voor gebruik	
Handvatten en handvatbuizen: Stabiliteit en beschadigingen	1. De handvatten moeten stevig vastzitten. 2. De handvatbuizen mogen geen uiterlijke schade / verbuiging vertonen en mogen niet wiebelen. 3. De spanhendels moeten stevig kunnen worden vastgezet.		x
Zitting: Vervuiling en beschadigingen	1. De zitting moet op het frame zijn vastgezet. 2. Reinig het zittingoppervlak bij vervuiling conform de reinigingsinstructies. 2. Bij beschadigingen moet de zitting worden vervangen.		x
Frame, volledig: Functie en beschadigingen	1. Op de beide framedelen mogen geen beschadigingen of scheuren zichtbaar zijn. 2. Eventuele functionele of oppervlakteschade moet worden hersteld.		x
Visuele controle: losse onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	 Als dergelijke schade wordt vastgesteld, mag de rollator niet meer worden gebruikt. Veilig rijgedrag kan niet meer gegarandeerd worden!		x
Vervuiling: Rollator, volledig:	Afhankelijk van de vervuilingsgraad, maar ten minste maandelijks, moet de gehele rollator worden gereinigd (zie hoofdstuk Reinigingsinstructies).		x

STORINGEN ZOEKEN EN VERHELPEN

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
De voorwielen lopen niet in een rechte lijn.	De lagers van de wielvork zijn defect of de wielophanging zit niet meer goed vast.	Neem contact op met een erkende specialist
De rollator loopt zwaar.	De wielassen / wielnaven zijn vies.	Verwijder het vuil
	De remmen zijn onjuist ingesteld.	Neem contact op met een erkende specialist
	De wielassen zijn defect of de wielassen zitten niet meer goed vast.	

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
De remfunctie is onvoldoende of ongelijkmatig.	De remmen zijn onjuist ingesteld of de remblokken zijn versleten.	Neem contact op met een erkende specialist
De zitting zit scheef of zit niet vast aan de rollator.	De rollator is niet volledig uitgeklapt.	Klap de rollator volledig uit en klik de inklapvergrendeling vast
	De zitting zit niet goed vast op de rollator of is defect.	Neem contact op met een erkende specialist
	De scharnier voor het vouwmechanisme of voor de inklapvergrendeling is defect.	
De rollator biedt onvoldoende steun of staat niet stabiel.	De armsteunen en handvatbuizen zijn niet goed vastgezet of niet goed op de gebruiker afgesteld.	Controleer de positie van de armsteunen / handvatten Controleer of de sternbouten en spanhendels van de armsteunen goed zijn aangedraaid.
	De rollator is niet volledig uitgeklapt en de inklapvergrendeling is niet vastgeklikt.	Klap de rollator volledig uit en vergrendel de inklapvergrendeling.
	Het rollatorframe of de armsteunen/handvatbuizen is/zijn beschadigd.	Neem contact op met een erkende specialist
	Piepende en schurende geluiden	Diverse oorzaken

REINIGING

- ▼ Neem de rollator regelmatig af met een vochtige doek.
- ▼ Bij sterkere vervuiling kunt u een mild schoonmaakmiddel en warm water gebruiken.
- ▼ De wielen kunnen met een vochtige kunststof borstel worden schoongemaakt.
- ▼ Verwijder vuil en pluizen uit de wielnaven.
- ▼ Let er na het schoonmaken op dat alle onderdelen volledig droog zijn om de kwaliteit van de rollator te behouden.
- ▼ Gebruik uitsluitend in de normale handel verkrijgbare milde reinigings- en desinfectieproducten. In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over desinfectie.



WAARSCHUWING

Materiaalschade! Gebruik voor het schoonmaken geen hogedrukreiniger, geen agressieve, bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen. Let er daarnaast na het schoonmaken op dat alle materialen volledig droog zijn, om de kwaliteit te behouden.

DESINFECTIE

Bij handmatige schoonmaak van een gebruikt hulpmiddel moeten alle onderdelen grondig worden behandeld met een geschikt oppervlakdesinfectiemiddel. Oppervlakken met regelmatig hand- of huidcontact, zoals de handvatten en armsteunen, moeten bijzonder zorgvuldig worden gedesinfecteerd.

De volgende desinfectiemiddelen zijn geschikt voor het materiaal:

- ▼ Aldehydevrije desinfectie op basis van alcohol (max. 70% propylalcohol)
- ▼ Desinfectiemiddelen op basis van aldehyde



WAARSCHUWING

Materiaalschade! Volg bij het desinfecteren de gebruikshandleiding van de fabrikant van de reinigings- & desinfectiemiddelen.

DOORGIFTE EN HERGEBRUIK

Tenzij uw product op maat is gemaakt, kan het worden doorgegeven/hergebruikt.

De bijpassende catalogus met reserveonderdelen vindt u op onze website bij de informatie over uw product.

Als een rollator wordt doorgegeven aan en wordt hergebruikt door een nieuwe gebruiker of een erkende specialist, moet u eraan denken dat u ook alle voor een veilig gebruik benodigde documentatie overhandigt.

Voordat de rollator wordt hergebruikt, moet deze door een erkende specialist worden schoongemaakt, gedesinfecteerd en gecontroleerd.

Hiertoe moeten alle in het onderhoudsrooster genoemde controlepunten bij de rollator worden uitgevoerd.

OPSLAG

Als u de rollator wilt opslaan, moet u erop letten dat deze droog, beschermd tegen sterke zoninstraling en bij

een temperatuur van 0 °C tot +45 °C wordt opgeslagen. Schakel de blokkeerremmen niet in en beveilig de rollator tegen onbedoeld wegrollen.

Controleer na langere opslag (> 4 maanden) alle controlepunten op het product die in het onderhoudsrooster staan vermeld, alvorens de rollator opnieuw te gebruiken/in te zetten.



WAARSCHUWING

Materiaalschade! Sla de rollator niet op in de buurt van warmtebronnen en leg tijdens de opslag geen voorwerpen op de rollator. _____

RECYCLING

Als u de rollator niet meer nodig hebt, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw specialist. Deze zal de rollator ophalen en vakkundig afvoeren of geschikt maken voor hergebruik. Als dit niet mogelijk is, kunt u de rollator naar uw plaatselijke milieustraat brengen.

PRODUCTKENMERKING

Type- en waarschuwingsplaatjes moeten altijd leesbaar blijven. Bij de FAKTO+ Arthritis zijn deze geplaatst op de horizontale verbindingstangen van het hoofdframe.

Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes/stickers direct door uw specialist vervangen. Hierbij horen tevens de reflecterende stickers.

Dit waarschuwingsplaatje bevindt zich naast het typeplaatje:


Gehilfe für Innenbereich

Achtung: Nur auf ebenem Untergrund verwenden!





Walking aid for indoor use




Attention: Use on flat and firm terrain only!





Op de volgende pagina worden de symbolen en gegevens op het hier afgebeelde typeplaatje nader verklaard. Op het typeplaatje is tevens het serienummer van uw rollator vermeld.

TOMTAR® DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad | DE 

TYP Fakto+ Arthritis

 580 mm  1155 mm -  120 kg 

REF  347NPU   2020 - 03

UDI  (01)04260241688597   

(10)1900XXX
(21)358000XXX

	Handelsmerk of productmerk
	Type / model
	REF = artikelnummer
	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI / GTIN (10) Bestelnummer (21) Serienummer
	Fabrikant / fabrieksymbool / contactadres
	Maximaal gebruikersgewicht incl. extra lading
	Productiedatum
	Totale breedte rollator
	Totale hoogte (min.- max.) Rollator
	De rollator is bedoeld voor gebruik in binnenruimtes
	Houd u aan de gebruikshandleiding
	Neem altijd de veiligheidsinstructies uit de gebruikshandleiding in acht!
	Medical Device / medisch hulpmiddel
	CE-markering

Bij producten met de volgende kenmerking betreft het een op maat gemaakt product:

SONDERANFERTIGUNG CUSTOM-MADE DEVICE

Producten op maat zijn producten die speciaal voor een specifieke gebruiker zijn vervaardigd. In dat geval wijken het typeplaatje, de waarschuwingen en eventueel het gebruiksdoel af. De aanvullende documentatie moet in acht worden genomen!

GARANTIE

De garanties hebben betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de melding van de verzending, uiterlijk vanaf de levering.

Uitgesloten van de garantieverplichting zijn beschadigingen die zijn ontstaan door slijtage, opzet, nalatigheid of ondoelmatige bediening of gebruik. Hetzelfde geldt bij gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, smeeroliën en vetten.

LEVENSDUUR

De te verwachten levensduur bedraagt vijf jaar, uitgaande van dagelijks gebruik conform het beoogde gebruiksdoel. Voorwaarde hiervoor is dat de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in deze gebruikshandleiding worden nageleefd.

AANSPRAKELIJKHEID

DIETZ GmbH aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de producten onder de voorgeschreven voorwaarden voor het voorgeschreven gebruiksdoel worden gebruikt. Wij adviseren de producten zorgvuldig te onderhouden en te verzorgen zoals in de gebruikshandleiding is beschreven. Voor schades veroorzaakt door (vervangende) onderdelen die niet door DIETZ GmbH zijn geautoriseerd, is DIETZ GmbH niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend door erkende specialisten of door de fabrikant zelf worden uitgevoerd.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Aanduiding	Eenheid	FAKTO+ Arthritis
Artikelnummer		347NPU
HMV-nummer		10.46.04.0017
Materiaal / kleur: Frame		Stalen buis, gepoedercoat, gelast / mangan grey
Materiaal / kleur / afmetingen: Wielen		PU, niet markerend / donkergrijs / 200/50 mm
Materiaal / kleur: Plank, remhendels		Verstevigd nylon glasvezel / zwart
Materiaal / kleur: Handvatten // armsteunen		PVC / zwart // PU-schuim / zwart
Materiaal / kleur: Zitting // Tafelblad		PP / zwart // Acryl / transparant
Materiaal / kleur: Mandje		Staal, gepoedercoat / grijs
Totale breedte	mm	580
Totale lengte	mm	620
Totale hoogte min./max.	mm	1155 / 1325
Zitting: Breedte x hoogte x diepte	mm	380 x 595 x 190
Hoogte armsteunen min. / max. (midden binnenzijde)	mm	980 / 1145
Instelmogelijkheden hoogte T-stukken met armsteunen		8 boringen (met sterbouten) op 25 mm onderlinge afstand
Afmeting ingeklapt, liggend (H / B / L)	mm	505 / 580 / 1120
Afmeting ingeklapt, liggend, zonder T-buizen (H / B / L)	mm	250 / 580 / 685
Draaibreedte	mm	1150
Kantelstabiliteit voorwaarts	°	10,0 (conform EN ISO 11199-3:2005)
Kantelstabiliteit achterwaarts	°	4,0 (conform EN ISO 11199-3:2005)
Kantelstabiliteit zijwaarts	°	3,5 (conform EN ISO 11199-3:2005)
Gewicht zonder / met accessoires	kg	10 / 11
Max. gewicht gebruiker incl. lading	kg	120
Max. Belastbaarheid accessoires	kg	Mandje: 5 / Tafelblad: 5 / Plank: 7
Aanbevolen lichaamslengte	m	1,55 - 1,85

PRODUCTCONTROLES


Complete test conform rollatornorm	EN ISO 11199-3
Vermoeingssterkte conform rollatornorm	EN ISO 11199-2
Biocompatibiliteit	ISO 10993

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur bij gebruik	-10 °C tot +50 °C
Omgevingsvoorwaarden bij opslag	0 °C tot 45 °C 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

BEPALING VAN DE IDENTIFICATIEGEGEVENS

We adviseren u om de identificatiegegevens van uw product over te nemen van het typeplaatje en op de volgende regels in te vullen, zodat u deze bij de hand hebt als wij contact met u opnemen. (Zie de toelichting in het hoofdstuk Productkenmerking)*

TYP Type / model:	
REF Artikelnr. /REF:	
UDI Serienummer (21):	
 Productiedatum:	
Overige gegevens/ aantekeningen:	

* Bij producten op maat kunnen de identificatiegegevens of het typeplaatje afwijken

TOMTAR®

Productgroep: Rollators
Product: FAKTO+ Arthritis rollator
Gebruikshandleiding versie 1.2.1 NL (MSC)
Versie 07-2021



TOMTAR is een geregistreerd merk van DIETZ GmbH.

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
Duitsland

Tel.: +49 7248.9186-0
Fax: +49 7248.9186-86

info@dietz-reha.de
www.dietz-rehab.de

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen en prijs- en productwijzigingen.
© DIETZ GmbH REHA-PRODUKTE, Karlsbad (Duitsland)
Verveelvoudiging, ook deels, uitsluitend met schriftelijke toestemming van
DIETZ GmbH, Karlsbad, Duitsland.