

Gebrauchsanleitung

Einstieghilfe „Entrado“
Art.-Nr.: 140005



Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung der Einstieghilfe genau durch und befolgen Sie die Hinweise.

Indikation

Die Einstieghilfe „Entrado“ erleichtert bewegungseingeschränkten Personen das selbständige Baden. Die Einstieghilfe dient als Hilfsmittel bei der Überwindung des Badewannenrandes und ermöglicht einen leichteren Transfer in die Badewanne und wieder heraus. Bei Gleichgewichtsstörungen verwenden Sie zusätzlich einen Handgriff.

Anwendung

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den festen Sitz der Gummipuffer und der Trittfläche. Stellen Sie die Einstieghilfe mittig vor die Längsseite der Wanne. Achten Sie darauf, dass alle vier Füße Bodenkontakt besitzen und die Einstieghilfe nicht kippelt. Stellen Sie sich zuerst mit beiden Füßen auf die Einstieghilfe. Halten Sie sich am Wannenrand oder einem Haltegriff fest und steigen dann in die Badewanne. Gehen Sie beim Aussteigen in umgekehrter Reihenfolge vor.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel, welches für den verwendeten Kunststoff zugelassen ist durchführen.

Material

Beschichteter Stahlrohrrahmen, Kunststoff-Trittfläche (PP), GummifüÙe

Entsorgung

Die Einstieghilfe muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltrichtlinien entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Länge: 44 cm
Breite: 42 cm
Höhe: 18,5 cm
Gewicht: 2,9 kg
Max. Tragkraft: 130 kg



Hersteller

DIETZ GmbH Reha-Produkte
DescotraÙe 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel.: +49(0) 7248/9186-0
Fax: +49(0) 7248/9186-86
Web: www-dietz-reha.de
E-Mail: info@dietz-reha.de



Gebrauchsanleitung

Einstieghilfe „Entrado“
Art.-Nr.: 140005



Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung der Einstieghilfe genau durch und befolgen Sie die Hinweise.

Indikation

Die Einstieghilfe „Entrado“ erleichtert bewegungseingeschränkten Personen das selbständige Baden. Die Einstieghilfe dient als Hilfsmittel bei der Überwindung des Badewannenrandes und ermöglicht einen leichteren Transfer in die Badewanne und wieder heraus. Bei Gleichgewichtsstörungen verwenden Sie zusätzlich einen Handgriff.

Anwendung

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den festen Sitz der Gummipuffer und der Trittpläche. Stellen Sie die Einstieghilfe mittig vor die Längsseite der Wanne. Achten Sie darauf, dass alle vier Füße Bodenkontakt besitzen und die Einstieghilfe nicht kippelt. Stellen Sie sich zuerst mit beiden Füßen auf die Einstieghilfe. Halten Sie sich am Wannenrand oder einem Haltegriff fest und steigen dann in die Badewanne. Gehen Sie beim Aussteigen in umgekehrter Reihenfolge vor.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel, welches für den verwendeten Kunststoff zugelassen ist durchführen.

Material

Beschichteter Stahlrohrrahmen, Kunststoff-Trittpläche (PP), Gummifüße

Entsorgung

Die Einstieghilfe muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltrichtlinien entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Länge: 44 cm
Breite: 42 cm
Höhe: 18,5 cm
Gewicht: 2,9 kg
Max. Tragkraft: 130 kg



Hersteller

DIETZ GmbH Reha-Produkte
Descostaße 10
D-76307 Karlsbad-Ittersbach

Tel.: +49(0) 7248/9186-0
Fax: +49(0) 7248/9186-86
Web: www-dietz-reha.de
E-Mail: info@dietz-reha.de

