


AS(01)


DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Hintere Sitzhöhe einstellen

Je nach Radgröße (22" / 24") kann die hintere Sitzhöhe des ATOS[01] in einem Bereich von 38.75 cm - 52.5 cm eingestellt werden.

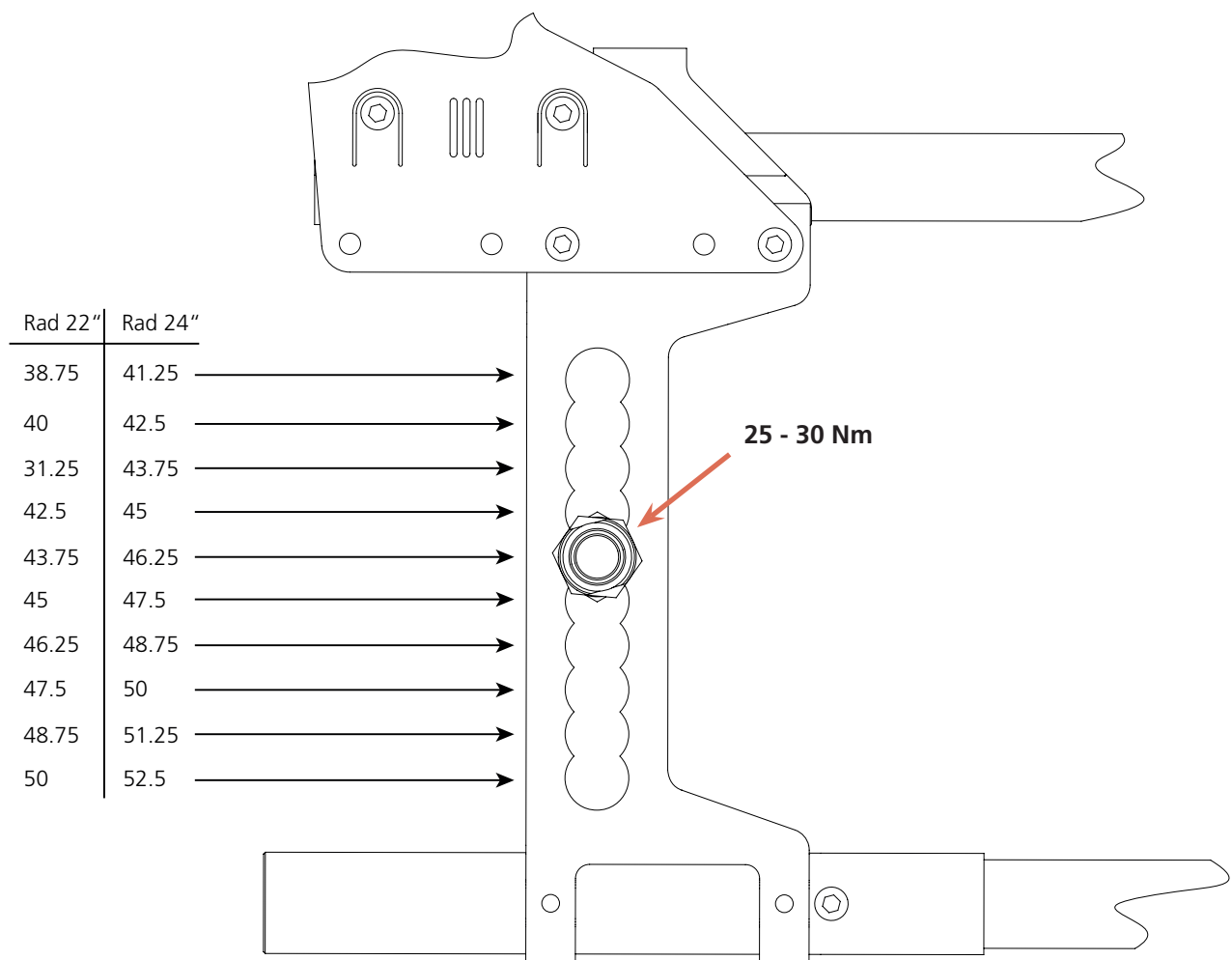

- Die Buchse der Steckachse muss mit einem Drehmoment von 25 - 30 Nm angezogen werden.

- Wir raten dringend davon ab, die hintere Sitzhöhe höher als die vordere zu wählen. Dabei besteht die Gefahr, dass der Patient nach vorne aus dem Rollstuhl fällt.



Je nach Sitzwinkel, Messpunkt und Art der Bereifung kann die tatsächliche Sitzhöhe um ca. + / - 1 cm vom absoluten Wert abweichen.