



1. Colocar/desplegar el rollator

Coloque el rollator en el sentido de la marcha y accione el freno de estacionamiento.

Presione hacia abajo con ambas manos los tubos laterales de la superficie de asiento a izquierda y derecha hasta que el mecanismo plegable quede enclavado.

Entonces ya se puede colocar la red, la bolsa o la cesta en el soporte al efecto.

2. Ajustar la altura de las empuñaduras

Afloje el tornillo de fijación de 5 a 6 vueltas aprox. (no hay que desenroscar totalmente el tornillo) y ajuste la altura que desee bajando o subiendo las empuñaduras.

Las empuñaduras quedan enclavadas cada 25 mm.

Apriete de nuevo el tornillo de fijación. El tornillo de fijación no se debe apretar entre las posiciones de enclavamiento predeterminadas.

Después de apretar el tornillo, este se puede sacar y colocar verticalmente para que estorbe menos.

Notas de seguridad

No cuelgue bolsos en las empuñaduras: iriesgo de vuelco!

En suelos inclinados utilice el freno de marcha (tire hacia arriba de la palanca de freno).

Utilice el rollator únicamente en suelos firmes y lisos.

Si se apoya con demasiada fuerza en las empuñaduras, el rollator puede volcar hacia atrás.

Al plegar el rollator pueden quedar atrapadas partes de la ropa o del cuerpo.

Tenga en cuenta que las partes acolchadas expuestas a la luz solar directa se calientan y pueden causar quemaduras en la piel por contacto. Por ello, debe cubrir esas partes o proteger el rollator de la radiación solar.

3. Freno

Freno de marcha (al empujar): tire de la palanca de freno hacia arriba.

Freno de estacionamiento (al aparcar): presione la palanca de freno hacia abajo.

4. Ajuste del freno

El freno está correctamente ajustado cuando tanto la palanca de freno como los cables Bowden no bailan y las ruedas se puede girar sin hacer ruido.

El efecto del freno se puede ajustar con el tornillo de ajuste del cable Bowden situado en las zapatas de las ruedas traseras.

5. Ayuda para subir

Presionando la prolongación del bastidor con la punta del pie resulta más fácil levantar las ruedas guía.

6. Plegar el rollator

Retire la red o la bolsa del bastidor.

Tire hacia arriba de la cinta de cierre situada en medio de la superficie de asiento: el rollator se pliega.

Limpieza/mantenimiento/reutilización

Limpieza

Se debe realizar la limpieza y desinfección con regularidad. Para ello utilice una lejía jabonosa que no contenga abrasivos.

Se puede desinfectar con los productos comerciales convencionales. No utilice vaporetas ni productos de limpieza abrasivos o cáusticos.

Mantenimiento

El rollator brado no necesita mantenimiento. Si comprueba que los frenos cedan, las ruedas giran con dificultad o constata cualquier otra limitación de funcionamiento, lleve el rollator a su distribuidor especializado para que lo repare.

Reutilización

Cuando entregue el rollator a un nuevo usuario, recuerde proporcionarle toda la documentación técnica necesaria para un manejo seguro. Tal y como se indica arriba, el distribuidor especializado es quien debe revisar, limpiar y dejar el rollator en perfecto estado para que se pueda utilizar de nuevo.

Vista general del brado



- 1 Empuñaduras ergonómicas
- 2 Palanca de freno
- 3 Superficie de asiento con cinta de cierre
- 4 Enganche para la bolsa
- 5 Tornillo de fijación para regular la altura
- 6 Ayuda para subir
- 7 Frenos
- 8 Ruedas



Datos técnicos

	Tipo S/M	Tipo S	Tipo M
Altura:		67-82 cm	78-102 cm
Altura plegado:		67 cm	78 cm
Altura del asiento:		52,5 cm	62,5 cm
Regulación de altura de las empuñaduras cada 25 mm:		0-15 cm	0-24 cm
Altura de bastidor regulable:		8 posiciones	10 posiciones
Longitud:	66 cm		
Ancho:	60 cm		
Ancho plegado:	22 cm		
Peso máx. del usuario:	150 kg		
Carga máx. red/bolsa:	5 kg		
Peso vacío:	7,1 kg		
Neumáticos (a prueba de reventón):	20 x 3 cm		

Alcance de suministro

- _ Rollator brado
- _ Bolsa
- _ Instrucciones de uso
- _ Tarjeta de garantía

Instrucciones de uso



Garantía

El plazo de garantía del bastidor de aluminio es de 5 años, mientras que para el resto de piezas es de 24 meses.

Las piezas de desgaste quedan excluidas de la garantía.

Generalidades

En cuanto al rollator descrito aquí, se declara la conformidad en virtud de la directiva CE 93/42 de productos médicos.

Las instrucciones de uso forman parte del alcance de suministro. El usuario debe guardarlas y deben acompañar al producto en caso de que se entregue a otro usuario.

Nos reservamos el derecho a modificar las explicaciones facilitadas en estas instrucciones de uso debido a avances técnicos.

Su reimpresión, traducción y reproducción en cualquier soporte, incluso de forma parcial, requieren el consentimiento expreso por escrito del fabricante.

Estas instrucciones de uso no están sujetas a ningún servicio de modificaciones. Nosotros podemos informarle de la versión actual.

Indicaciones y finalidad

El rollator brado va destinado a personas con dificultades de movimiento que pesen 150 kg como máximo, como ayuda para caminar y como asiento sencillo para reposar temporalmente.

La bolsa situada debajo de la superficie de asiento sirve para transportar objetos. No se sienta en la bolsa.

El rollator brado solo debe utilizarse sobre superficies firmes y lisas. Su uso con otras finalidades, especialmente la utilización como ayuda para subir o transportar cargas pesadas, es peligroso y contrario a las normas.