

AquaSwift Badewannendrehsitz Bedienungsanleitung

Version 2.0.0 DE




Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DIETZ entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen AquaSwift benutzen. Sie erhalten darin wichtige Hinweise, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge vollständig zu nutzen.

Darüber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebssicherheit sowie einer bestmöglichen Werterhaltung Ihres Duschhockers dienen.

Sollten Sie weitergehende Informationen zu Ihrer Versorgung wünschen, so wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitäts-Fachhaus.

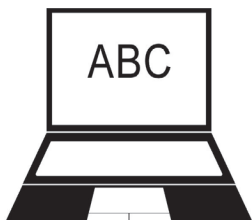

HINWEIS

Zur größeren Darstellung steht Ihnen die Bedienungsanleitung unter www.dietz-reha.de im PDF-Format zur Verfügung.

ALLGEMEINES

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor. Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller. Diese Gebrauchsanweisung unterliegt dem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

ZWECKBESTIMMUNG / INDIKATION

Der Badewannendrehstuhl AquaSwift ist ausschließlich für das Sitzen beim Waschen/Duschen in einer Badewanne konzipiert.

Die Verwendung des „AquaSwift“ ist angezeigt bei funktioneller Störung der Rumpfbewegung /-haltung (z.B. neuromuskulärer Erkrankungen oder bei Gleichgewichtsstörungen), fehlender Funktionsfähigkeit der unteren und/oder oberen Extremitäten (z.B. bei Amputationen, Lähmungen, Gelenkerkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen).

KONTRAINDIKATION

Bei der richtigen Anwendung ist keine Kontraindikation bekannt.


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für den hier beschriebenen Badewannendrehstuhl AquaSwift ist die Konformität gemäß EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte erklärt.

LIEFERUMFANG

1. Aluminiumrohrgestell (kunststoffbeschichtet)
2. Auflagerahmen (rechts und links) und Auflagergummis
3. Kunststoff-Rückenlehne und -Sitzfläche
Arretierhebel mit Rückholfeder

KENNZEICHNUNG / TYPENSCHILD

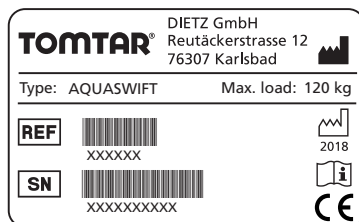


HINWEISE ZUR SICHEREN BENUTZUNG

Der Drehstuhl wird auf die Badewannenränder aufgelegt. Vor dem Einsteigen drehen Sie die Sitzfläche in Einstiegsrichtung (durch das Betätigen des Arretierhebels), dadurch wird das Hinsetzen/Einsteigen erleichtert. Nach dem Hinsetzen/Einsteigen betätigen Sie den Arretierhebel und drehen sich mit dem Stuhl in die Wanne hinein. Nun können Sie sich selbstständig oder mit Hilfe einer Pflegeperson Waschen oder Duschen und wieder sicher durch die Drehfunktion aussteigen.

DREHSITZ ANPASSEN


Der Badewannendrehsitz muss an die Wannenbreite angepasst werden.

- ▼ Platzieren Sie den Drehsitz auf den Wannenrand und achten Sie darauf, dass die Auflagegummis vollständig aufliegen
- ▼ Drehen Sie die Sicherungsschraube rechts und links an den Wannenrand
- ▼ So ist sichergestellt, dass der Drehsitz bei Benutzung festen Halt hat

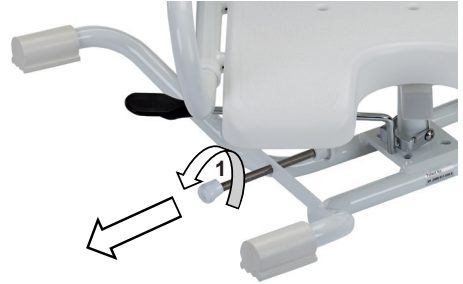

SITZ DREHEN

- ▼ Um den Sitz zu drehen, ziehen Sie den Arretierungshebel nach oben
- ▼ Drehen Sie den Sitz nun in die gewünschte Richtung und lassen den Arretierungshebel wieder los
- ▼ In 90° zur Ausgangsposition arretiert der Sitz selbsttätig ein

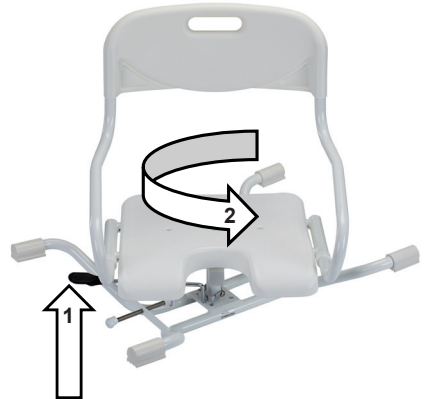

SICHERHEITSHINWEISE

- ▼ Bitte lassen Sie sich, falls erforderlich zum Ein- und Aussteigen sowie beim Waschen und Duschen, von einer Hilfsperson, sofern Sie sich selbst nicht ausreichend halten können helfen.
- ▼ Achtung Klemmgefahr! Beim Einstellen der Breite und Drehen des Sitzes.
- ▼ Achten Sie auf den korrekten Sitz der Auflagegummis auf dem Wannenrand (die Gummis müssen komplett aufliegen). Dadurch wird gewährleistet, dass der Sitz nicht vom Wannenrand in die Wanne abrutschen kann.
- ▼ Der Badewannendrehsitz ist ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck und von einer Person zu benutzen.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen.

Der Badewannendrehsitz AquaSwift ist wartungsfrei. Sollte der Sitz Defekte aufweisen, wenden Sie sich an den Fachhändler oder Ihren Service zum Austausch des Sitzes.



WARNUNG

Keine Scheuermittel und Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden.

Technische Daten

Hilfsmittelnummer	04.40.02.3011
Maximale Zuladung	120 kg
Leergewicht	4,5 kg
Gesamtbreite	700 mm
Gesamthöhe	630 cm
Gesamttiefe	54 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm
Badewannenrand	530-600 mm
Sitzhöhe über Wannenrand	85 mm
Verstellung	Drehbar 360° (4 x 90° arretierbar)

WIEDEREINSATZ / ENTSORGUNG

Die Produktlebensdauer ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung auf mindestens 5 Jahre ausgelegt. Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl der Wiedereinsätze ist abhängig vom Zustand des jeweiligen Produkts. Vor dem Wiedereinsatz die Aufbereitungs- und Hygienerichtlinien des Herstellers beachten sowie die technisch-funktionelle Sicherheit des Produkts prüfen.

Die Entsorgung und Verwertung von Altgeräten und Verpackungen muss gemäß den geltenden nationalen Bestimmungen erfolgen.

HAFTUNG

Die DIETZ GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung.

Produktgruppe: Bad & WC

Produkt: AquaSwift
 Marke: TOMTAR
 Bedienungsanleitung V2.0.0 DE
 Stand 07/2018 (BL)

Hersteller:

DIETZ GmbH
 Reha-Produkte
 Reutäckerstraße 12
 76307 Karlsbad

Tel. +49 7248.9186-0
 Fax +49 7248.9186-86
 info@dietz-reha.de
 www.dietz-reha.de

