

TOMTAR

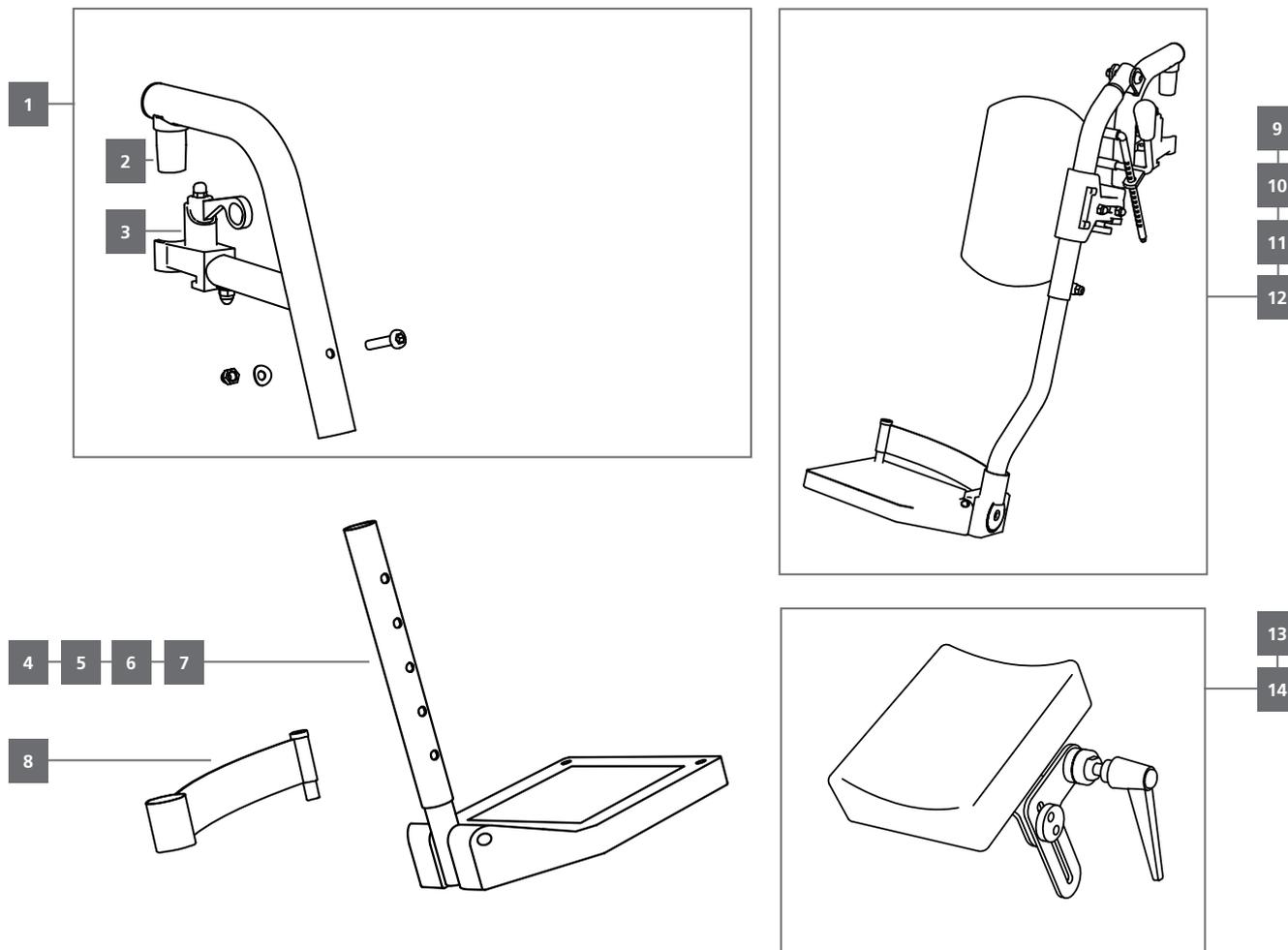
BASIK

ORIGINAL ERSATZTEILE



BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

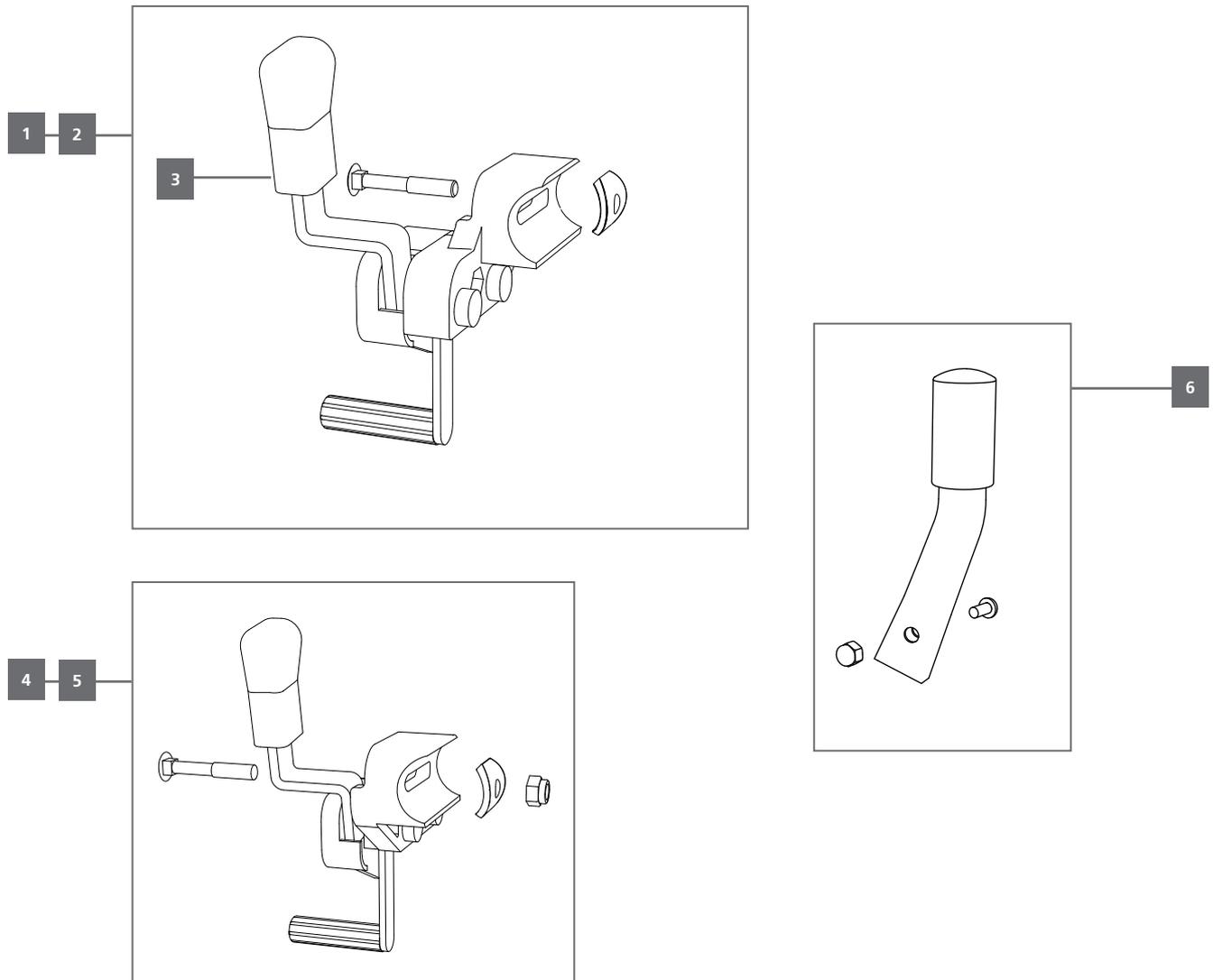
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Beinstütze	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	2	196080	Beinstützenoberenteil, inkl. Einrastzapfen	Stk.
02	2	196083	Einrastzapfen f. Beinstütze, inkl. Schraube	Stk.
03	2	196082	Verriegelungshebel f. Beinstütze, inkl. Schraube	Stk.
04	1	196084	Beinstützenunterteil, SB 39 - 42, links, inkl. Fußplatte, ohne Fersenband	Stk.
05	1	196085	Beinstützenunterteil, SB 39 - 42, rechts, inkl. Fußplatte, ohne Fersenband	Stk.
06	1	196086	Beinstützenunterteil, SB 45 - 51, links, inkl. Fußplatte, ohne Fersenband	Stk.
07	1	196087	Beinstützenunterteil, SB 45 - 51, rechts, inkl. Fußplatte, ohne Fersenband	Stk.
08	2	196088	Fersenband, inkl. Montageschraube	Stk.
09	1	196200	BW Beinstütze komplett, SB 39 - 42, rechts	Stk.
10	1	196201	BW Beinstütze komplett, SB 39 - 42, links	Stk.
11	1	196202	BW Beinstütze komplett, SB 45 - 51, rechts	Stk.
12	1	196203	BW Beinstütze komplett, SB 45 - 51, links	Stk.
13	1	196204	Amputationsauflage, komplett, rechts	Stk.
14	1	196205	Amputatioinsauflage, komplett, links	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

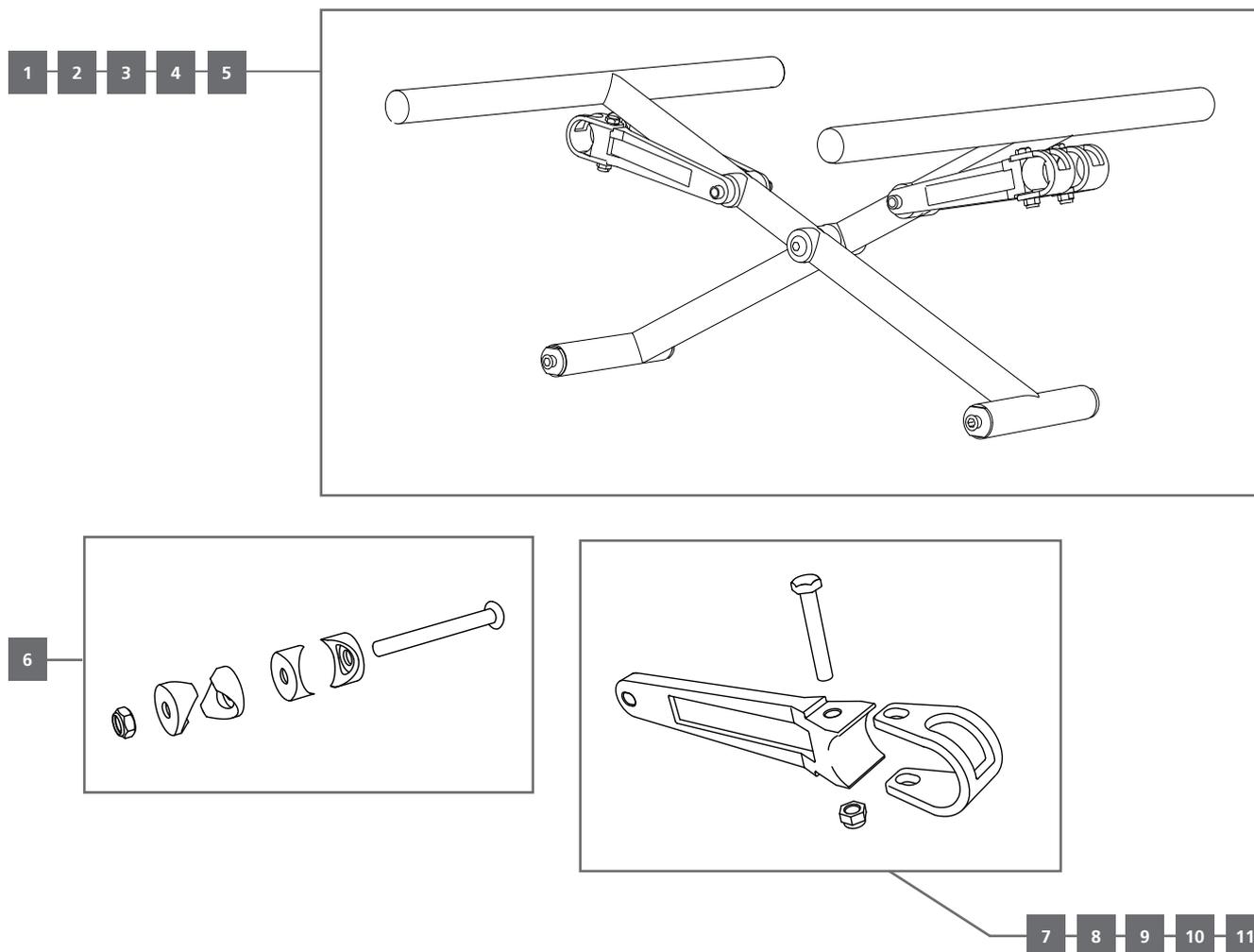
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Feststellbremse	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	196020	Feststellbremse komplett, inkl. Schrauben, rechts	Stk.
02	1	196021	Feststellbremse komplett, inkl. Schrauben, links	Stk.
03	2	196022	Bremshebelgummi für Feststellbremse	Stk.
04	1	196216	Feststellbremse f. Radstandverlängerung, komplett, inkl. Schrauben, rechts	Stk.
05	1	196217	Feststellbremse f. Radstandverlängerung, komplett, inkl. Schrauben, links	Stk.
06	2	196210	Bremshebelverlängerung, inkl. Schraube und Mutter	Paar

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

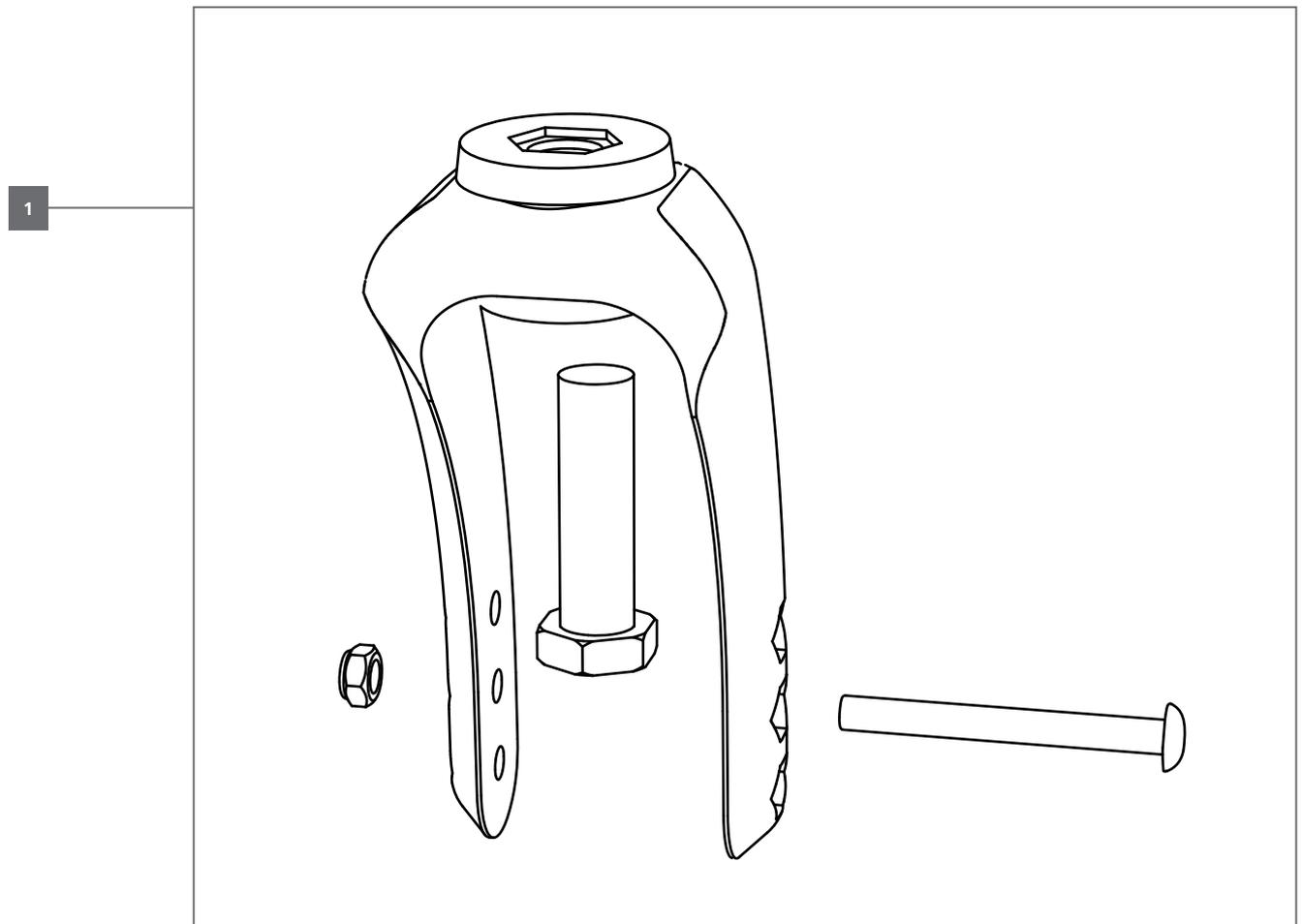
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Kreuzstrebe	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	196113	Kreuzstrebe komplett, Sitzbreite 39 cm	Stk.
02	1	196114	Kreuzstrebe komplett, Sitzbreite 42 cm	Stk.
03	1	196115	Kreuzstrebe komplett, Sitzbreite 45 cm	Stk.
04	1	196116	Kreuzstrebe komplett, Sitzbreite 48cm	Stk.
05	1	196117	Kreuzstrebe komplett, Sitzbreite 51cm	Stk.
06	1	196105	Achse für Kreuzstrebe, komplett	Stk.
07	2	196106	Befestigungsschiene für Kreuzstrebe, inkl. Schraube, Sitzbreite 39	Stk.
08	2	196107	Befestigungsschiene für Kreuzstrebe, inkl. Schraube, Sitzbreite 42	Stk.
09	2	196108	Befestigungsschiene für Kreuzstrebe, inkl. Schraube, Sitzbreite 45	Stk.
10	2	196109	Befestigungsschiene für Kreuzstrebe, inkl. Schraube, Sitzbreite 48	Stk.
11	2	196110	Befestigungsschiene für Kreuzstrebe, inkl. Schraube, Sitzbreite 51	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

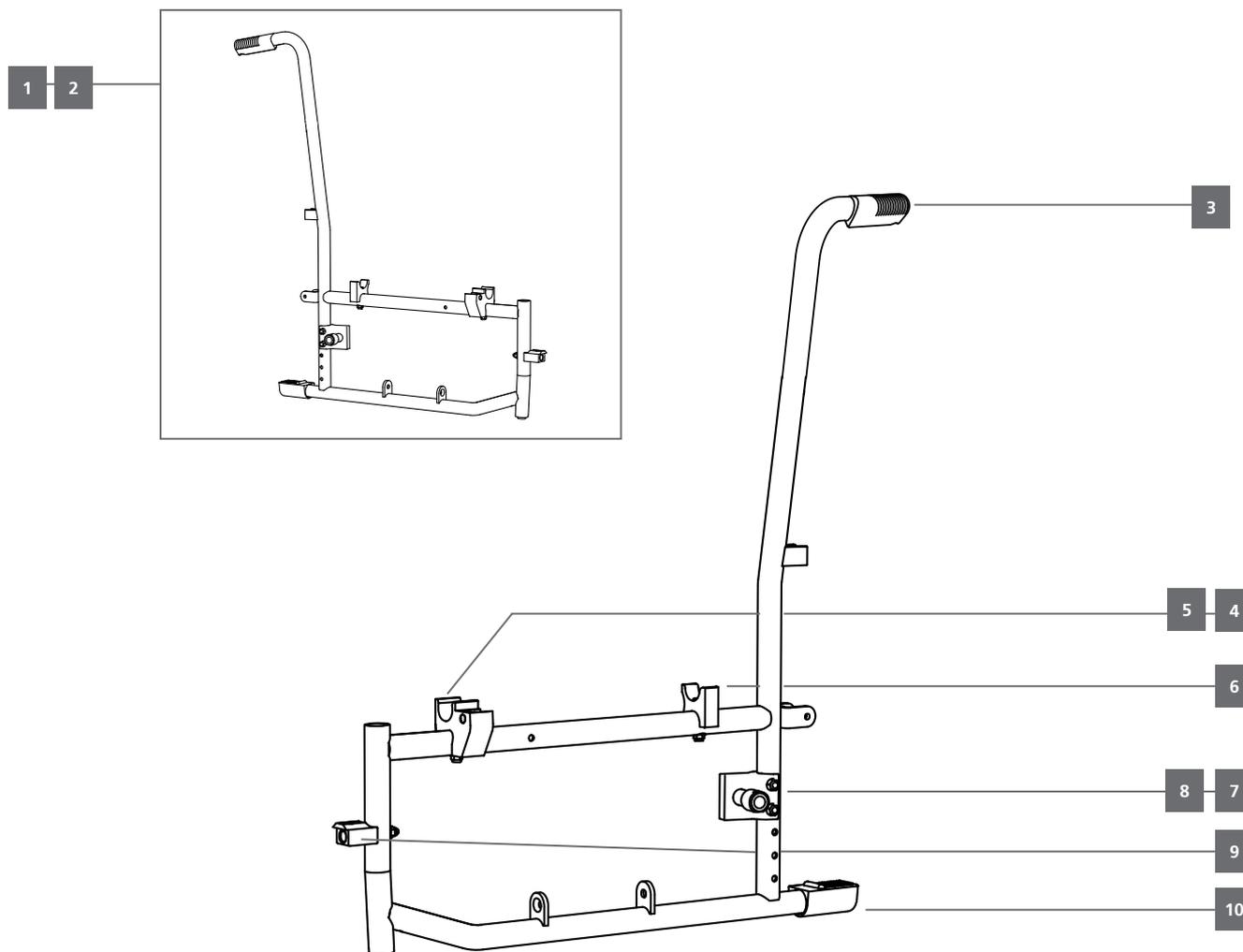
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Radgabel	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	2	196015	Radgabel komplett, inkl. Achse und Radachse	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

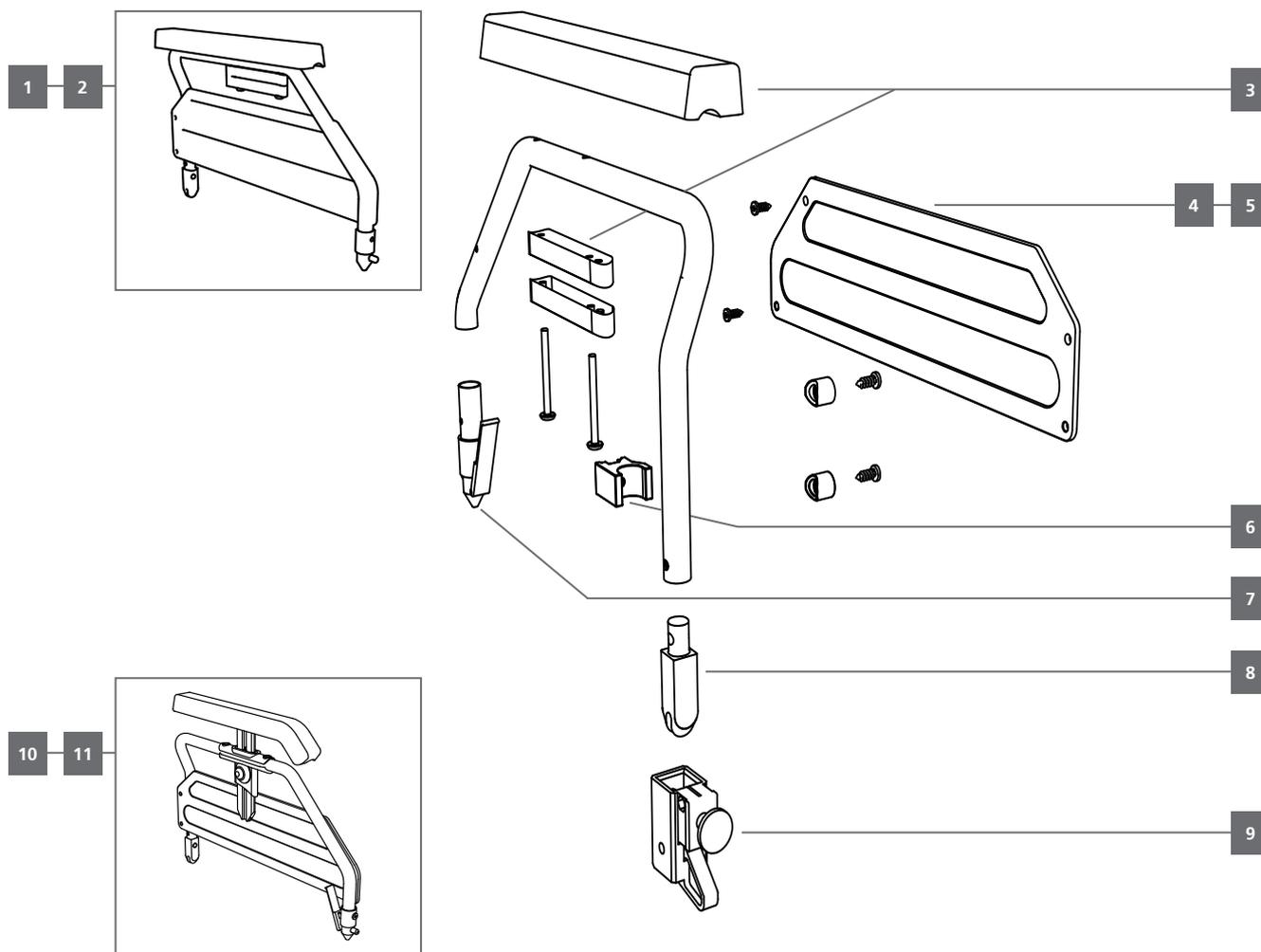
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Seitenrahmen	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	196000	Seitenrahmen komplett, montiert, rechts	Stk.
02	1	196001	Seitenrahmen komplett, montiert, links	Stk.
03	2	196005	Handgriffe	Paar
04	1	196009	Auflageprofil vorn, für Seitenteil inkl. Schraube, rechts	Stk.
05	1	196010	Auflageprofil vorn, für Seitenteil inkl. Schraube, links	Stk.
06	2	196008	Auflageprofil hinten, für Kreuzstrebe inkl. Schraube, rechts / links	Stk.
07	2	196030	Adapter Hinterrad komplett	Stk.
08	2	196031	Adapter Hinterrad komplett für Trommelbremse	Stk.
09	2	196011	Aufnahmeklotz für Beinstütze	Stk.
10	2	196004	Ankipphilfe	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

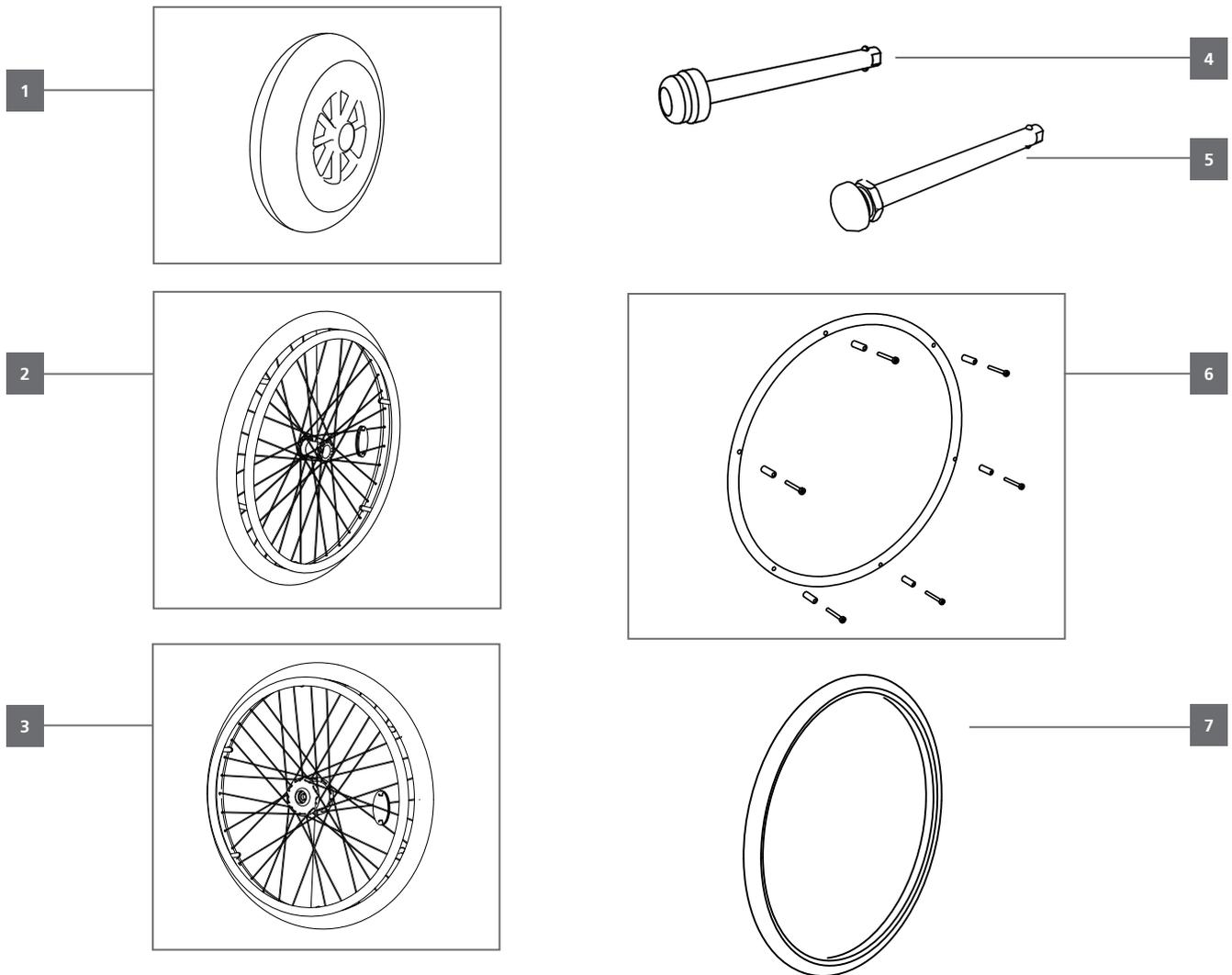
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Seitenteil	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	196070	Seitenteil komplett, inkl. Armauflage, rechts	Stk.
02	1	196071	Seitenteil komplett, inkl. Armauflage, links	Stk.
03	2	196072	Armlehnenpolster inkl. Höhenadapter und Schrauben, rechts / links	Stk.
04	1	196077	Kleiderschutz, inkl. 4 Schrauben und 2 Dizbuchsen, links	Stk.
05	1	196078	Kleiderschutz, inkl. 4 Schrauben und 2 Distanzbuchsen, rechts	Stk.
06	2	196075	Seitenteilfixierung hinten, inkl. Schraube, rechts / links	Stk.
07	2	196073	Verriegelungszapfen, vorne inkl. Schraube, rechts / links	Stk.
08	2	196076	Seitenteilzapfen hinten, inkl. Schraube, rechts / links	Stk.
09	2	196074	Aufnahme für Seitenteil hinten, inkl. Schraube, rechts / links	Stk.
10	1	196214	Seitenteil höhenverstellbar, rechts	Stk.
11	1	196215	Seitenteil höhenverstellbar, links	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Räder / Bereifung	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

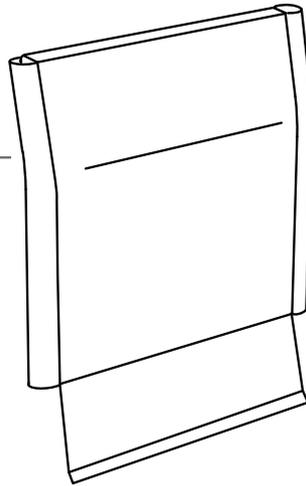
**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	2	196036	Vorderrad 7", PU	Stk.
02	2	196037	Rad 24" komplett Standard, inkl. PU-Bereifung	Stk.
03	2	196038	Rad 24" komplett für Trommelbremse, inkl. PU-Bereifung	Stk.
04	2	196034	Steckachse für Radnabe Standard	Stk.
05	2	196035	Steckachse für Radnabe Trommelbremse	Stk.
06	2	196040	Greifreifen für Rad 24", Set inkl. 6 Distanzhülsen und 6 Schrauben	Stk.
07	2	196039	Reifen, PU, 24"	Stk.
o.Abb.	2	400695	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon, schwarz/gerillt	Stk.
o.Abb.	2	400696	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon, schwarz/glatt	Stk.
o.Abb.	2	400693	Greifreifenüberzug für Rad 22", Silikon, schwarz/gerillt	Stk.
o.Abb.	2	402206	Speichenschutz transparent für Rad 24" mit Befestigungsmaterial	Stk.
o.Abb.	2	402207	Speichenschutz transparent für Rad 22" inkl. Befestigungsmaterial	Stk.

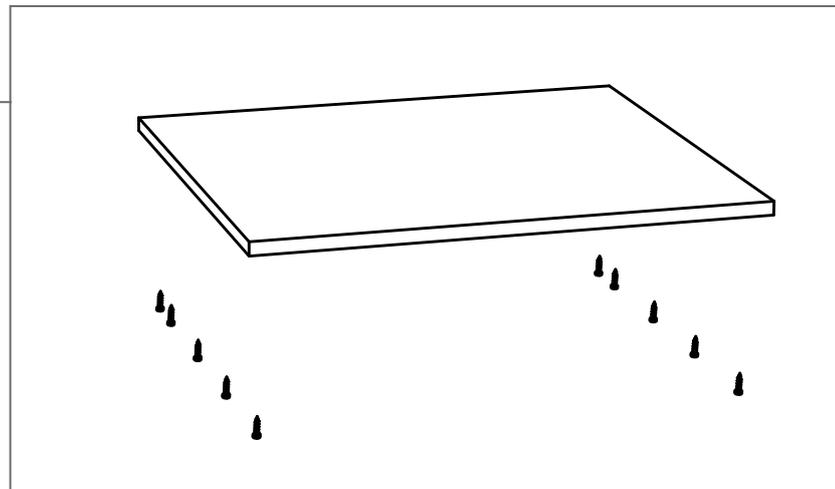
BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Sitz und Rücken	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

1 2 3 4 5



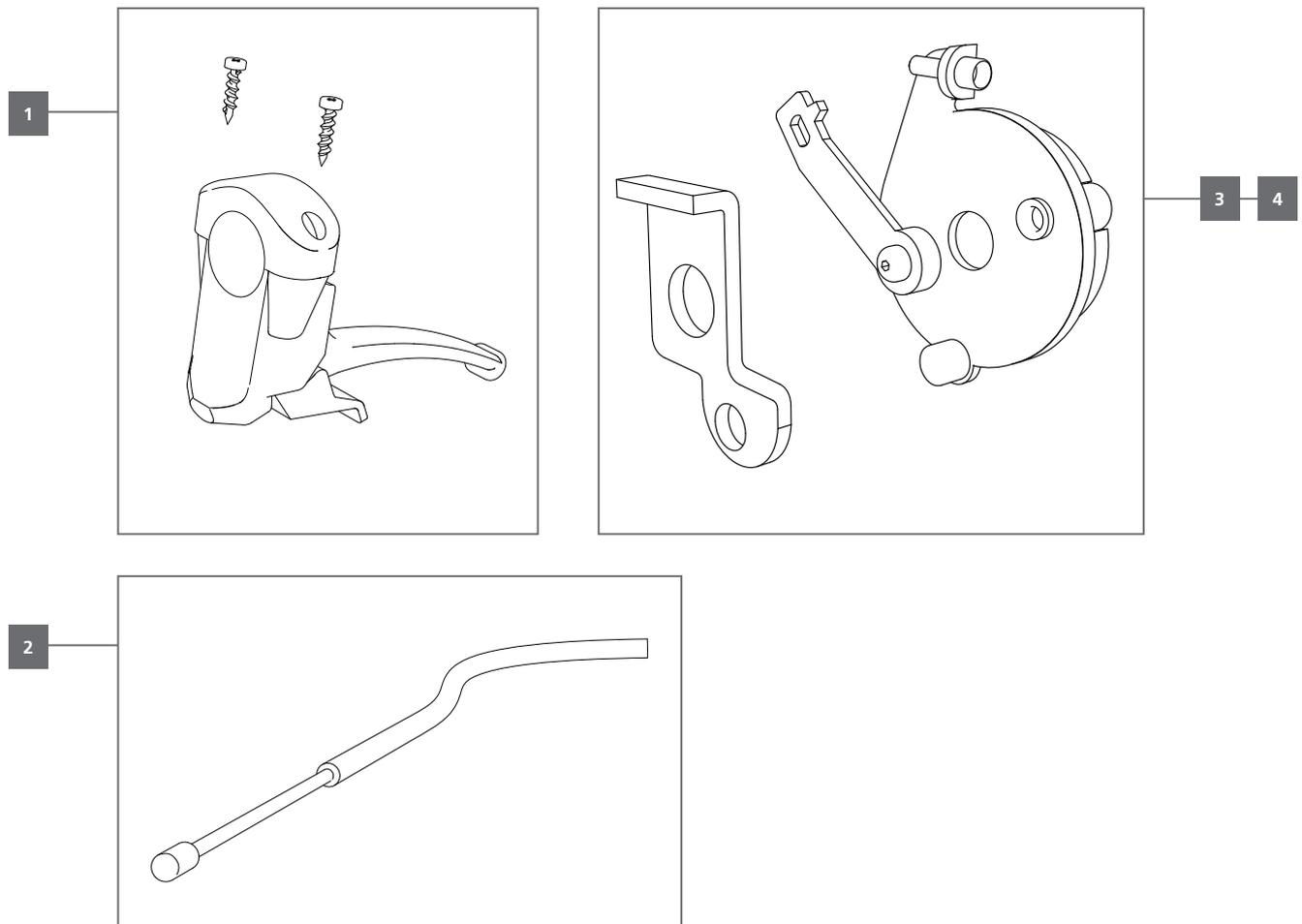
6 7 8 9 10

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	196050	Rückenpolster, inkl. Schrauben, Sitzbreite 39	Stk.
02	1	196051	Rückenpolster, inkl. Schrauben, Sitzbreite 42	Stk.
03	1	196052	Rückenpolster, inkl. Schrauben, Sitzbreite 45	Stk.
04	1	196053	Rückenpolster, inkl. Schrauben, Sitzbreite 48	Stk.
05	1	196054	Rückenpolster, inkl. Schrauben, Sitzbreite 51	Stk.
06	1	196060	Sitzbespannung, inkl. Schrauben, Sitzbreite 39	Stk.
07	1	196061	Sitzbespannung, inkl. Schrauben, Sitzbreite 42	Stk.
08	1	196062	Sitzbespannung, inkl. Schrauben, Sitzbreite 45	Stk.
09	1	196063	Sitzbespannung, inkl. Schrauben, Sitzbreite 48	Stk.
10	1	196064	Sitzbespannung, inkl. Schrauben, Sitzbreite 51	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

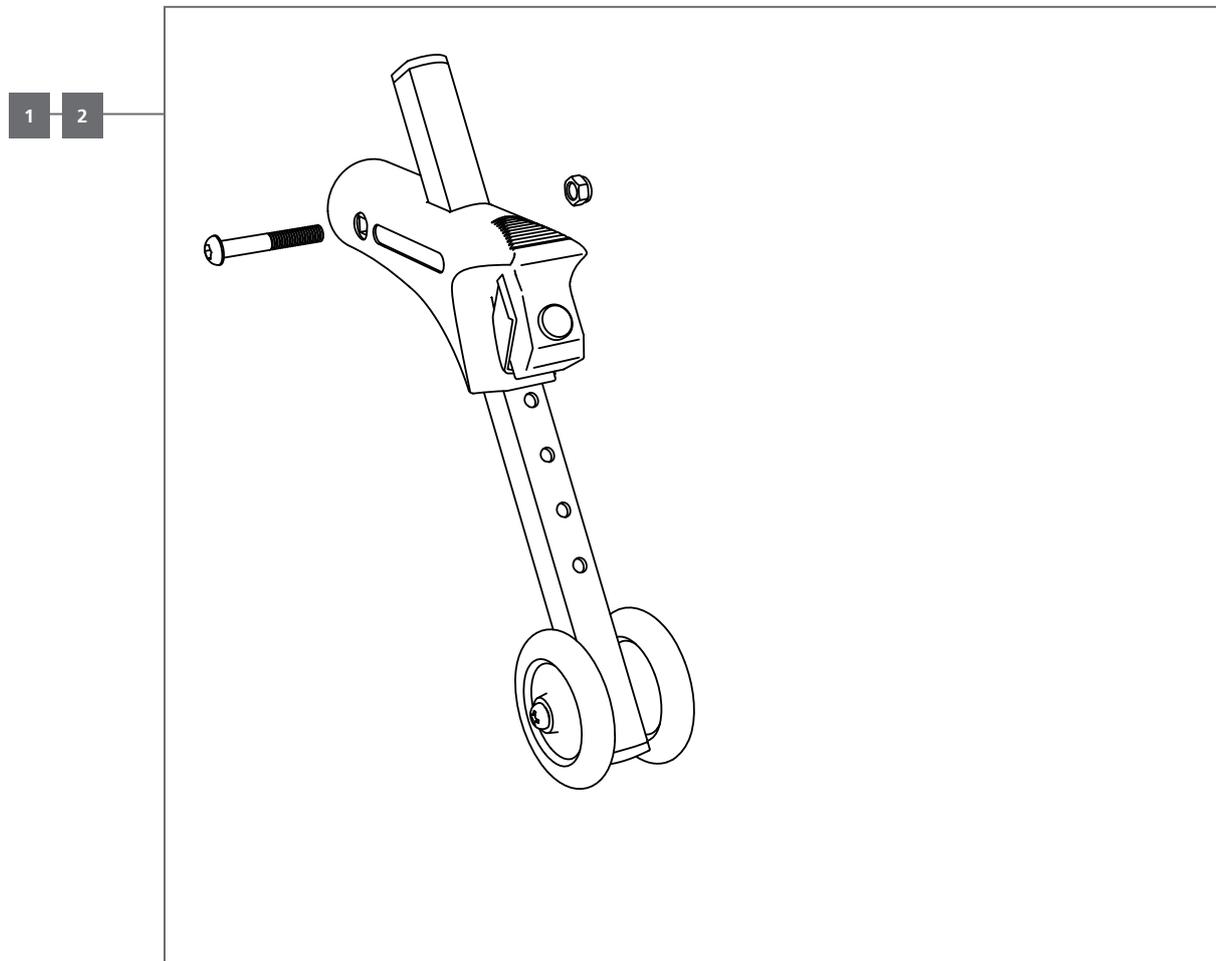
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Trommelbremse	BASIK	102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	2	196023	Bremshebel m. Feststeller für Begleitperson, inkl. Schrauben	Stk.
02	2	196024	Bowdenzug und Hülle	Stk.
03	1	196025	Bremsträger komplett für Trommelbremse, rechts	Stk.
04	1	196026	Bremsträger komplett für Trommelbremse, links	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

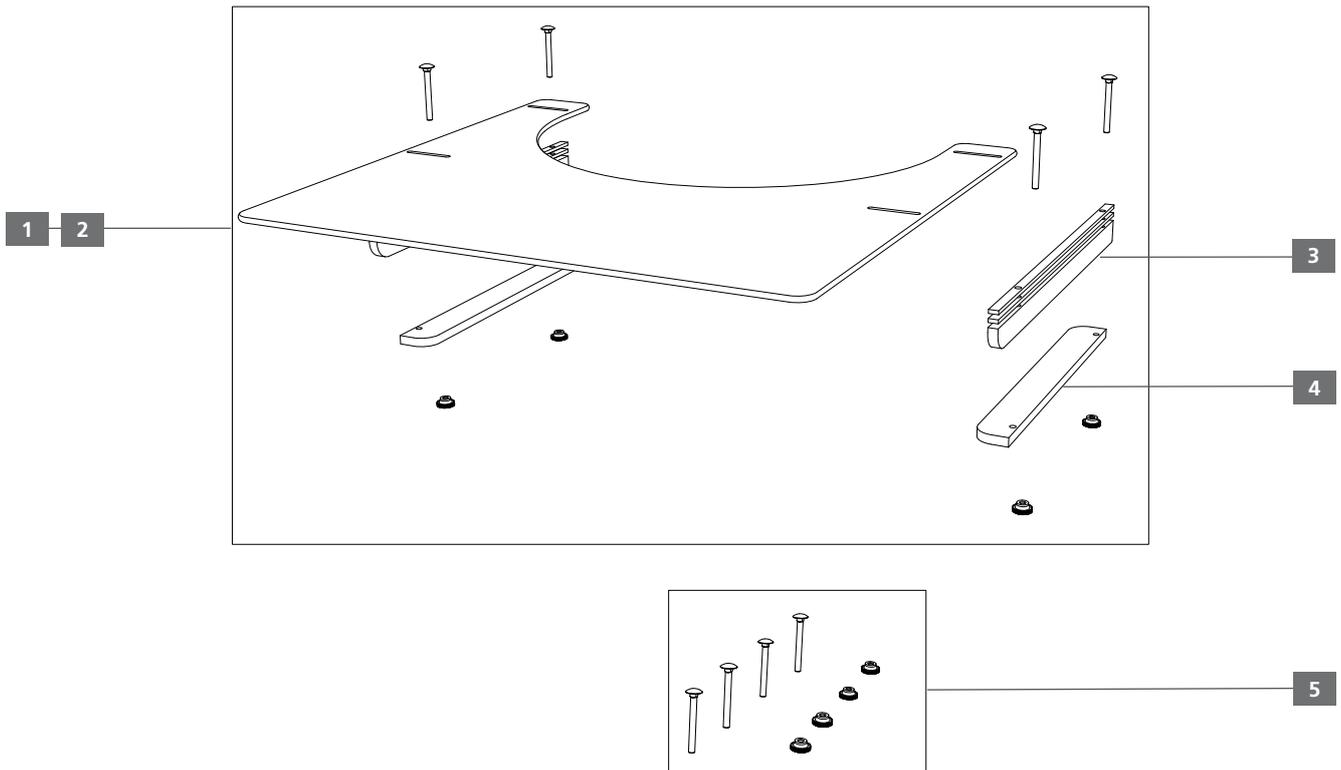
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Anti-Kipp-Stütze	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	2	196206	Anti-Kipp-Stütze, links/rechts verwendbar	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Therapietisch	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019



Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	402270	Therapietisch bis Sitzbreite 45 cm, Acrylglas (einstellbar 48-57,5 cm) komplett	Stk.
02	1	402271	Therapietisch für Sitzbreite 48-51 cm, Acrylglas (einstellbar 53,5- 63 cm) komplett	Stk.
03	1	400911	Halteschienen lang für Therapietisch (2x25 & 2x4mm Schienen aus Set)	Set
04	1	400912	Halteschienen kurz für Therapietisch (2 Schienen)	Set
05	1	401719	Schraubenset für Therapietisch	Set

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Stockhalter	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019



1

Ersatzteilliste

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	402260	Stockhalter mit Schraubhalterung für 25mm Rohr	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

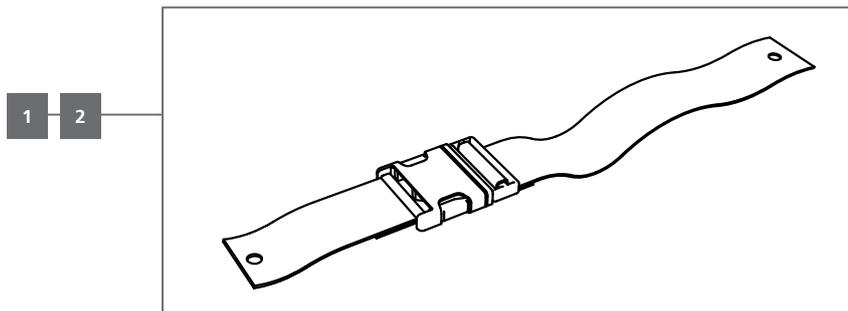
Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Faltsperrre	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	410017	Faltsperrre schwarz, für Rollstühle	Stk.

BASIK**TOMTAR****Standard-Faltrollstuhl**

Baugruppe	Produktname	Haupt-Artikelnummer	Hilfsmittelnummer	Stand
Sonstige	BASIK	102039 - 102051 + 102139 - 102151	18.50.02.0129	01/2019

**Ersatzteilliste**

Objekt	Anzahl/Rollstuhl	Art.Nr.	Beschreibung	Liefermenge
01	1	196208	Beckengurt für SB 39-45cm	Stk.
02	1	196209	Beckengurt für SB 48-51cm	Stk.
o. Abb.	1	400810	Kopfstütze komplett mit Klemmhalterung von SB 45 - 51 cm	Stk.
o. Abb.	1	400351	Einkaufsnetz	Stk.
o. Abb.	1-2	190016	Infusionshalter aus Edelstahl mit 2-armigen Halter aus Kunststoff	Stk.