

AS(01)


DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Castorwinkel einstellen

Entsprechend der Sitzneigung, die sich aus den eingestellten Sitzhöhen vorne und hinten ergibt, muss der Winkel der Castorarme justiert werden. Dieser Winkel muss dabei so eingestellt werden, dass die Achsen der Lenkgabeln (= Castorwinkel) senkrecht zum Boden stehen.

Diese Einstellmöglichkeit dient ausschließlich zur Kompensierung der Sitzneigung. Ein Castorwinkel, der von 90° abweicht, wird immer das Fahrverhalten des Rollstuhles negativ beeinflussen.

Um den Castorwinkel einzustellen, lösen Sie die 3 Schrauben auf der Rahmeninnenseite um einige Umdrehungen. Sie können nun einen 5mm Inbusschlüssel durch die Bohrung unten im Castorgehäuse führen, und durch Drehen den Winkel justieren. Ziehen Sie anschließend alle 3 Schrauben wieder fest an. Zur präzisen Einstellung empfehlen wir die Verwendung eines 90° Anschlagwinkels.

