

**TOMTAR®**

## **9403-A / 9403-B**

Siège de bain /  
siège de bain avec dossier  
Notice d'utilisation version 2.1 FR



**9403-A**




**9403-B**

FR

### Relevé des données d'identification du produit

Nous vous recommandons de noter dans le tableau figurant ci-dessous les données d'identification de votre produit que vous trouverez sur sa plaque signalétique. Ainsi disposerez-vous de ces informations en cas de questions sur le produit.

(Voir chapitre « Étiquetage du produit »)

<b>TYP</b> Type / modèle :	
<b>REF</b> N° d'article/RÉF. :	
<b>UDI</b> Numéro de série (21) :	
 Date de fabrication :	
Autres indications/notes :	

## Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de DIETZ.

Ce produit est un dispositif médical. Il est impératif que vous vous familiarisiez très précisément avec sa manipulation afin d'en faire un bon usage et d'éviter tout risque provoqué par une utilisation impropre.

Veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation avant d'utiliser votre produit. Vous y trouverez des indications importantes qui vous permettront de tirer pleinement partie de ses avantages techniques. Vous y trouverez également des informations concernant la sécurité et le meilleur entretien possible de votre produit.


Si vous souhaitez des informations plus détaillées en matière d'assistance, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Vous trouverez toujours la version la plus récente de documentation concernant votre produit sur notre site internet. Pour toute indication ou question concernant la sécurité liée au produit ou les rappels, adressez-vous par écrit ou par téléphone à DIETZ. Les coordonnées pour nous contacter figurent au dos de la notice d'utilisation.



### REMARQUE

Pour les personnes atteintes de déficience visuelle, la notice d'utilisation est disponible sur **www.dietz-group.de** au format PDF aux fins d'affichage grossi.

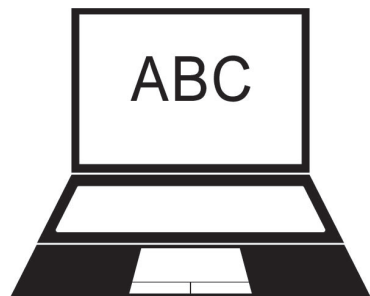

<b>1 Informations importantes</b>	
1.1 Informations d'ordre général . . . . .	5
1.2 Utilisation prévue . . . . .	5
1.3 Indications médicales . . . . .	5
1.4 Contre-indications . . . . .	5
1.5 Symboles . . . . .	6
<b>2 Description du produit</b>	
2.1 Ensemble fourni . . . . .	7
2.2 Représentation exemplaire . . . . .	7
2.3 Accessoires . . . . .	7
<b>3 Mise en service du produit</b>	
3.1 Instructions de montage . . . . .	8
3.2 Outils . . . . .	8
3.3 Montage 9403-A siège de bain . . . . .	8
3.4 Montage 9403-B siège de bain avec dossier . . . . .	8
<b>4 Utilisation du produit</b>	
4.1 Ajustement du siège de bain . . . . .	9
4.2 S'asseoir et se lever . . . . .	10
4.3 Accessoires et pièces rapportées d'autres fabricants . . . . .	10
4.4 Transport . . . . .	10
<b>5 Caractéristiques techniques</b>	
5.1 Principe des dimensions indiquées par DIETZ 11 . . . . .	12
5.2 Dimensions et informations techniques . . . . .	12
5.3 Conformités . . . . .	12
5.4 Matières du produit . . . . .	12
5.5 Étiquetage du produit . . . . .	13
<b>6 Consignes de sécurité</b>	
6.1 Consignes de sécurité . . . . .	14
<b>7 Soin du produit et entretien</b>	
7.1 Entretien et maintenance . . . . .	15
7.2 Plan de maintenance . . . . .	16
7.3 Nettoyage . . . . .	17
7.4 Désinfection . . . . .	17
7.5 Mise au rebut . . . . .	17
7.6 Remise à autrui et réutilisation . . . . .	18
7.7 Entreposage . . . . .	18
<b>8 Déclarations du fabricant</b>	
8.1 Garantie . . . . .	19
8.2 Durée de vie . . . . .	19
8.3 Responsabilité du fabricant . . . . .	19

## 1.1 INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

---

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante de l'ensemble fourni. Elle doit être conservée à portée de main chez l'utilisateur et remise avec le produit en cas de transfert à autrui. En cas d'éventuels perfectionnements techniques futurs, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications des explications figurant dans la présente notice d'utilisation.

Toute réimpression, traduction ou reproduction sous quelque forme que ce soit, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de DIETZ GmbH. Les droits d'auteur sont la propriété du fabricant. Veuillez contacter DIETZ GmbH pour connaître la version la plus récente de votre notice d'utilisation. Lisez la notice d'utilisation avant de monter et d'utiliser le produit.

## 1.2 UTILISATION PRÉVUE

---

Ce produit a pour but de faciliter la prise de la douche/la toilette des personnes à mobilité réduite en position assise dans la baignoire. Le produit est conçu uniquement pour un usage en intérieur et pour supporter un poids maximal de l'utilisateur de 120 kg.

Le produit ne convient pas à des personnes de taille inférieure à 146 cm ou pesant moins de 40 kg (IMC < 17) et ne doit pas être utilisé par des enfants. Ce produit n'est pas conçu pour servir de siège permanent. Ne l'utilisez pas à des fins de transport de personnes ou de charges.

## 1.3 INDICATIONS MÉDICALES

---

L'utilisation du siège de bain est indiquée en cas d' :

- ▼ incapacité totale à tenir debout
- ▼ incapacité partielle à tenir debout
- ▼ amputation / défaillance / déformation d'un membre

## 1.4 CONTRE-INDICATIONS

---

N'utilisez pas ce produit en cas de :

- ▼ troubles de la perception
- ▼ troubles importants de l'équilibre
- ▼ incapacité à vous asseoir
- ▼ poids de l'utilisateur supérieur à 120 kg

## 1.5 SYMBOLES

---

Ces symboles repèrent les passages de texte utiles au fonctionnement et à l'utilisation du produit au quotidien.



---

### AVERTISSEMENT

Tenez impérativement compte des avertissements et respectez-les ! Ils signalent que leur non-respect peut entraîner des risques de blessures et/ou de dommages au produit ou à l'espace environnant. \_\_\_\_\_



---

### REMARQUE

Conseils et astuces facilitant l'utilisation des différentes fonctions. \_\_\_\_\_

## 2.1 ENSEMBLE FOURNI

Le produit est emballé en usine sous film plastique et livré dans un carton.

Après réception de la marchandise, veuillez contrôler immédiatement qu'elle comprend tous les éléments devant être fournis et qu'ils sont en parfait état. Si vous constatez que le contenu est endommagé, veuillez en informer immédiatement votre fournisseur.

Ensemble fourni 9403-A siège de bain :

- ▼ 1 siège de bain prémonté
- ▼ 1 clé Allen
- ▼ 1 notice d'utilisation



### AVERTISSEMENT

**Risque d'empoisonnement :** La combustion de films d'emballage peut entraîner le dégagement de gaz toxiques.

**Risque d'étouffement :** Conserver les sacs en plastique hors de portée des enfants. \_\_\_\_\_

Ensemble fourni 9403-B siège de bain avec dossier :

- ▼ 1 siège de bain prémonté
- ▼ 1 dossier
- ▼ 2 tubes de dossier
- ▼ 1 jeu pour vissage : 4 × vis, 4 × rondelles, 4 × écrous
- ▼ 1 clé Allen
- ▼ 1 notice d'utilisation

## 2.2 REPRÉSENTATION EXEMPLAIRE

1. Dossier (9403-B)
2. Tube du dossier (9403-B)
3. Embout d'appui caoutchouc
4. Assise
5. Appui latéral

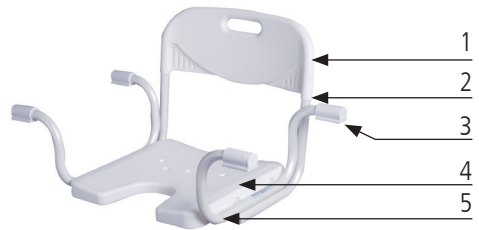


fig. 1

## 2.3 ACCESSOIRES

Il n'y a pas d'accessoires prévus pour ce produit.

### 3.1 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le montage et le contrôle fonctionnel doivent être réalisés par le revendeur spécialisé. Le technicien employé chez le revendeur spécialisé adapte le produit à son utilisateur.



#### REMARQUE

Lisez la notice d'utilisation avant de monter et d'utiliser le produit.

### 3.2 OUTILS

- ▼ Clé Allen 4
- ▼ Tournevis cruciforme (9403-B)

### 3.3 Montage 9403-A siège de bain

1. Le siège de bain 9403-A est livré à l'état prémonté. Sortez le produit de l'emballage en le saisissant des deux mains par les appuis latéraux, puis retirez le sac en plastique.

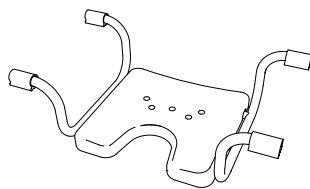


fig. 2

### 3.4 Montage 9403-B siège de bain avec dossier

1. Le siège de bain 9403-B est livré prémonté (sans dossier). Sortez le produit de l'emballage en le saisissant des deux mains par les appuis latéraux, puis retirez le sac en plastique.
2. Pour monter le dossier, vissez les tubes du dossier sur leurs logements situés sur la face inférieure du produit (fig. 3, 1). Utilisez pour cela le kit de vissage fourni :
3. Pour finir, faites coulisser le dossier sur les tubes du dossier jusqu'en butée (fig. 4, 1).

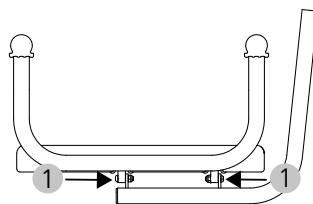


fig. 3

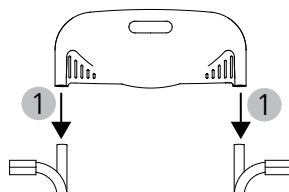


fig. 4



## 4.1 Ajustement du siège de bain

Il est possible d'utiliser le siège de bain sur toute baignoire de dimensions standard. Les appuis latéraux sont dotés d'embouts en caoutchouc antidérapants. Ils préviennent tout glissement intempestif du siège sur le bord de la baignoire. Placez le siège de bain dans la baignoire de sorte que les embouts en caoutchouc des appuis latéraux soient intégralement en appui sur le bord de la baignoire.

1. Il est nécessaire d'ajuster le siège de bain à la largeur de la baignoire. Pour cela, desserrez les 4 vis à six pans creux situées sur le dessous du siège à l'aide de la clé Allen fournie (4) (fig. 5, 1).
2. Mettez le siège de bain dans la baignoire et allongez les deux appuis latéraux en tirant de manière uniforme de sorte que les embouts en caoutchouc soient intégralement en appui sur le bord de la baignoire (fig. 5, 2).
3. Retirez ensuite le siège de bain de la baignoire et resserrez à fond les quatre vis (fig. 5, 1).



### AVERTISSEMENT

**Risque de pincement :** Faites attention à vos mains et doigts lorsque vous ajustez la largeur du siège de bain et que vous passez la main dans la fente entre l'appui du siège et l'assise.

**Risque de basculement :** Il convient de remplacer sans tarder les embouts d'appui en caoutchouc s'ils sont usés ou détériorés.

**Risque d'accident :** Veillez à ce que les appuis latéraux soient correctement ajustés à la largeur de la baignoire, c'est-à-dire que leurs embouts en caoutchouc soient intégralement et fermement en appui sur le bord de la baignoire.

**Risque de glissement :** Veillez à ce que les embouts en caoutchouc et le bord de la baignoire, dans la zone d'appui, soient absolument exempts de graisse, de savon ou de produit de douche.

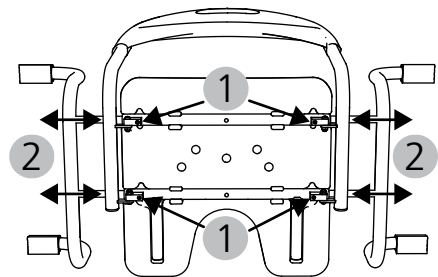


fig. 5

## 4.2 S'asseoir et se relever

1. Faites passer vos deux jambes dans la baignoire en vous tenant au bord de celle-ci.
2. Tenez-vous au bord de la baignoire pour vous asseoir et vous relever. Si nécessaire, faites-vous assister pour cela par un aidant.



### AVERTISSEMENT

**Risque d'accident** : Ne vous mettez pas debout sur l'assise.

**Risque d'accident** : Ne prenez pas appui sur les appuis latéraux ou les embouts d'appui en caoutchouc lorsque vous vous asseyez ou vous levez.

## 4.3 ACCESSOIRES ET PIÈCES RAPPORTÉES D'AUTRES FABRICANTS

Il n'y a pas d'accessoires de DIETZ prévus pour ce produit. Seule l'utilisation des accessoires d'origine de DIETZ GmbH est permise a priori. En cas de montage sur le produit de produits d'autres fabricants, la responsabilité quant à la sécurité du produit est transférée à la personne ayant monté l'accessoire ou la pièce rapportée. La personne qui monte un accessoire ou une pièce rapportée doit faire une nouvelle déclaration de conformité pour l'ensemble formé par ces nouveaux accessoires/pièces et le produit. La déclaration de conformité faite par DIETZ selon le MDR 2017/745, annexes I à III, n'est alors plus valide.



### AVERTISSEMENT

**Danger pour la sécurité** : La sécurité du produit ne peut pas être garantie en cas d'utilisation de pièces rapportées ou d'accessoires non distribués par DIETZ.

Si des accessoires ou des pièces sont montés/rapportés au produit, il faut impérativement respecter les consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation de ces accessoires ou pièces.

## 4.4 TRANSPORT

Ce produit n'est pas conçu pour être transporté fréquemment. S'il est nécessaire de transporter la chaise, nous recommandons de la désassembler dans le sens inverse de celui indiqué dans les instructions de montage mentionnées plus haut. Il convient d'emballer le produit de

manière à ce qu'il soit stable et ne risque pas d'être détérioré en cas de secousses brusques ou dangereuses durant le transport.

## 5.1 PRINCIPE DES DIMENSIONS INDIQUÉES PAR DIETZ

Les données dimensionnelles se réfèrent à la configuration standard du produit.



### REMARQUE

Les dimensions mesurées sur pièces en textile (par ex. hauteur du dossier) sont données à titre indicatif, avec une tolérance de  $\pm 10$  mm. \_\_\_\_\_

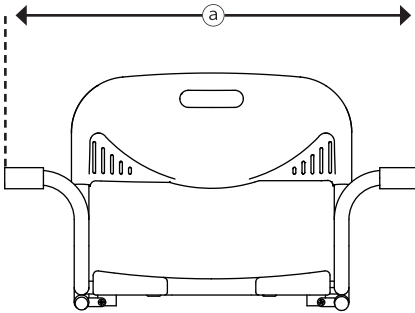


fig. 6

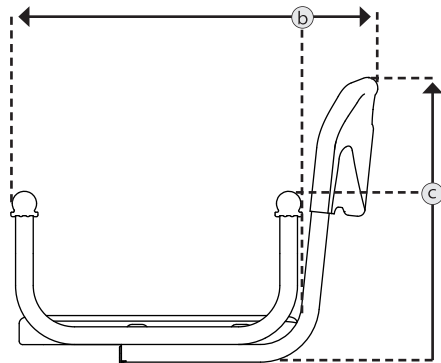


fig. 7

## 5.2 DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications		9403-A	9403-B
	Réf. HMV (registre des produits d'assistance)	04.40.02.1006	04.40.02.2007
	Couleur	mm	blanc
a	Largeur hors tout	mm	735 – 890
b	Longueur hors tout	mm	420
c	Hauteur hors tout	mm	285
	Assise (l x p)	mm	400 × 400
	Plage d'ajustement dans la baignoire	mm	480 – 770
	Température ambiante de service	+10 °C à +40 °C	
	Conditions ambiantes d'entreposage	de 0 °C à 45 °C // humidité relative de l'air de 20 % à 75 %	
	Poids total	kg	2,7
	Poids maximal admissible de l'utilisateur <sup>1</sup>	kg	120

<sup>1</sup> Poids maximal admissible de l'utilisateur avec charge supplémentaire / le poids de la charge supplémentaire abaisse d'autant le poids maximal admissible de l'utilisateur

## 5.3 CONFORMITÉS

DIN EN 12182	Contrôlé conformément aux exigences des produits d'assistance pour personnes en situation de handicap
ISO 17966	Contrôlé conformément aux exigences et méthodes d'essai des produits d'assistance pour l'hygiène personnelle
ISO 10993-5	Contrôle de la toxicité dans la matière
Poids mannequin d'essai	120 kg

## 5.4 MATIÈRES DU PRODUIT

Appui latéral/tubes d'assise et de dossier	aluminium (peint)
Embouts d'appui caoutchouc	plastique (TPR)
Dossier/assise	polyéthylène (PE)
Bouchons d'assise	plastique (TPR)
Pièces en caoutchouc	plastique (ABS)
Vis, raccords	acier inoxydable

**Remarque :** Tous les métaux utilisés sont résistants à la corrosion

## 5.5 ÉTIQUETAGE DU PRODUIT

La plaque signalétique et les avertissements figurant sur le produit doivent être lisibles. Faites remplacer immédiatement les plaques/étiquettes illisibles ou manquantes par votre revendeur spécialisé. Le numéro de série qui identifie sans ambiguïté un produit se trouve, sous l'assise, sur la plaque signalétique. Celle-ci ne doit pas être retirée.

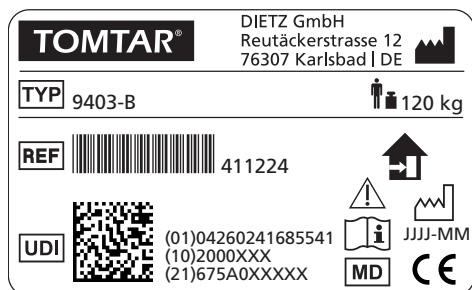








fig. 8

<b>TOMTAR®</b>	Marque commerciale
<b>TYP</b>	TYPE/modèle
<b>REF</b>	RÉF. = référence de l'article
<b>UDI</b>	UDI = Identifiant unique du dispositif (01) UDI-DI/GTIN (10) Numéro de lot (21) Numéro de série
	Fabricant/marque du fabricant/ adresse de contact
	Poids maximal admissible de l'utilisateur, charge supplémentaire comprise
	Date de fabrication
	Le produit n'est homologué que pour une utilisation en intérieur
	Respecter la notice d'utilisation
	Attention : Les consignes de sécurité se trouvent dans la notice d'utilisation !
<b>MD</b>	Medical Device / dispositif médical
<b>CE</b>	Marquage CE MDR 2017/745, annexes I à III

## 6.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Lors de l'utilisation de votre produit, veillez à toujours respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute chute, situation dangereuse et toute détérioration du produit :

- ▼ Le produit ne peut être utilisé qu'en intérieur.
- ▼ N'utilisez pas le produit comme aide pour vous hisser et ne vous tenez pas debout dessus.
- ▼ Ne laissez jamais un enfant ou un adolescent sans surveillance installé sur le produit.
- ▼ Il y a risque de dérapage en s'asseyant ou en se relevant dans une baignoire humide, surtout en cas d'utilisation de produits de douche (par exemple du savon ou gel douche).
- ▼ Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est en bon état. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- ▼ Contrôlez la stabilité du produit après chaque désassemblage et réassemblage.
- ▼ En cas de mobilité fortement réduite, utilisez le produit avec l'aide d'un accompagnant.
- ▼ La surface du produit peut s'échauffer sous l'effet de l'eau chaude ou des rayons du soleil. Risque de brûlures !
- ▼ Les incidents graves survenant en lien avec le produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente.

## 7.1 ENTRETIEN / MAINTENANCE

---

Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement les contrôles indiqués dans le plan de maintenance pour que la sécurité du produit puisse être systématiquement garantie.

Un entretien ou une maintenance du produit insuffisante ou négligée entraîne la limitation de la responsabilité du fabricant. Le plan de maintenance ne fournit pas d'informations sur l'ampleur réelle des interventions effectivement nécessaires sur le produit.



### REMARQUE

En tant qu'utilisateur, vous êtes le premier à pouvoir détecter un éventuel dommage. Si vous constatez un défaut qui est décrit dans le plan de maintenance ou tout autre défaut ou une entrave au bon fonctionnement, veuillez contacter immédiatement un revendeur spécialisé agréé. \_\_\_\_\_



### AVERTISSEMENT

Aux fins de maintien de la fiabilité du produit, seul le revendeur spécialisé est autorisé à effectuer des réparations sur le produit, avec des pièces de rechange d'origine DIETZ. Le catalogue des pièces de rechange correspondant est à votre disposition sur notre site internet, à la rubrique informations sur le produit. \_\_\_\_\_



### REMARQUE






Sauf indication contraire, les contrôles et mesures préconisés dans le plan de maintenance doivent être effectués par l'utilisateur ou un auxiliaire. \_\_\_\_\_



### REMARQUE DESTINÉE AU REVENDEUR SPÉCIALISÉ :

Si l'utilisateur constate des anomalies sur le produit, veuillez effectuer le contrôle de tous les points énumérés dans le plan de maintenance. Ces contrôles doivent également être effectués avant chaque réutilisation et après un entreposage prolongé du produit (> 4 mois). \_\_\_\_\_

## 7.2 PLAN DE MAINTENANCE

Intervention	Description	<div style="text-align: right; font-size: small;">une fois par mois</div> <div style="text-align: right; font-size: x-small;">avant utilisation</div> <div style="text-align: right;">  </div>	
<b>Assise/dossier</b> vérifier le bon fonctionnement et contrôler l'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'assise, et le dossier le cas échéant, sont correctement fixés.</li> </ul>	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle des 5 bouchons intégrés à l'assise.   Faites remplacer les bouchons manquants dans les plus brefs délais par l'intermédiaire de votre revendeur spécialisé.</li> </ul>	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche de ruptures et de détériorations matérielles   N'utilisez plus le produit si vous constatez une détérioration de cette nature. Veuillez-vous adresser immédiatement à votre revendeur spécialisé aux fins de remise en état.</li> </ul>		x
<b>Appuis latéraux/ tubes d'assise et de dossier</b> contrôler l'état	Contrôlez si le cadre n'est pas déformé ou cassé.  N'utilisez plus le produit si vous constatez une détérioration de cette nature. Veuillez-vous adresser immédiatement à votre revendeur spécialisé aux fins de remise en état.		x
<b>Raccords à vis</b> contrôler la solidité de la fixation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les raccords à vis doivent être serrés à fond.   Les écrous et vis autobloquants perdent de leur efficacité lorsqu'ils sont dévissés et revissés de manière répétée. C'est pourquoi il est nécessaire de les faire remplacer par un revendeur spécialisé agréé.</li> </ul>	x	
<b>Embouts d'appui caoutchouc</b> contrôler l'état	 En cas de défaut, remplacez sans tarder les embouts d'appui en caoutchouc.		x
<b>Contrôle visuel</b> Vérifiez l'absence de pièces desserrées, de ruptures, de corrosion ou d'autres dommages	 N'utilisez plus le produit si vous constatez une détérioration de cette nature, car un usage sûr n'est alors plus garanti. Veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé		x
<b>Ensemble du produit</b> contrôler l'état de propreté	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après chaque utilisation, nettoyez, et désinfectez si nécessaire, les pièces du produit qui ont été en contact direct avec la peau.</li> </ul>	x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ensemble du produit doit être nettoyé et désinfecté au minimum une fois par mois, et sinon selon le degré de salissure (voir chapitres 7.3. et 7.4).</li> </ul>		x



### 7.3 NETTOYAGE

---

Pour nettoyer le produit, utilisez de l'eau tiède additionnée d'un nettoyant doux (sans solvant et d'un pH de 5 à 9). Après le nettoyage, rincez le produit à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon.



#### AVERTISSEMENT

**Détérioration matérielle :** Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression, ni de produits chimiques agressifs ou caustiques, ou d'additifs abrasifs.

**Risque de corrosion :** Pour éviter la corrosion, assurez-vous que tous les éléments sont entièrement secs après le nettoyage. \_\_\_\_\_

### 7.4 DÉSINFECTION

---

Frottez ou vaporisez soigneusement toutes les pièces avec un désinfectant du commerce pour surfaces. Les surfaces sur lesquelles les mains et la peau sont en contact fréquent, comme l'assise, doivent être désinfectées avec un soin minutieux.

Les désinfectants compatibles avec les matières sont les suivants :

- ▼ désinfectant sans aldéhyde à base d'alcools (70 % d'alcool propylique maximum)



#### AVERTISSEMENT

**Détérioration matérielle :** Pour la désinfection, veillez à respecter les instructions d'utilisation et de mise en œuvre du fabricant des produits d'entretien.

**Risque d'infection :** Le produit doit être désinfecté avant chaque utilisation par une autre personne. \_\_\_\_\_

### 7.5 MISE AU REBUT

---

Si vous n'avez plus besoin du produit, veuillez contacter votre revendeur spécialisé qui viendra le chercher pour le mettre au rebut dans les règles ou assurer sa réutilisation. Si cela n'est pas possible, veuillez déposer le produit dans votre déchetterie locale.

## 7.6 REMISE À AUTRUI ET RÉUTILISATION

---

Vous pouvez remettre votre produit à autrui en vue de sa réutilisation. Le nombre de réutilisations possibles dépend de l'état d'usure des matières et de l'aptitude fonctionnelle du produit concerné.

Lorsque vous remettez le produit à autrui aux fins de réutilisation, veillez à donner au nouvel utilisateur ou au revendeur spécialisé l'ensemble des documents techniques requis pour une utilisation sûre.

Avant la réutilisation du produit, le revendeur spécialisé doit le nettoyer, le désinfecter, contrôler son état, puis donner son feu vert.

Tous les points de contrôle énumérés dans le plan de maintenance doivent être contrôlés sur le produit.

## 7.7 ENTREPOSAGE

---

Si vous souhaitez entreposer le produit, veillez à le placer dans un environnement sec, à l'abri d'un fort ensoleillement et à une température comprise entre 0 °C et +45 °C. Pour minimiser son encombrement, vous pouvez désassembler le produit dans le sens inverse du sens indiqué dans les instructions de montage. Sur le lieu d'entreposage, sécurisez le produit pour prévenir tout mouvement ou chute indésirable.

Si vous souhaitez réutiliser le produit après un entreposage prolongé (> 4 mois), veuillez contrôler tous les points énumérés dans le plan de maintenance.



### AVERTISSEMENT

**Détérioration matérielle :** N'entrez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne déposez aucun objet dessus pendant l'entreposage.

---

## 8.1 GARANTIE

---

Les prestations de la garantie s'appliquent à tous les vices du produit qui sont dus à un problème de fabrication ou un défaut de matière. La durée de la garantie est de 24 mois à compter de la réception de l'avis de livraison, et au plus tard après la livraison. Les dommages causés

par l'usure naturelle, intentionnellement, par négligence ou en raison d'une utilisation inappropriée sont exclus de l'obligation de garantie. Il en va de même en cas d'utilisation de produits d'entretien, d'huiles lubrifiantes ou de graisses inappropriés.

## 8.2 DURÉE DE VIE

---

La durée de vie prévisionnelle de ce produit est de cinq ans dans le cadre d'une utilisation quotidienne et conforme. Le respect des consignes de maintenance et de sécurité indiquées dans la

présente notice d'utilisation constitue une condition préalable à cette durée de vie.

La durée de vie indiquée ne constitue pas une garantie supplémentaire.

## 8.3 RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

---

La responsabilité de DIETZ GmbH est uniquement engagée si les produits sont utilisés dans les conditions spécifiées et aux fins spécifiées. Nous recommandons de manipuler les produits de manière appropriée et de les utiliser conformément aux instructions. La responsabilité de DIETZ GmbH n'est pas engagée en cas de dommages causés par des composants ou des pièces de rechange qui n'ont pas été agréés par DIETZ GmbH. Seul un revendeur spécialisé agréé, ou le fabricant lui-même, est autorisé à effectuer les réparations du produit.

# TOMTAR®



Groupe de produits : siège de bain

Produit : 9403-A / 9403-B

Notice d'utilisation version 2.1 FR

Version 2021-12 (RPO)

## **DIETZ GmbH**

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Allemagne

Tél. : +49 7248.9186-0

Fax : +49 7248.9186-86

[info@dietz-group.de](mailto:info@dietz-group.de)

[www.dietz-group.de](http://www.dietz-group.de)

TOMTAR est une marque déposée de DIETZ GmbH.

Les produits TOMTAR sont distribués par DIETZ GmbH.

Sous réserve d'erreurs d'impression, d'informations erronées et de modifications de prix ou de produits.

© DIETZ GmbH, Karlsbad.

Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de DIETZ GmbH, Karlsbad.