

# HEMI - ARMAUFLAGE

## Montage an den Rollstühlen

TOMTAR MR-S-/MR-LG, CANEO und AS[01]

Werkzeuge: Innensechskantschlüssel 3 mm, 4 mm, 8er-Maulsschlüssel

### 1) Montage Hemi-Armauflage (Abb. 2)

Montieren Sie die Hemi-Armauflage, indem Sie die Unterarmschale mit der Handauflage und ggf. dem Verlängerungsstück über die Verbindungsplatten ineinander stecken. Fixieren Sie alle Elemente über ein Anziehen der 4 Gewindestifte mit einem Innensechskantschlüssel 3mm fest.

### 2) Montage Hemi-Schwenkarm 360° am Rollstuhl (Abb. 3 & 4):

- A) 2 x M5 x 40 Innensechskantschraube\* (ISO 4762 / DIN 912 - A2 blank in M5 x 40 - SW 4mm)
- B) 4 x Unterlegscheibe\* (DIN 9021 - A2 blank in D5,3 x 15mm x 1,2mm)
- C) 2 x M5 Positionierbuchse mit Bund (2 x M6 Positionierungs-Buchsen bleiben über)
- D1) 1 x Halteplatte schwarz für TOMTAR MR-S / MR-LG
- D2) 1 x Halteplatte silber (184621) für **CANEO S E B L XL & AS [01]**, bitte D1 gegen D2 austauschen (siehe Abb. 3 & 5)\*
- E) 2 x Halbschellen
- F) 2 x Distanzprofil 400341\*
- G) 2 x Hutmuttern lang selbstsichernd\* (DIN 986 - A2K M5 mit SW 8mm)
- H) Armlehnenrohr Rollstuhl, an die vorhanden Bohrlöcher wird die Halteplatte montiert (Standard Armlehnenpolster und Höhenadapter beim TOMTAR MR-S/MR-LG sind zu entfernen)

### 3) Montage Schwenkarm an der Armauflage:

Befestigen Sie den Schwenkarm mit den Schrauben (J) durch die Montagelöcher (K) in die Nutsteine (I), die sich in der Unterarmschiene befinden. (Abb. 6 & 7)

\*DIETZ Ergänzungs-Set für die Montage am Rollstuhl (A, B, F, G); D2 nur für CANEO & AS[01]

