

TOMTAR®

TOMTAR DH / DS

Tabouret de douche / chaise de douche
Notice d'utilisation version 1.4 FR



TOMTAR DH




TOMTAR DS

FR

Relevé des données d'identification du produit

Nous vous recommandons de noter dans le tableau figurant ci-dessous les données d'identification de votre produit que vous trouverez sur sa plaque signalétique. Ainsi disposerez-vous de ces informations en cas de questions sur le produit.

(Voir chapitre « Étiquetage du produit »)

TYP Type / modèle :	
REF N° d'article/RÉF. :	
UDI Numéro de série (21) :	
 Date de fabrication :	
Autres indications/notes :	

Nous vous remercions d'avoir choisi un tabouret de douche de DIETZ.

Ce produit est un dispositif médical. Il est impératif que vous vous familiarisiez très précisément avec sa manipulation afin d'en faire un bon usage et d'éviter tout risque provoqué par une utilisation impropre.

Veillez lire attentivement la présente notice d'utilisation avant d'utiliser votre produit. Vous y trouverez des informations importantes qui vous permettront de tirer pleinement partie de ses avantages techniques. Vous y trouverez également des informations concernant la sécurité et le meilleur entretien possible de votre produit.


Si vous souhaitez des informations plus détaillées en matière d'assistance, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Vous trouverez toujours la version la plus récente de documentation concernant votre produit sur notre site internet. Pour toute indication ou question concernant la sécurité liée au produit ou les rappels, adressez-vous par écrit ou par téléphone à DIETZ. Les coordonnées pour nous contacter figurent au dos de la notice d'utilisation.



REMARQUE

Pour les personnes souffrant de déficience visuelle, une version de cette notice d'utilisation en gros caractères est disponible sur **shop.dietz-group.de** au format PDF.

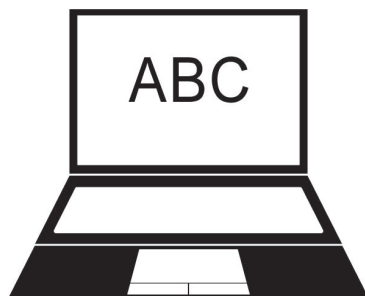

1 Informations importantes	
1.1 Informations d'ordre général	5
1.2 Utilisation prévue	5
1.3 Indications médicales	5
1.4 Contre-indications	5
1.5 Symboles	6
2 Description du produit	
2.1 Ensemble fourni	7
2.2 Représentation exemplaire	7
2.3 Accessoires	7
3 Mise en service du produit	
3.1 Instructions de montage	8
3.2 Outils	8
3.3 Montage TOMTAR DH	8
3.4 Montage TOMTAR DS	9
4 Utilisation du produit	
4.1 Réglage de la hauteur d'assise	10
4.2 Soulever le produit	10
4.3 S'asseoir et se relever	11
4.4 Transport	11
4.5 Accessoires et pièces rapportées d'autres fabricants	12
5 Caractéristiques techniques	
5.1 Principe des dimensions indiquées par DIETZ	13
5.2 Dimensions et informations techniques	14
5.3 Conformités	14
5.4 Autres données	14
5.5 Matières du produit	15
5.6 Étiquetage du produit	15
6 Consignes de sécurité	
6.1 Consignes de sécurité	16
7 Soin du produit et entretien	
7.1 Entretien / maintenance	17
7.2 Plan de maintenance	18
7.3 Nettoyage	19
7.4 Désinfection	19
7.5 Mise au rebut	19
7.6 Remise à autrui et réutilisation	20
7.7 Entreposage	20
8 Déclarations du fabricant	
8.1 Garantie	21
8.2 Durée de vie	21
8.3 Responsabilité du fabricant	21

1.1 INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante de l'ensemble fourni. Elle doit être conservée à portée de main chez l'utilisateur et remise avec le produit en cas de transfert à autrui. En cas de perfectionnements techniques, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications des explications figurant dans la présente notice d'utilisation. Toute réimpression,

traduction ou reproduction sous quelque forme que ce soit, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de DIETZ GmbH. Les droits d'auteur sont la propriété du fabricant. Veuillez contacter DIETZ GmbH pour connaître la version la plus récente de votre notice d'utilisation. Lisez la notice d'utilisation avant de monter et d'utiliser le produit.

1.2 UTILISATION PRÉVUE

Utilisée sur un revêtement de sol solide, plan et antidérapant, cette chaise de douche a pour but de faciliter la prise de la douche aux personnes à mobilité réduite. Ces produits sont conçus uniquement aux fins d'assistance à la toilette quotidienne, dans la douche ou la salle de bain. Le produit est conçu pour supporter un poids maximal de l'utilisateur de 100 kg. Le produit

TOMTAR DH/DS est destiné exclusivement à l'usage domestique.

Le produit ne convient pas à des personnes de taille inférieure à 146 cm ou pesant moins de 40 kg (IMC < 17) et ne doit pas être utilisé par des enfants. Ce produit n'est pas conçu pour servir de siège permanent. Ne l'utilisez pas à des fins de transport de personnes ou de charges.

1.3 INDICATIONS MÉDICALES

L'usage de ce produit est recommandé aux personnes à mobilité physique réduite qui ne peuvent pas prendre la douche debout en raison de :

- ▼ incapacité totale à tenir debout
- ▼ incapacité partielle à tenir debout
- ▼ amputation / défaillance / déformation d'un membre

1.4 CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas ce produit en cas de :

- ▼ troubles de la perception
- ▼ troubles importants de l'équilibre
- ▼ incapacité à s'asseoir
- ▼ poids de l'utilisateur supérieur à 100 kg

1.5 SYMBOLES

Ces symboles repèrent les passages de texte utiles au fonctionnement et à l'utilisation du produit au quotidien.



AVERTISSEMENT

Tenez impérativement compte des avertissements et respectez-les ! Ils signalent que leur non-respect peut entraîner des risques de blessures et/ou de dommages au produit ou à l'espace environnant. _____



REMARQUE

Conseils et astuces facilitant l'utilisation des différentes fonctions. _____

2.1 ENSEMBLE FOURNI

Le produit est emballé en usine sous film plastique et livré dans un carton.

Après réception de la marchandise, veuillez contrôler immédiatement qu'elle comprend tous les éléments devant être fournis et qu'ils sont en parfait état. Si vous constatez que le contenu est endommagé, veuillez en informer immédiatement votre fournisseur.

Ensemble fourni TOMTAR DH :

- ▼ 1 assise
- ▼ 2 pieds télescopiques numérotés (1, 2)
- ▼ Kit de fixation : 5 × rondelles, 5 × vis de 35 mm
- ▼ 1 notice d'utilisation

2.2 REPRÉSENTATION EXEMPLAIRE

1. Cavité de préhension (sur le modèle TOMTAR DS)
2. Dossier (sur le modèle TOMTAR DS)
3. Tube de dossier (sur le modèle TOMTAR DS)
4. Assise (avec cavités de préhension extérieures)
5. Pied télescopique
6. Bouton à ressort
7. Embout de pied en caoutchouc



AVERTISSEMENT

Risque d'empoisonnement : La combustion de films d'emballage peut entraîner le dégagement de gaz toxiques.

Risque d'étouffement : Conserver les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Ensemble fourni TOMTAR DS

- ▼ 1 assise
- ▼ 2 pieds télescopiques numérotés (1, 2)
- ▼ 1 dossier et 2 tubes supports de dossier
- ▼ Kit de fixation : 9 × rondelles, 4 × vis de 55 mm, 1 × vis 35 mm, 4 × vis de 30 mm
- ▼ 1 notice d'utilisation



fig. 1

2.3 ACCESSOIRES

Il n'y a pas d'accessoires prévus pour ce produit.

3.1 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le montage et le contrôle fonctionnel doivent être réalisés par un revendeur spécialisé. Le technicien employé chez le revendeur spécialisé adapte le produit à son utilisateur.



REMARQUE

Lisez la notice d'utilisation avant de monter et d'utiliser le produit.

3.2 OUTILS

Pour le montage, les outils nécessaires sont les suivants :

- ▼ Tournevis cruciforme

3.3 Montage TOMTAR DH

1. Posez l'assise le dessous tourné vers le haut, sur une surface propre, plane et stable (sur le sol ou une table) (fig. 2).

2. Disposez les pieds télescopiques en croix sur le dessous de l'assise pour les monter.

Le pied télescopique numéro 1 se trouve dessous (fig. 2, 1) et le numéro 2 (fig. 2, 2) est placé par-dessus et fixé au centre (fig. 2, 3).

Utilisez pour cela les pièces suivantes :

1 × rondelle, 1 × vis 35 mm.

3. Vissez les pieds télescopiques sur l'assise par les quatre alésages restants (fig. 2, 4).

Utilisez pour cela les pièces suivantes :

4 × rondelles, 4 × vis de 35 mm.



AVERTISSEMENT

Risque de pincement : Durant tout le montage, faites attention à vos mains et/ou doigts. _

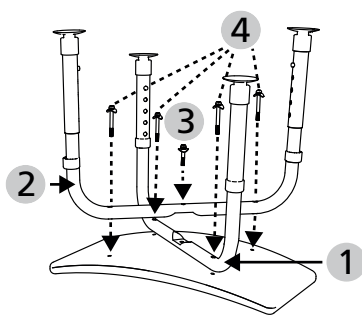


fig. 2

3.4 Montage TOMTAR DS

1. Posez l'assise le dessous tourné vers le haut, sur une surface propre, plane et stable (sur le sol ou une table) (fig. 2).
2. Disposez les pieds télescopiques en croix sur le dessous de l'assise pour les monter. Le pied télescopique numéro 1 se trouve dessous (fig. 2, 1) et le numéro 2 (fig. 2, 2) est placé par-dessus et fixé au centre (fig. 2, 3). Utilisez pour cela les pièces suivantes :
1 × rondelle, 1 × vis 35 mm.
3. Ensuite, faites chevaucher les alésages des pieds télescopiques et ceux des tubes du dossier et vissez tous les composants à l'assise (fig. 3, 1). Utilisez pour cela les pièces suivantes : 4 × rondelles, 4 x vis de 55 mm.
4. Pour le montage du dossier, faites chevaucher les alésages du dossier et ceux de ses tubes, puis vissez ces éléments (fig. 4, 1). Pour cela, utilisez les pièces suivantes :
4 x rondelles, 4 x vis de 30 mm.



AVERTISSEMENT

Risque de pincement : Durant le montage, faites attention à vos mains et/ou doigts. _____

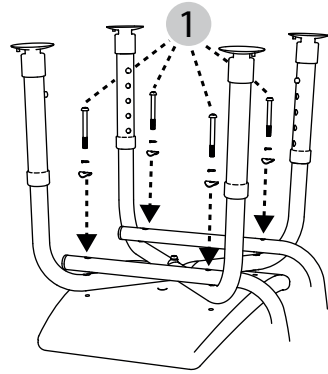


fig. 3

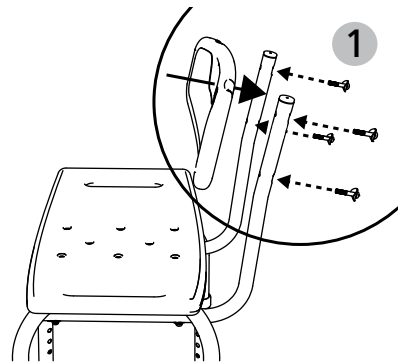


fig. 4

4.1 Réglage de la hauteur d'assise

1. Le produit offre 6 hauteurs d'assise différentes. Pour adapter la hauteur, enfoncez les boutons à ressorts situés sur les pieds télescopiques (fig. 5, 1).
2. Réglez chaque pied télescopique à la longueur souhaitée (fig. 5, 2) jusqu'à ce que le bouton à ressort ressorte du trou et soit arrêté (fig. 5, 1).




AVERTISSEMENT

Risque de pincement : Faites attention à vos doigts lorsque vous réglez les pieds télescopiques.

Risque d'accident : Veillez à ce que les boutons à ressort ressortent par un trou des pieds télescopiques après la translation et qu'ils soient arrêtés.

Risque de basculement : Réglez les 4 pieds télescopiques à la même longueur. _____

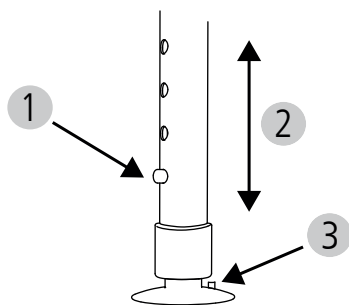

4.2 Soulever le produit

1. Avant de soulever le produit, tous les pieds ventouses doivent être désolidarisés du sol. Tirez sur la languette du pied ventouse à cet effet (fig. 5, 3).
2. Une fois désolidarisé, laissez le pied ventouse soulevé de sorte qu'il ne puisse pas se fixer de nouveau au sol.



AVERTISSEMENT

Risque d'accident : N'essayez pas de soulever la chaise sans avoir auparavant détaché les pieds ventouses afin que le bouton à ressort et les vis ne se desserrent pas lors de l'utilisation.

Risque d'accident : Soulevez le produit uniquement sans charge, en le saisissant par les deux cavités de préhension de l'assise (côtés gauche et droit). _____

4.3 S'asseoir et se relever

1. En installant le siège de douche, veillez à ce qu'il reste suffisamment d'espace pour pouvoir évoluer. Les pieds du siège doivent reposer en toute sécurité et la chaise doit être accessible sans encombre.
2. En vous asseyant, centrez-vous sur l'assise (fig. 6, 1) entre les cavités de préhension (gauche et droite, fig. 6, 2). Si nécessaire, faites-vous assister pour vous asseoir ou vous lever par un aidant.



AVERTISSEMENT

Risque de basculement : Veuillez noter que les mouvements corporels entraînent un déplacement du centre de gravité, ce qui peut augmenter le risque de basculement du produit.

Risque de basculement : Ne vous mettez pas debout sur l'assise.

Risque de pincement : Ne vous mettez jamais à cheval sur l'assise.

Risque d'accident : Veillez à ce que les substances huileuses ou très savonneuses n'entrent pas en contact avec les pieds en caoutchouc.

Le produit risque sinon de dérapier. _____

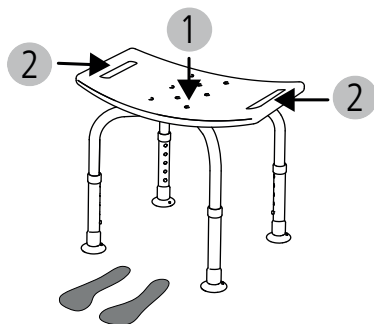


fig. 5

4.4 TRANSPORT

Ce produit n'est pas conçu pour être transporté fréquemment. S'il est nécessaire de transporter la chaise, nous recommandons de la désassembler dans le sens inverse de celui indiqué dans les instructions de montage mentionnées plus haut. Il convient d'emballer le produit de

manière qu'il soit stable et ne risque pas d'être détérioré en cas de mouvements brusques ou dangereux du véhicule de transport.

4.5 ACCESSOIRES ET PIÈCES RAPPORTÉES D'AUTRES FABRICANTS

Il n'y a pas d'accessoires de DIETZ prévus pour ce produit. Seule l'utilisation des accessoires d'origine de DIETZ GmbH est permise a priori. En cas de montage sur le produit de produits d'autres fabricants, la responsabilité quant à la sécurité du produit est transférée à la personne ayant monté l'accessoire ou la pièce rapportée. La personne qui monte un accessoire ou une pièce rapportée doit faire une nouvelle déclaration de conformité pour l'ensemble formé par ces nouveaux accessoires/pièces et le produit. La déclaration de conformité faite par DIETZ selon le MDR 2017/745, annexes I à III, n'est alors plus valide.



AVERTISSEMENT

Danger pour la sécurité : La sécurité du produit ne peut pas être garantie en cas d'utilisation de pièces rapportées ou d'accessoires commercialisés par d'autres fabricants que DIETZ.

Si des accessoires ou des pièces sont montés/rapportés au produit, il faut impérativement respecter les consignes de sécurité figurant dans la notice d'utilisation de ces accessoires ou pièces.

5.1 PRINCIPE DES DIMENSIONS INDIQUÉES PAR DIETZ

Les données dimensionnelles se réfèrent à la configuration standard du produit.

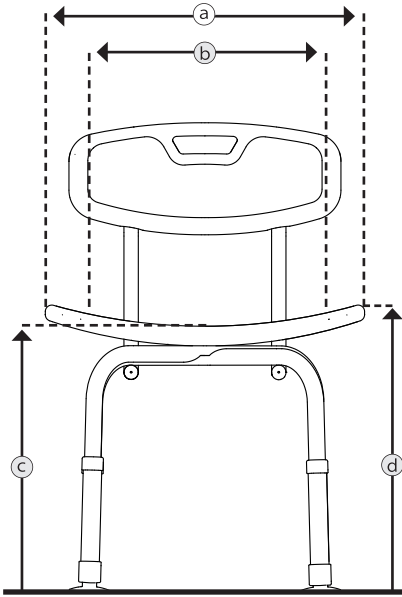


fig. 6



REMARQUE

Les dimensions mesurées sur pièces en textile (par ex. hauteur du dossier) sont données à titre indicatif, avec une tolérance de +/-10 mm. _____

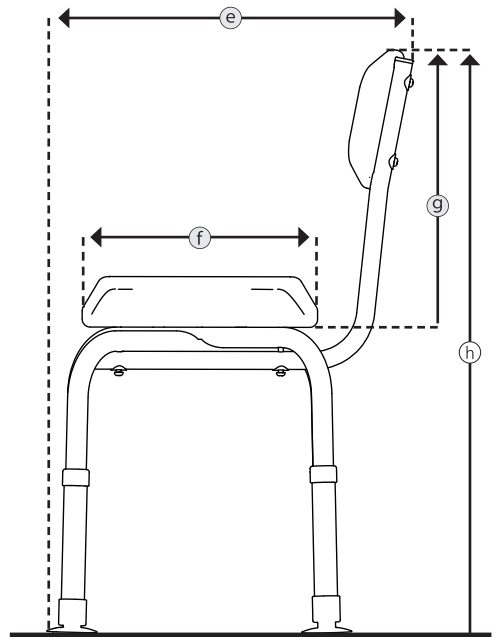


fig. 7

5.2 DIMENSIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications			TOMTAR DH	TOMTAR DS
b	Largeur d'assise	mm	380	380
f	Profondeur d'assise	mm	295	295
c	Hauteur d'assise, intérieur	mm	355 – 505	355 – 505
d	Hauteur d'assise, extérieur	mm	385 – 535	385 – 535
e	Longueur hors tout	mm	400	475
a	Largeur hors tout	mm	490	490
h	Hauteur hors tout	mm	385 – 535	680 – 830
	Assise (l x p)	mm	380 × 295	380 × 295
g	Hauteur du dossier	mm	-	335
	Dossier (l x h)	mm	-	405 × 175
	Poids de l'élément le plus lourd ¹	kg	1,25	1,65
	Poids total	kg	2	2,8
	Poids maximal admissible de l'utilisateur ²	kg	100	100

¹ Poids du produit sans les pièces amovibles (dans le cas présent, sans l'assise et le dossier).

² Poids maximal admissible de l'utilisateur avec charge supplémentaire / le poids de la charge supplémentaire abaisse d'autant le poids maximal admissible de l'utilisateur.

5.1 CONFORMITÉS

DIN EN 12182	Contrôle conformément aux exigences des produits d'assistance pour personnes en situation de handicap
ISO 17966	Contrôle conformément aux exigences et méthodes d'essai des produits d'assistance pour l'hygiène personnelle
ISO 10993-5	Contrôle de la toxicité dans la matière
Poids du mannequin de test	100 kg

5.2 AUTRES DONNÉES

Spécifications	
Couleurs	blanc
Assise	kg 0,75
Dossier	kg 0,4
Température ambiante de service	+10 °C à +40 °C
Conditions ambiantes d'entreposage	de 0 °C à 45 °C // humidité relative de l'air de 20 % à 75 %

5.3 MATIÈRES DU PRODUIT

Cadre et pieds télescopiques	aluminium (peint)
Dossier / assise	polyéthylène dur / HDPE
Bouton à ressort	acier inoxydable
Capuchons de tube dossier	Polypropylène / PP
Embouts de pieds en caoutchouc	polychlorure de vinyle / PVC
Plastique de manchette pied télescopique	polyéthylène / PE
Vis, pièces de jonction	acier inoxydable

Remarque : Tous les métaux utilisés sont résistants à la corrosion.

5.4 ÉTIQUETAGE DU PRODUIT

La plaque signalétique et les avertissements figurant sur le produit doivent être lisibles. Faites remplacer immédiatement les plaques/étiquettes illisibles ou manquantes par votre revendeur spécialisé. Le numéro de série qui identifie sans ambiguïté un produit se trouve, sous l'assise, sur la plaque signalétique. Celle-ci ne doit pas être retirée.

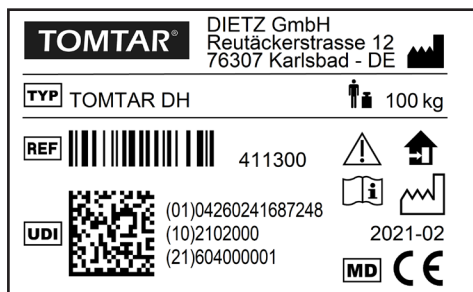


fig. 8

	Marque commerciale
	TYPE/modèle
	RÉF. = référence de l'article
	UDI = Identifiant unique du dispositif (01) UDI-DI/GTIN (10) Numéro de lot (21) Numéro de série
	Fabricant/marque du fabricant/ adresse de contact
	Poids maximal admissible de l'utilisateur, charge supplémentaire comprise
	Date de fabrication
	Le produit n'est homologué que pour une utilisation en intérieur
	Respecter la notice d'utilisation
	Attention : Les consignes de sécurité se trouvent dans la notice d'utilisation !
	Medical Device / dispositif médical
	Marquage CE MDR 2017/745, annexes I à III

6.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de votre produit, veillez à toujours respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute chute, situation dangereuse et toute détérioration du produit :

- ▼ Le produit ne peut être utilisé qu'en intérieur, sur un sol solide et plan.
- ▼ N'utilisez pas le produit comme aide pour vous hisser et ne vous tenez pas debout dessus.
- ▼ Ne chargez pas le produit d'un seul côté.
- ▼ Il y a risque de dérapage en s'asseyant ou en se relevant dans une baignoire ou une douche humide, surtout en cas d'utilisation de produits de douche (par exemple du savon ou gel douche).
- ▼ Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est en bon état. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- ▼ Contrôlez la stabilité de la chaise de douche après chaque désassemblage et réassemblage et assurez-vous que tous les pieds télescopiques sont réglés à la même longueur.
- ▼ En cas de mobilité fortement réduite, utilisez le produit avec l'aide d'un accompagnant.
- ▼ La surface du produit peut s'échauffer sous l'effet de l'eau chaude ou des rayons du soleil. Risque de brûlures !
- ▼ Les incidents graves survenant en lien avec le produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente.

7.1 ENTRETIEN / MAINTENANCE

Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement les contrôles indiqués dans le plan de maintenance pour que la sécurité du produit puisse être systématiquement garantie.

Un entretien ou une maintenance du produit insuffisante ou négligée entraîne la limitation de la responsabilité du fabricant. Le plan de maintenance ne fournit pas d'informations sur l'ampleur réelle des interventions effectivement nécessaires sur le produit.



REMARQUE

En tant qu'utilisateur, vous êtes le premier à pouvoir détecter un éventuel dommage. Si vous constatez un défaut qui est décrit dans le plan de maintenance ou tout autre défaut ou une entrave au bon fonctionnement, veuillez contacter immédiatement un revendeur spécialisé agréé. _____



AVERTISSEMENT

Aux fins de maintien de la sécurité de fonctionnement du produit, seul le revendeur spécialisé est autorisé à effectuer des réparations sur le produit, avec des pièces de rechange d'origine DIETZ. Le catalogue des pièces de rechange correspondant est à votre disposition sur notre site internet, à la rubrique informations sur le produit. _____



REMARQUE






Sauf indication contraire, les contrôles et mesures préconisés dans le plan de maintenance doivent être effectués par l'utilisateur ou un auxiliaire. _____



REMARQUE DESTINÉE AU REVENDEUR SPÉCIALISÉ :

Si l'utilisateur constate des anomalies sur le produit, veuillez effectuer le contrôle de tous les points énumérés dans le plan de maintenance. Ces contrôles doivent également être effectués avant chaque réutilisation et après un entreposage prolongé du produit (> 4 mois). _____

7.2 PLAN DE MAINTENANCE

Intervention	Description	une fois par mois avant utilisation	
Cadre contrôler l'état	Contrôlez si le cadre n'est pas déformé ou cassé.  N'utilisez plus le produit si vous constatez une détérioration de cette nature. Veuillez-vous adresser immédiatement à votre revendeur spécialisé aux fins de remise en état.		x
Assise et dossier vérifier le bon fonctionnement et l'état	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'assise, l'axe de blocage et le dossier sont correctement en place 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche de ruptures et de détériorations matérielles  N'utilisez plus le produit si vous constatez une détérioration de cette nature. Veuillez-vous adresser immédiatement à votre revendeur spécialisé aux fins de remise en état. 		x
Raccords à vis contrôler la solidité de la fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les raccords à vis doivent être serrés à fond. Les vis perdent de leur efficacité si elles sont desserrées et serrées de manière répétée. C'est pourquoi il est nécessaire de les faire changer par un revendeur spécialisé agréé. 	x	
Embouts de pieds en caoutchouc contrôler l'état	 En cas de défaut, remplacez sans tarder les embouts de pied en caoutchouc.		x
Contrôle visuel Vérifiez l'absence de pièces desserrées, de ruptures, de corrosion ou d'autres dommages	 N'utilisez plus le produit si vous constatez une détérioration de cette nature, car un usage sûr n'est alors plus garanti. Veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé		x
Ensemble du produit contrôler l'état de propreté	<ul style="list-style-type: none"> • Après chaque utilisation, nettoyez, et désinfectez si nécessaire, les éléments du produit qui ont été en contact direct avec la peau. 	x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Selon le degré de salissure, mais au minimum une fois par mois, l'ensemble du produit doit être nettoyé et désinfecté (voir chapitres « Nettoyage et désinfection »). 		x

7.3 NETTOYAGE

Pour nettoyer le produit, utilisez de l'eau tiède additionnée d'un nettoyeur doux (sans solvant et d'un pH de 5 à 9). Après le nettoyage, rincez le produit à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon.



AVERTISSEMENT

Détérioration matérielle : Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression, ni de produits chimiques agressifs ou caustiques, ou d'additifs abrasifs.

Risque de corrosion : Pour éviter la corrosion, assurez-vous que tous les éléments sont entièrement secs après le nettoyage. _____

7.4 DÉSINFECTION

Frottez ou vaporisez soigneusement toutes les pièces avec un désinfectant du commerce pour surfaces. Les surfaces sur lesquelles les mains et la peau sont en contact fréquent, comme l'assise, le dossier et les accoudoirs, doivent être désinfectées avec un soin minutieux.

Les désinfectants compatibles avec les matières sont les suivants :

- ▼ désinfectant sans aldéhyde à base d'alcools (70 % d'alcool propylique maximum)



AVERTISSEMENT

Détérioration matérielle : Pour la désinfection, veillez à respecter les instructions d'utilisation et de mise en œuvre du fabricant des produits d'entretien.

Risque d'infection : Le produit doit être désinfecté avant chaque utilisation par une autre personne. _____

7.5 MISE AU REBUT

Si vous n'avez plus besoin du produit, veuillez contacter votre revendeur spécialisé qui viendra le chercher pour le mettre au rebut dans les règles ou assurer sa réutilisation. Si cela n'est pas possible, veuillez porter le produit à votre déchetterie locale.

7.6 REMISE À AUTRUI ET RÉUTILISATION

Vous pouvez remettre votre produit à autrui en vue de sa réutilisation. Le nombre de réutilisations possibles dépend de l'état d'usure des matières et de l'aptitude fonctionnelle du produit concerné.

Si vous remettez le produit à un nouvel utilisateur ou au revendeur spécialisé aux fins de réutilisation, veillez à lui donner l'ensemble des documents techniques requis pour une utilisation sûre.

Avant la réutilisation du produit, le revendeur spécialisé doit le nettoyer, le désinfecter, contrôler son état, puis donner son feu vert.

Tous les points de contrôle énumérés dans le plan de maintenance doivent être contrôlés sur le produit.

7.7 ENTREPOSAGE

Si vous souhaitez entreposer le produit, veillez à le placer dans un environnement sec, à l'abri d'un fort ensoleillement et à une température comprise entre 0 °C et +45 °C. Sécurisez-le sur le lieu d'entreposage pour prévenir tout mouvement ou chute indésirable.

Si vous souhaitez réutiliser le produit après un entreposage prolongé (> 4 mois), veuillez contrôler tous les points énumérés dans le plan de maintenance.



AVERTISSEMENT

Détérioration matérielle : N'entrez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et ne déposez aucun objet dessus pendant l'entreposage.

8.1 GARANTIE

Les prestations de la garantie s'appliquent à tous les vices du produit qui sont dus à un problème de fabrication ou un défaut de matière. La durée de la garantie est de 24 mois à compter de la réception de l'avis de livraison, ou au plus tard après la livraison. Les dommages causés

par l'usure naturelle, intentionnellement, par négligence ou en raison d'une utilisation inappropriée sont exclus de l'obligation de garantie. Il en va de même en cas d'utilisation de produits d'entretien, d'huiles lubrifiantes ou de graisses inappropriés.

8.2 DURÉE DE VIE

Nous considérons que ce produit a une durée de vie prévisionnelle de cinq ans en cas d'une utilisation quotidienne et conforme. Le respect des consignes de maintenance et de sécurité indiquées dans la présente notice d'utilisation

constitue une condition préalable à cette durée de vie.

La durée de vie indiquée ne constitue pas une garantie supplémentaire.

8.3 RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

La responsabilité de DIETZ GmbH est engagée uniquement si les produits sont utilisés dans les conditions spécifiées et aux fins spécifiées. Nous recommandons de manipuler les produits de manière appropriée et de les entretenir conformément aux instructions. La responsabilité de DIETZ GmbH n'est pas engagée en cas de dommages causés par des composants ou des pièces de rechange qui n'ont pas été agréés par DIETZ GmbH. Seul un revendeur spécialisé agréé, ou le fabricant lui-même, est autorisé à effectuer les réparations du produit.

TOMTAR®



Groupe de produits : salle de bain & WC
Produit : TOMTAR DH/DS

Notice d'utilisation version 1.4 FR

Version 2024-01 (FWI)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
Allemagne

Tél. : +49 7248.9186-0

Fax : +49 7248.9186-86

info@dietz-reha.de

www.dietz-rehab.de

TOMTAR est une marque déposée de Dietz GmbH.

Les produits TOMTAR sont distribués par DIETZ GmbH.

Sous réserve d'erreurs d'impression, d'informations erronées et de modifications des prix ou des produits.

© DIETZ GmbH, Karlsbad.

Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de DIETZ GmbH, Karlsbad.



DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Allemagne