



1. Collocare/aprire il rollatore

Posizionare il rollatore davanti a sé in direzione di marcia ed azionare il freno.

Premere con entrambe le mani i tubi laterali del sedile a sinistra e a destra verso il basso fino a che il meccanismo di apertura non scatta.

Solo dopo questa operazione si potrà appendere la borsa o il cestello nell'apposito supporto.

2. Impostazione dell'impugnatura

Allentare la vite di fissaggio di ca. 5-6 giri (non bisogna estrarre completamente la vite) ed impostare l'altezza desiderata inerendo o estraendo li manubri.

I manubri si innestano a intervalli di 25 mm.

Avvisi di sicurezza

Non appendere delle borse alle maniglie - pericolo di ribaltamento!

Per andare in salita utilizzare i freni operativi (tirare le leve dei freni verso l'alto).

Utilizzare il rollatore solo su superfici piane e solide.

Se ci si appoggia troppo sulle maniglie il rollatore potrebbe ribaltarsi all'indietro.

Quando si piega il rollatore potrebbero restare impigliati abiti o parti del corpo.

Attenzione: le parti imbottite soggette alle radiazioni dirette del sole si riscaldano e al contatto possono causare scottature. Coprire quindi queste parti o proteggere il rollatore dalle radiazioni solari.

3. Freni

Freno operativo (quando ci si muove): tirare le leve dei freni verso l'alto.

Freno di fissaggio (quando si parcheggia): spingere le leve dei freni verso il basso.

4. Regolazione dei freni

I freni sono correttamente impostati quando le leve dei freni ed i cavi dei freni non hanno un gioco e le ruote girano senza rumore di abrasione.

L'effetto frenante può essere impostato con la vite di regolazione del cavo del freno sulle ganasce dei freni delle ruote posteriori.

5. Aiuto per la salita

Con la pressione con la punta del piede sul prolungamento del telaio si facilita il sollevamento delle ruote direzionali.

6. Piega il rollatore

Togliere la borsa a rete o la borsa dal telaio.

Tirare verso l'alto il nastro di bloccaggio al centro del sedile - il rollatore si piega.

Pulizia/manutenzione/riutilizzo

Pulizia

Una pulizia e disinfezione dovrebbe avvenire ad intervalli regolari. Utilizzare dell'acqua saponata non aggressiva senza additivi acidi.

La disinfezione può essere eseguita con i comuni prodotti in commercio. Non utilizzare getti di vapore o detergenti abrasivi o irritanti.

Manutenzione

Il rollatore brado non richiede manutenzione. Se si riscontra che i freni cedono, le ruote girano con difficoltà o altri malfunzionamenti, far mettere a punto il rollatore dal vostro rivenditore.

Riutilizzo

Quando si consegna il rollatore ad un nuovo utente si raccomanda di consegnargli tutte le documentazioni tecniche per garantire un utilizzo sicuro. Il rollatore deve essere controllato da un rivenditore specializzato, come riportato sopra, e deve essere pulito per un riutilizzo in buone condizioni.

Schema generale del brado



- 1 Maniglie ergonomiche
- 2 Leve dei freni
- 3 Sedile con nastro
- 4 Ganci per appendere la borsa
- 5 Vite di bloccaggio per la regolazione dell'altezza
- 6 Aiuto per la salita
- 7 Freni
- 8 Ruote



Technische Daten

	Tipo S/M	Tipo S	Tipo M
Altezza:		67-82 cm	78-102 cm
Altezza chiuso:		67 cm	78 cm
Altezza sedile:		52,5 cm	62,5 cm
Regolazione dell'altezza delle maniglie a intervalli di 25mm:		0-15 cm	0-24 cm
Altezze del telaio regolabili:		8	10
Lunghezza:	66 cm		
Larghezza:	60 cm		
Larghezza da chiuso:	22 cm		
Max. peso sorretto:	150 kg		
Max. portata rete/borsa:	5 kg		
Peso a vuoto:	7,1 kg		
Ruote (non forabili):	20 x 3 cm		

Dotazione

- Rollatore brado
- Borsa a rete
- Istruzioni per l'uso
- Garanzia



DIETZ GmbH Reha-Produkte
 Descostraße 10 · 76307 Karlsbad-Ittersbach
 Tel.: +49 (0) 72 48 / 91 86-0 · Fax: +49 (0) 72 48 / 91 86-86
 www.dietz-reha.com · www.bechle-mobility.de

Istruzioni per l'uso



Garanzia

La garanzia ha una durata di 5 anni per il telaio in alluminio, per tutte le altre parti è di 24 mesi.

Le parti soggette ad usura sono escluse dalla garanzia.

Generalità

Per il rollatore qui descritto si dichiara la conformità ai sensi della direttiva CE 93/42 per i prodotti medici.

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante della dotazione. Vanno consegnate all'utente e devono essere consegnate con il prodotto in caso di cessione a terzi.

Ci si riserva il diritto di apportare delle modifiche tecniche rispetto alle versioni rappresentate in queste istruzioni per l'uso.

La ristampa, la traduzione e la riproduzione in qualsiasi forma, anche per estratto, richiedono l'autorizzazione scritta del produttore.

Queste istruzioni per l'uso non comportano un servizio di modifica. Lo stato attuale della documentazione può essere richiesto a noi.

Indicazione e scopo dell'utilizzo

Il rollatore brado serve alle persone con limitazioni nei movimenti e con un peso massimo di 150 kg come aiuto per spostarsi e come possibilità limitata di sedersi per un riposo momentaneo.

La tasca a rete situata sotto il sedile è prevista per il trasporto di oggetti e merci. Non sedersi sulla tasca.

Il rollatore brado deve essere utilizzato solo su un suolo piano e solido. L'utilizzo per altri scopi, in particolare come aiuto per salire le scale o per trasportare carichi pesanti, è contrario alla destinazione del prodotto e pericoloso!