

Gebrauchsanweisung
Duschhocker DHR-101
TOMTAR



DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Descostrasse 10
D-76307 Karlsbad-Iltersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 – 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 – 86

CE

Allgemeines

Für den hier beschriebenen Duschhocker ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführungen behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Vorbemerkung

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
Sie haben sich für ein technisch ausgereiftes und nach dem neuesten Stand der Technik konstruiertes und zuverlässiges Produkt entschieden.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung **bevor** Sie den Duschhocker in Benutzung nehmen.

Diese Anweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und die Handhabungssicherheit beizubehalten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung, halten Sie die vorgegebenen Handlungsanweisungen ein und sorgen sie dafür, dass die Gebrauchsanweisung für die Benutzer erreichbar bleibt.

Indikation und Verwendungszweck

Der Duschhocker DHR-101 wurde ausschließlich als Sitzmöglichkeit beim Duschen für Personen mit eingeschränkter Stehfähigkeit konzipiert.

Sicherheitshinweise / Benutzung

- Der Duschhocker muss sicher auf allen vier Füßen stehen. Ausrutschgefahr besteht beim Hinsetzen und Aufstehen in feuchten Badewannen oder Duschräumen, insbesondere dann, wenn Badezusätze oder Waschmittel verwendet wurden.
- Nach jedem Zerlegen und Wiederausammenbau des Duschhockers kontrollieren Sie die Stabilität und überprüfen Sie, dass alle Stuhlbeine in der gleichen Länge eingestellt und die Schrauben fest angezogen sind.
- Lehnen Sie sich nicht übermäßig stark nach vorne oder hinten. Kippgefahr!
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Duschhocker fest und sicher in der Dusche steht und die GummifüÙe eben aufliegen.
- Bitte benutzen Sie, falls erforderlich zum Hinsetzen und Aufstehen, sowie Waschen und Duschen eine Hilfsperson, sofern Sie sich selbst nicht ausreichend halten können.

Lieferumfang

Der DHR-101 wird zerlegt in einem Karton geliefert:


- 1 x Sitzfläche
- 4 x Stuhlbeine (teleskopierbar)
- 1 x Schraubenset (bestehend aus: 5x Kreuzschlitzschraube M6 x 35, 5x Sprengring, 5x Halbrund-Unterlegscheibe)




Vor dem Auspacken die Verpackung überprüfen: Ist die Verpackung beschädigt, kann auch der Inhalt beschädigt sein. Nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit gem. den Lieferunterlagen überprüfen. Ist der Inhalt erkennbar beschädigt, unverzüglich das Frachtunternehmen verständigen. **Folie nicht verbrennen!** Beim Verbrennen können giftige Gase entstehen.

Montage

- Legen Sie die Sitzfläche umgedreht auf eine ebene Fläche.
- Legen Sie die Rahmenteile mittig übereinander so, dass die Aussparungen ineinander greifen und fixieren Sie beide Teile mit der zentralen Schraube.

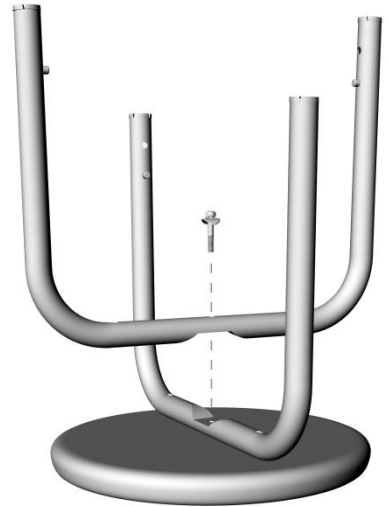

- Fixieren Sie nun die Rahmenteile indem Sie die restlichen vier Schrauben festdrehen.

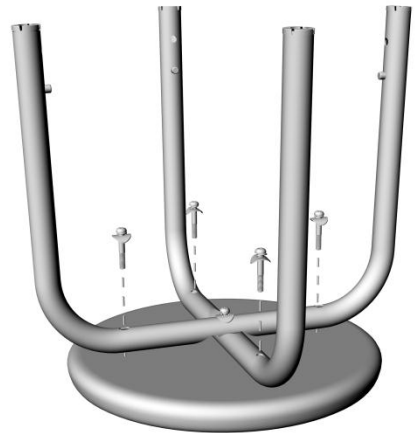

□ Schieben Sie nun die vier Stuhlbeine so ein, dass die Bohrungen aller Beine zur Innenseite des Hockers zeigen und achten Sie darauf, dass die Federstifte einrasten. Bitte beachten Sie zusätzlich, dass die Stuhlbeine in der gleichen Sitzhöhe eingestellt sind.



Technische Spezifikationen:

| Bezeichnung | DHR-101 |
|-------------------------|----------------------|
| Farbe | Weiß |
| Ausstattung | Sitzhöhenverstellung |
| Sitzbreite (cm) | 32 |
| Sitztiefe (cm) | 32 |
| Sitzhöhe (cm) | 42-55 |
| Gesamtbeite (cm) | 44,5 |
| Gesamtlänge (cm) | 46 |
| Gesamthöhe (cm) | 42-55 |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 120 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |

Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung.

Von der Gewährleistungspflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen welche durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Das Gleiche gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln.

Pflegehinweise

Den Duschhocker können Sie mit allen handelsüblichen, milden Bad und WC-Reinigern behandeln. Des Weiteren ist ggf. eine Desinfektion mit Sprühdesinfektionsmitteln (z.B. Sagrotan) möglich. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Entsorgung

Nach Ablauf der Lebensdauer ihres Duschhockers können Sie ihn durch die ortsansässigen Entsorgungsunternehmen entsorgen lassen. Beachten Sie bitte die Entsorgungsvorschriften Ihres Wohnorts.