



Gebrauchsanweisung

Nachrüstung R-net externe Ladebuchse

634398 (5001346)

Anwendung:

Eine zusätzliche externe Ladebuchse am Rollstuhl.

Kann direkt an den OBC-Port des R-Net-Controllers angeschlossen werden.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei einer Nachrüstung dieses Zubehörs ist eine zusätzliche Programmierung des Rollstuhls aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich. Erst nach der Programmierung wird der Ladevorgang des Rollstuhls über den Joystick mittels blinkender Dioden angezeigt. Mit dem Aufspielen dieser Software wird zusätzlich verhindert, dass der Rollstuhl während des Ladens fahren kann.

In unserem Webshop unter den SANGO Downloads gibt es eine „Subset-Datei“ mit der richtigen Einstellung. Folgen Sie diesem Link zum Download der Software:

[Software für externe Ladebuchse 634398.rnss](#)

- Laden Sie die .rnss-Datei herunter
- Starten Sie den PGDT Rnet-Programmierer
- Datei, öffnen (1)
- Wählen Sie R-net- „Subset“-dateien aus (2)
- Öffnen Sie die **R-Net External charger.rnss**
- Programmierung des R-net-Systems (3)
- Alle anderen Systemeinstellungen wie Fahrprofile bleiben unverändert.

Fragen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr DIETZ Service Team.

Fotos und eine detaillierte Beschreibung des Problems können helfen, es effizient zu lösen.

Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit der Dokumentation Ihres Zubehörs auf.