



- Kabel dürfen nicht geknickt oder eingeklemmt werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt alle Funktionen des Rollstuhls.

Um Ihren neuen You-Q Rollstuhl ideal für Sie und den Einsatz vorzubereiten, wurden in den Rollstuhl bereits die Batterien aus Ihrer Bestellung eingebaut und angeschlossen.


Das Einzige, was Sie für den Betrieb machen müssen, sind die folgenden Schritte:

1. Am Joystick Kabel befinden sich zwei Stecker. Ein Stecker wird mit der Lichtanlage verbunden (B), der andere wird mit dem Controller verbunden (A). Vergewissern Sie sich, dass die Lichtanlage ordentlich verbunden ist. Ist diese Steckverbindung offen, dann muss die Verbindung hergestellt werden bevor der Rollstuhl in Betrieb genommen wird.


2. Verbinden Sie den Stecker des Joysticks (Bedienkonsole) mit dem Controller (Steuergerät). Der Stecker geht nur in einer Position in den Controller, es gibt keine Möglichkeit den Joystick falsch anzuschließen.
3. Bringen Sie die Verkleidung des Controllers an. Achten Sie dabei besonders gut darauf, dass kein Kabel eingeklemmt oder zu über 120° scharf geknickt wird!

- A** Stecker Joystick
- B** Stecker Lichtanlage


- 1** Controller
- 2** Buchse Joystick
- 3** Aufnahme Controller Abdeckung
- 4** Controller Abdeckung

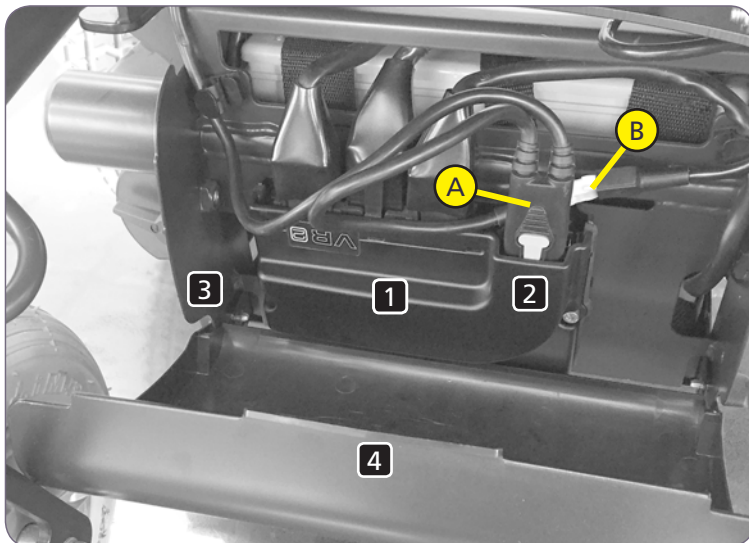

Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Lichtanlage (B) verbunden ist.

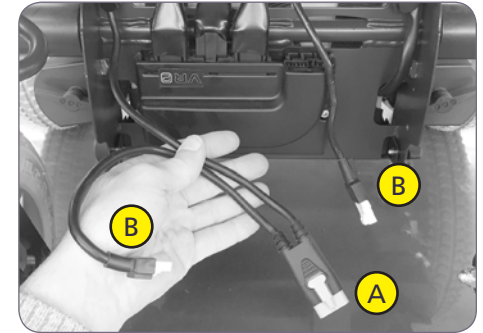


Nachdem Sie die Controller Abdeckung an der unteren Seite in die Aufnahmen gesteckt haben, drücken Sie die Abdeckung in Richtung Rollstuhl. Vergewissern Sie sich, dass dabei keine Kabel eingeklemmt oder stark (>120° Knick) geknickt werden.

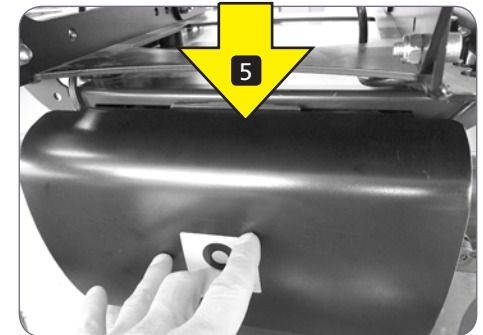

Auf der Oberseite der Controller Abdeckung befindet sich ein Steg. Dieser muss heruntergedrückt werden (5), und zeitgleich muss die Abdeckung in Richtung Rollstuhl gedrückt werden, bis der Steg im Rollstuhl einrastet.

Die Abdeckung muss nun fest sitzen, der Steg auf der Oberseite der Abdeckung ist ordentlich eingerastet und es sind keine Kabel eingeklemmt. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung ordentlich fest sitzt und nicht wackelt.

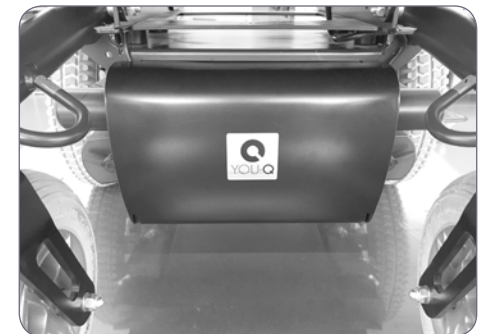

Zur Demonntage der Abdeckung befolgen Sie die vorangegangenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

BEDIENUNGSHINWEISE

Schalten Sie am Joystick den Rollstuhl ein und überprüfen Sie bitte Funktion des Rollstuhls. Jetzt ist der Rollstuhl einsatzbereit.

ALLG. HINWEISE

Bitte befolgen Sie immer die Anweisungen zum Laden der Batterien, und verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Batterieladegeräte. Besonders die ersten 20 Ladevorgänge sind wichtig für die Lebensdauer der Batterien und die Reichweite des Rollstuhls.