

Gehstock GS-3 (anatomisch beidseitig),
GS-8 / 9 (links / rechts) und GS-10 (beidseitig)
Bedienungsanleitung

Version 2.0.0 DE



01 Wichtige Informationen		05 Sicherheitsbelehrungen	
Allgemeines	3	Sicherheitsbelehrungen	8
Zweckbestimmung	3	06 Hinweise zum Gebrauch	
Zeichen und Symbole	3	Typenschilder	9
02 Produktbeschreibung		Reinigen	9
Lieferumfang	4	Entsorgung	9
Aufbau	4	Hinweise für den Fachhandel	9
03 Gehstock verwenden		07 Gewährleistungen	
Vorbemerkung	5	Garantie	10
Gehstock verwenden	5	Konformitätserklärung	10
Stockhöhe einstellen	6	Verantwortlichkeit	10
Gehen	6	Haftung	10
04 Technische Dokumentation		Garantie Abschnitt	11
Technische Daten	7		
Wartung	7		

ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weiterverkauf des Produktes beim Produkt.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei:



Reutäckerstr.12
76307 Karlsbad
Tel. +49 (0) 7248 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248 9186 - 86

ZWECKBESTIMMUNG

Gehstöcke (Gehhilfen) dienen gehbehinderten Menschen zum Ausgleich der verminderten Belastbarkeit/Leistungsfähigkeit der unteren Gliedmaßen oder als Koordinationshilfe beim Stehen und Gehen. Die Anwendung der Gehstöcke kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen.

Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitshinweise!

Der Gehstock darf nur auf ebenem und festem Untergrund von Personen mit max. 100 kg Körpergewicht verwendet werden. Eine andere Verwendung, insbesondere z. B. als Hilfe bei Bergstouren ist unzulässig.

ZEICHEN UND SYMBOLE



WARNUNG

Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden. Sie machen darauf aufmerksam, dass Verletzungsgefahr besteht.






ACHTUNG

Gefahrenhinweise auf mögliche Beschädigungen durch falsche Bedienung oder Anwendung.

LIEFERUMFANG

- Den Gehstock GS-3 (anatomisch beidseits), GS-8 (anatomischen Handgriff links), GS-9 (rechts) oder GS-10 (Classic beidseits)
- 1 Bedienungsanleitung

AUFBAU

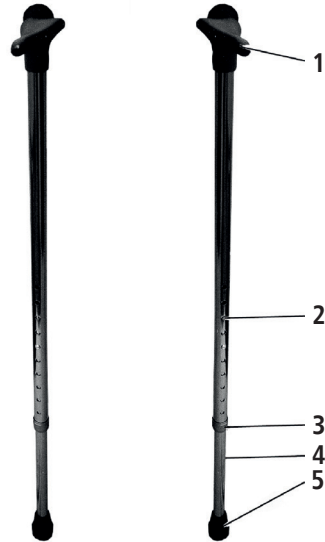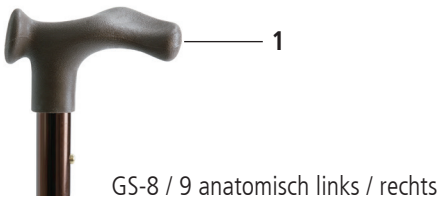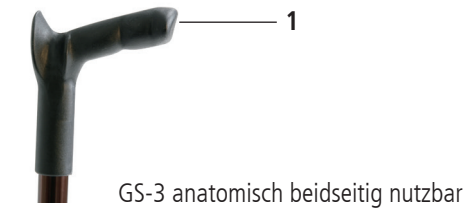

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1 Handgriff | 4 Teleskoprohr |
| 2 Federstift | 5 Rutschhemmender Gummifuß |
| 3 Überwurfmutter | |

VORBEMERKUNG

Diese Bedienungsanleitung dient allen Anwendern, insbesondere dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung des Gehstocks.

Diese Anleitung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes.

Die Bedienungsanleitung muss für den Benutzer jederzeit in greifbarer Nähe sein.

GEHSTOCK VERWENDEN

Der Gehstock wird in gebrauchsbereitem Zustand ausgeliefert, von Fachhandel-Technikern bzw. vom Betreuungspersonal montiert und in der Funktion überprüft.

Der Gehstock ist komplett in Folie verpackt. Nach dem Entpacken die Folie nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften entsorgen.

Nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit gem. den Lieferunterlagen überprüfen.



ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Gehstock benutzen.



ACHTUNG

Vor dem Auspacken die Verpackung überprüfen. Ist die Verpackung beschädigt, kann auch der Inhalt beschädigt sein. Ist der Inhalt erkennbar beschädigt, unverzüglich das Frachtunternehmen verständigen.



ACHTUNG


Folie nicht verbrennen! Beim Verbrennen können giftige Gase entstehen.

STOCKHÖHE EINSTELLEN

Nach dem Verändern der Höhe muss der Federstift unbedingt wieder sichtbar aus den Bohrungen ausgetreten sein. Nach dem Zusammenstecken der Teleskopteile unbedingt die Stabilität des Gehstockes und den festen Halt der einzelnen Teile prüfen. Sonst kann der Gehstock ungewollt bei Belastung zusammen geschoben werden und der Benutzer stürzt.

Einstellen:

- Die Überwurfmutter **3** lösen.
- Den Federstift **2** so hineindrücken, dass sich das Teleskoprohr verschieben lässt.
- Teleskoprohr **4** auf gewünschtes Maß verschieben.
- Federstift einrasten und Überwurfmutter wieder festdrehen.

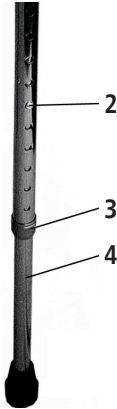

WARNUNG

Sturzgefahr!



ACHTUNG

Die Stockhöhe wird generell vom Fachhandel angepasst und auf die jeweilige Körpergröße eingestellt. Wenn die werkseitige Höheneinstellung nicht passend ist, kann die Höhe selbst verändert werden.



ACHTUNG

Die festgedrehte Überwurfmutter gibt dem Gehstock zusätzliche Stabilität und verhindert das Wackeln des Teleskoprohres.

GEHEN

- Den Gehstock immer senkrecht und nicht zu weit vom Körper entfernt aufsetzen.
- Angemessene, nicht zu große Schritte machen.



WARNUNG

Kipp- und Abrutschgefahr!

TECHNISCHE DATEN

Modell	HMV Nr.	Länge einstellbar	Gewicht	Belastbar- keit	Farbe	Handgriff	Art.-Nr.
GS-3	10.50.01.xxxx	77 – 100 cm	0,4 kg	100 kg	Bronze- eloxiert	Anatomisch beidseits	350
GS-8	10.50.01.2000	77 – 100 cm	0,4 kg	100 kg	Bronze- eloxiert	Anatomisch links	345
GS-9	10.50.01.2000	77 – 100 cm	0,4 kg	100 kg	Bronze- eloxiert	Anatomisch rechts	344
GS-10	10.50.01.1010	77 – 100 cm	0,4 kg	100 kg	Bronze- eloxiert	Classic beidseits	370

WARTUNG

Der Gehstock ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, dann den Gehstock an den Fachhandel übergeben.

SICHERHEITSBELEHRUNG

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Gehstockes keine Gefahr aus.

Die verwendeten Materialien und die Konstruktion entsprechen den Anforderungen aus den EG-Richtlinien, dem Medizin- Produkte- Gesetz und den Normen für Medizinprodukte.

Bitte beachten Sie dabei stets folgende Sicherheitshinweise:

- ▼ Beim Verändern der Höhe müssen die Federstifte unbedingt wieder sichtbar aus den Bohrungen herausgetreten sein. Sonst kann der Gehstock ungewollt bei Belastung zusammengeschoben werden und der Benutzer stürzt.
- ▼ Den Gehstock immer senkrecht und nicht zu weit vom Körper entfernt auf den Boden aufsetzen.



ACHTUNG

Zur Störungsbehebung und Fehlerbeseitigung den Gehstock an den Fachhandel übergeben. Ausgenommen solche Störungen, die durch Reinigung beseitigt werden können.

TYPENSCHILDER



ACHTUNG

Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen. Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.



ENTSORGUNG



ACHTUNG

Wenn der Gehstock die Nutzungsdauer erreicht hat oder aus anderen Gründen nicht mehr benutzt werden kann, sind die Bestandteile durch den Fachhandel zu entsorgen.

REINIGEN



WARNUNG

Griff und Gummifußkappe niemals mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr!



ACHTUNG

Zum Reinigen den Gehstock mit handelsüblichen Reinigungsmitteln abwischen.

HINWEISE FÜR DEN FACHHANDEL

Der Fachhandel prüft den Gehstock:

- Auf Vollständigkeit.
- Auf unbeschädigte Teile, hierbei insbesondere ob die Teleskop-Verstellung verbogen oder beschädigt ist, und ob der Faltmechanismus einwandfrei funktioniert.

GARANTIE

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollständig ausgefüllte Garantie-Abschnitt (siehe unten) mit einzureichen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für die Gehstöcke GS-3 / 8 / 9 / 10 erklärt die Dietz GmbH in alleiniger Verantwortung die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte.

VERANTWORTLICHKEIT

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Gehstöcke verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden.

HAFTUNG

Die Dietz Reha-Produkte GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen, die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht durch die Dietz Reha-Produkte GmbH freigegeben wurden, haftet die Dietz Reha-Produkte GmbH nicht. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Hersteller selbst durchzuführen.

Garantie- Abschnitt**Produkt**

Modellbezeichnung

Seriennummer (vom Typenschild entnehmen)

Fachhändler

Datum und Stempel



Produktgruppe: Gehilfen

Produkt: GS-3 / 8 / 9 / 10 Gehstöcke Classic

Bedienungsanleitung Version 2.0.0. DE

Stand 01/2016 (RP)

DIETZ GmbH

Reutäckerstraße 12

76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248.9186-0

Fax: +49 7248.9186-86

info@dietz-reha.de

www.dietz-reha.de